

保管用
保証書付き


介護保険
購入対象
品 目

取扱説明書

シャワーチェア [ユクリア Air] 家庭用

シャワーチェア (Air)

- ☐ コンパクト SP ワンタッチ 品番：PN-L41431
- ☐ ミドル SP ワンタッチ 品番：PN-L41831
- ☐ ワイド SP ワンタッチ 品番：PN-L41532
- ☐ コンパクト ワンタッチ 品番：PN-L41432
- ☐ ミドル ワンタッチ 品番：PN-L42231

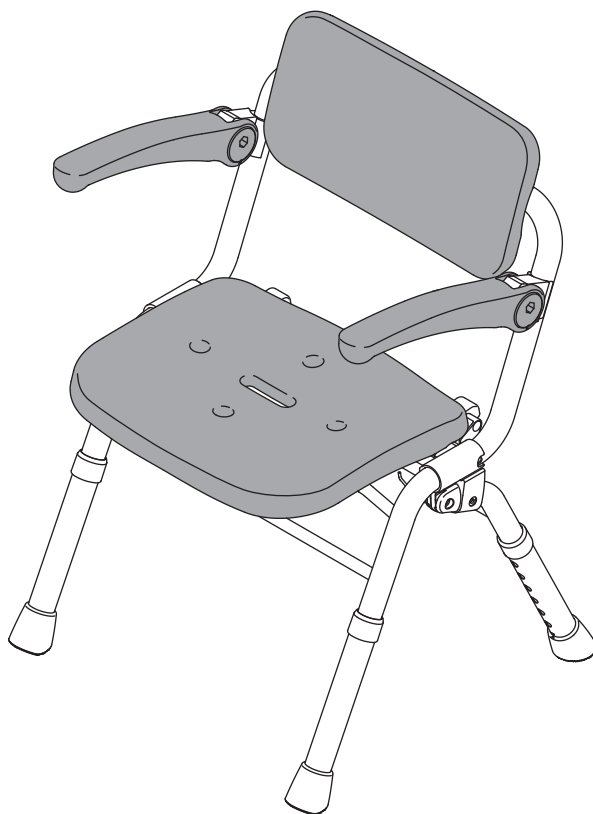

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
初めて使うときの準備	5
ご使用方法	6
お手入れのしかた	9
修理を依頼される前に	9
仕様	10
製品寸法図	12
愛情点検表	13
保証とアフターサービス	13
お客様ご利用窓口のご案内	14
保証書	15

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

最大使用者体重:100kg

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告




転倒、事故、けが
などを防ぐために



シャワーチェアを使用する際は



- 座面の上に立ったり脚をかけたり飛び乗ったりしない
- 浴室の洗い場以外で使用しない
- 横方向に強い力をかけない
- 故意にゆすらない
- 強い衝撃が加わるような座り方をしない
(転倒によるけがの原因)
- 上体を側方に大きく傾けひじかけに体重をかけすぎない
- 座位を1人で保持できない方はひじかけを上げたまま使用しない
- 2人以上同時に座らない
- 人が座っている状態で、本体を移動させたり、引きずったりしない
- 上体を後方に大きくのけぞらせて背もたれに体重をかけすぎない
- 浴室内で使用するチェア以外の用途で使用しない
- 座面のフチ、背もたれ、ひじかけなど、座面中央以外に座らない
- 座面のフチに手をついて支えにし、立ち座りをしない
(破損や転倒によるけがの原因)
- 体重が100 kgを超える方は使用しない
(破損によるけがの原因)
- 商品梱包用のポリ袋やシートをかぶらない
(窒息の原因)
- 座面の水抜き穴に手指や足指を入れない
- 分解したり、修理、改造はしない
- 本製品の代用部品を、サイズが同じでも使用しない
(本体が正常にはたらかず破損によるけがの原因)

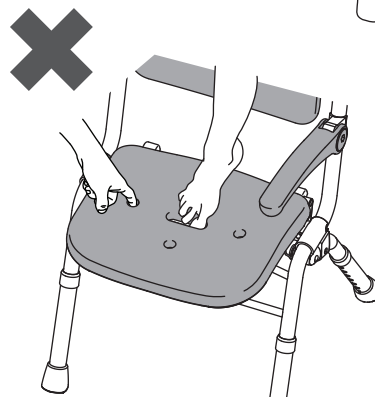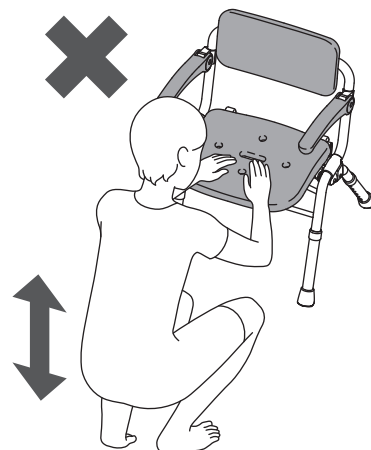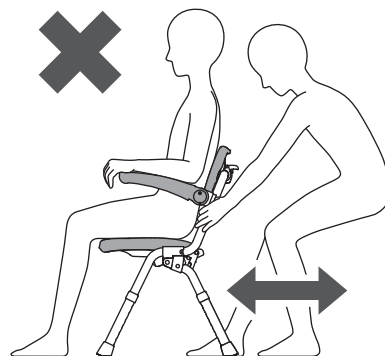




警告

破損、転倒、けが
などを防ぐために




- 本体を開いた時は座面が確実にロックされていることを確認する
- チェアが完全に開き座面が水平となっていることを確認して使用する
- 高さ調整時には、調整脚パイプの調整ピンを確実に固定する
- 調整脚パイプは4脚とも同じ高さに調整する
- 浴室床の、平らで安定した場所に置いて使用する
(転倒によるけがの原因)
- チェアをおりたたむときは各部のすきまに指をはさまないように注意する
(けがの原因)

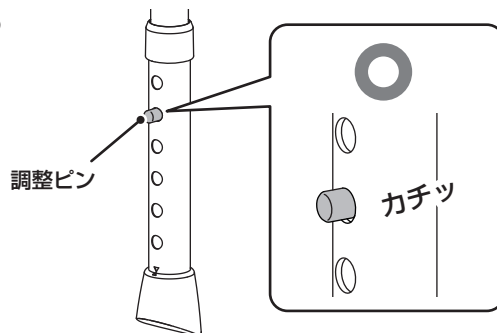

注意



破損、転倒、けが
などを防ぐために

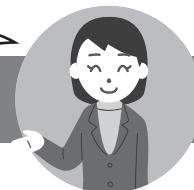

- 解除レバーに無理な力を加えたり身体を支えたりしない
- 持ち運ぶ場合は周囲にぶつけない
(破損によるけがの原因)

- 水中に沈めて使用したり洗わない
- 座面ロックに手や指を入れない
- 解除レバーを持って移動しない
- 背もたれ樹脂の隙間に指を入れない
(けがの原因)

座面
ロック

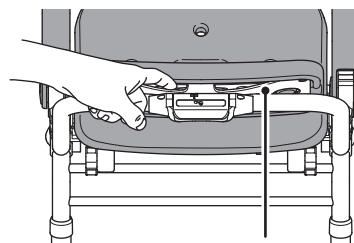
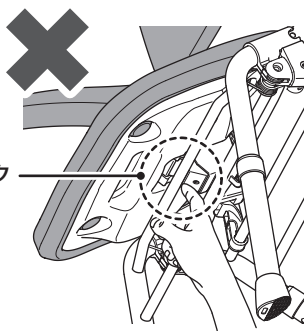


背もたれ樹脂

- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない
- アルコール以外で消毒しない
- 熱湯(60 度以上)をかけない
- 温泉水や入浴剤を使用しない
(プラスチックの劣化または破損によるけがの原因)

- 火気に近づけない
(火災や変形の原因)

- ひじかけや背もたれを手すり代わりにして身体を支えたりしない
- ひじかけを上げた状態でひじかけを引っ張ったり持ち上げたりしない
(転倒によるけがの原因)

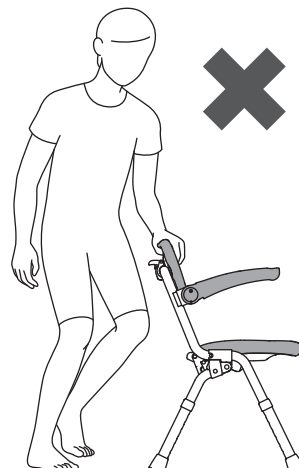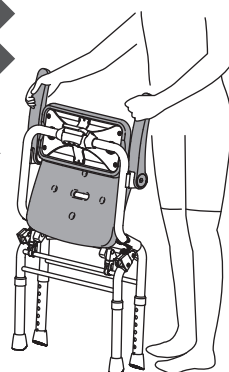

- サウナで使用しない
(破損ややけどの原因)

安全上のご注意

必ずお守りください





転倒、破損、劣化
などを防ぐために



- 定期的にネジのゆるみなど各部に異常がないか点検する
(本体が正常にはたらかないことによる破損またはけがの原因)
- 脚ゴムが取り付けられていることを確認する
- 浴槽への座位移乗に使用する場合、浴槽のフチと座面の高さを合わせ、できるだけ浴槽に接するように横付けする
- 中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後洗剤が残らないように水洗いし、乾いた布で水分をふき取る
(転倒によるけがの原因)
- ご使用前、ご使用後は床やシャワーチェアについた石鹸やシャンプーを洗い流す
(本体の不安定による転倒の原因)
- 使用者の身体状況(座位保持や立ち座りが不安定な場合)によって介助者が付き添う
- シャワーチェアをおりたたむときは、座面の上に人やものがない状態であることを確認する
- シャワーチェアの開閉時は、製品が人や周囲に当たらないように注意して操作する
- 背もたれクッション、座面クッションがしっかりと取り付けられていることを確認する
(けがの原因)
- ひじかけを上げ下げする時に手や指をはさまないように注意する
- 調整ピンを強く押しすぎると調整ピンがもどらなくなるので注意する
(調整脚パイプが固定できないことによる転倒やけがの原因)

各部のなまえ

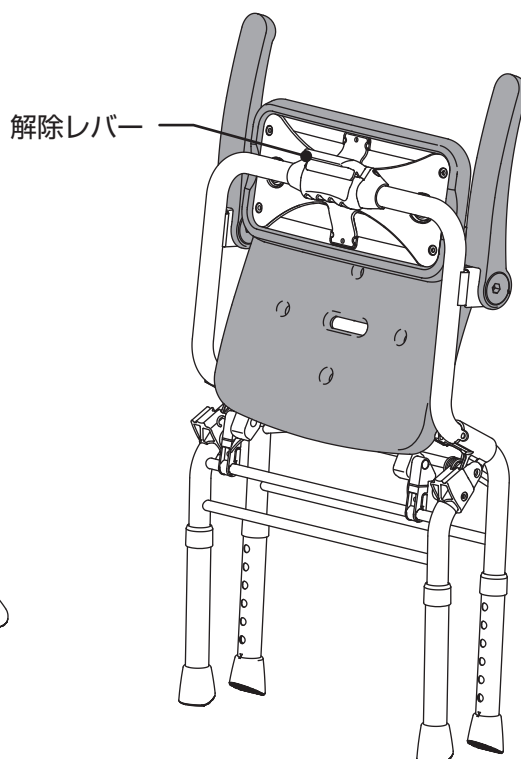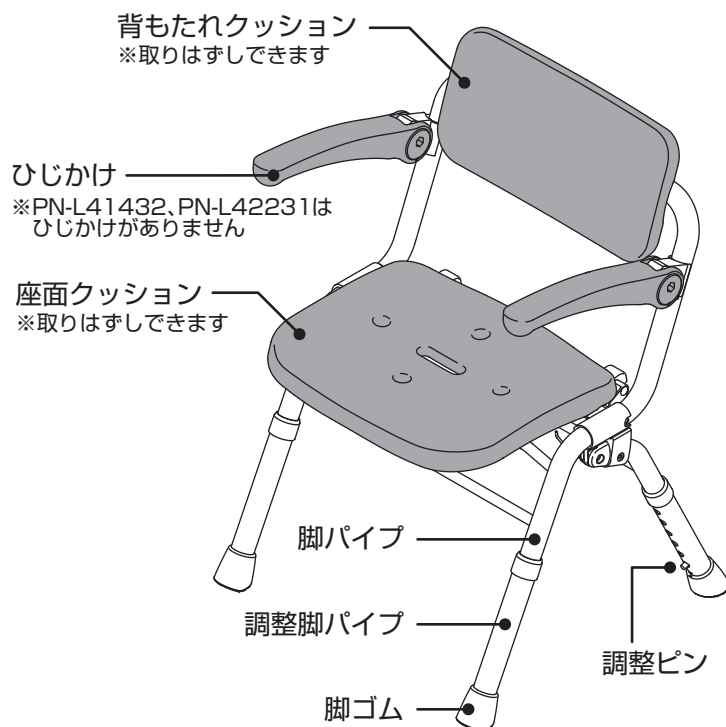

- 背もたれクッション、座面クッション、脚ゴムは交換部品としてお買い求めいただけます。
(P.11、12 **交換部品のご案内** をご確認ください)

初めて使うときの準備

●このシャワーチェアは浴室の洗い場でシャワーを浴びたり、体を洗ったりする際にご使用ください。

●身体状況などに合わせて、使いやすい高さに座面の高さを調整してください


座面高さは 6 段階 (2 cm 間隔) で調整できます

コンパクト 31.5 ~ 41.5 cm (出荷時 31.5 cm)

ミドル、ワイド 36 ~ 46 cm (出荷時 36 cm)

1 座面の高さを調整する

①調整ピンを押し、ロックをはずしてください。

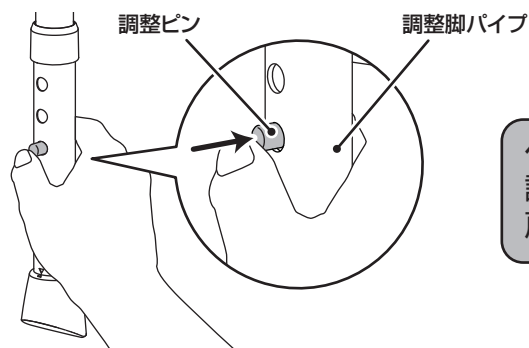


ペンなどの細い工具で強く押し込むと調整ピンがパイプ内部に入り込み戻らなくなります。


⚠ 注意

●調整ピンを強く押しすぎると調整ピンがもどらなくなるので注意する
(調整脚パイプが固定できないことによる転倒やけがの原因)

②調整脚パイプを上下にスライドさせ、使いやすい高さのパイプ穴に調整ピンを合わせてください。
高さを合わせると調整ピンが外に押し出され高さが固定されます。

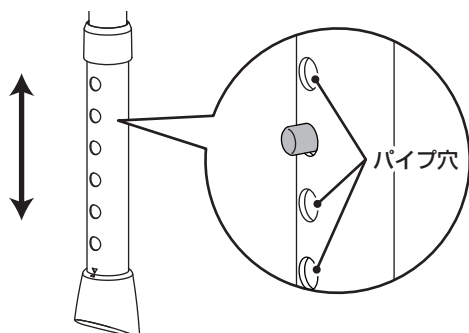

③調整脚パイプが固定されていることを確認してください。

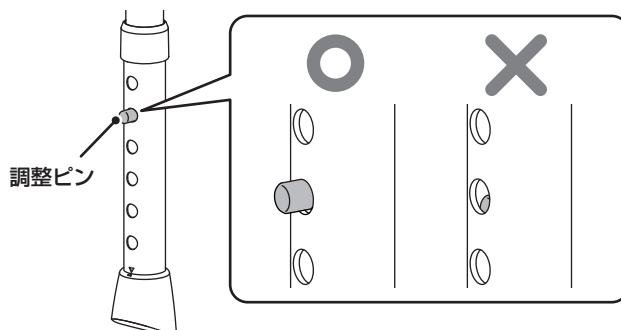

調整ピンが隠れて見えない場合があります。
その場合は、調整脚パイプを引っ張って取りはずし、調整ピンの位置を確認後に取り付け直してください。

⚠ 警告

●調整脚パイプは 4 脚とも同じ高さに調整する
(転倒によるけがの原因)


⚠ 注意

●調整脚パイプに脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認する
●ご使用になる前に、各部の緩み、ガタつき、変形等がないか確認する
(転倒によるけがの原因)
●塩ビ製フロアーマットの上に長時間放置しない
(劣化及び変色の原因)


ご使用方法

1 チェアを開く

- ① 背もたれと解除レバーを持ち、前脚が床より少し浮くように背もたれを持ち、チェアの重心を後脚に乗せます。

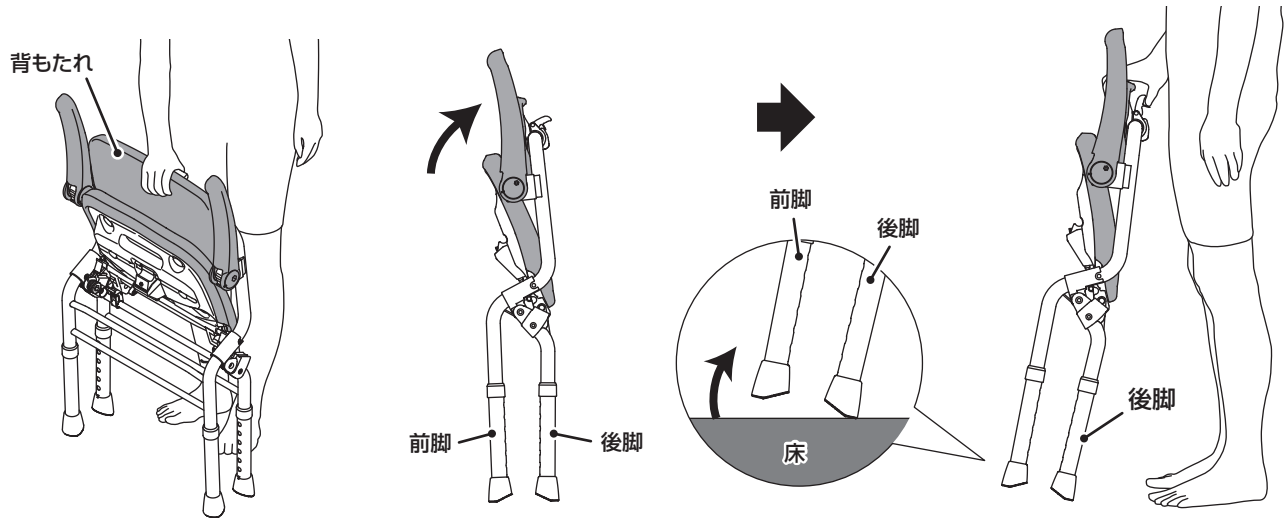

- ② 背もたれをまっすぐ下に降ろすイメージで床の方向に押してください。
解除レバーを握らずに開いてください。
最後に座面が水平となることを確認してください。

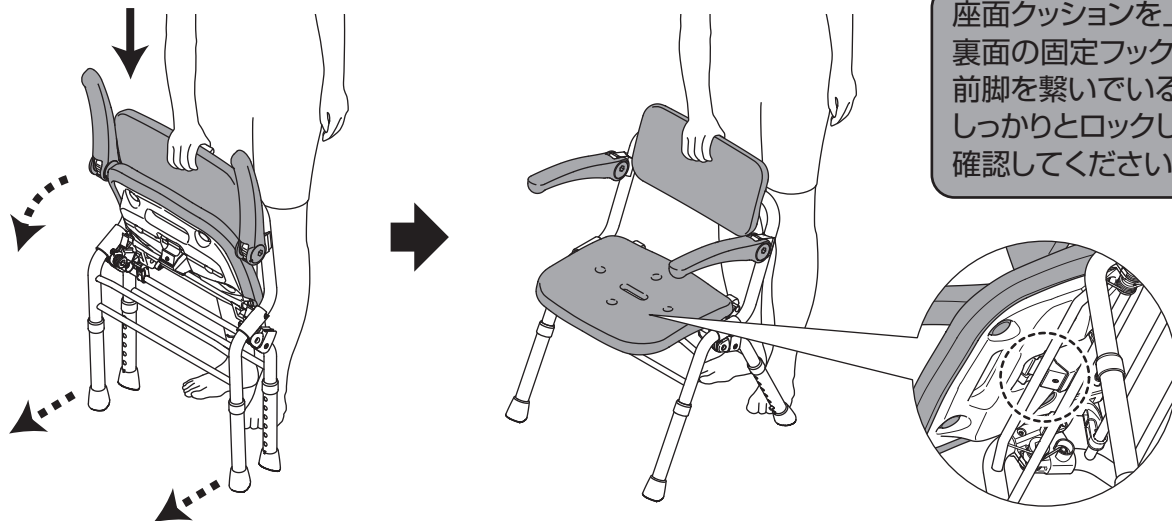

座面クッションを上から押して裏面の固定フックが前脚を繋いでいるパイプをしっかりとロックしていることを確認してください。


※ひじかけなしタイプも同様です

⚠ 警告

- チェアが完全に開き、座面が水平となっていることを確認して使用する
- 浴室床の、平らで安定した場所に置いて使用する
- 座面が確実にロックされていることを確認する
- 強い衝撃が加わるような座り方をしない
(転倒によるけがの原因)


2 チェアをおりたたむ

①ひじかけを上げ、背もたれと解除レバーを持ち、前脚に重心をのせてください。

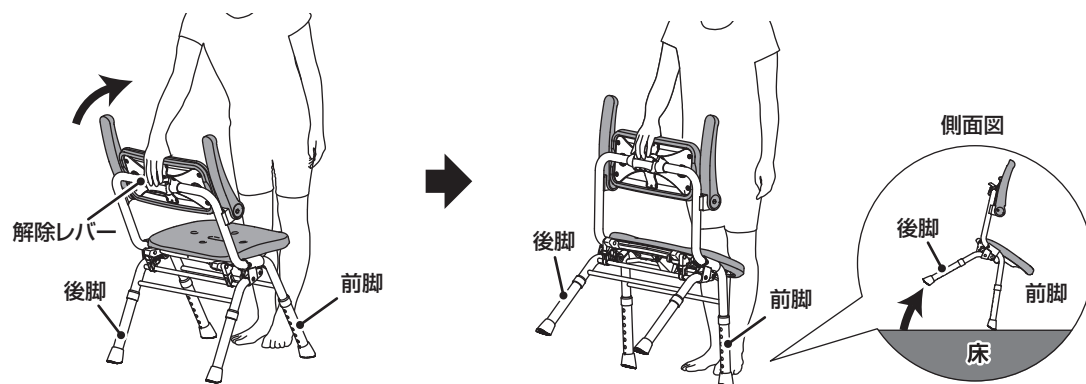

②解除レバーを握ってください。

●チェアは自立します


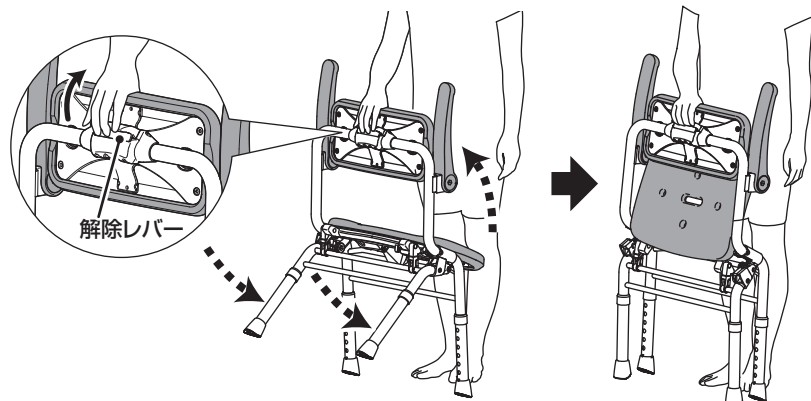


凹凸や傾斜がある床面では自立しない場合がありますので、平らで安定した場所に置くようにしてください。

3 持ち方

①背もたれ裏の持ち手を握る。

②座面裏の持ち手を握る。

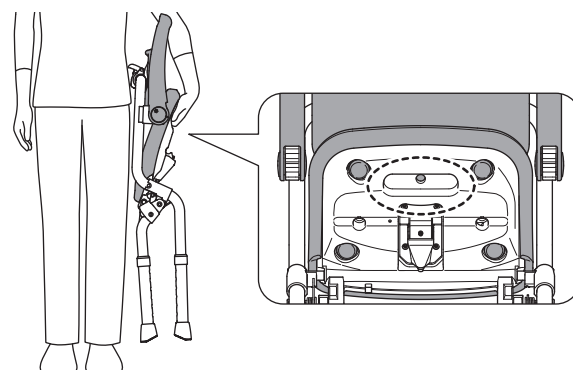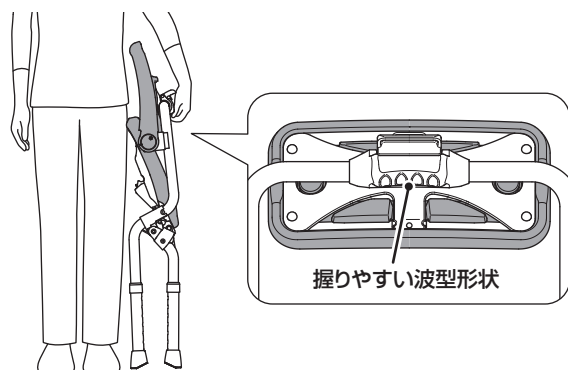

※ひじかけなしタイプも同様です

⚠ 注意

- 座面ロックに手や指を入れないこと
- 解除レバーを持って移動しない
(けがの原因)


ご使用方法

4 クッションの付け方


① 背もたれクッションをつける。

クッションの上下を確認する。


背もたれ樹脂の ▲マークと同じ向きにセットする。

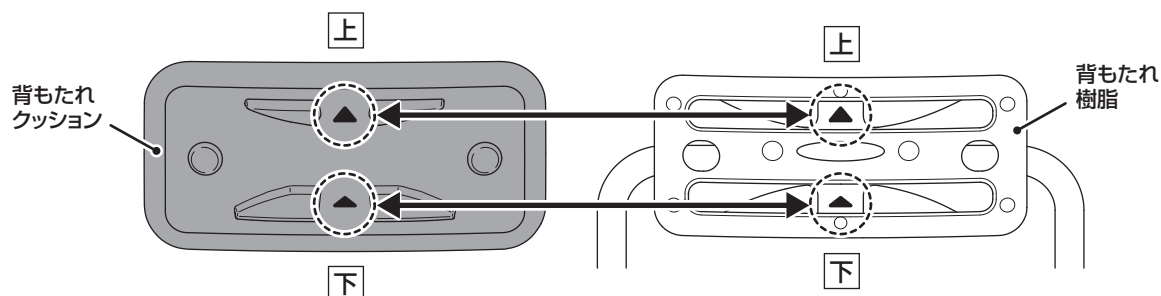

上部の角を背もたれ樹脂に引っかける。

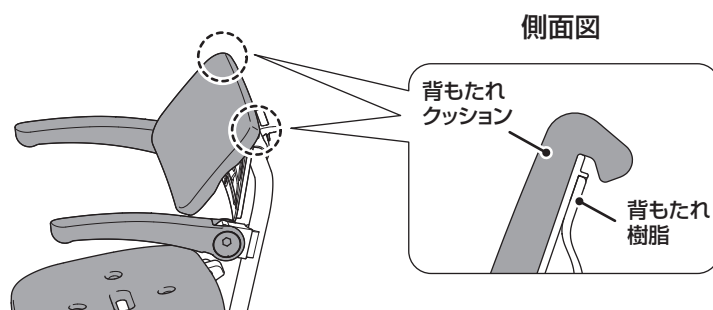


クッション裏の突起を背もたれ樹脂の穴に位置を合わせ背もたれをおさえながらはめ込む。
6つの突起が確実にハマっていることを確認する。

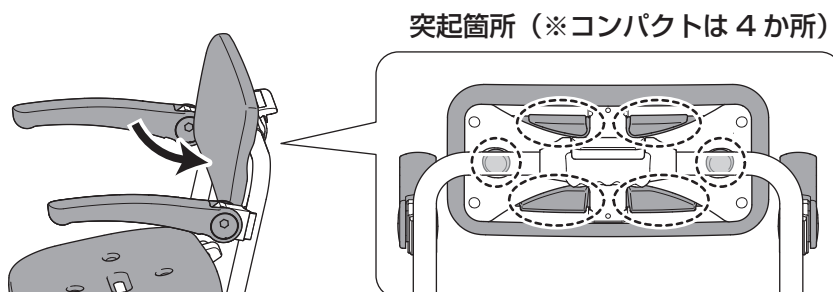

② 座面クッションをつける。

クッション裏の突起を座面の丸穴に位置を合わせてはめ込む。

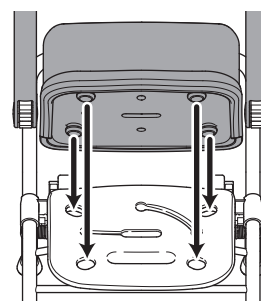

※ひじかけなしタイプも同様です

⚠ 注意

- 座面ロックに手や指を入れないこと
- 背もたれ樹脂の隙間に指を入れない
(けがの原因)

お手入れのしかた

安全のため、定期的にお手入れをお願いします。

- 背もたれクッション、座面クッションは、取りはずして洗うことができます。
- 中性洗剤で洗浄し、真水(20℃以下)で洗剤を洗い流した後に、乾いた布で水分をふきとってください。
- もとにもどすときは、クッションの凸をそれぞれ座面、背もたれの穴に入れて押し込んでください。(P.8 参照)
- ※ 十分なお手入れをしても、使用環境によりカビが発生することがあります。
- 湿気のない場所で保管してください。

▲ 注 意

- 背もたれクッション、座面クッションがしっかりと取り付けられていることを確認する
(けがの原因)
- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない
- 熱湯(60 度以上)をかけない
(プラスチックの劣化または破損によるけがの原因)

お 願 い

- 浴室乾燥機は使用しないでください
(クッションが取付できなくなる原因)
- 屋外に放置したり直射日光に当てたりしないでください
(色あせや、本体破損によるけがの原因)

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお、異常がある場合は、納入業者へご連絡ください。

症 状	考えられる原因	処 置
使用中に本体がガタつく	脚ゴムが床面より浮いている	脚ゴムが床面に接していることを確認してください
	高さ調整パイプが固定されていない	調整脚パイプが固定されていることを確認してください (P.5 ご使用方法)
背もたれクッションが取り付けられない	上下が逆になっている	正しい向きになっているか確認してください (P.8 クッションの付け方)

仕様

		ひじかけ あり			ひじかけ なし	
製品名		シャワーチェア (Air) コンパクトSP ワンタッチ	シャワーチェア (Air) ミドルSP ワンタッチ	シャワーチェア (Air) ワイドSP ワンタッチ	シャワーチェア (Air) コンパクト ワンタッチ	シャワーチェア (Air) ミドル ワンタッチ
製品番号		PN-L41431	PN-L41831	PN-L41532	PN-L41432	PN-L42231
色		A：ブルー D：オレンジ BR：モカブラウン				
ご使用時 サイズ (cm)	幅	40.5	45.5	49.5	40.5	45.5
	奥行	37.5～46.5	43～53	43～53	37.5～46.5	43～53
	高さ	60.5～70.5	64.5～74.5	67～77	60.5～70.5	64.5～74.5
	座面高	31.5～41.5 (6段階調整)	36～46 (6段階調整)	36～46 (6段階調整)	31.5～41.5 (6段階調整)	36～46 (6段階調整)
おりたたみ時 サイズ (cm)	幅	40.5	45.5	49.5	40.5	45.5
	奥行	(厚み) 13				
	高さ	78～89	83.5～94.5	87～98	70～81	74.5～85.5
材質	背もたれ	ポリプロピレン (硬質部)、EVA樹脂 (軟質部)				
	ひじかけ	EVA樹脂、アルミニウム (芯材)				
	座面	ポリエチレン (硬質部)、EVA樹脂 (軟質部)				
	脚パイプ、 調整脚パイプ	アルミニウム				
	調整ピン	ステンレス				
	脚ゴム	EVA樹脂				
製品重量		3.3kg	3.5kg	3.7kg	2.8kg	2.9kg
最大使用者体重		100kg				

交換部品のご案内

●背もたれクッション、座面クッション、脚ゴムは、交換部品としてお買い求めいただけます。

サイズ	部品名	色	部品番号
コンパクト	座面クッション	ブルー	PN-L4143101A
		オレンジ	PN-L4143101D
		モカブラウン	PN-L4143101BR
	背もたれクッション	ブルー	PN-L4143102A
		オレンジ	PN-L4143102D
		モカブラウン	PN-L4143102BR
ミドル	座面クッション	ブルー	PN-L4183101A
		オレンジ	PN-L4183101D
		モカブラウン	PN-L4183101BR
	背もたれクッション	ブルー	PN-L4183102A
		オレンジ	PN-L4183102D
		モカブラウン	PN-L4183102BR
ワイド	座面クッション	ブルー	PN-L4153201A
		オレンジ	PN-L4153201D
		モカブラウン	PN-L4153201BR
	背もたれクッション	ブルー	PN-L4183102A
		オレンジ	PN-L4183102D
		モカブラウン	PN-L4183102BR
共通	脚ゴム		PN-L4183103P

部品のご購入は、介護用品販売店へお問い合わせください。

防カビ加工について

本製品は、クッションと脚ゴムに防カビ加工を施しています。

防カビ加工製品とは、防カビ加工されていない製品の表面と比較し、特定のカビの生育が基準より抑えられていることが確認されている製品です。

防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

■ 防カビ加工についての情報

- 防カビ加工部位：クッション(背もたれ、座面)
脚ゴム
- 防カビ加工方法：練り込み



⚠ 注意事項

- 防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
- 防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- 使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- SIAAの安全性基準に適合しています。

防汚加工について

本製品は、本体一部とロック解除レバーに防汚加工を施しています。

防汚加工製品とは、防汚加工されていない製品の表面と比較し、汚れが広がりにくいことが確認されている製品です。

■ 防汚加工についての情報

- 防汚加工部位：プラスチックパーツ(クッション・脚ゴムを除く)
ロック解除レバー
- 防汚加工方法：練り込み

⚠ 注意事項

- 防汚加工は、汚れが付着しないものではありません。
- 使用条件によっては汚れが残る場合があります。
- 防汚材料は厚生労働省のポジティブリストに登録されています。


廃棄上のご注意

- 廃棄する際はできるだけ素材別に分解し、地域の分別ルールに従い廃棄してください。


製品寸法図

単位:cm


【ご使用時】

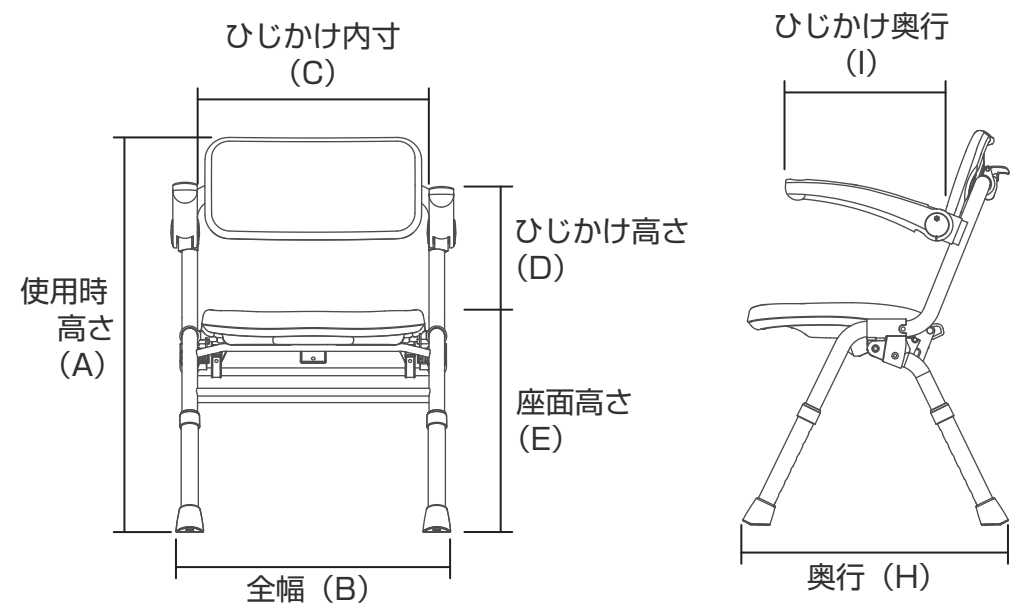

【おりたたみ時】

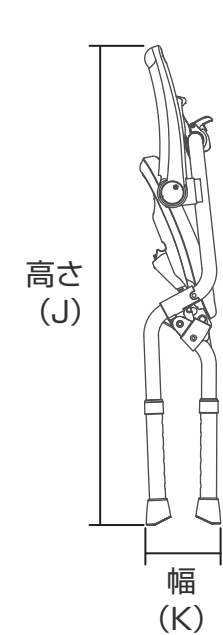

【座面サイズ】

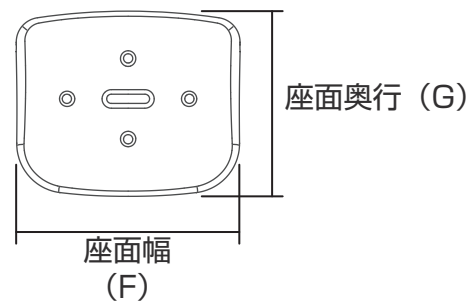

		ひじかけ あり			ひじかけ なし	
単位 (cm)		コンパクト	ミドル	ワイド	コンパクト	ミドル
A	使用時高さ	60.5～70.5	64.5～74.5	67～77	60.5～70.5	64.5～74.5
B	全幅	40.5	45.5	49.5	40.5	45.5
C	ひじかけ内寸	33.5	37.5	42.5		
D	ひじかけ高さ	20.5	20.5	24		
E	座面高さ	31.5～41.5	36～46	36～46	31.5～41.5	36～46
F	座面幅	32	36.5	41.5	32	36.5
G	座面奥行	29	30.5	32.5	29	30.5
H	奥行	37.5～46.5	43～53	43～53	37.5～46.5	43～53
I	ひじかけ奥行	26	26	26		
J	おりたたみ時高さ	78～89	83.5～94.5	87～98	70～81	74.5～85.5
K	おりたたみ幅	13	13	13	13	13

愛情点検表

事故防止のために

シャワーチェア[ユクリア Air] 安全チェックシート					※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください				
安全点検項目					点検結果(該当には○)				
※1か月に1度チェックしてください					日付				
愛情点検									
	フレームにひび割れ、変形、腐食がある。								○印があるときは、危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為、お取り替えをおすすめします。
	購入後5年以上経過している。								
	座面、ひじ掛け、背もたれにガタツキ・ゆるみなどがある。								○印があるときは、お買い上げ販売店にご相談ください。
	変色がある。								
	脚ゴムが破損している。								

上記の点検項目以外でも不具合があれば、販売店などの専門家にご相談ください

●製品の長期使用について

1. 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、ロットナンバーを本体に表示しております。

2. 想定安全使用期間とは

一般家庭用にてご使用いただくシャワーチェア[ユクリア Air]において、標準的な条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。

無償保証期間とは異なります。

※一般家庭以外(病院、施設など、不特定多数の方が使用される場所)に設置された場合は、使用条件により、想定安全期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

3. 経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】 5年(一般家庭にて使用いただく場合)

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による怪我などの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

● お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名			
電話			
お引き渡し日	年	月	日

■ 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入より1年間です。ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

■ 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後、5年保有しています。

修理を
依頼されるとき

■ 保証期間中は、お買い上げの販売店まで、製品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。保証の規定に従って修理させていただきます。

■ 保証期間を過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

■ 修理料金は次の内容で構成されています

【技術料】 診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】 修理に使用した部品および補助材料代です。

※ この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

お客様ご相談窓口のご案内

商品・お取扱いなどのご相談は
パナソニック エイジフリー株式会社

0120-365887

●受付時間 9:00～12:00 (土、日、祝日休み)
13:00～17:00

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/>

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

©Panasonic AGE-FREE Co.,Ltd. 2025

公的介護保険制度購入対象商品

※申請の際にコピー、または切り取ってご使用ください。

シャワーチェア(Air) コンパクトSPワンタッチ

品番:

PN-L41431A(ブルー)
PN-L41431D(オレンジ)
PN-L41431BR(モカブラウン)



シャワーチェア(Air) ミドルSPワンタッチ

品番:

PN-L41831A(ブルー)
PN-L41831D(オレンジ)
PN-L41831BR(モカブラウン)



シャワーチェア(Air) ワイドSPワンタッチ

品番:

PN-L41532A(ブルー)
PN-L41532D(オレンジ)
PN-L41532BR(モカブラウン)



シャワーチェア(Air) コンパクトワンタッチ

品番:

PN-L41432A(ブルー)
PN-L41432D(オレンジ)
PN-L41432BR(モカブラウン)



シャワーチェア(Air) ミドルワンタッチ

品番:

PN-L42231A(ブルー)
PN-L42231D(オレンジ)
PN-L42231BR(モカブラウン)

