


保管用
保証書付き

介護保険
購入対象
品 目

取扱説明書

浴槽台[ユクリア Air] 家庭用

- 浴槽台ソフト(Air)コンパクト1220 品番 PN-L11320
- 浴槽台ソフト(Air)コンパクト1826 品番 PN-L11326
- 浴槽台ソフト(Air)レギュラー1220 品番 PN-L11420
- 浴槽台ソフト(Air)レギュラー1826 品番 PN-L11426

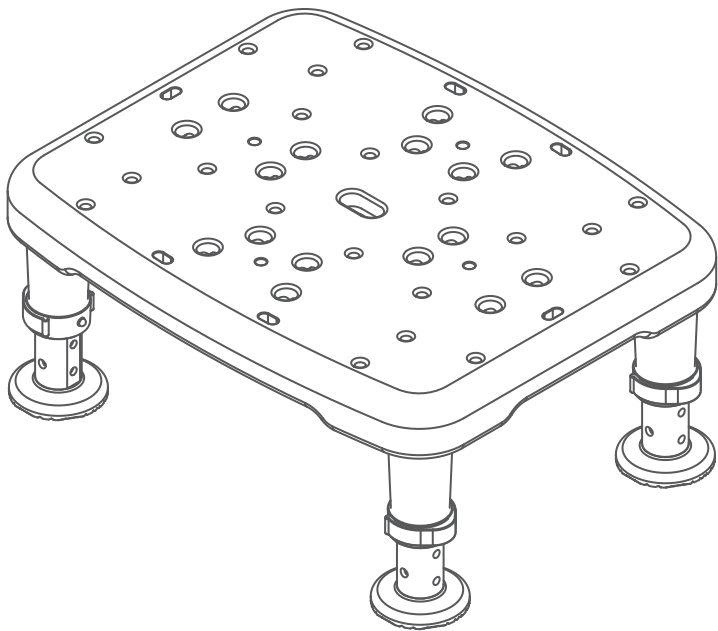

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	5
初めて使うときの準備	6
ご使用方法	8
お手入れのしかた	9
修理を依頼される前に	10
仕様	10
製品寸法図	12
愛情点検表	12
保証とアフターサービス	13
お客様ご利用窓口のご案内	14
保証書	15

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

最大使用者体重:100kg

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




警告

転倒、事故、けが
などを防ぐために



- 故意にゆすらない
- 浴室以外で使用しない
- 人が座っている状態で本体を移動させたり引きずったりしない
- 横方向に強い力をかけない
- 浴槽台を落下などで変形、破損した場合は使用しない
- 石けんなどのついた足で浴槽台に乗らない
- 高さ調整脚から脚ゴムを外さない
(転倒によるけがの原因)
- 移動させる際は、湯かき棒等でひっかけて持ちあげない
(落下によるけがの原因)
- 座面の上に飛び乗らない
- 2人以上同時に座らない
- マットや、すのこ、小さい石のようなタイル等、不安定な床面上では使用しない
- 座面中央以外に座らない
(破損や転倒によるけがの原因)
- クッションを外した状態で使用しない
(本体が正常にはたらかず、破損またはケガをするおそれがあります。)

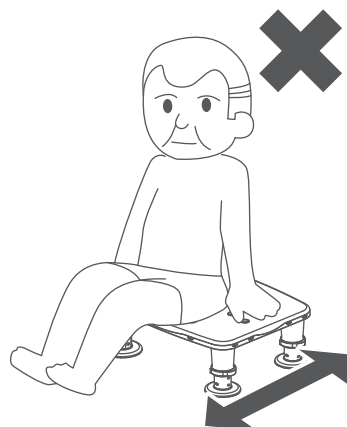



警告

転倒、けが
などを防ぐために




- 座面の水抜き穴に手指や足指を入れない
(けがの原因)

- 浴槽台以外の用途で使用しない
- 体重が 100 kgを超える方は使用しない
(破損によるけがの原因)

- 製品を梱包しているポリ袋やシートを頭にかぶる等の他用途で使用しない
(窒息の原因)

- 分解したり、修理、改造はしない
- 本製品の代用部品を、サイズが同じでも使用しない
(本体が正常にはたらかず破損によるけがの原因)

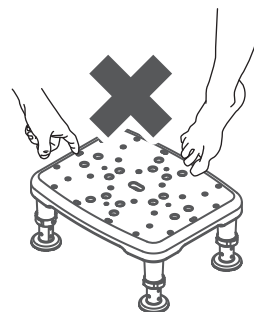


- 踏み台として使用する際は必ず座面部の中央に足をおく
- 使用前後は床や浴槽台についた石鹸やシャンプーを洗い流す
(転倒によるけがの原因)

- 平らで安定した場所に置いて使用する
- 高さ調整脚は必ず同じ高さで固定する
- 高さ調整ピンは、高さ調整脚に確実に装着し、装着後、取付け穴から高さ調整ピンのピンが飛びだしていることを確認する
- 脚ゴム4箇所がしっかり接地していることを確認してから使用する
- ミニ吸盤が浴槽底についていることを確認する
- 吸盤がつかなくなったり、脚ゴムにヒビ割れが発生した場合は、使用を中止する
(破損、転倒の原因)

- 浴槽と製品のすき間に注意する
(けがの原因)

高さ調整ピン固定の確認

図のように高さ調整脚から、高さ調整ピンのピンが取り付け穴から飛び出している事を確認する。

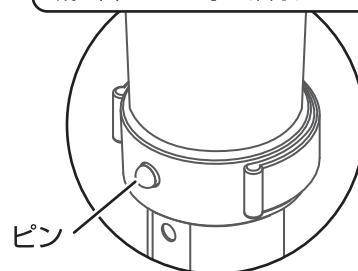



注意

転倒、破損、劣化
などを防ぐために



- 沸き出し口の近くや高温となる場所で使用しない
- サウナで使用しない
(本体破損ややけどの原因)

- アルコール以外で消毒しない
- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、
あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、
クレゾール等は使用しない
- 温泉水や入浴剤を使用しない
(プラスチックの劣化または破損によるけがの原因)

- 屋外に放置したり直射日光に当てたりしない
- 毛染め液を使用しない
- 本体が浴室内にある状態で、浴室乾燥機を使用しない
- 熱湯(60 度以上)をかけない
- お湯の入った浴槽の中につけたままにしておかない
(本体劣化による破損・けがの原因)

- クッションのみを持って持ち上げない

- 本体の保管時は浴槽壁にひっかけて保管しない
(本体落下によるけがの原因)

- 木質浴槽などぬめりなどが発生する浴槽では使用しない
- ガラス質でコーティング(ホーロー)された浴槽では
使用しない
(本体が滑ることによる転倒の原因)

- 火気に近づけない
(熱による変形・けがの原因)

- スリーブの外れた状態で使用しない
- 高さ調整脚を正しい向き以外で使用しない


- 浴槽内に製品を沈めた状態で
ジェットバスやジャグジーを使用しない
(本体が不安定な状態となり転倒によるけがの原因)

- 塩ビ製の床の上に長時間放置しない
(床変色による家財損害の原因)

スリーブが外れた状態では、高さ調整脚が固定できず、本体が不安定な状態となります

スリーブの装着方法


スリーブの突起と本体脚の切り込み位置を
合わせて装着してください

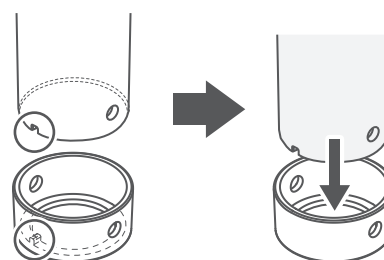

高さ調整脚を誤った向きで取り付けると、高
さ調整ができなくなったり、高さ調整脚が固
定できず、本体が不安定な状態となります

高さ調整脚の取り付け向き

高さ調整脚とスリーブの平らな面を合わせ
て差し込んでください

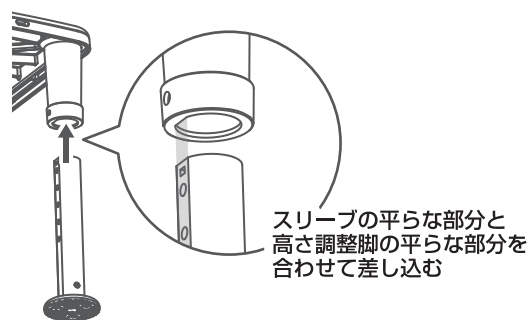

安全上のご注意

必ずお守りください


！ 注意

破損、転倒、けが
などを防ぐために



- 追い焚き付き給湯器や直焚き浴槽、お湯が循環している浴槽（24 時間風呂）で使用する場合は入浴時のみ設置し使用後は浴槽から取り出す（プラスチックの変形による転倒やけがの原因）
- 定期的に部品の破損やゆるみなど、各部に異常がないか点検する（本体が正常にはたらかないことによる破損またはけがの原因）
- 排水溝のフタの上に脚ゴムが乗らないように設置する（本体がガタつき、転倒によるけがの原因）
- 定期的に製品や浴槽、洗い場を清掃する（脚ゴムの裏に汚れが蓄積し、滑りやすくなる原因）
- 中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後、洗剤が残らないように水洗いし、乾いた布で水分をふき取る
- 脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認する
- 浴槽台に乗り降りするときは、本体の脚部や持ち手、座面に引っ掛からないように注意する
- 使用者が自分の身体を十分に安定させられないときは、必ず介助者が付き添う（転倒によるけがの原因）
- 排水口の近くに設置する場合は止水栓の鎖に注意する（本体の不安定による転倒の原因）
- 製品を浴槽内から取り出すときは浴室内の手すりなどをしっかり握りながら取り出す（転倒による溺れの原因）

各部のなまえ

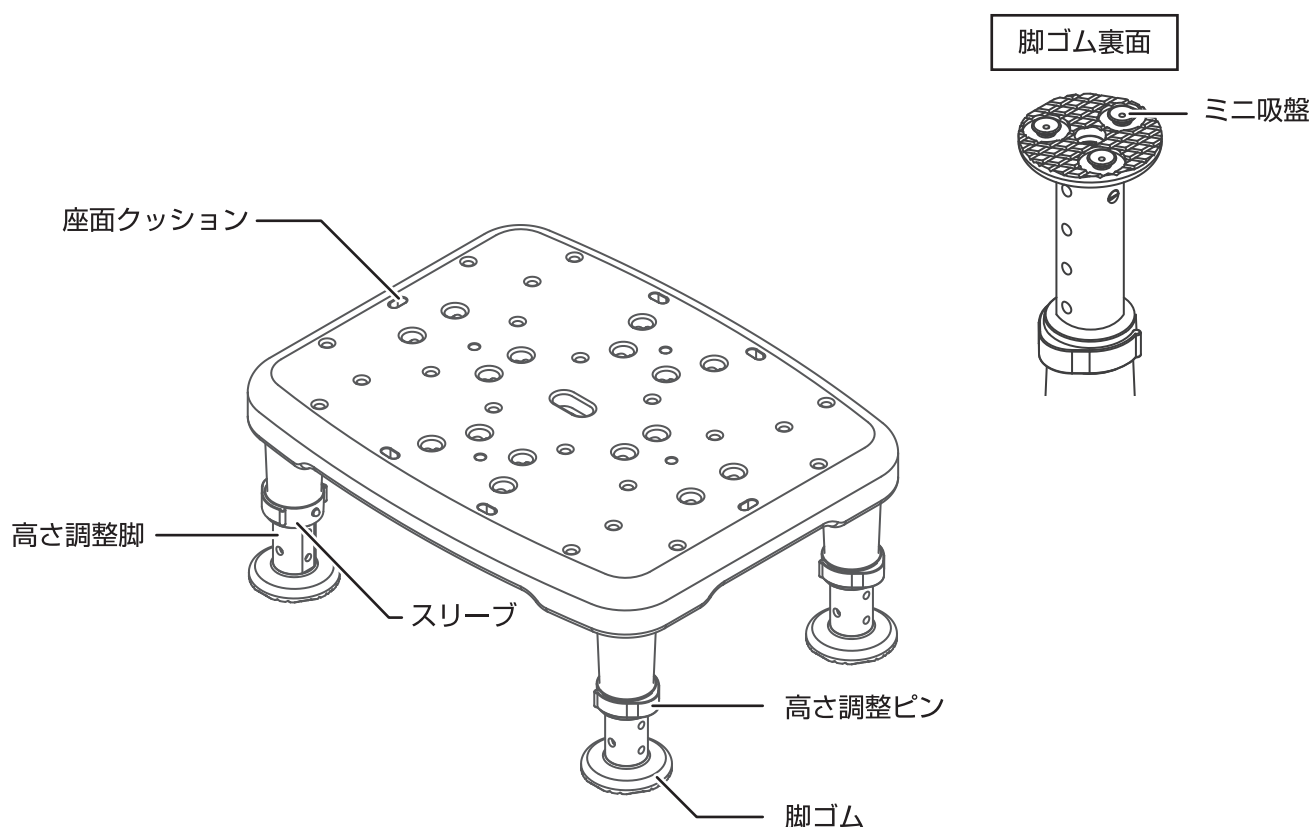


初めて使うときの準備

高さ調整脚の確認

●ご使用になる前に、高さ調整脚がしっかりと取り付けられていることをご確認ください。

- ・ 座面・脚の高さは適正か
- ・ 高さ調整脚は歪んで差し込まれていないか
- ・ 高さ調整脚は4脚とも同じ高さか
- ・ 高さ調整ピンはしっかりと刺さっているか
- ・ スリーブから高さ調整ピンが見えているか
- ・ スリーブは正しく装着されているか
- ・ ぐらつきはないか
- ・ 座面は床に対して平行か

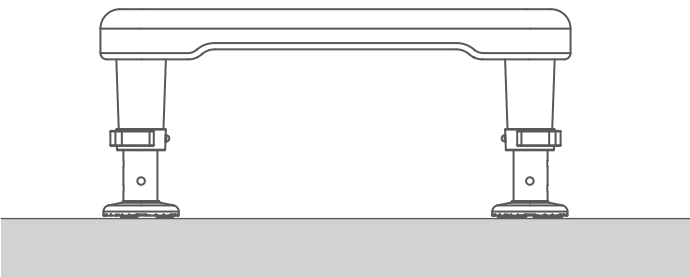


座面の高さ調整幅

●本製品は高さ調整脚を上下にスライドさせ、それぞれの高さ調整ピンで固定することにより座面高さを調整できます。
調整方法は P7 の **高さ調整脚の調整** をご参照ください。

製品名	座面高さ				
	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm
コンパクト1220 レギュラー1220					
コンパクト1826 レギュラー1826	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm


高さ調整脚の調整

●製品の天地を返し、座面を下にして作業すると調整しやすくなります。

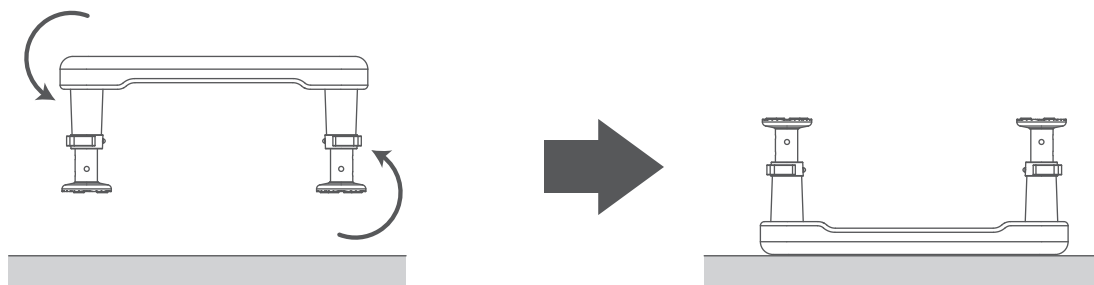


1. 高さ調整ピンを外す

高さ調整ピンをはずし高さ調整脚の固定を解除します。

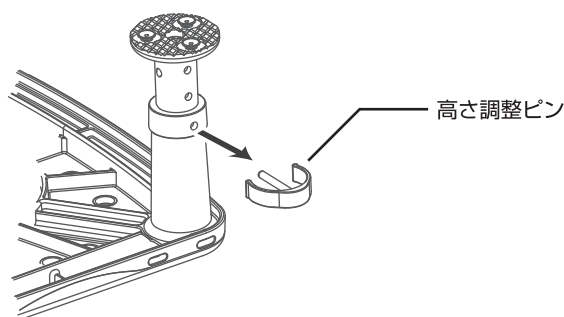


2. 高さを調整する

高さ調整脚を上下にスライドさせ、高さ調整ピンを固定する目的の位置とパイプ穴が重なるように高さを合わせます。

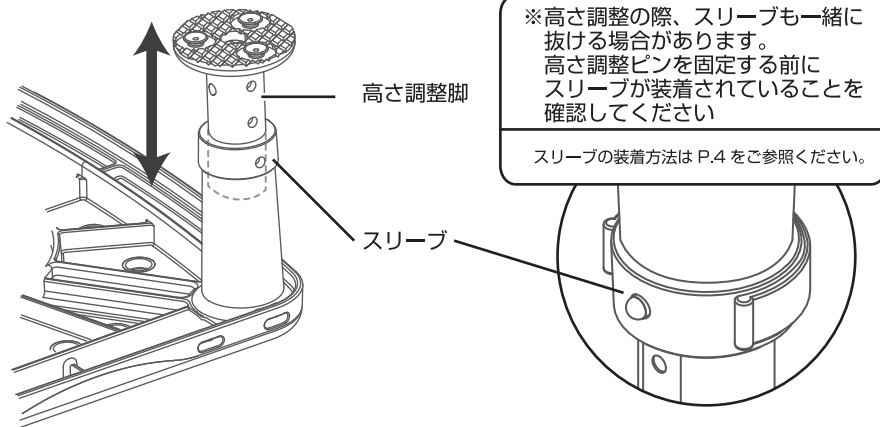

3. 高さ調整ピンを固定する

パイプ穴に高さ調整ピンを確実に差し込み、高さ調整脚を固定します。

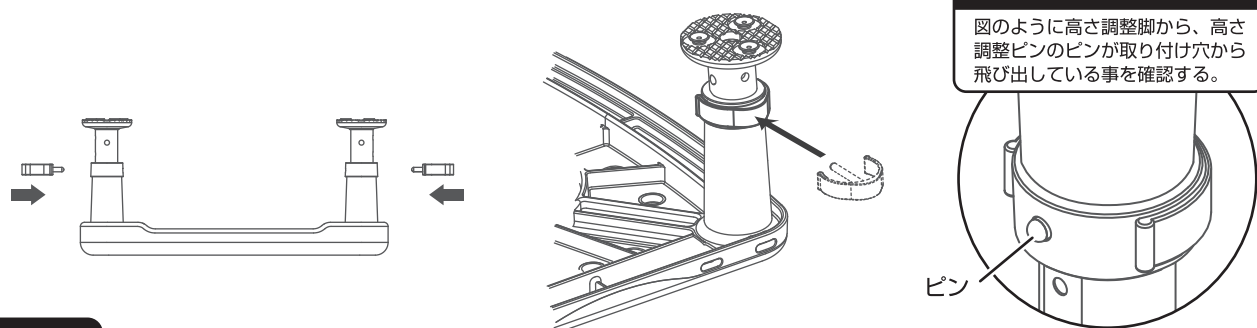

⚠ 警告

- 高さ調整脚は必ず同じ高さで固定する
- 高さ調整ピンは、高さ調整脚に確実に装着し、装着後、取付け穴から高さ調整ピンが飛びだしていることを確認する（破損、転倒の原因）


ご使用方法

必ず浴槽台が安定していることを確認してからご使用ください

1. 設置する位置を決める

①浴槽にお湯を溜めてから排水口の上に脚ゴムが乗らないように設置してください。


※製品内に入っている空気が抜けるまでに多少時間がかかりますので、自沈に時間がかかる場合があります。
(空気が抜けるように本体を沈めるまたは、上から浴槽台を押して頂くとすぐに設置出来ます。)

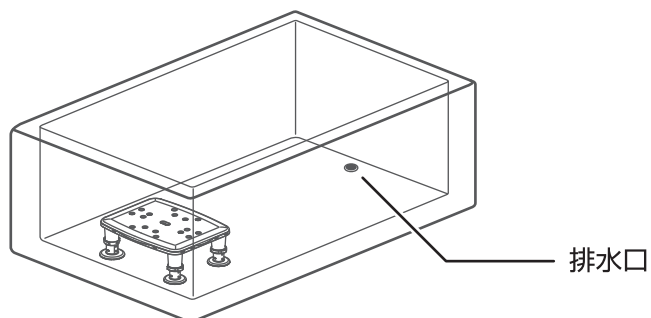

②使用前に浴槽台を上から押し付けミニ吸盤を浴槽床に密着させてください。

※浴槽の材質によっては、ミニ吸盤が吸着しないことがあります。

③脚ゴム 4箇所がしっかり接地しており、浴槽台のガタツキがないことを確認してください。

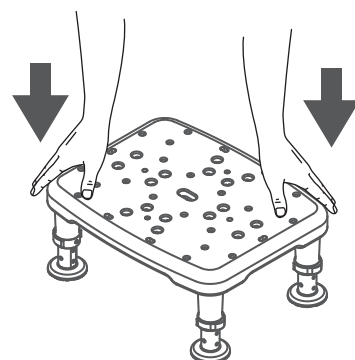


▲ 注意


- 沸き出し口、給湯口、給水口、蛇口の近くで使用しない
(変形や破損、やけどの原因)
- 排水口の近くに設置する場合は止水栓の鎖に注意する
(本体がガタツキ、転倒によるけがの原因)

2. 浴槽に入る

①体を安定させるために、浴槽のフチや浴槽手すりなどをしっかり握りながら片足ずつゆっくりと浴槽台の中央部に足を移してください。

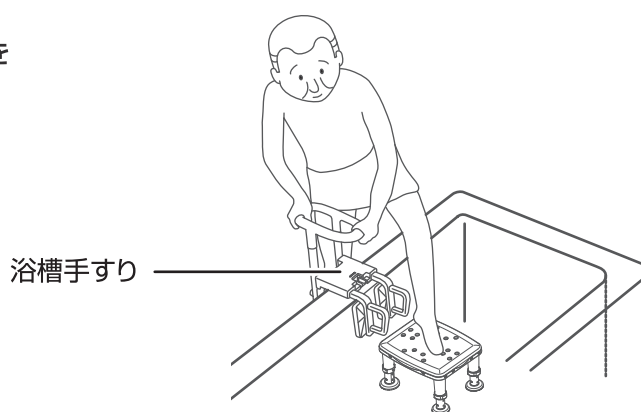


②片足ずつ体を安定させながら、足を浴槽内に移してください。

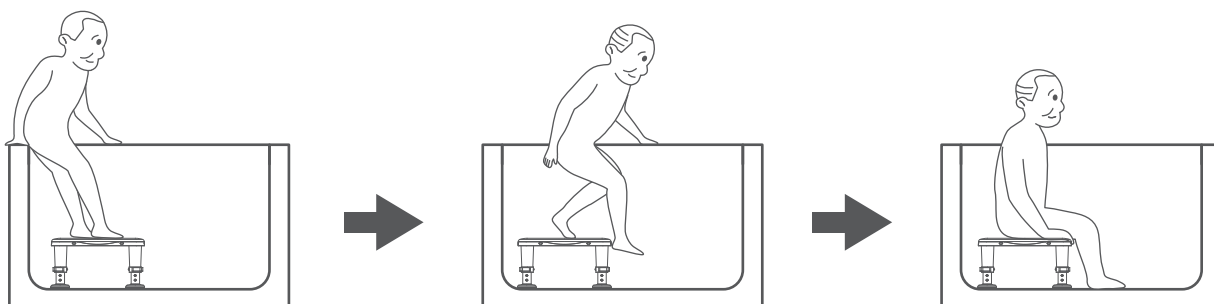

お手入れのしかた

安全のため、定期的にお手入れをお願いします。

- 天板裏の持ち手を握り、浴槽から出して乾かしてください。
- 中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後洗剤が残らないように水洗いし、乾いた布で水分をふきとってください。
- 市販の中性洗剤をご利用の際には使用上の注意をご確認ください。

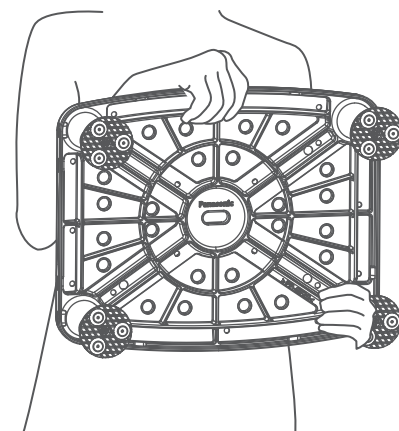

高さ調整脚は取り外して洗うことができます

- ・ 高さ調整ピンを取りはずし、高さ調整脚を引き抜いてください。

P7の **高さ調整脚の調整** をご参照ください。

※脚ゴムのみをひねると脚ゴムが外れることがあり、取り付け出来なくなりますので注意してください。


- ・ お手入れ後は高さ調整脚を元の状態に戻してください。

P.4 をご参照ください。

※間違った向きで差し込むと高さ調整ができなくなるおそれがありますので注意してください。



1 クッションをはずす

- 高さ調整脚をしっかりと固定して、クッションを引き上げ取り外します。

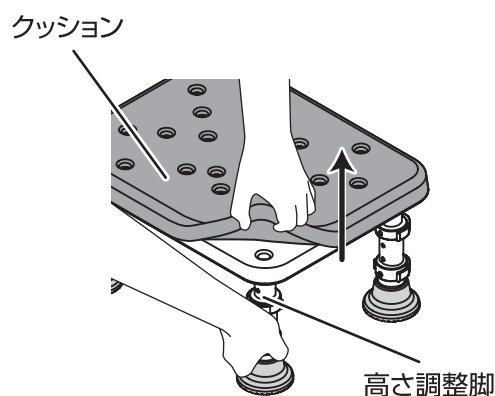


2 クッションを取り付ける

- クッション裏面の突起と本体フレームの穴とを合わせて、座面クッションを上からしっかり押さえて取り付けます。

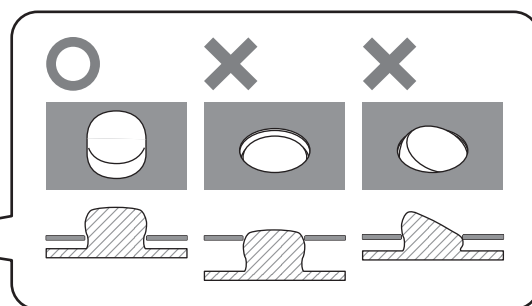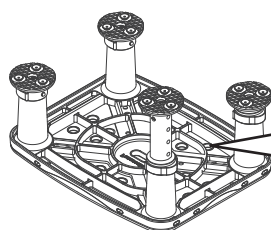

3 高さ調整脚をはずす

- 高さ調整ピンを取りはずし、高さ調整脚を引き抜いてください。
P7 高さ調整脚の調整をご参照ください。

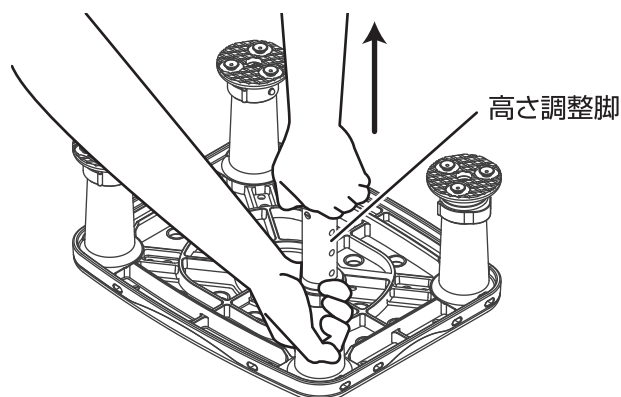

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。
処置後なお、異常がある場合は、納入業者へご連絡ください。

症 状	考えられる原因	処 置
使用中にガタつく	排水蓋の上など 床面に段差がある	平らで安定した場所に置き、 脚ゴム 4 箇所をしっかりと 接地してください
	脚の高さが等しくない	高さ調整脚の高さを そろえてください (P.7 高さ調整脚の調整)
	高さ調整ピンが固定されていない	装着後、取付け穴から高さ 調整ピンが飛びだしている ことを確認してください (P.7 高さ調整脚の調整)
	スリーブが正しく装着されていない	突起位置を合わせて 装着してください (P.4 をご参照ください)
本体が移動する	吸盤がついていない	ミニ吸盤が床面につくように 手で押さえて確認してください

仕 様

製品名		浴槽台ソフト(Air) コンパクト 1220		浴槽台ソフト(Air) コンパクト1826		浴槽台ソフト(Air) レギュラー 1220		浴槽台ソフト(Air) レギュラー 1826	
製品品番		PN-L11320		PN-L11326		PN-L11420		PN-L11426	
色		A：ブルー D：オレンジ BR：モカブラウン							
サ イ ズ	製品寸法	幅30 × 奥行24 cm				幅37.5 × 奥行30 cm			
	高さ	12.14.16.18.20cm (5段階調整)		18.20.22.24.26cm (5段階調整)		12.14.16.18.20cm (5段階調整)		18.20.22.24.26cm (5段階調整)	
	脚寸法	幅29.5 × 奥行22 cm				幅37 × 奥行27 cm			
材 質	座面	クッション：EVA樹脂 本体：ポリプロピレン、スチール							
	高さ調整脚	アルミニウム							
	高さ調整ピン	ポリプロピレン、ステンレス鋼							
	脚ゴム	エラストマー、アルミニウム							
製品質量		1.9kg		2.0kg		2.4kg		2.5kg	

防カビ加工について

本製品は、座面部と脚ゴムに防カビ加工を施しています。
防カビ加工製品とは、防カビ加工されていない製品の表面と比較し、特定のカビの育成が基準より抑えられていることが確認されている製品です。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

■防カビ加工についての情報

- 防カビ加工部位 : 座面クッション
本体
脚ゴム
- 防カビ加工方法 : 練り込み



注意事項

- 防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
- 防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- 使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- SIAAの安全基準に適合しています。

防汚加工について

本製品は、座面部・本体・脚ゴムに防汚加工を施しています。
防汚加工製品とは、防汚加工されていない製品の表面と比較し、汚れが広がりにくいことが確認されている製品です。

■防汚加工についての情報

- 防汚加工部位 : 本体
脚ゴム
- 防汚加工方法 : 練り込み



注意事項

- 防汚加工は、汚れが付着しないものではありません。
- 使用条件によっては汚れが残る場合があります。
- 厚生労働省のポジティブリストに登録されています。

廃棄上のご注意

- 廃棄する際はできるだけ素材別に分解し、地域の分別ルールに従い廃棄してください。

製品寸法図

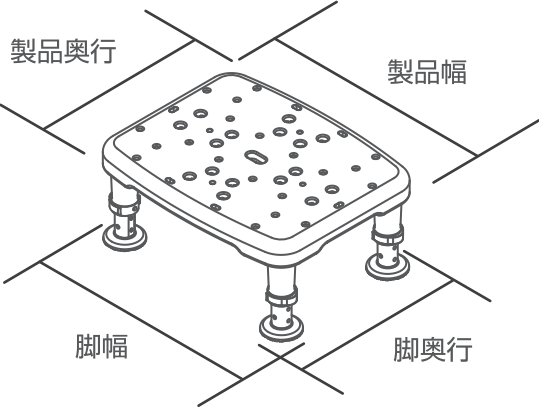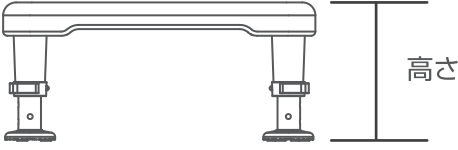幅・奥行						高さ					
											
		脚幅	脚奥行	製品幅	製品奥行	高さ					調整段階数
コンパクト	1220	29.5cm	22cm	30cm	24cm	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	5段階
	1826					18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	
レギュラー	1220	37cm	27cm	37.5cm	30cm	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	5段階
	1826					18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	

愛情点検表 事故防止のために

浴槽台[ユクリア Air] 安全チェックシート				※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。							
安全点検項目				点検結果（該当には○）						処理手順	
				日付							
	愛情点検	ガタツキやゆるみなどがある								○印があるときは、危険な状態になっていますので、使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。	
		購入後5年以上経過している									
		フレームにひび割れ、変形、腐食がある									
		変色がある									
		吸盤がつかない、または脚ゴムにひび割れがある								脚ゴムの交換時期です。脚セットを交換してください。	

上記の点検項目以外でも不具合があれば、販売店などの専門家にご相談ください

●製品の長期使用について

1. 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、製造年月日を本体に表示しております。

2. 想定安全使用期間とは

一般家庭用にてご使用いただく浴槽台[ユクリア Air]において、標準的な条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。無償保証期間とは異なります。

※一般家庭以外(病院、施設など、不特定多数の方が使用される場所)に設置された場合は、使用条件により、想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

3. 経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】 5年(一般家庭にて使用いただく場合)

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による怪我などの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・
修理などのご相談は

■ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

● お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名			
電話			
お引き渡し日	年	月	日

■ 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は買い上げより1年間です。ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

■ 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後、5年保有しています。

修理を
依頼されるとき

■ 保証期間中は、お買い上げの販売店まで、製品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。保証の規定に従って修理させていただきます。

■ 保証期間を過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

■ 修理料金は次の内容で構成されています

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。


※ この製品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

公的介護保険制度購入対象製品

※申請の際にコピー、または切り取ってご使用ください。

浴槽台ソフト(Air) コンパクト1220


品番:
PN-L11320A(ブルー)
PN-L11320D(オレンジ)
PN-L11320BR(モカブラウン)

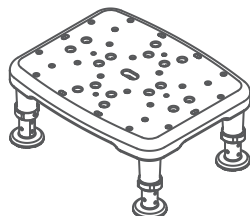

パナソニック エイジフリー株式会社

浴槽台ソフト(Air) レギュラー1220


品番:
PN-L11420A(ブルー)
PN-L11420D(オレンジ)
PN-L11420BR(モカブラウン)

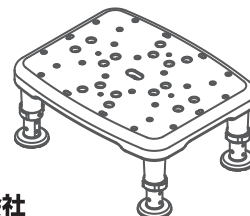

パナソニック エイジフリー株式会社

浴槽台ソフト(Air) コンパクト1826


品番:
PN-L11326A(ブルー)
PN-L11326D(オレンジ)
PN-L11326BR(モカブラウン)

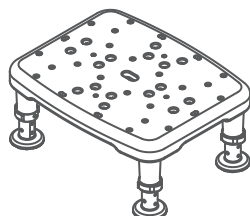

パナソニック エイジフリー株式会社

浴槽台ソフト(Air) レギュラー1826

品番:
PN-L11426A(ブルー)
PN-L11426D(オレンジ)
PN-L11426BR(モカブラウン)

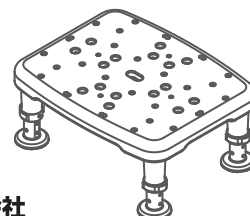

パナソニック エイジフリー株式会社

お客様ご相談窓口のご案内

製品・お取り扱いなどのご相談は
パナソニック エイジフリー株式会社
0120-365887
●受付時間 9:00～12:00 (土、日、祝日休み)
13:00～17:00
<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

©Panasonic AGE-FREE Co.,Ltd. 2022