


取扱説明書

床ずれ防止用具マットレス ルミナフィット

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> レギュラーサイズ | 品番 PN-S120011 |
| <input type="checkbox"/> ショートサイズ | 品番 PN-S120012 |
| <input type="checkbox"/> ナローサイズ | 品番 PN-S120013 |
| <input type="checkbox"/> ナローショートサイズ | 品番 PN-S120014 |

もくじ

●安全上のご注意	2
●製品の使用方法	3
●仕様	4
●保証書	5~6
●お手入れの方法	7
●保証とアフターサービス	8

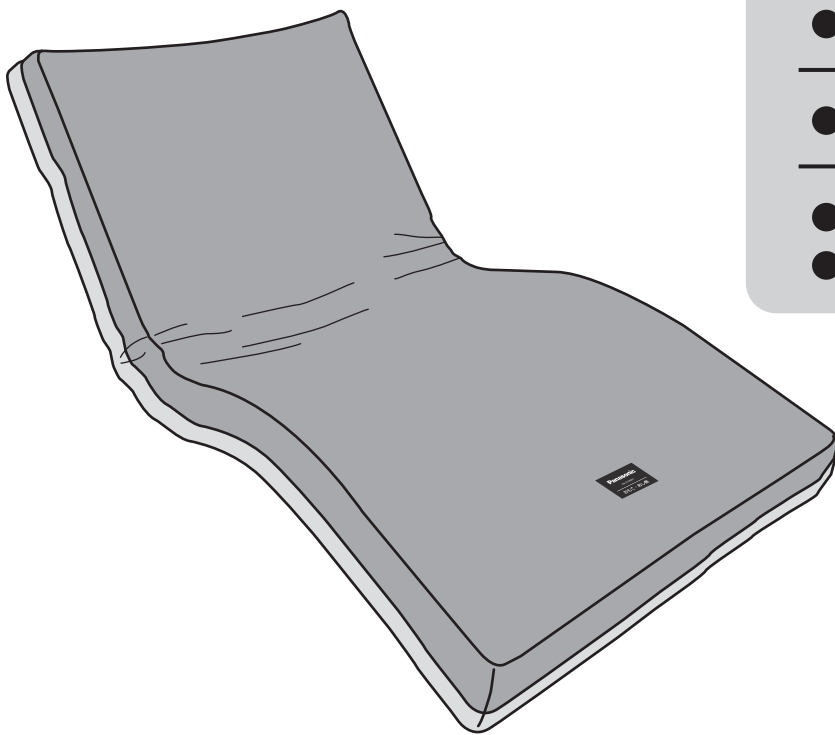

ご使用になる前に必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



保証書付き

■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。







■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告 「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。	 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
---	--








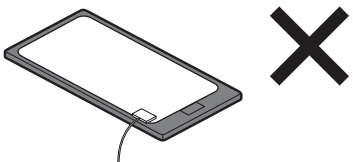





■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--

! 警告

 禁止	■使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は、使用しない。 (症状の悪化や思わぬ事故の原因となります。) ⇒医師・看護師などの専門家に相談してください。	 禁止	■心臓マッサージなどの処置が予測される方に使用しない。 (硬い床などの上でないと効果がでない処置には対応できないおそれがあります。)
 禁止	■ストーブなどの火気類に製品を近づけない。 (火災や変色・変形の原因となります。)	 必ず守る	■身体の挟み込みに注意する。 (サイドレールやベッド用グリップを併用する場合、ベッドとマットレスのすき間に身体を挟まれて思わぬ事故やけがをする原因となります。) ⇒ベッドのサイズに合ったものを選定してください。
 禁止	■梱包用の袋やマットレスカバーを被らない。 (窒息する原因となります。)	 必ず守る	■呼吸を妨げないような体位で使用する。 (うつぶせ寝などの場合、窒息する原因となります。)


! 注意

 禁止	■二人以上で使用したり、マットレスの上で飛び跳ねない。 (本体の性能を発揮できないおそれやマットレスの破損・変形の原因となります。)	 必ず守る	■クッション(詰物)にへたり(永久歪み)や破損が見られた場合は、使用を中止し、交換をする。 (守らないと、体圧分散効果が妨げられ、床ずれの発症や進行の原因となります。)
 禁止	■マットレスの上に厚手のパッドや布団などを敷かない。 (守らないと、体圧分散効果が妨げられ、床ずれの発症や進行の原因となります。)	 必ず守る	■ご使用になる前に、マットレス上面に異物がないか確認する。 (守らないと、思わぬ事故やけがの原因となります。)
 禁止	■電気敷き毛布は使用しない。 (本来の性能を発揮できないおそれがあります。)	 必ず守る	■表裏・頭側足側の向きに注意してベッド上に敷く。 (守らないと、本来の寝心地を損なう原因となります。)
 禁止		 必ず守る	■マットレスの表面には必ず薄手のシーツを敷いて使用してください。その際、シーツを張り過ぎたり、しわができないように敷く。 (守らないと、本来の性能を発揮できないおそれや床ずれの進行の原因となります。)
 禁止	■日のある場所や砂・ほこりの多い場所に放置したり、使用しない。 (破損・変形・変質・変色の原因となります。)	 必ず守る	■インナーカバーとアウターカバーは必ず掛ける。 (守らないと、体圧分散効果が妨げられ、床ずれの発症や進行の原因となります。)
 禁止	■無理な折り曲げや、曲げた状態で保管しない。 (破損・変形の原因となります。)	 必ず守る	■マットレスを移動させるときは、両手で挟み込むようにして持つ。 (クッションが破損する原因となります。)

製品の使用方法

1 マットレスをベッド上に敷く

- 本マットレスは、おもて面・うら面・あたま側・あし側があります。(リバーシブル仕様ではありません。)
- カバーのPanasonicマークの指示に従って“おもて・あし側”に合わせて使用してください。(洗濯等で、カバーからクッションを取り外した場合は、“おもて・あし”の表示に合わせてカバーを取り付けてください。)

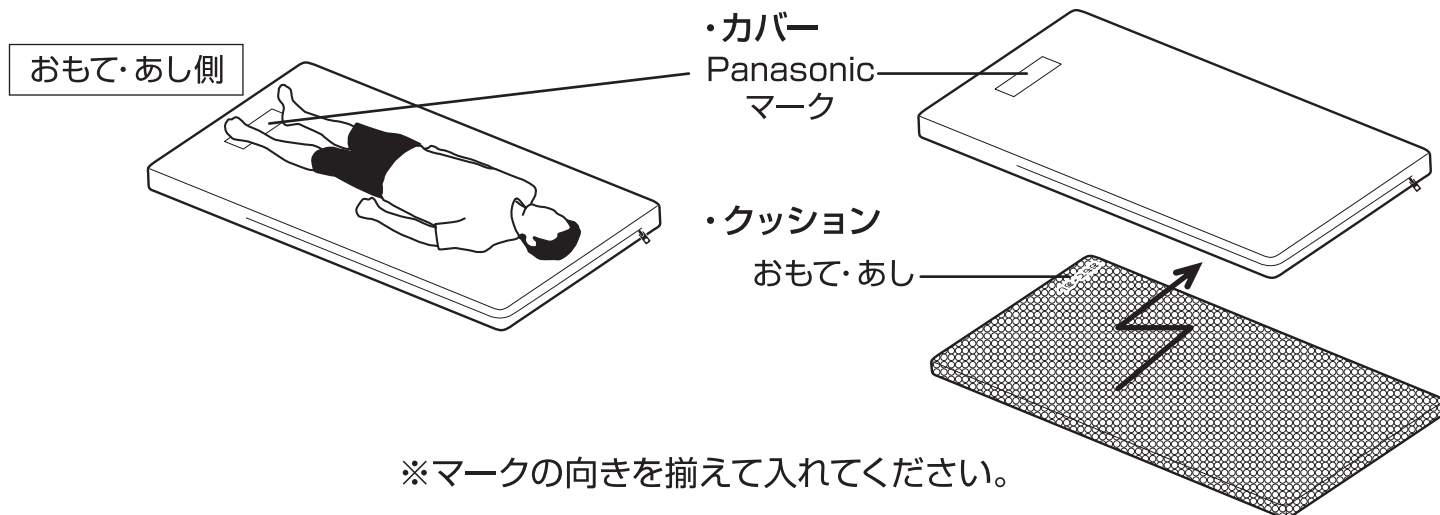


注意

<p>禁止</p>	<p>■マットレスの上に厚手のパッドや布団などを敷かない。 (守らないと、体圧分散効果が妨げられ、床ずれの発症や進行の原因となります。)</p>	<p>必ず守る</p>	<p>■表裏・頭側足側の向きに注意してベッド上に敷く。 (守らないと、本来の寝心地を損なう原因となります。)</p>
<p>禁止</p>	<p>■日のある場所や砂・ほこりの多い場所に放置したり、使用しない。 (破損・変形・変質・変色の原因となります。)</p>	<p>必ず守る</p>	<p>■インナーカバーとアウターカバーは必ず掛ける。 (守らないと、体圧分散効果が妨げられ、床ずれの発症や進行の原因となります。)</p>

2 マットレスに薄手のシーツを敷く


- 簡単にめくれないようマットレスを巻き込むようにシーツを被せてください。
- 汚れ、雑菌、カビを取り除くために、定期的にクッションとカバーを洗濯してください。

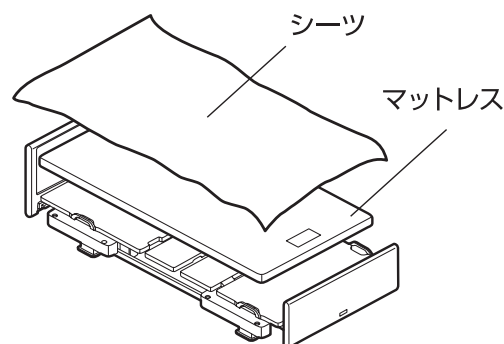

注意

<p>禁止</p>	<p>■ご使用になる前に、マットレス上面に異物がないか確認する。 (守らないと、思わぬ事故やけがの原因となります。)</p>	<p>必ず守る</p>	<p>■マットレスの表面には必ず薄手のシーツを敷いて使用してください。その際、シーツを張り過ぎたり、しわができないように敷く。 (守らないと、本来の性能を発揮できないおそれや床ずれの進行の原因となります。)</p>
-----------	--	-------------	---

仕様

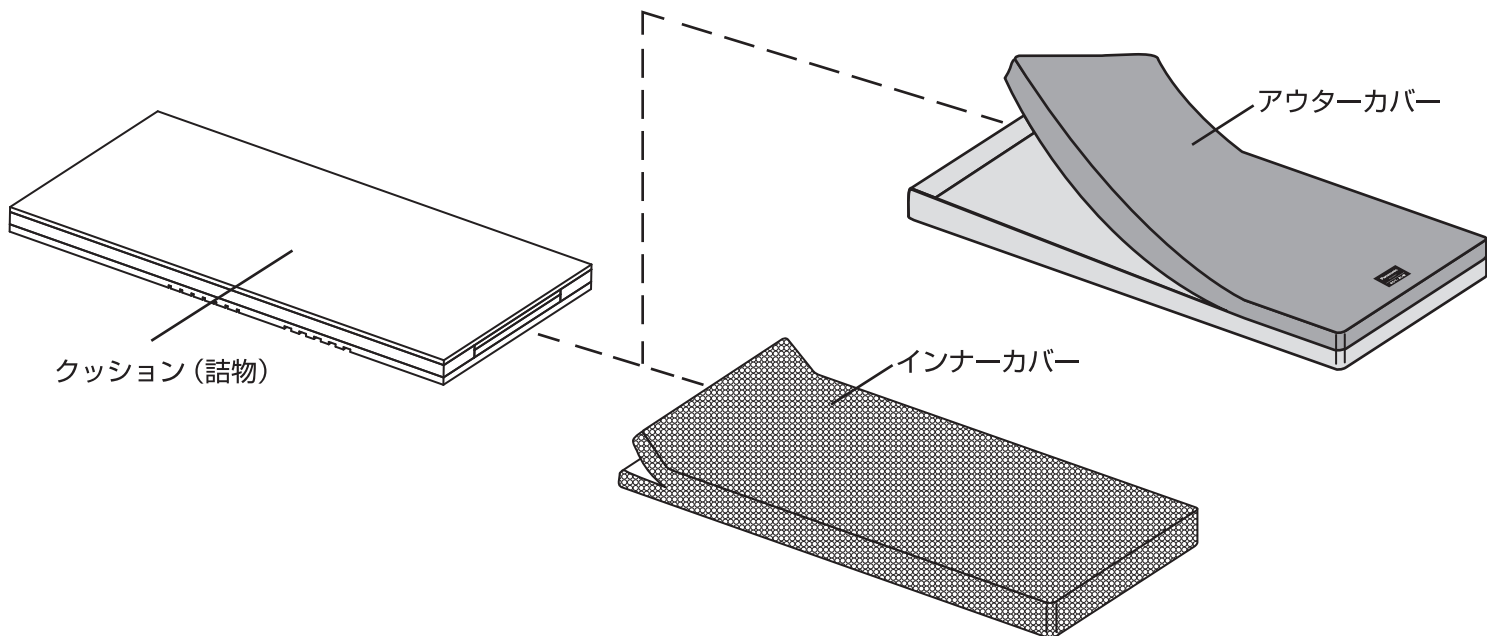

品名	床ずれ防止用具マットレス ルミナフィット			
品番	PN-S120011	PN-S120012	PN-S120013	PN-S120014
タイプ	レギュラー	ショート	ナロー	ナローショート
寸法 (mm)	幅910x長さ1910x厚さ100	幅910x長さ1810x厚さ100	幅830x長さ1910x厚さ100	幅830x長さ1810x厚さ100
質量 (kg)	7.5	7.2	7.3	7.0
構造	平型 (クッションは4層構造)			
材質	アウターカバー : ポリエステル100% インナーカバー : ポリエステル100% クッション【詰物】 : 1層目/2層目/3層目 (端座位部) /4層目 : ウレタン 75% 3層目 (中央部) : 指定外繊維 (プレスエア) 15%			

商品特徴

●ご理解いただきたいこと

床ずれには個人差があります。ご利用者の身体状況や使用環境によっては、適切にご使用いただいても床ずれを防止できないことがあります

1. 優れた体圧分散効果

かたさの異なるウレタンと高反発のプレスエア素材を組み合わせた4層構造にすることで、バランス良く身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られます。

2. 理想的な寝姿勢と座位姿勢の保持

身体の部位別にウレタンのかたさを変えることで重量のある臀部の沈み込みを抑え、バランスのとれた寝姿勢を保持し、両端は硬めのウレタンを採用することで座位姿勢が安定します。

3. なめらかな肌触り

1層目に高触感ウレタンフォームを使用することで程よいさわり心地を実現しました。

■ お手入れの方法 ■

・つねに清潔に保てるよう、定期的に風通しがよく、日のあたらない場所で干し、汚れが目立つ場合は洗濯をしてください。

■アウターカバー(側地)

- ・洗濯水の温度は40℃以下、乾燥温度は80℃以下としてください。
- ・塩素系漂白剤は使用しないでください。
- ・アイロンは低い温度(80~120℃)で掛ける。またアイロンは掛け時にあて布を使用してください。

■インナーカバー (取り外してお手入れする場合)

- ・洗濯水の温度は40℃以下、乾燥温度は80℃以下としてください。
- ・塩素系漂白剤は使用しないでください。
- ・アイロンは低い温度(80~120℃)で掛ける。またアイロンは掛け時にあて布を使用してください。

■クッション(詰物)

- ・洗淨する場合は、インナーカバーを取り外さないでください。
- ・中性洗剤を使用し、手で押し洗いをしてください。
(中性洗剤以外の洗剤を使用すると、変質・変色・傷み・割れの原因となります。)
- ・たわし、みがき粉およびブラシは使用しないでください。(傷みの原因となります。)
- ・シンナーやベンジン、アルコールなど揮発性のものは使用しないでください。(変質・変色・傷みの原因となります。)
- ・機械洗いをする場合は、ポリッシャーなどの使用は避けてください。
- ・オゾン消毒は行わないでください。
- ・乾燥はタンブルドライ機は避け、静止乾燥(日陰干し)をしてください。

■推奨消毒方法(カバー)

※拭き取りは可能であるが、浸け置きは不可。

- ・消毒用エタノール
- ・塩化ベンザトニウム 0.5%以下
- ・塩化ベンザルコニウム 0.5%以下
- ・グルコン酸クロルヘキシジン 5%以下

＜ 拭き取りを含めて使用不可のもの ＞



- ・クロロホルム
- ・トルエン
- ・MRガス
- ・クレゾール
- ・メチルエーテル
- ・オゾンガス
- ・シンナー
- ・次亜塩素酸ナトリウム
- ・ホルムアルデヒドガス
- ・ベンジン
- ・IGB液
- ・過酸化水素水

⚠ 注意

	<p>■ストーブなどの火気類に製品を近づけない。 (火災や変色・変形の原因となります。)</p>		<p>■マットレスを移動させるときは、両手で挟み込むようにして持つ。 (クッションが破損する原因となります。)</p>
--	--	--	---

■マットレスを使用しないときの注意(保管上の注意)

- ・積重ねた状態や、重いものが上に置かれている状態、また曲がっている状態で保管しないでください。
- ・高温、多湿、ほこりの多い場所、自動車の排気ガスが入り込む場所、火気のある場所、日のあたる場所での保管は避けてください。

⚠ 注意

	<p>■無理な折り曲げや、曲げた状態で保管しない。 (破損・変形の原因となります。)</p>		<p>■日のあたる場所や砂・ほこりの多い場所に放置したり、使用しない。 (破損・変形・変質・変色の原因となります。)</p>
--	--	--	--

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■ **まず、お買い求め先へご相談ください。**

▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 () —

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

お買い上げ日と

右の内容をご連絡ください。

- 製品名：ルミナフィット
- 品番：レギュラーサイズ PN-S120011
ショートサイズ PN-S120012
ナローサイズ PN-S120013
ナローショートサイズ PN-S120014
- 故障の状況：できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品及び補助材料代
診断料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このマットレスの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

フリーダイヤル



0120-365887

●受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日休み)

<http://panasonic.co.jp/es/pesalt/>

【ご相談窓口における個人情報の取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供しません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 代表 TEL06(6908)8122

©Panasonic AGE-FREE Life Tech Co.,Ltd.2012