


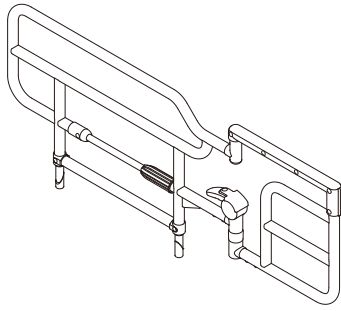

Panasonic®

取扱説明書

電動介護用ベッド **ベッド用グリップ** 品番 PN-S105035

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に下記の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った施工をした時に生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。

警告

- 専用のサイドレール S(PN-S105032)以外と組み合わせ使用しない
安全なすき間が確保できず、事故・けがの原因となります。
- すき間に頭、首をはさまない
はさまれて、事故・けがの原因となります。
- 電動介護用ベッドコンフォース以外に使用しない
安全なすき間が確保できず、事故・けがの原因となります。
- レール(柵)やグリップに腰を掛けたり、もたれたり、ぶら下がったりしない
バランスを崩して転倒し、事故・けがの原因となります。
- 頭、腕および足をレール(柵)やグリップのすき間から出したまま背上げ、ひざ上げをしない
はさまれて、事故・けがの原因となります。
- 12歳以下のお子さまや自分で適切に操作できない方には操作をさせない
操作ミスにより、事故・けがの原因となります。
- ベッド用グリップをベッド内側に向けて使用しない
はさまれてけがをしたり、ベッド用グリップやベッドが破損・変形する原因となります。
- ロック解除の状態で、勢いよくグリップを回転させない
グリップの破損や、はさまれて、事故・けがの原因となります。
- お客様による修理・分解・改造はしない
思わぬ事故・けがの原因となります。
- ストーブなどの火気類に製品を近づけない
火災や変色・変形の原因となります。



禁止

警告

- グリップは必ずロックして使用する
バランスを崩して転倒し、事故・けがの原因となります。
- 本体固定用グリップはしっかり締める
バランスを崩して転倒し、事故・けがの原因となります。
- 専用のサイドレール S(PN-S105032)は正しい向きで使用する
安全なすき間が確保できず、事故・けがの原因となります。
- ベッドから移動するときは、衣類の引っ掛かりに注意し、ゆっくり行動する
衣類が引っ掛かり、事故・けがの原因となります。
- 固定ピンは必ず外して、オプション受け上部に収納する
ベッドが破損して、事故・けがの原因となります。



必ず守る

保証書付き

⚠ 注意



禁止

- 座位が保てない方には使用しない
倒れ込みにより、事故・けがの原因となります。


- レール（柵）やグリップを持ってベッドを移動しない
負荷が掛かり、事故・けがの原因となります。



必ず守る

- グリップや操作レバーを操作するときに手指がはさまれないようにする
はさまれて、事故・けがをする原因となります。
- グリップを使用しないときは、必ずグリップ角度を水平（0度）の位置にもどす
グリップに当たって転倒し、事故・けがの原因となります。
- ベッド用グリップを持ち運ぶ際は、固定軸を床などにぶつけないようにする
固定軸が変形したり、床などが傷つく原因となります。


- マットレス上面からレール（柵）上端までの距離が22cm以上となるマットレスを使用する
レール（柵）やグリップを乗り越えてベッドから、転倒する原因となります。

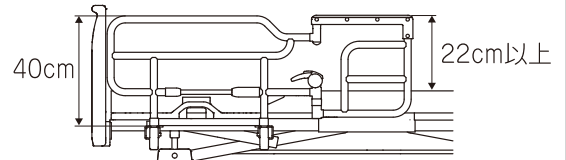

各部のなまえ

安全レバー

操作レバー

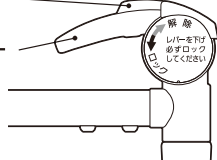


本体固定用
グリップ

固定軸



レール（柵）

グリップ

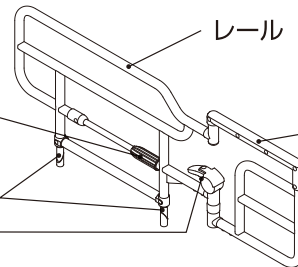

取り付けかた

- 1 本体固定用グリップを「ゆるむ」方向に回す。

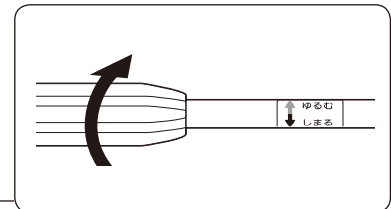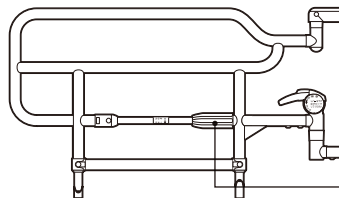



- 2 ヘッドボード側のオプション受けをひらき、固定ピンを外して、ベッド用グリップを差し込む。
・外した固定ピンは、紛失しないようにオプション受けの上部に差し込んで保管してください。

⚠ 注意





必ず守る

- 取り付け穴にきちんと挿入すること（2か所）
誤って落としたとき、けがの原因となります。

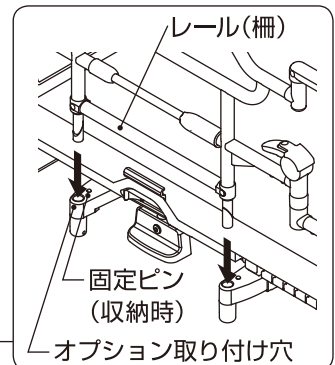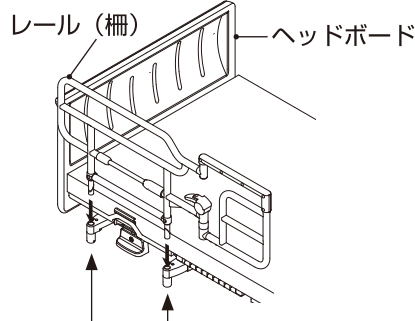

- 3 本体固定用グリップを「しめる」方向に固くなるまで回してベッド用グリップを固定する。
・レール（柵）を上引っ張っても、抜けないことを確認してください。

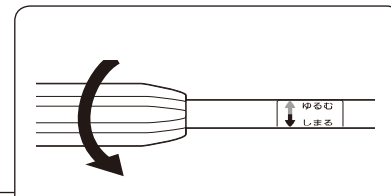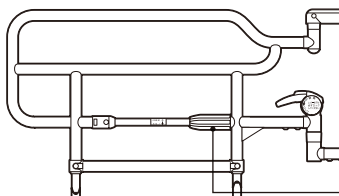




使いかた


● グリップを回転させる

・用途により、0度、30度、60度、90度、120度、150度での固定が可能です。


- 1 安全レバーを押しながら、操作レバーを「解除」方向に回す。

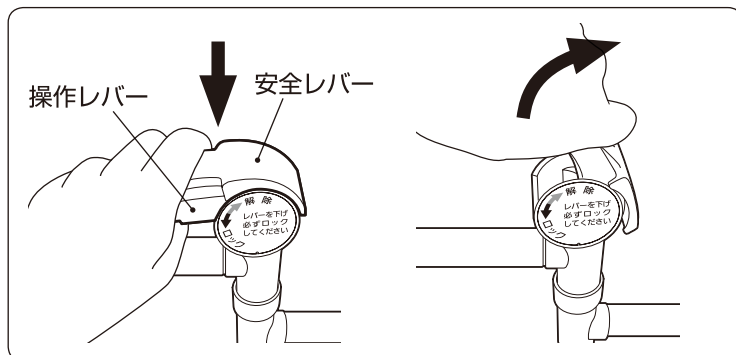

- 2 グリップを固定したい角度まで回転させる。

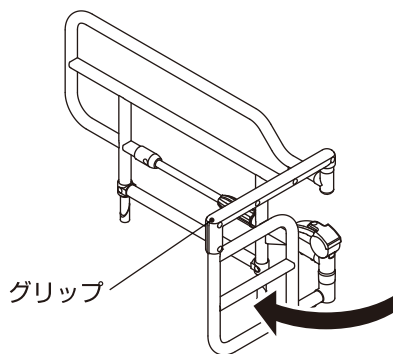

- 3 操作レバーを「ロック」方向に回してロックする。
・ロックするときは、安全レバーを押さなくても回すことができます。

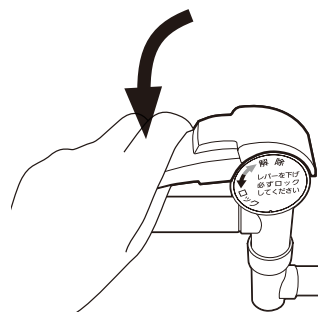


- 4 操作レバーが上がらないことと、グリップが確実に固定されていることを確認する。

● ベッドから降りる

- 1 ベッドの床高を立ち上がりやすい高さに調節する。


- 2 ベッドの背ボトムを座りやすいように調節する。

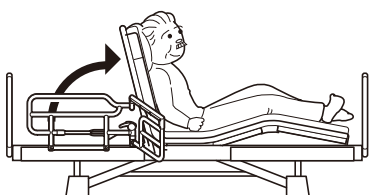

- 3 ベッド用グリップのレール（柵）またはグリップをしっかり握り、体の向きを変える。



- 4 グリップをしっかり握り、体を支えながら立ち上がる。

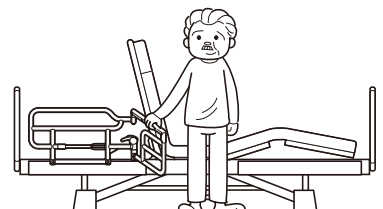

⚠ 警告



必ず守る

● ベッドから移動するときは、衣類の引っかかりに注意し、ゆっくり行動する
衣類が引っ掛かり、転倒・事故の原因となります。




サイドレール S との組み合わせ

警告



必ず守る

- 専用のサイドレール S (PN-S105032) は、正しい向きで使用する
安全なすき間が確保できず、事故・けがの原因となります。

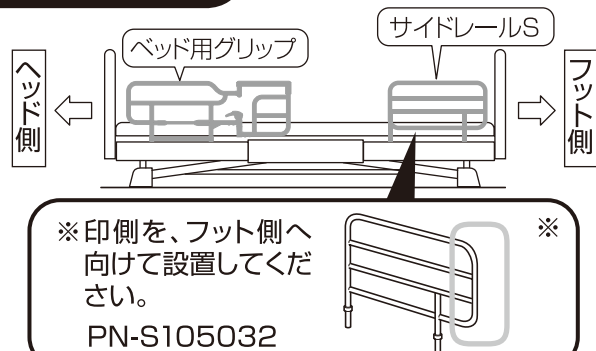

お手入れのしかた

※つねに清潔に保つように
清掃してください。

- 1 中性洗剤を適度にうすめスポンジか柔らかい
布に含ませ、汚れをきれいにふき取る。
- 2 乾いた布でからぶきする。

注意



必ず守る

- 必ず中性洗剤を使用する
- オゾン消毒はしない
- 水洗いはしない
守らないと、製品を傷める原因となります。



故障かな？と思ったとき

・修理を依頼される前に、下記の項目をチェックしてください。


症 状	チェック内容	処 理
ベッド用グリップ全体 がぐらつく	本体固定用グリップ が緩んでいないか	本体固定用グリップが緩んでいる場合は、しっかり締める。 それでもぐらつく場合は、使用を中止し、販売店にご相談ください。
グリップが変形した	_____	使用を中止し、販売店へご相談ください。
グリップのぐらつきが 大きくなった	_____	

※お買い求めの販売店へお申し付けください。



仕 様

品 名	ベッド用グリップ
品 番	PN-S105035
質 量	6.5kg

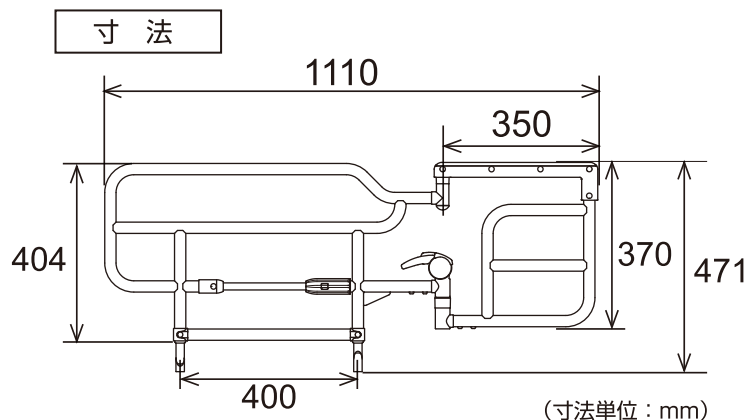

ベッド用グリップ保証書

※ お 客 様	お名前	様	※ お引渡し日	年	月	日
	ご住所		シリーズ・品番	PN-S105035		
	電話番号 () -		保証期間	(お引渡し日から)	1年間	
※ 販 売 店	取扱販売店名・住所・電話番号					

無料修理規定

ご販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

本書はお引渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 〔イ〕 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
 - 〔ロ〕 お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
 - 〔ハ〕 この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 〔イ〕 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
 - 〔ロ〕 消耗部品の取替や修理
 - 〔ハ〕 お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 〔ニ〕 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）による故障および損傷
 - 〔ホ〕 異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）、燃料などによる故障および損傷
 - 〔ヘ〕 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - 〔ト〕 仕上げのキズなどで、引渡し時に申し出がなかったもの
 - 〔チ〕 瑕疵によらない自然の摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
 - 〔リ〕 維持管理の不備による汚れ、さびなどの不具合
 - 〔ヌ〕 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
 - 〔ル〕 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、または、これが原因で生じた事故による場合
 - 〔ヲ〕 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
 - 〔ワ〕 本書のご提示がない場合
 - 〔カ〕 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 〔コ〕 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - 〔ク〕 用途外に使用された場合の故障および損傷
 - 〔ケ〕 納入後、1年以上経過した場合の虫害
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は右ページをご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL(06)6908-8122

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販 売 店 名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の 4 ページにしたがってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、お買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は

お買い上げの販売店まで、製品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証書

この製品には保証書を添付しております。
所定の事項の記入および記載内容をご確認のいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このベッド用グリップの補修用性能部品を製造打ち切り後 5 年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お手入れ・お取扱いなどのご相談は、
まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

フリーダイヤル



0120-365887

●受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日休み)

<http://panasonic.co.jp/es/pesalt/>

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic AGE-FREE Life Tech Co.,Ltd.2012

PN-S105035T
O1114-0