

取扱説明書


保管用

よくお読みください

電動ケアベッド用 キャスター

■ 清掃など、ベッドを動かすことが多い場合に使用します

品番 PN-S105036

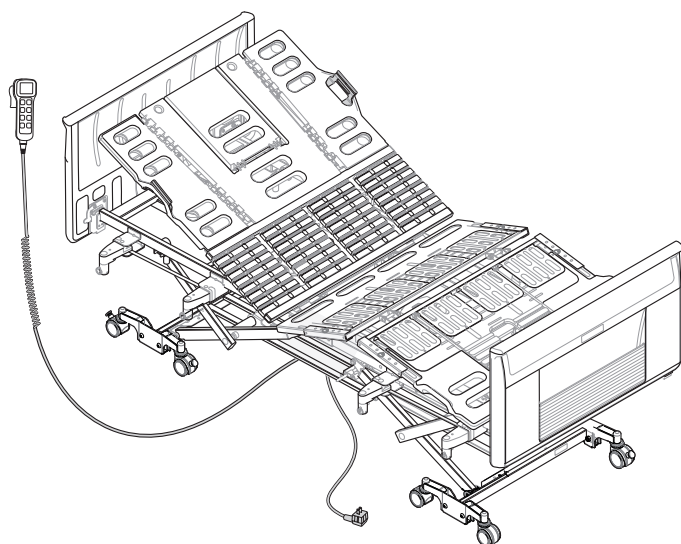

もくじ

●安全上のご注意		2
●各部の名称		3
●部材・付属品一覧		3
●取り付けかた		4
●お手入れ方法		5
●愛情点検表		5
●お客様ご相談窓口のご案内		5
●仕様		6
●保障とアフターサービス		6
●保証書		裏表紙

ご使用になる前に必ずお読みください。

このたびは、電動ケアベッド用キャスターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重症などを負うおそれがある内容」です。



注意

「軽症を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



禁止

■火気に近づけない。

変形・変質・発火するおそれがあります。



禁止

■ベッドを移動させるときは、利用者やおもいものを乗せない。

キャスターの脱輪などによりベッドがバランスを崩し、おもわぬ事故やけがをしたり、床などを傷つけるおそれがあります。



禁止

■弊社指定の適合品以外で使用しない。

おもわぬ事故やけがの原因となります。



禁止

■お客様による修理・分解・改造はしない。

おもわぬ事故やけがの原因となります。



禁止

■長い距離や段差・傾斜のある場所での移動をしない。

キャスターの脱輪などによりベッドがバランスを崩し、おもわぬ事故やけがをしたり、床などを傷つけるおそれがあります。



必ず守る

■キャスターが正しく取り付けられていることを確認する。

正しく設置できていないと不安定な状態となり、おもわぬ事故やけがの原因となります。



必ず守る

■キャスターとキャスター取付金具のすき間に足先や手指をはさまないように注意する。

キャスターが旋回したときやベッドを移動させるときに、すき間に足先や手指がはさまれて、けがをする原因となります。



必ず守る

■ベッドを移動させるときは、足元に注意する。

ベッドに足をぶつけたり、キャスターなどに足がはさまれたり、けがをする原因となります。



必ず守る

■ベッドを移動させるとき以外は、ロック付きキャスター 4 輪を全てロックする。

ベッドに乗り降りするときに、ベッドが動いておもわぬ事故やけがの原因となります。




必ず守る

■脚座と床の間に、指をはさまないように注意する。

守らないと、けがの原因となります。


キャスター取り付け金具

キャスター

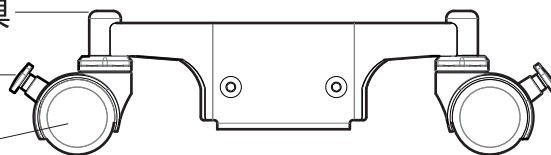


■ 部材・付属品一覧 ■


必ず同梱されている部材・付属品をご確認下さい。

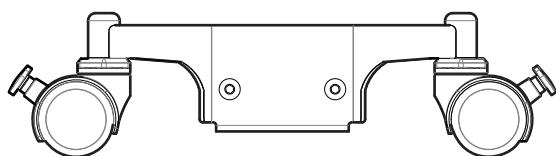


● ロック付キャスター
(ボルト 2 本付き)
2 セット

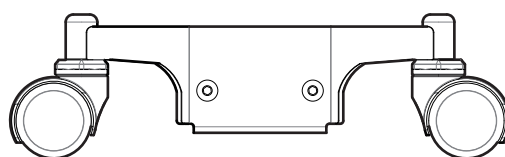


● ロックなしキャスター
(ボルト 2 本付き)
2 セット

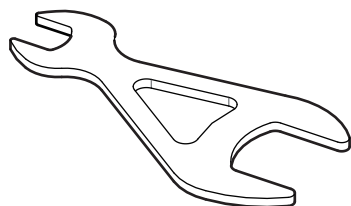

● 両口スパナ
(17mm / 36 mm)

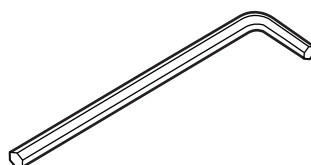

● 六角レンチ
(対角 5mm)

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

● 取扱説明書
1 部

■ 取り付けかた ■


■ このキャスターは、ベッドに取り付けることにより、部屋の中での配置換えや掃除などを
するときに、ベッドの移動を補助することを目的につくられています。

長い距離や段差・傾斜のある場所での移動には適していません。

■ ベッドを分解した状態で作業を行ってください。分解方法はベッド本体の取扱説明書を
参照してください。

● 脚座を取り外す

- ① リベットの中央を押し込む。
- ② 脚座を取り外す。



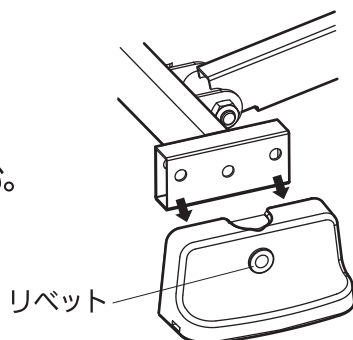


■ 取り付けかた ■

● キャスターを取り付ける


※ ロック付キャスターは、ベッドの対角の位置に取り付ける仕様になっています。

- ① 付属の六角レンチで、キャスターからボルトを外す。
- ② キャスターをベースユニットに差し込む。(4箇所)
- ③ 付属の六角レンチでボルトを締める
締め付けトルクの目安：12 N/m)

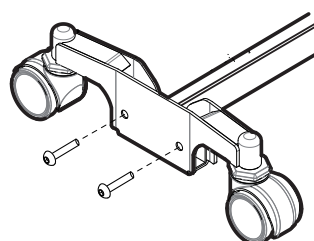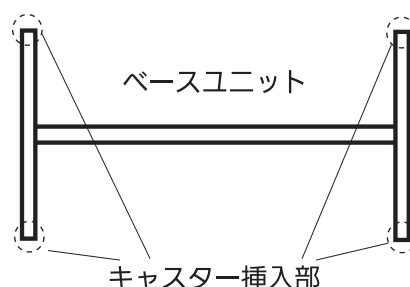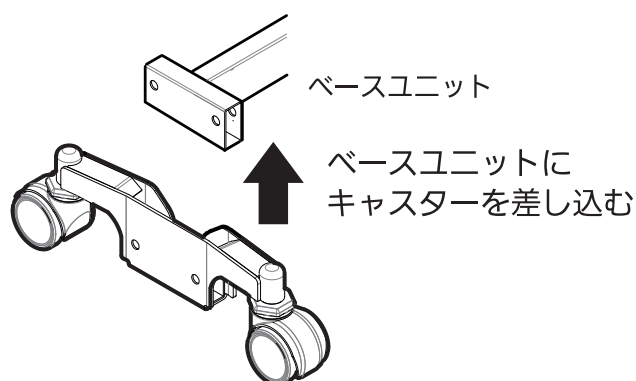

- ④ ベッドの設置位置が決まったら、ロックボタンを押してロックする。

※ ロックボタンを押し込んでいる状態がロック解除状態で、
ロックボタンが押し込まれていない状態がロック状態です。

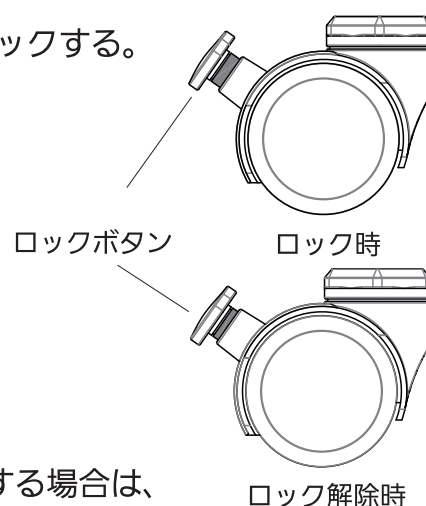

● キャスターの位置を変更する

※ 設置位置などの関係で、ロック付キャスターの位置を変更する場合は、
以下の方法でキャスターを付け換えてください。

- ① 付属の六角レンチでボルトを外す。
- ② キャスターをベースユニットより取り外す。
- ③ キャスターを付け換え、①と逆の手順で取り付ける。



■ キャスターは確実に取り付け。

守らないと、事故やけがの原因となります。

■ ご注意

- ・ ベッドを移動するとき以外は、必ずキャスターをロックしてください。
- ・ 畳や毛足の長い絨毯の上では使用しないでください。
スムーズな移動ができないだけでなく、畳や絨毯の表面を傷付けることがあります。

■ お手入れ方法 ■

- 中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後、洗剤が残らないよう水洗いし、乾いた布で水分をふきとってください。



■タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。
プラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。



■ 愛情点検表 ■

キャスター安全チェックシート		※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。				
安全点検項目		点検結果（該当には○）				
		日付				処理手順
愛情点検	キャスターが割れている					○印があるときは、危険な状態になっていますので、使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。
	キャスターが破損、変形している					
	キャスター取り付け金具が破損、変形している					
	変色がある					
	購入後5年以上経過している					
	すべてのキャスターをロックしてもベッドが動く					
	ロックボタンを押してもキャスターをロックできない					

キャスターは消耗部品のため、長期間ご使用いただいた場合は、磨耗・破損などにより、機能が低下するおそれがあります。

1、想定安全使用期間とは

一般家庭にて使用いただく電動ケアベッド用キャスターにおいて、標準的な条件のもとで、適正な取扱いで使用し、適正な管理維持が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。

※一般家庭以外（病院、施設など、不特定多数の方が使用される場所）に設置された場合は使用条件により、想定安全機関よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

2、経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】 5年（一般家庭にて使用いただく場合）想定安全使用を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化によるケガなどの事故に至るおそれがあります。

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

仕様

製品名			キャスター
製品品番			PN-S105036
製品質量			キャスター：約 150g / キャスター取り付け金具：約 650g
サイズ	キャスター		キャスター径：φ5.0 cm / キャスター幅：5.5 cm
	キャスター取付金具		長さ：26× 幅：4 × 高さ：8 cm
材質	キャスター	車輪	ポリウレタン
		ロックボタン	ポリカーボネート
		軸	ステンレス
	キャスター取付金具		スチール
	ボルト		スチール

保障とアフターサービス

●保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

●補修用性能部品の保有期間

当社は電動ケアベッド用キャスターの補修用性能部品の製造打切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中は

ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。

保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 代表 TEL06(6908)8122

©Panasonic AGE-FREE Life Tech Co.,Ltd.2012

PN-S105036
A0115-1

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、
まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

フリーダイヤル



0120-365887

●受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日休み)

<http://panasonic.biz/healthcare/aflt/>

＜キリトリ線＞

＜ 無料修理規定 ＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期限内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

＜キリトリ線＞

＜キリトリ線＞

＜キリトリ線＞

Panasonic

持込修理

電動ケアベッド用キャスター

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	PN-S105036
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () —
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () —

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真 1048 TEL06(6908)8122

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

＜キリトリ線＞

＜キリトリ線＞