

Panasonic®

取扱説明書

電動介護用ベッド

サイドレール L 品番：PN-S105031 **サイドレール LH** 品番：PN-S105033
サイドレール S 品番：PN-S105032 **サイドレール SH** 品番：PN-S105034

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に下記の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った施工をした時に生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

- 電動介護用ベッドコンフォース以外に使用しない
- 専用のサイドレール以外と組み合わせて使用しない
安全なすき間が確保できず、事故・けがの原因となります。
- 首などを柵のすき間にはさみ込まない
- すき間に入った状態でベッドを操作しない
- ボードとのすき間に頭などを入れない
はさまれて、事故・けがの原因となります。
- サイドレールに腰を掛けたり、もたれたり、ぶら下がったりしない
- サイドレールを持って、移動などしない
バランスを崩して転倒し、事故・けがの原因となります。
- オーバーテーブルを使用するときは、サイドレール端部(R部)の上に置かない
脱落したり、物がこぼれたりする原因となります。
- 12歳以下のお子さまや自分で適切に操作できない方には操作をさせない
思わぬ事故・けがの原因となります。
- お客様による修理・分解・改造はしない
思わぬ事故・けがの原因となります。
- ストーブなどの火気類に製品を近づけない
火災や変色・変形の原因となります。



禁止



警告

- サイドレールは取り付け穴にきちんと挿入して使用する
バランスを崩して転倒し、事故・けがの原因となります。
- サイドレールは正しい向きで使用する
安全なすき間が確保できず、事故・けがの原因となります。
- ベッドから移動するときは、衣類の引っ掛かりに注意し、ゆっくりと行動する
衣類が引っ掛かり、事故・けがの原因となります。



必ず守る



注意


- 座位が保てない方には使用しない
倒れ込みにより、事故・けがの原因となります。
- サイドレールを持ってベッドを移動しない
負荷が掛かり、事故・けがの原因となります。
- マットレス上面からサイドレール上端までの距離が22cm以上となるマットレスを使用する
サイドレールを乗り越えてベッドから転落する原因となります。



禁止



必ず守る

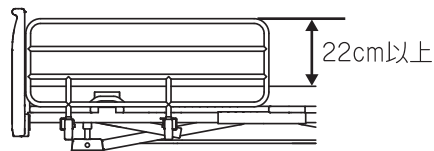

保証書付き

仕様

品名	サイドレール L	サイドレール S	サイドレール LH	サイドレール SH
品番	PN-S105031	PN-S105032	PN-S105033	PN-S105034
取付ピッチ	400mm			
長さ	971mm	580mm	971mm	580mm
高さ	475mm		525mm	
重量	2.4kg	2.2kg	2.5kg	2.3kg

取り付け方向と組み合わせ


- サイドレールは正しい向きで取り付けてください。
- 下記の組み合わせで使用してください。

警告



禁止

- 専用のサイドレール以外と組み合わせて使用しない
安全なすき間が確保できず、事故・けがの原因となります。

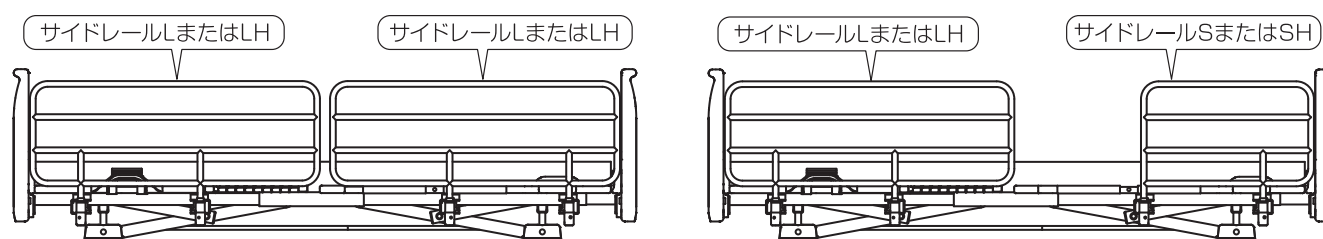


取り付けかた

1. オプション受けをひらく。
2. キャップの向きと固定ピンの位置を確認して根元までしっかりと差し込みます。

※キャップと固定ピンの向きを誤ると根元まで差すことができません。

- 取り付けないときは、必ずオプション受けを内側に収納して下さい。
- 固定ピンは必ず差し込んだ状態で使用して下さい。

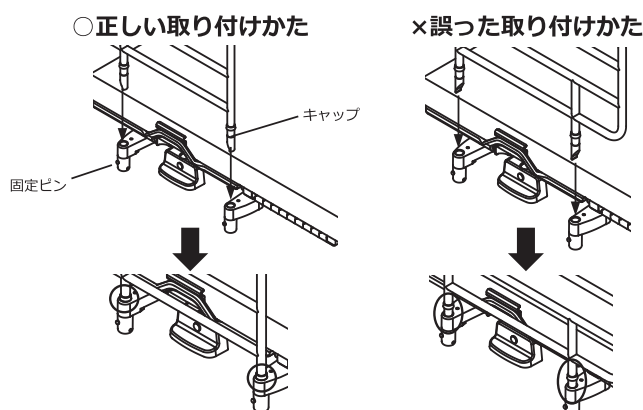

お手入れのしかた

※つねに清潔に保つように清掃してください。

- 1 中性洗剤を適度にうすめスポンジか柔らかい布に含ませ、汚れをきれいにふき取る。
- 2 乾いた布でからぶきする。

注意



必ず守る

- 必ず中性洗剤を使用する
- オゾン消毒はしない
- 水洗いはしない
守らないと、製品を傷める原因となります。

故障かな？と思ったとき

- 修理を依頼される前に、下記の項目をチェックしてください。

症状	チェック内容	処 理
サイドレールが差し込みにくい	オプション取り付け穴にゴミが混入していないか	ゴミなどが混入している場合は、取り除く。それでも差し込みにくい場合は、使用を中止し、販売店にご相談ください。
サイドレールが変形した	—————	使用を中止し、販売店にご相談ください。

サイドレール保証書

※ お 客 様	お名前	様	※ お引渡し日	年	月	日
	ご住所		シリーズ・品番	PN-S105031	PN-S105032	
	電話番号 () -			PN-S105033	PN-S105034	
※ 販 売 店	取扱販売店名・住所・電話番号		保証期間	(お引渡し日から) 1年間		

無料修理規定

ご販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

本書はお引渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

〔イ〕 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。

〔ロ〕 お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。

〔ハ〕 この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

〔イ〕 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷

〔ロ〕 消耗部品の取替や修理

〔ハ〕 お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

〔ニ〕 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）による故障および損傷

〔ホ〕 異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）、燃料などによる故障および損傷

〔ヘ〕 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷

〔ト〕 仕上げのキズなどで、引渡し時に申し出がなかったもの

〔チ〕 瑕疵によらない自然の摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合

〔リ〕 維持管理の不備による汚れ、さびなどの不具合

〔ヌ〕 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障

〔ル〕 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、または、これが原因で生じた事故による場合

〔フ〕 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの

〔ワ〕 本書のご提示がない場合

〔カ〕 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合

〔ヨ〕 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

〔タ〕 用途外に使用された場合の故障および損傷

〔レ〕 納入後、1年以上経過した場合の虫害

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

6. お客様ご相談窓口は右ページをご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販 売 店 名

電 話 () -

お 買 い 上 げ 日 年 月 日

修理を依頼されるときは

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の2ページにしたがってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、お買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は
お買い上げの販売店まで、製品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証書

この製品には保証書を添付しております。
所定の事項の記入および記載内容をご確認のいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このサイドレールの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お手入れ・お取扱いなどのご相談は、
まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

フリーダイヤル



0120-365887

●受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日休み)

<http://panasonic.co.jp/es/pesalt/>

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地

©Panasonic AGE-FREE Life Tech Co.,Ltd.2012

PN-S105031T
O1114-0