


電動介護ベッドの事故を防ぐために

電動介護ベッドには、ベッドの高さを調整する昇降機能が備わっています。

使用方法を誤ると、ベッドの下や周囲の人が身体を挟まれ

重大な事故につながるおそれがあります。


安全にご使用いただくために、以下の内容を必ずご確認ください。

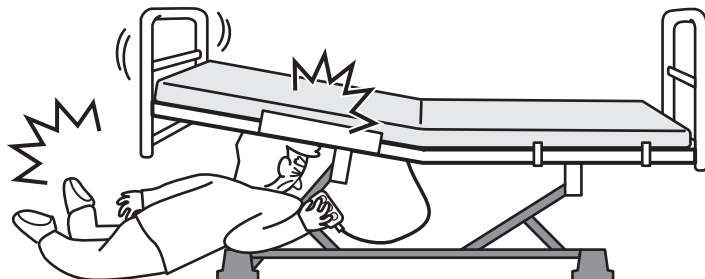

操作前に必ず周囲の確認！

ベッドを上げ下げする前に…

- ベッドの下に人がいませんか？
- ベッドの周囲で遊んだり、物を置いたりしていませんか？

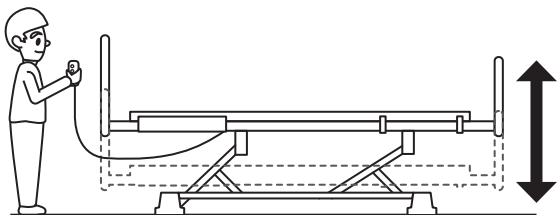

誤操作を防止する！

次のような方が使用する場合は、誤操作防止のため配慮が必要です。


- 操作方法の理解が難しい方
- 認知機能の低下がみられる方
- 自ら危険を認識・回避することが難しい方
- お子様

必要に応じて、手が届かない位置に手元スイッチを置いたり、電源プラグを抜いたりしてください。

警告



- ベッドの下にもぐらない
(身体が挟まれて、事故やけがの原因)

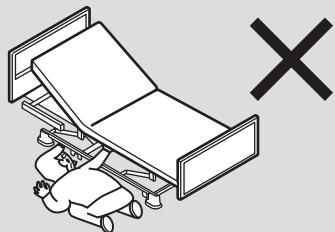


- 操作するときは、動作範囲に人や動物、物がないことを確認する
(周囲の物を破損させたり、事故の原因)


警告



- 12才以下のお子様や、認知症の方など自分で適切に操作できない方には、操作させない
(事故やけがの原因)

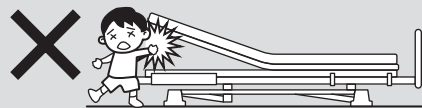

- 手元スイッチは、サイドレール外側などに引っ掛ける
(手元スイッチに無意識に触れ、誤動作による事故の原因)

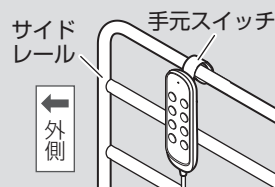

- 掃除などお手入でベッド下に入る場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(意図せずにベッドが動き、けがや事故の原因)



安全のため、必ず取扱説明書をお読みください