

項 目	仕 様
型 番	EJ-KP01NP-W
寸 法	長さ262 mm 幅30 mm 高さ195 mm
質 量	約740 g (文字板1枚含む、乾電池含まず)
入力端子	
入力スイッチ	2系統 モノラルミニジャック
DC入力	DCジャック (DC 5 V)
出力端子	
スピーカー端子	モノラルミニジャック (0.5 W/8 Ω)
イヤホン端子	モノラルミニジャック (40 mW/16 Ω)
外部プザー端子	モノラルミニジャック
外部出力端子	2系統 モノラルミニジャック
赤外線信号端子	モノラルミニジャック
プリンター用USB端子	Aコネクター
LCD表示	表示可能文字：12文字/行×3行

本体希望小売価格 **168,000円**（非課税、対応品別）

【本体同梱品】ACアダプター、ACコード、文字板4種類、ショルダーベルト、TVリモコン送信ケーブル、文字板用シールセット、取扱説明書

【購入における給付制度について】
レッツ・チャットを購入いただくにあたり、以下の給付制度を活用できます。 ■補装具給付制度「意思伝達装置」 ■日常生活用具給付事業「携帯用会話補助装置」 それぞれの制度の運用内容については、購入される地域の行政窓口へお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店にご相談の上、正しくご使用ください。

ご購入の前に ●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 ●このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

お取り扱い店

レッツ・チャットの背面
設定手順と設定項目が印刷されています。
説明書を見なくても設定変更ができます。



●対応するテレビメーカー（1990年以降の機種）

対応メーカー	
パナソニック	
三洋	
シャープ	
ソニー	
東芝	
パイオニア	
日立	
ビクター	
三菱	
BLUEDOT	

※ビデオやDVD付きテレビなどの複合機は本機では操作できない場合があります。

※ケーブルテレビチューナーのチャンネル変更はできません。


Panasonic

2017/04

意思伝達装置

レッツ・チャット®

**スイッチひとつの
コミュニケーション**

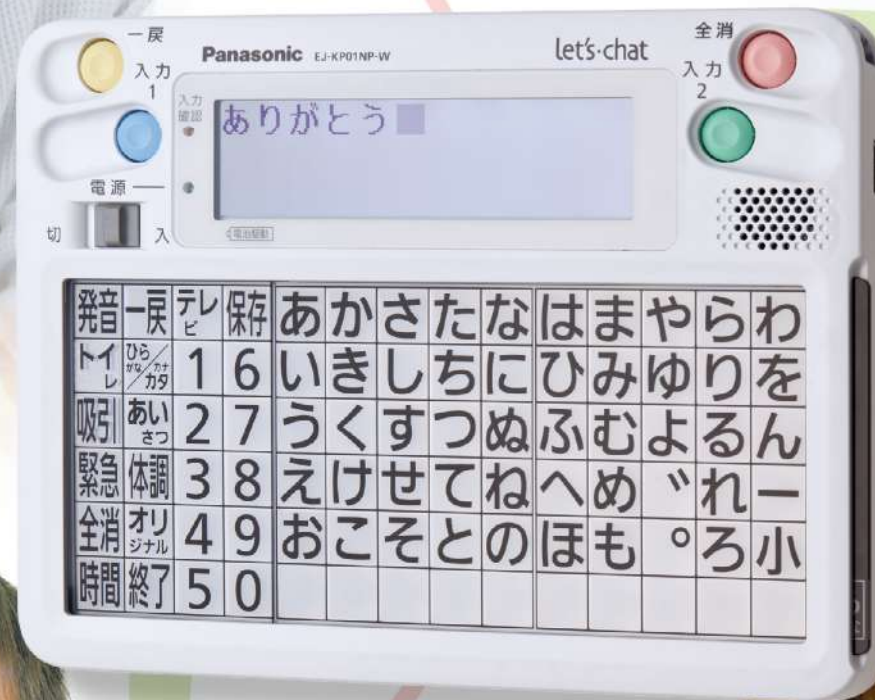

このカタログの記載内容は
2017年4月現在のものです。
本書からの無断複製は固くお断りします。

レッツ・チャットなら、スイッチひとつで コミュニケーション

お母さんと はじめて おしゃべりできた日

声を出すことができない。
身体もほとんど動かせず、手話も筆談もできない。
難病などの障がいのために、
コミュニケーション手段を奪われてしまった人がいます。
世話をしてくれる家族にさえ、自分の思いを伝えることができない。
そのもどかしさを救い、少しでもコミュニケーションを楽しんでほしい。
そんな思いで開発したのが「レッツ・チャット」という装置です。
頬でも唇でも眉でも、その人がわずかに動かせる部位で操作できる
入力スイッチを使い、順々に光る文字板から、
必要な文字を選んでいくだけのシンプル操作。
世界最速とか世界最小よりも、めざしたのは何よりも、使いやすさ。
スイッチひとつで、自分の思いが、自分の言葉で伝えられる。
ある少年が「レッツ・チャット」によって初めて話した言葉、
それは「おかあさんありがとう」でした。



「ありがとう」の一言を伝えたい…
その想いをかなえるために、すでに様々な障がいを持った方に愛用されています！

奈良県 池原久豊様
脳性まひ




【入力方法】スベックスイッチ(バシフィックサプライ(株)製) を左手に
固定し、テーブルの上に置いた台に押しつけて操作
【固定方法】支持アームを車椅子のテーブルに取り付けて固定

兵庫県 岡本興一様
筋萎縮性側索硬化症 (ALS)



【入力方法】PPSスイッチ(バシフィックサプライ製)のピエゾセンサー
を額に貼付け、額の筋肉のわずかな動きで操作
【固定方法】特製のスタンドにテレビ、パソコンのディスプレイを設置、
その横にレッツ・チャットを固定

北海道 杉原颯香様
脊髄性筋萎縮症 (SMA) I 型

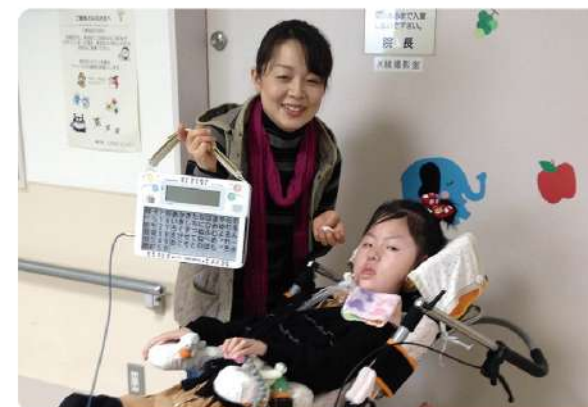

【入力方法】手作りの入力スイッチを使い、わずかに動く左右の親指で
操作
【固定方法】手作りのパイプをベッドサイドや車椅子に取り付けてレッツ・チャ
ットを吊して固定

石川県 宮田俊也様
脳幹出血



【入力方法】手作りの入力スイッチを手袋に取付け、手袋をはめることで
手に固定し、手を握り込むことで操作
【固定方法】スタンドアームで顔の前に固定

いつでもどこでも簡単に会話が楽しめます

デザインと使いやすさを両立。どなたでも安心してお使いいただけます。

●電源


家電感覚で「入/切」が可能です。
「入」の時に入力スイッチを押せば
すぐに文章を作成できます。

●外部ブザー端子

対応品のワイヤレスコールを
取り付けます。

●入力スイッチ端子

対応品の入力スイッチを
接続します。

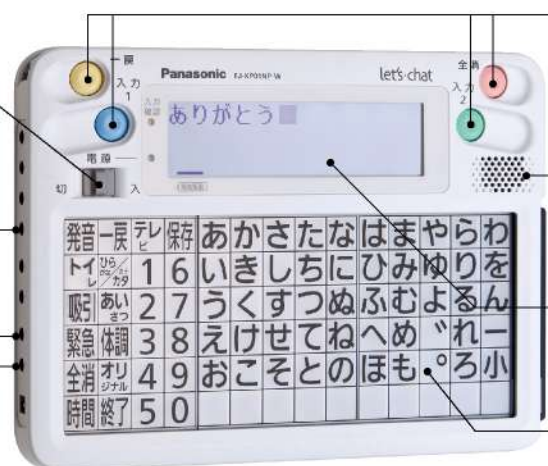

●本体側入力ボタン

利用者に代わって
支援者が操作するボタンです。
●戻りボタン ●全消ボタン
●入力1ボタン ●入力2ボタン

●スピーカー

作成した文章を読み上げる音声や
操作音を出力します。

●液晶画面

選択した文字は液晶画面に順次表示され、
最大360文字（36文字×10画面）まで
入力することができます。

●文字板

選択可能枠が順番に赤く光ります。

あなたに合った入力スイッチをつなぐだけ

レッツ・チャットは入力スイッチを接続するだけですぐ使えます。



接続したスイッチで操作




本体上部のスイッチで操作



文字板を直接押して操作することはできません


すぐ覚えられる簡単操作

入力したい文字が光っているときに、入力スイッチを押すだけで文章を作成できます。
すべての動作に音声ガイドがあるので、視覚障がいのある方でもご利用いただけます。

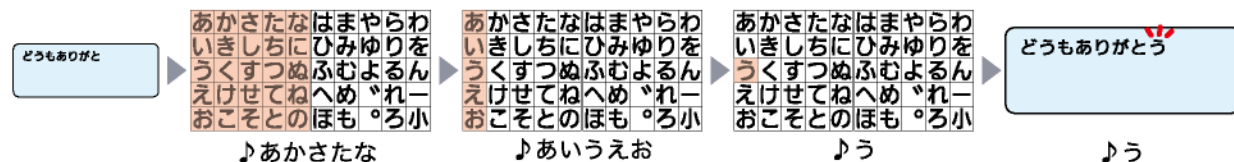

表現豊かな文字板


日常生活で必要と考えられる言葉を集めた文字板を4枚準備。交換するだけで表現豊かな文章が作成できます。

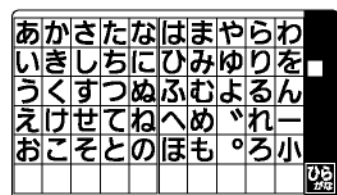


ひらがな



あいさつ

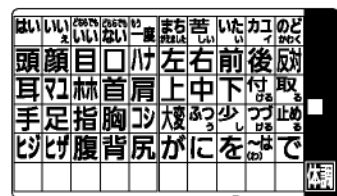

体調

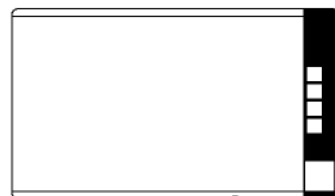

オリジナル（標準は30分割）
※好きな言葉や文章を保存できます。

入力方法を工夫すれば、文字板を交換しなくても別の文字板の文字を選択することができます。

「ひらがな/カタカナ」の枠を選択することでカタカナに切り替えて入力することもできます。

オリジナル文字板は、利用者がよく使う言葉を30個まであらかじめ保存しておくことで、コミュニケーションをよりスムーズに取ることができます。


軽くて設置もカンタン

- ・生活シーンに合わせた設置方法を選べます。
- ・小型軽量なので手軽に持ち運びができます。
- ・AC100Vと単3形乾電池のどちらにも対応しているので、家の中や外出先でも手軽に使えます。



分割数を変更すれば、より多くの方に対応

オリジナル文字板は、分割数を変更できます。少ない選択肢やイラストから選択することで無理なく使い方を習得していただけます。（罫線の描画、分割数の設定やイラストに対応する単語登録が必要です。）

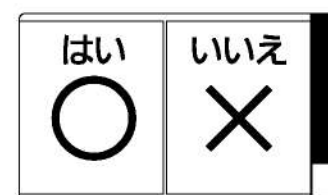

活用事例1

まずは、「はい」「いいえ」の受け答えからはじめるとき
2分割のオリジナル文字板を作成し、油性ペンで
手書きで作成します。
2つの枠が交互に点灯するので、いずれかを選択します。

15分割のオリジナル文字板をセットした例



活用事例2

言語未習得のお子様などが、自分の食べたいものを
自分で選べるようにしたいとき
15分割のオリジナル文字板を作成し、それぞれの枠に食事のメニューを描きます。
（右の写真は、支援者が作成した文字やイラストを、透明シートに印刷して貼り付けた例）



※オリジナル文字板の文字やイラストは、手書きで書くことも、デジカメで撮影した写真を印刷して貼り付けることもできます。
追加のオリジナル文字板もございます。弊社もしくは販売店へお問い合わせください。

生活に便利な機能

- ・360文字まで入力できるので、ちょっとした手紙や日記も書けます。
- ・作成した文章は、文字板の空白の枠に簡単に保存できます。
- ・プリンターを使って、作製した文章を印刷できます。
- ・イヤホンを使えば、読み上げの音声および操作音は本人のみに聞こえるので、周囲に迷惑をかけずに使えます。
- ・カレンダー機能を内蔵しています。現在時刻を音声で読み上げます。
- ・テレビリモコン機能を内蔵しています。
- ・「外部出力」機能を使うことで、本機に接続した入力スイッチ一つで、パソコンやタブレット(注)など、入力スイッチで操作できる機器を最大2台まで接続できます。これにより、安定した動作のレッツ・チャットと、高機能ながらもトラブルのあるパソコン等の機器の「いいとこ取り」をした使い方が可能となります。

（注）別途、1スイッチで操作可能とするためのソフトや追加の機器が必要です。



プリンター印刷機能



テレビリモコン機能

2016年
4月20日（水）
午前10時00分

カレンダー表示機能

呼出ブザーも併用可能

- ・入力スイッチを長押しするだけで、内蔵の呼出ブザーを鳴らすことができます。
- ・お手持ちの1つの入力スイッチで会話と呼出ブザーの2つの機能を使い分けができます。大変便利です。
- ・対応品のワイヤレスコールがあれば、同時に離れた場所のコールを鳴らすことができます。

ワイヤレスコール



レッツ・チャットの基本構成

●小電力型ワイヤレスコール
送信器/受信器（オプション）
レッツ・チャットで離れた場所のコールを
鳴らすことができます。

●プリンタ（オプション）
作成した文章を印刷できます。
©SEIKO EPSON CORPORATION,
EPSON SALES JAPAN CORPORATION
2006, ALL RIGHTS RESERVED.

●入力スイッチ（オプション）
障害に合わせた様々なタイプスイッチが用意
されています。他のメーカーの入力スイッチも
お使い頂けます。

【主な入力スイッチメーカー】
■パシフィックサプライ
■徳器技研工業

●支持具（オプション）
楽な姿勢でお使い頂けるよう、
様々な支持具を揃えています。

レッツ・チャット

入力スイッチの選定には、以下のホームページを参照ください。
■マイスイッチ ホームページ：<http://myswitch.jp/>

レッツ・チャット本体以外は全
てオプションです。
障害の程度や目的に合わせて適切
なものを組み合わせてご利用
下さい。

重度障害者用意思伝達装置 レッツ・チャット®

本体希望小売価格 168,000円（非課税、対応品別）

【本体同梱品】ACアダプター、ACコード、文字板4種類、ショルダーベルト、
TVリモコン送信ケーブル、文字板用シールセット、取扱説明書

※補装具給付制度 重度障害者用意思伝達装置（簡易な環境制御機能が付加されたもの）
が適用可能です。（給付上限：191,000円 プリンタ含む）
制度の運用については、購入される地域の行政窓口へお問い合わせ下さい。



レッツ・チャット® 対応品（別売）リスト

入力スイッチ

手押しスイッチ	●一番シンプルなスイッチです。 押したときにクリック感があるので、操作感覚を肌で 感じることができます。 ●手、指、足など幅広く使えます。 ●スプリングは「弱（白）」と「並（黒）」からお選びください。 希望小売価格：3,000円（税抜） ※補装具給付制度購入品目：接点式入力装置（スイッチ）交換	スプリング並：EJ-KKN008 スプリング弱：EJ-KKN009	
足踏みスイッチ	●一番シンプルなスイッチです。 押したときにクリック感があるので、操作感覚を 足で感じることができます。 ●上面の前側に傾斜があり、足で踏みやすくなっています。 希望小売価格：3,000円（税抜） ※補装具給付制度購入品目：接点式入力装置（スイッチ）交換	EJ-KKN010	
ホッペタッチ	●金属とプラスチックを組み合わせたアームなので、設置しやすくなっています。 ●先端の丸い部分を前後、左右、上のいずれかの方向からでも軽く触れることで スイッチが入ります。 ●ほほ、唇、眉などわずかに動く部位で操作可能です。 ●電源不要で移動時や外出時でも使えます。 ●固定用のクリップが付属されているので、取り付けが簡単です。 希望小売価格：10,000円（税抜） ※補装具給付制度購入品目：接点式入力装置（スイッチ）交換	EJ-KKN011	

ワイヤレスコール

小電力型 ワイヤレスコール 接点入力送信器	●レッツ・チャットの背面のくぼみにセットできます。 ●レッツ・チャットのヨココにコネクターを差し込むだけで 取り付けができます。 ●リチウムイオン電池（CR2×1個、本体に同梱）が必要です。 ※ナースコールではありません。 生命に関わる用途での使用はできません。 希望小売価格：18,000円（税抜） ※補装具給付制度購入品目：呼び鈴分岐装置	EJ-KKN005	
小電力型 ワイヤレスコール 卓上型受信器	●見通しで40 mまで電波が届きます。 ●音と光で呼出しをお知らせします。 暗いところでも、確実に確認することができます。 希望小売価格：19,000円（税抜） ※補装具給付制度購入品目：呼び鈴	EJ-KKN006	
小電力型 ワイヤレスコール 携帯型受信器セット	●見通しで30 mまで電波が届きます。 ●ポケット等に入れて持ち歩くことができます。 ●音と振動の両方で呼出しをお知らせしますので、 確実に確認することができます。 希望小売価格：29,000円（税抜） ※補装具給付制度購入品目：呼び鈴	EJ-KKN007	

支持具

支持アーム	●テーブルやパイプなどに、レッツ・チャットを固定します。 ●レッツ・チャットを自由な角度に調整することができます。 ●厚さ8 cm以下のテーブル、直径2 cm～8 cmのパイプに固定可能です。 希望小売価格：23,000円（税抜） ※補装具給付制度購入品目：固定台（アーム式またはテーブル置き式）	EJ-KKN001	
フレキシブルアーム	●支持アームの先端に取り付け、レッツ・チャットを高い位置に固定できます。 ●延長させた部分（約25 cm）は自由に曲げられるので、レッツ・チャットを 見やすい位置に固定できます。 ●別途、支持アーム（EJ-KKN001）が必要です。 希望小売価格：9,000円（税抜） ※補装具給付制度購入品目：固定台（アーム式またはテーブル置き式）	ボールヘッド EJ-KKN002	
多機能アーム	●車椅子、電動ベッドなどに取り付けることで、レッツ・チャットを 見やすい位置に固定できます。 ●長さや角度を自由に調整できるので、さまざまな用途でお使いいただけます。 ●厚さ1.0 cm～3.2 cmのテーブル、直径1.5 cm～3.2 cmのパイプに固定可能です。 希望小売価格：40,000円（税抜） ※補装具給付制度購入品目：固定台（アーム式またはテーブル置き式）	EJ-KKN003	
スタンドアーム	●ベッドの下にスタンドアームの脚が入るので、寝たままの楽な姿勢で、 レッツ・チャットを操作することができます。 ●キャスター付きなので、移動や調整が簡単に行えます。 ●レッツ・チャットの高さを80 cm～125 cmまで調整できます。 ●レッツ・チャットの向きを自由に変わるので、ベッド上で どの方向を向いても、使うことができます。 ●ALS等の難病をはじめ、ベッド上でレッツ・チャットを使う時間が多い方には 最も適した支持具です。 希望小売価格：45,000円（税抜） ※補装具給付制度購入品目：固定台（自立スタンド式）	EJ-KKN004	

プリンター

セイコーエプソン株式会社のUSB端子を持つ以下のプリンターに対応しています。（2016年4月現在）

■プリンタ設定「1」で印刷可能
EP-977A3 / EP-907F / EP-807A / EP-777A
EP-707A / PX-437A
EP-976A3 / EP-906F / EP-806A / EP-776A
EP-706A / PX-436A / PX-1004
EP-905A / EP-905F / EP-805A / EP-775A
EP-904A / EP-904F / EP-804A / EP-774A
PX-535F / PX-505F / PX-435A / PX-405A
PX-105 / PX-049A

■プリンタ設定「2」で印刷可能
PX-048A / PX-046A / PX-1700F
PX-1600F / PX-1200
PX-404A / PX-434A / PX-205
PX-K100 / PX-045A / PX-675F

ご注意）一部の機種では、用紙の最後まで印刷した後、そのまま印刷を続けると、紙送りは実行されません。
続けて印刷を行うときは、レッツ・チャットから「紙送り」のコマンドを実行してから印刷を行うこと
で対応できます。USBケーブルは別途ご用意願います。

■プリンタ設定「自動」で印刷可能
PX-101 / PX-V630 / PX-201 / PX-203
PX-503A / PX-601F / PX-402A / PX-501A
EP-302 / EP-702A / EP-802A / EP-803A

2017年4月現在のメーカーとしてのお奨めプリンターは「PX-049A」です。