



もくじ

●安全上のご注意	2・3	●スキャン機能の使い方	12
●各部のはたらきと名称	4	●スキャン操作でワイヤレスコントロールを使うには	13
●付属品・電池の入れ方	5	●入力スイッチで直接操作する使い方	14
●赤外線延長ケーブル	5	●対応メーカー	15
●本体の固定方法	6	●お手入れ	15
●はじめに	7	●仕様	15
●メーカー設定方法	7	●対応品の設定方法一覧	16・17
●その他の設定方法	8・9	●故障かな？と思ったら	18・19
●本機の使い方	9	●オンラインマニュアルについて	19
●対応品を追加してできること	10	●対応品	20
●入力スイッチ機能の設定と準備	11	●愛情点検表	21
		●お客様ご相談窓口のご案内	22
		●保証書	裏表紙

ご使用になる前に必ずお読みください。

このたびは、レッツリモコンADをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2・3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告 「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。	 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
---	--

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--

警告

 分解禁止	■分解、改造をしない 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。 ・内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。
 必ず守る	■使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す そのまま機器の中に放置すると、電池の液漏れや、発熱・破裂の原因になります。
 必ず守る	■テレビ以外の機器が誤動作しないことを確認する 本機はテレビ用の信号を発信しますが、海外製の機器等が、本機で誤動作することがあります。
 必ず守る	■定格を超えた外部スイッチ、ブザーを使用しない。 発煙・発火のおそれがあります。
 禁止	■水などの液体をかけたり、ぬらしたりしない 本機の内部に入ると、ショートや発熱の原因になります。
 禁止	■就寝時にストラップを首からかけて使用しない ストラップが絡まり、窒息の原因になります。
 禁止	■ブザー機能をナースコールの代わりに使用しない 緊急時に作動せず、救命できない可能性があります。
 禁止	■電池の液がもれたときは、素手でさわらない ・液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水であらったあと、医師にご相談ください。 ・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。


警告

 禁止	■電池は誤った使い方をしない ・指定以外の電池を使わない ・乾電池は充電しない ・加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない ・⊕と⊖を針金などで接続しない ・金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない ・⊕と⊖を逆に入れない ・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない ・被覆の剥がれた電池は使わない 取り扱いを誤ると、液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。 ・電池には安全のため被覆をかぶせています。 これをはがすとショートによる火災の原因になりますので絶対に はがさないでください。
---	---


注意

 必ず守る	■長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す 液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。
 必ず守る	■病院内や機内で使用するとき、病院や航空会社の指示に従う。 本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。
 禁止	■ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定なところに置かない。 落下すると怪我の原因となります。
 禁止	■固定用ネジを使用している場合、本機上部に強い力を加えない。 固定部が破損して怪我をするおそれがあります。
 禁止	■台所などで高温の蒸気の当たるところに放置しない 高温の蒸気で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。
 禁止	■異常に温度が高くなるところに置かない 温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。 ・直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。 ・特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になります。 絶対に放置しないでください。 ・また外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

■各部のはたらきと名称

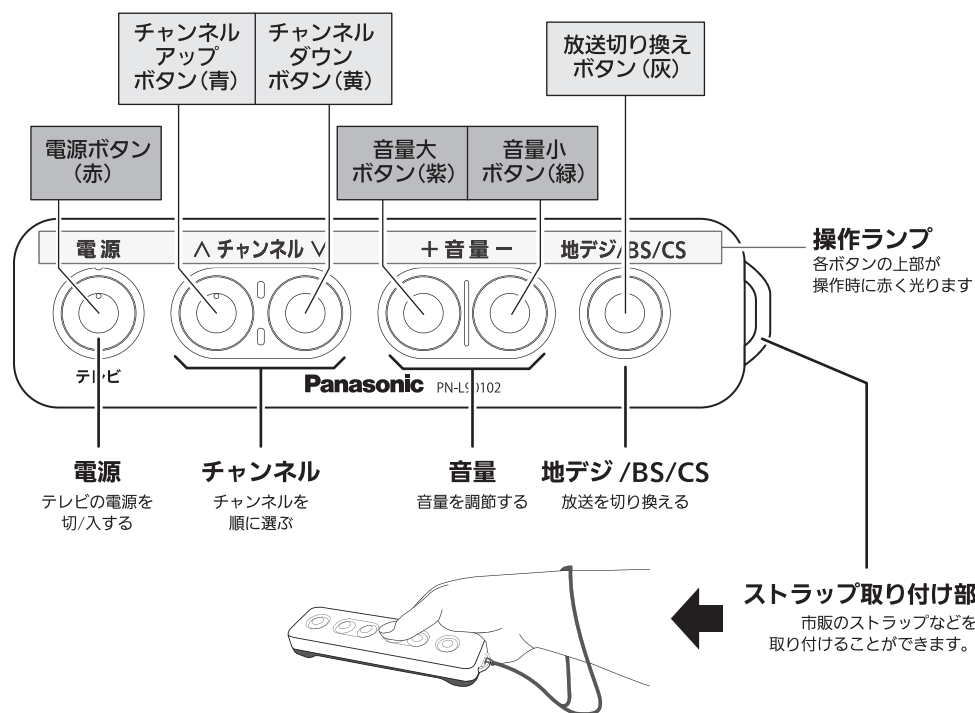


※ボタンを押し続けた時の信号繰り返し時間は P8 の「長押し時間を設定する」で変更できます。

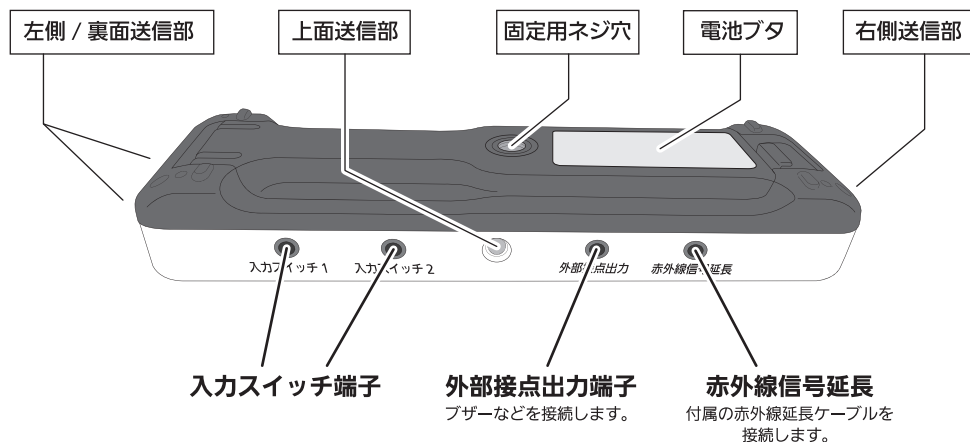

■付属品

単3電池 2本

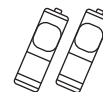

赤外線延長ケーブル
約1.5m / 両面テープ付属



取扱説明書




簡単ガイド



■電池の入れ方

付属のマンガン電池は動作確認用の為、
電池の持続が短い場合があります。
ご使用時はアルカリ電池をお使いください。

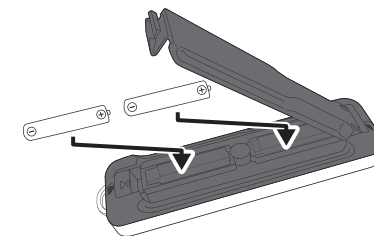


- ⊕と⊖は正しく入れる。
- ⊖側のバネを電池で押しながら入れる。

■赤外線延長ケーブル

以下のような場合にご使用下さい。

- 本体の信号が届きにくい場合。
- 病院の大部屋など、テレビが複数ある箇所で、特定のテレビのみを操作したい場合。

- ・ 広角に信号が発信されますが、反応範囲はテレビの機種により異なりますので、両面テープで固定する前に必ずテレビが反応する事を確認して下さい。
- ・ 発光部をテレビのリモコン受信部に向けて、付属の両面テープで固定して下さい。
- ・ 赤外線延長ケーブルは、赤外線受信部の近く(約1m以内)に設置して下さい。
- ・ 赤外線延長ケーブルを接続すると、リモコン本体からは信号は発信されません。

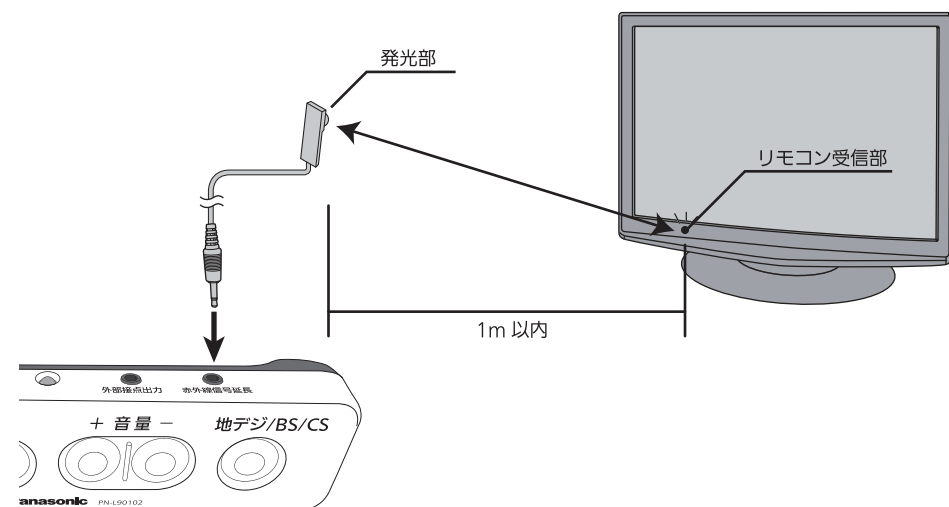


■本体の固定方法

市販の三脚などに本機を固定することができます。
三脚に付属の取扱い説明書に従い、安定した場所に設置して下さい。



お知らせ

取り付けまた取り外し時に、ネジが斜めにならないようにお気をつけ下さい。無理な力で回すと、本機の固定用ネジ穴を破損するおそれがあります。

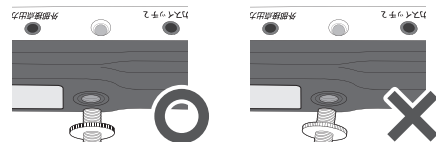

■はじめに

- ご使用の前に必ずメーカー設定を行って下さい。設定をしないと正しく操作できません。(パナソニック製のテレビの場合、設定せずに動作する場合があります。)
- 対応メーカー (P15) 一覧表に該当する機種でも、操作出来ない場合があります。
- お買い上げ時の設定ではCSは無効になっています。設定方法はP8ページをご確認下さい。

■メーカー設定方法

設定
1



テレビ付属のリモコンで
電源をオン

設定したいテレビで番組を映します。

①テレビの電源を入れ、番組を映します。

テレビに付属のリモコンで電源を入れて下さい。設定前の本機では、テレビの電源を入れることは出来ません。

「ピピピッ」の音が鳴るまで
5秒以上押し続ける。



②赤、青、緑、灰の4つのボタンを5秒以上押し続けます。
音が鳴ったらボタンから指を離します。

《設定モードになります》

③電源の操作ランプが点滅したらテレビにリモコンを向け
黄ボタンをゆっくり繰り返し押します。

押すたびに、28種類のチャンネルアップ信号が順に
発信されます。一巡すると「ピピピ」と音が鳴りお買
い上げ時の設定に戻ります。



番組が換わったら
押すのを止める

ゆっくり
繰り返し押す。



④番組が換わった時、本機の設定がテレビと一致したことに
なります。このとき、黄ボタンを押すのを止めます。
この状態で、赤ボタンを3秒以上押し続けます。

《操作モードになります》

テレビのチャンネルが切り換わるには少し時間が
かかります。黄ボタンをゆっくり押して下さい。

操作ランプが消灯するまで
3秒以上赤ボタンを押し続ける。



⑤音が鳴って操作ランプが消灯したら設定完了です。
テレビの操作が可能であるか確認して下さい。

■その他の設定方法

メーカー設定方法は前ページをご確認ください。

①設定モードにする

赤、青、緑、灰の4つのボタンを5秒以上押し続けます。

「ビビビ」の音が鳴るまで5秒以上押し続ける。



②設定する（※印がお買い上げ時の設定です）

●リモコン操作音量、種類を設定する。

音量大ボタン(紫)を押す。

設定
2



設定内容

- ・ドレミ音 音量大
- ・ドレミ音 音量小※
- ・ビビビビ音 音量大
- ・ビビビビ音 音量小
- ・操作音なし(ブー)

●音量ボタン「有効 / 無効」を設定する。

音量小ボタン(緑)を押す。

設定
3



設定内容

- ・ビビビビ音 有効※
- ・ビツ 無効

●BS/CS 選択「有効 / 無効」を設定する。

放送切り替えボタン(灰)を押す。

設定
4



設定内容

- ・ビツ 全て無効
- ・ビビビ 地デジ、BS 有効※
- ・ビビビビ 地デジ、BS、CS 有効

●長押し時間を設定する。

チャンネルアップボタン(青)を押したまま、音量大ボタン(紫)を押す。

音量小(緑)と放送切換(灰)の操作ランプが現在の設定速度で交互に点滅します。

設定
7



- (青・紫)を押したまま
- ☆(緑)を押すと短くなります。
- (灰)を押すと長くなります。


☆最も短く設定すると、緑と灰の両方が点灯し、長押し操作が無効になります。

③設定を確定する（操作モードに戻す）

電源ボタン(赤)を3秒以上押し続けます。

3秒以上押し続ける。
音がして赤ランプが消えると完了。

設定モードのまま10分間
操作をしないと操作モード
に戻ります。

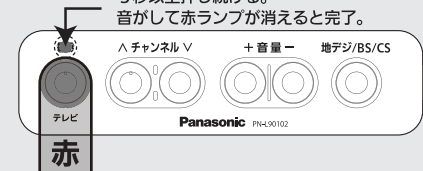

■本機の使用方

テレビの受光部へ向けて、各位置の送信部を向けて操作してください。

右面送信部

仰向けの状態でも操作が可能です。

左面 / 裏面送信部


一般的なりモコンの操作が可能です。

上面送信部

正面で約7m（当社製テレビの場合）

- ・使用範囲は角度により異なります。
- ・テレビに付属のリモコンより送信角度が狭い場合があります。

ご使用の各機器の受光部正面から操作してください。

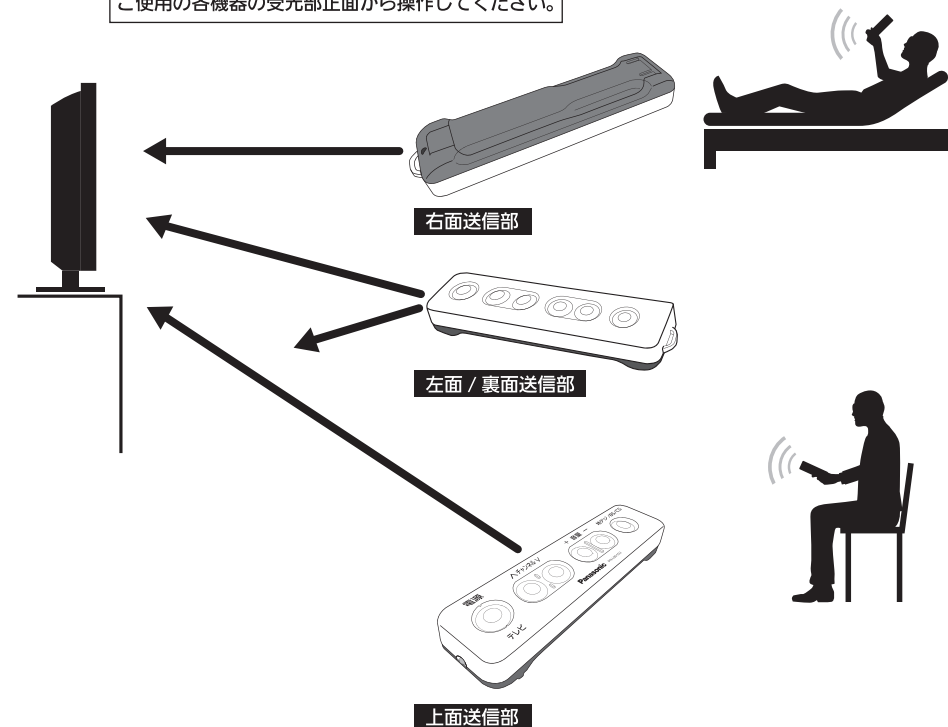

■対応品を追加してできること


全ての設定で、リモコンの本体ボタンを押しても操作が可能です。

使い方 1 入力スイッチ1つで、テレビのいろいろな操作をしたい方

1 スイッチ・オートスキャン方式（以降スキャン操作）


1つの入力スイッチで、全ての操作を行うことができます。

- ・入力スイッチを押すと各ボタンの上のランプが順番に点灯
- ・操作したい機能が点灯しているタイミングでもう一度入力スイッチを押すと、対応するボタンの機能が動作します。

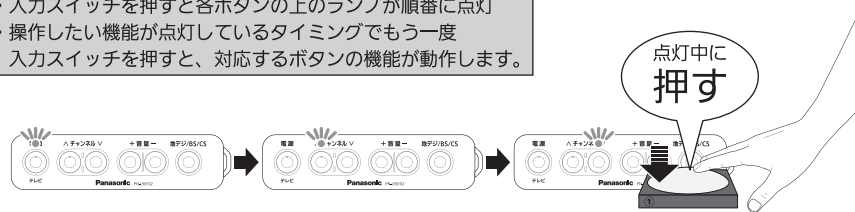

■入力スイッチ機能の設定と準備

- お買い上げ時「モード1」のまま使えます。
- 入力スイッチ1端子に入力スイッチを接続して下さい。

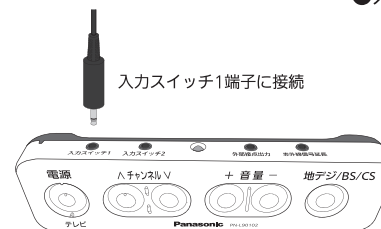

使い方 2 入力スイッチ 1 つで 2 つの機能を操作したい方

機能を絞って直接操作したい方、スキャン操作が難しいと感じる方

1つの入力スイッチの「短押し」「長押し」で、事前に設定した二つの機能を操作できます。

- ・① チャンネルと電源操作を行いたい場合。

「短押し」…チャンネルアップ操作
「長押し」…電源のオン・オフ操作



- ・② チャンネル操作は一人で行うが、その他の操作は介助者の方が行う場合。

「短押し」…チャンネルアップ操作
「長押し」…ブザー機能



①<短押し…チャンネルアップ操作 長押し…電源>


入力スイッチ2端子に接続



- お買い上げ時の「モード1」のまま使えます。
- 入力スイッチ2端子に入力スイッチを接続して下さい。

②<短押し…チャンネルアップ操作 長押し…ブザー>

入力スイッチ1端子に接続

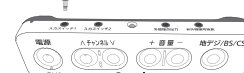


- 入力スイッチ機能を「モード2」に変更します。
 - 入力スイッチ1端子に入力スイッチを接続して下さい。
- ⇒ 設定方法はP16参照

使い方 3 入力スイッチ 2 つで 4 つの機能を操作したい方

2つの入力スイッチを操作できる方、直接操作で多くの機能を使いたい方

2つの入力スイッチそれぞれの「短押し」「長押し」で、事前に設定した4つの機能を操作できます。

- ・入力スイッチ1 → 「短押し」…チャンネルアップ操作
「長押し」…ブザー機能
- ・入力スイッチ2 → 「短押し」…放送切り換え
「長押し」…電源のオン・オフ操作

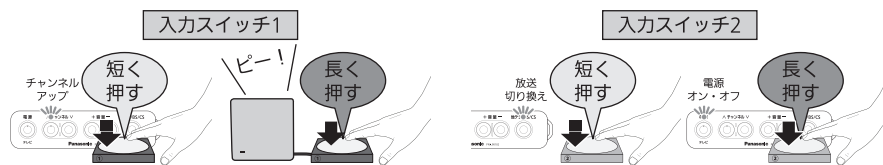

入力スイッチ 1 <短押し…チャンネルアップ操作 長押し…ブザー> 入力スイッチ 2 <短押し…放送切換 長押し…電源>


・チャンネルアップ・ブザー
・放送切換・電源



- 入力スイッチ機能を「モード2」に変更します。
 - 入力スイッチ1・2端子に入力スイッチを接続して下さい。
- ⇒ 設定方法はP16参照


■スキャン操作の使い方

使い方 1 スキャン操作 (入力スイッチ機能 [モード1] 端子 1)

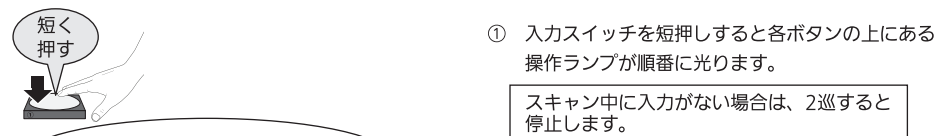

2 回目以降


- ③ ②と同じ機能を繰り返し使う場合は入力スイッチを長押しします。(短押しを2回繰り返すことでも同じ機能を選択することができます)
- ④ もう一度ボタンを選ぶ場合は入力スイッチを短押しします。

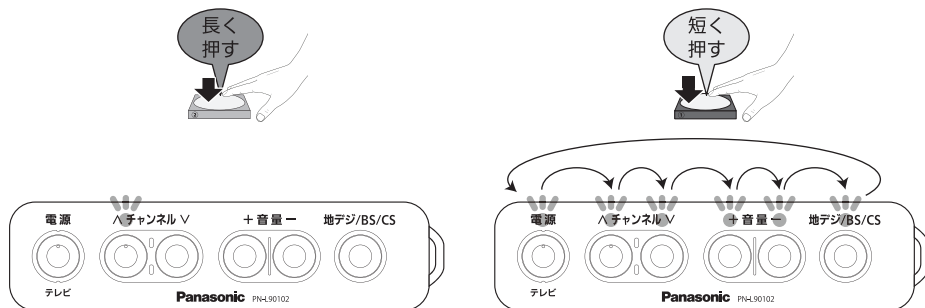

- ・スキャン操作中も、本体のボタン操作は可能です。
- ・スキャン操作の速度、長押し時間は 設定変更できます。

■スキャン操作でワイヤレスコールを使うには

ワイヤレスコールの準備

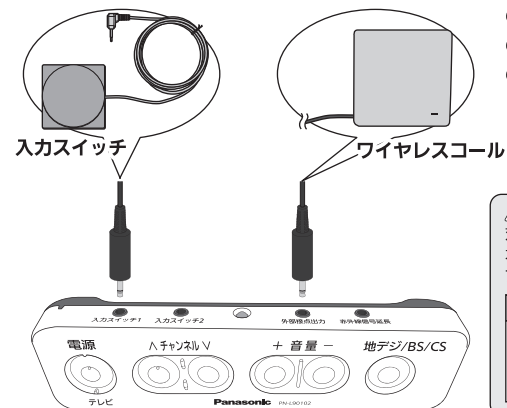

- ①入力スイッチ1端子に入力スイッチを接続する。
②外部接点出力端子にワイヤレスコールを接続する。
③外部接点出力の設定を有効にする。


⇒外部接点出力の設定方法はP16参照

警告
対応品（ワイヤレスコール）以外のブザーを接続される場合は、本機の接点仕様と適合したものを選び下さい。ご不明な点は、ブザーの製造メーカーにご確認ください。


	項目	仕様
外部接点出力	端子形状	Φ3.5モノラルミニプラグ（2極）
	制御容量	0.1A 6V DC
	接点仕様	PhotoMOSリレー

※上記仕様でも正しく動作しないものがあります。

操作

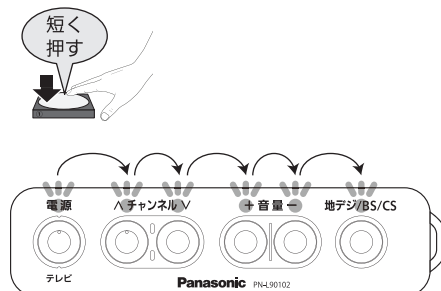


- ①入力スイッチを短押しすると各ボタンの上にある操作ランプが順番に光ります。

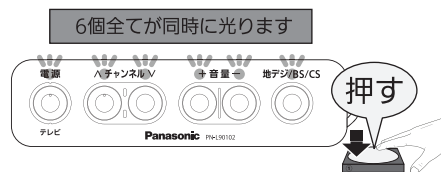

- ②放送切換の操作ランプの次に全ての操作ランプが点等します。
③全ての操作ランプが点灯している時に入力スイッチを※押します。

「押す※」の操作は外部接点出力の設定（P16）にて、長押し/短押しを選択できます。
誤操作防止の為に長押しを推奨しますが、押したままの状態を保持出来ない入力スイッチをお使いの場合などは、短押しに設定して下さい。

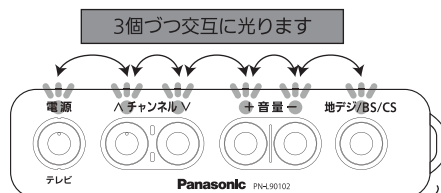


- ④外部接点出力端子が約1秒間オンになり、接続したワイヤレスコールが機能します。



■入力スイッチで直接操作する使い方

使い方 2・3

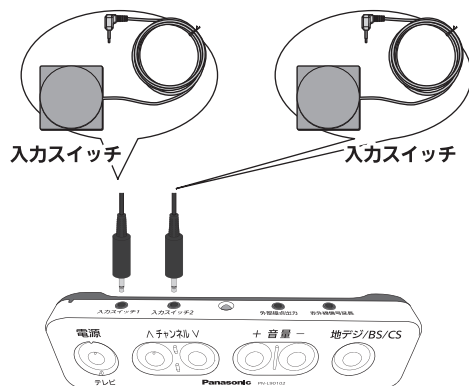


- ・スイッチの長押し、短押しにより操作して下さい。
- ・長押し時間は設定を変更できます。

⇒長押し時間の設定方法はP16参照

入力スイッチ機能設定	端子	短押し	長押し	1つの入力スイッチで使う	2つの入力スイッチで使う
モード1	入力1	スキャン操作			
	入力2	チャンネルアップ	電源	① どちらかお選び下さい	この設定でお使い下さい
モード2	入力1	チャンネルアップ	プザー	②	
	入力2	放送切換	電源		

ワイヤレスコイルの準備

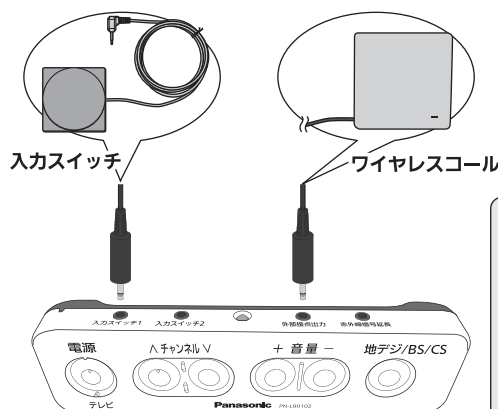

- ①入力スイッチ機能を「モード2」にする。
- ②入力スイッチ1端子に入力スイッチを接続する。
- ③外部接続出力端子にワイヤレスコイルを接続する。


⇒設定方法はP16参照

警告
対応品（ワイヤレスコイル）以外のプザーを接続される場合は、本機の接続仕様に適合したものをお選び下さい。ご不明な点は、プザーの製造メーカーにご確認ください。

	項目	仕様
外部接続出力	端子形状	φ3.5モノラルミニプラグ（2極）
	制御容量	0.1A 6V DC
	接続仕様	PhotoMOSリレー

※上記仕様でも正しく動作しないものがあります。

ワイヤレスコイルの使用

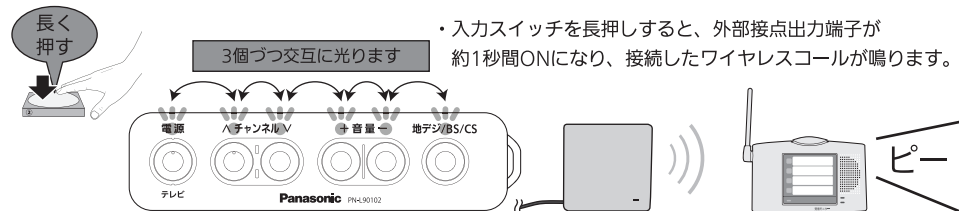

- ・入力スイッチを長押しすると、外部接続出力端子が約1秒間ONになり、接続したワイヤレスコイルが鳴ります。

■対応メーカー

パナソニック	日立	SORTEO
三洋電機	ビクター	EIZO(ナナオ)
シャープ	三菱	ディーオン(CANDELA)
ソニー	船井・DXアンテナ	BLUEDOT
東芝	LG電子	パイ・デザイン
パイオニア	オリオン電機	アズマ(EAST)

- いずれも、2004年以降のテレビにのみ対応です。
(本リモコンが発売された2016年10月以降のテレビについても対応は未確認です。)
- 赤外線リモコン付きのテレビに限ります。
- 各メーカーの赤外線信号は、出荷時のリモコンコードにのみ対応です。
- LG電子はBS/CS信号のみが異なる設定が2種類あります。BS/CSのみが反応しない場合は、メーカー設定操作で異なる設定に切替えて下さい。
- 一部のメーカーでは、BS/CS信号は設定されていません。「地デジ/BS/CS」ボタンを押すと、エラー音が出ます。「地デジ/BS/CS」ボタンを無効に設定すると(P6ページ)エラー音を消すことができます。
- ビデオ付きテレビやDVD付きのテレビなどの複合機は本機では操作できません。
- ケーブルテレビチューナー、セトトップボックス等のチャンネルの変更は出来ません。
- OEM(相手先ブランドによる製造)などで、他のメーカー信号で動作するモデルもあります。
- 上記の表に該当するテレビでも、一部の機能が操作できないモデルや、全てを操作できないモデルがあります。

■お手入れ

乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所用洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、印刷がはがれるおそれがありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- しばらく使わない場合は、液漏れ防止のため乾電池を抜いておいてください。
- 防水・防滴ではありません。



■仕様


品名	レッツリモコンAD
品番	PN-L90102
寸法	約174×46×29mm（突起部を除く：幅×高さ×奥行き）
質量	約140g（単3電池2本を含む）
使用電源	DC3V（アルカリ型単3乾電池2個）
電池持続時間	約1年（使用頻度により変わります）
赤外線LED発光部	4カ所
動作範囲	約7m（新品電池使用、受光部正面方向、テレビのメーカー、機種によっては、距離が短くなることがあります）
設定変更	8項目
対応メーカー	18メーカー(28種類)

※この仕様は性能向上のため変更することがあります。

■設定方法一覧

・設定モードにする

赤、青、緑、灰の4つのボタンを5秒以上押し続けます。

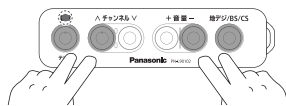


「ビビビ」の音が鳴るまで5秒以上押し続ける。

設定	項目	設定できる機能	設定方法  (設定モードで操作)						上段：確認方法 下段：設定内容												
5	入力スイッチ機能	・入力スイッチ1、2の機能を切換える。	赤	青	黄	紫	緑	灰													
				押						「青」を押しながら											
								換		「灰」繰返しで切換											
									ピ音⇒モード1			ピピ音⇒モード2									
									端子	短押し	長押し	端子	短押し	長押し							
									入力1	スキャンモード		入力1	チャンネルアップ	ブザー							
									入力2	チャンネルアップ	電源	入力2	放送切換	電源							
6	スキャン速度	スキャン操作のみに適用	赤	青	黄	紫	緑	灰													
			押						「青」を押しながら												
				押					「黄」で設定開始。												
							短		スキャン速度を…												
														長	「緑」…短くする						
															長	「灰」…長くする					
7	長押し時間	・ボタンを押し続けた時の繰返し信号発信の間隔を変更する。 ・入力スイッチの長押し判定時間を変更する。 ・長押し（繰返し）操作を無効にする。	赤	青	黄	紫	緑	灰													
				押						「青」を押しながら											
						押				「紫」で設定開始。											
								短		長押し時間を…											
														長	「緑」…短くする						
															長	「灰」…長くする					
8	外部接点出力、有効/無効	スキャン操作のみに適用	赤	青	黄	紫	緑	灰													
			押						「青」を押しながら												
							換		「緑」繰返しで切換												
		・スキャン操作時の、ブザー機能の有効・無効と、選択方法を変更する。																			
									ピ音		ピピ音		ピピピ音								
									有効、長押しで確定		有効、短押しで確定		無効								

・設定を確定する(操作モードに戻す)

電源ボタン(赤)を3秒以上押し続けます。

設定モードのまま10分間操作をしないと操作モードに戻ります。

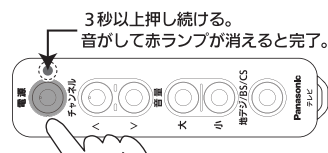

・お買い上げ時の設定に戻す

(の色塗り部分がお買い上げ時の設定です)

全てのボタンを10秒以上押し続けると、「ビピー」という確認音と共に操作ランプが一度点滅し、設定が完了します。



■故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても治らない場合や、この表以外の症状は、メーカーに問い合わせるか、お買い上げの販売店にご相談ください。
お問い合わせ頂く際は、「操作するテレビのメーカーと型番」を最初にお知らせください。

こんなときは		ここを確認してください
Q01	メーカー設定ができない	「設定モード」に移行してから、メーカー設定をしていますか？設定モードでは赤色の「電源」ボタン右横の操作ランプが点滅します。操作ランプが点滅していることを確認してから、黄色の「チャンネルダウン」ボタンをゆっくり押してください。 テレビのリモコンコードが変更されていませんか？テレビのリモコンコードは出荷時の設定にのみ対応しています。テレビのリモコンコードを出荷状態のものに変更してから試してください。
Q02	メーカー設定ではチャンネルは変わったのに、操作モードに戻ったらテレビの操作ができない	もう一度、設定を行ってみてください。設定モードでは、黄色の「チャンネルダウン」ボタンはゆっくりと押して、一度押したら、しばらく待って、チャンネルが換わらないことを確認してください。 設定モードで黄色の「チャンネルダウン」ボタンを押してテレビの画面が変わった後、別の設定を変更するなどで、さらに黄色のボタンを押してしまっていないか？他の設定を変更するときも、黄色ボタンを押すとメーカーが換わってしまいます。赤色の「電源」ボタンを押して操作モードに戻るまで、黄色ボタンを押さないようにしてください。
Q03	一部のボタンだけが操作できない	別のリモコン信号で設定を直すと操作できる場合もあります。今の状態から、設定モードへ移り、再度メーカー設定を行なってみてください。
Q04	「地デジ/BS/CS」ボタンを押しても、BS、CSIに切り換わらない、映像が出ない	テレビがBS、CSに対応していますか？テレビにそれらの機能が搭載されていない、またはテレビで番組受信の設定が出来ていなければ映りません。 メーカーがLGでは、電源、チャンネル、音量は同じで、BS、CS信号だけが異なる場合もあります。Q03の手順で、再度メーカー設定を行なってみてください。 レッツ・リモコンの初期設定ではCS信号は発信されないようにしてあります。CSにのみ切り換わらない、という場合は、設定を確認、変更してください。
Q05	「地デジ/BS/CS」ボタンを押すとエラー音となる、番組が換わらない	レッツ・リモコン側で、BSやCSの信号が登録されていないメーカー設定では、BSやCSの信号を発信すると、赤外線信号は発信されず、エラー音だけが出ます。この音が気になるという場合は、設定で「BS/CSを無効」にすれば、エラー音は消えます。
Q06	テレビに近づかないと動作しない	乾電池が消耗していることが考えられます。新しい乾電池と交換してください。 テレビに付属のリモコンでは問題なく操作できますか？付属のリモコンでも操作ができない場合は、テレビの不調も考えられます。テレビの調子も確認してください。なお、テレビとリモコンの角度によっては、テレビに付属のリモコンのほうで信号が届きやすい場合もあります。
Q07	音量ボタンが効かない	設定変更で「音量」ボタンを無効としていませんか？設定を確認、変更してください。
Q08	スキャン操作時に操作ランプが移動しない（反応しない）	設定5「入力スイッチ機能」で「モード1」にしていますか？「モード2」になっている場合は、「モード1」に変更して下さい。 入力スイッチは「入力スイッチ1端子」に接続していますか？「入力スイッチ2端子」では操作できませんので、「入力スイッチ1端子」に接続して下さい。
Q09	スキャン操作時に、操作ランプが動く速度が速すぎる（遅すぎる）	設定6「スキャン速度」で操作ランプが移動する速度を調整してください。
Q10	長押しをしても反応しない	設定7「長押し時間」を「最短」としている場合は、長押しが無効となります。適切な長押し時間を設定してください。

こんなときは		ここを確認してください
Q11	スキャン操作で「音量」や「放送切換」ボタンがスキャンされない	設定3「音量ボタン、有効/無効」や設定4「BS/CS、有効/無効」で、これらを無効としていませんか？無効の場合は、設定を有効に変更して下さい。
Q12	スキャン操作でブザーが鳴らない	外部接点出力が無効になっていませんか？ 設定8「外部接点出力、有効/無効」で外部接点出力を「有効」にして下さい。 設定8「外部接点出力、有効/無効」で外部接点出力を「長押しで確定」にした状態で、設定7「長押し時間」で「長押し無効」に設定していませんか？ 設定8 設定7 どちらかの設定を変更して下さい。 入力スイッチを押す時間が短くありませんか？（長く押すと反応しませんか？） 設定7「長押し時間」で、時間を短く設定して下さい。 もしくは 設定8「外部接点出力、有効/無効」で、「短押しで確定」に設定して下さい。
Q13	赤外線延長ケーブルを接続すると、テレビが反応しない	赤外線延長ケーブルを本体上面の「赤外線信号延長端子」にしっかり接続しているか確認してください。 赤外線延長ケーブルを正しく接続して下さい。

■オンラインマニュアルについて

- レッツ・リモコンADは本体背面の電池フタに「QRコード」が印刷されています。このQRコードをスマートフォンで読み取ることで、簡単に外出先などでも取扱説明書をご覧頂くことができます。

Panasonic 品番 PN-L90102 日本製
 レッツ・リモコン AD 単3形アルカリ乾電池2個
 パナソニック エイジフリー株式会社
 ●新旧・異種の電池は混用しないでください。
 ●電池の(+)は正しく入れてください。
 ●右のQRコードをスマートフォンで読み取り
 取扱説明書をご覧いただけます。






■対応品（ご使用方法は P10）




対応品は、仕様改善のため予告なく変更することがあります。
詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

ご利用者の身体状況に応じて入力スイッチや外部ブザーをご使用願います。
入力スイッチはここに掲載したものの他に、他の福祉機器業者からも販売されています。

入力スイッチ

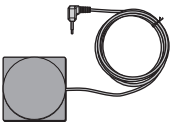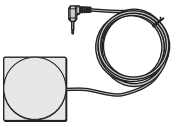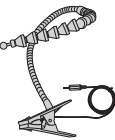手押しスイッチ (スプリング並 (黒))	手押しスイッチ (スプリング弱 (白))	足踏みスイッチ	ホップタッチスイッチT
EJ-KKN008	EJ-KKN009	EJ-KKN010	EJ-KKN011
			

ワイヤレスコール

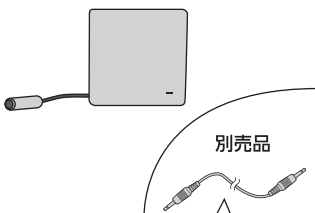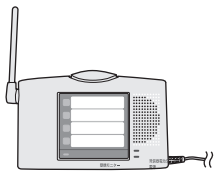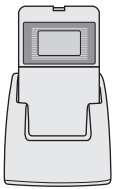小電力型ワイヤレスコール 接点入力送信器 (メスコネクタ付)	小電力型ワイヤレスコール 卓上型受信器	小電力型ワイヤレスコール 携帯型受信器セット
PN-S60001	EJ-KKN006	EJ-KKN007
 別売品		

別途、送信機とレッツリモコンを接続するケーブル「モノラルミニプラグ-モノラルミニプラグ」が必要です。
お近くの電気店にてお買い求めください。

接続端子	項目	仕様
共通	端子形状	Φ3.5モノラルミニプラグ（2極）
入力1、2	入力インピーダンス	短絡時：200Ω以下 解放時：100kΩ以上
	入力方法	a接点接続による無電圧入力
外部接点出力	制御容量	0.1A 6V DC
	接点仕様	PhotoMOSリレー
赤外線信号延長	— （必ず専用品をご使用ください。）	

■愛情点検表

レッツ・リモコン安全チェックシート		※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。									
安全点検項目		点検結果（該当には○）									
愛情点検		日付									処理手順
	樹脂部品にひび割れが見られる。										○印があるときは、 お買い上げの販売店に ご相談ください。
	購入後5年以上経過している。										

上記の点検項目以外でも不具合があれば、販売店などの専門家にご相談ください。

●製品の長期使用について

1. 本体への表示内容
経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、製造年月日を本体に表示しております。
2. 想定安全使用期間とは
一般家庭用にてご使用いただくレッツ・リモコンにおいて、標準的な条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。無償保証期間とは異なります。
※一般家庭以外（病院、施設など、不特定多数の方が使用される場所）に設置された場合は、使用条件により、想定安全期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。
3. 経年劣化とは
長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】
5年（一般家庭にて使用いただく場合）
想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、
経年劣化による怪我などの事故に至るおそれがあります。

廃棄上のご注意

廃棄するときはできるだけ素材別に分解し
地域の分別のルールに従い廃棄してください。

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、
まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<http://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様・製品・在庫に関するお問合せ

TEL 06-6908-8141

個人のお客様・製品に関するお問合せ



0120-365887 受付時間 9:00~17:30
(土、日、祝日休み)

パナソニック エイジフリー株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 代表 TEL06(6908)8122

© Panasonic AGE-FREE Co., Ltd. 2016

＜キリトリ線＞

＜ 無料修理規定 ＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期限内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

＜キリトリ線＞

＜キリトリ線＞