

保管用

保証書付き

介護保険
住宅改修
対象品目

取扱説明書

木製玄関ステップ

- 木製玄関ステップ1段 400 品番 VALSMG400
- 木製玄関ステップ1段 600 品番 VALSMGS1
- 木製玄関ステップ1段 ワイド900 品番 VALSMGSW

もくじ

●安全上のご注意	2
●各部の名称	3
●部材・付属品一覧	3
●取り付け方法	3
●ご使用方法	4
●お手入れ方法	5
●仕様	5
●保証とアフターサービス	6
●お客様ご相談窓口のご案内	6
●保証書	裏表紙

ご使用になる前に必ずお読みください。

最大使用者体重:100kg以下

このたびは、木製玄関ステップをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



必ず守る

■ ご使用になる前に脚、固定金具がしっかり固定されているか確認する。

固定が不十分な状態で使用すると、不意に動き、転倒したり破損するおそれがあります。



必ず守る

■ 壁側など、つかまるものがある場所に設置する。



必ず守る

■ アジャスターは必ず脚底面に取り付けて使用する。

アジャスターはガタつき調整用ですので、高さ追加には使用しないでください。



必ず守る

■ 必ず固定して使用する。

固定しなければ不安定となり転倒転落の原因になります。



分解禁止

■ 絶対に分解したり、修理、改造はしない。部品の代用品は使用しない。

本体が正常にはたらかず、破損やケガのおそれがあります。

修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

■ 子供の遊び道具や他の用途には使用しない。

転倒やケガをするおそれがあります。



禁止

■ マットやすのこなど、凹凸のあるものの上では使用しない。

また天板の上には、マットなどを置かない。

不安定となり転倒転落の原因になります。

注意



禁止

■ 本製品は屋外では使用しない。

腐食し破損するおそれがあります。




禁止

■ 床面がクッションフロア(塩化ビニール製床面)の場合、

アジャスターが直接触れるような設置は避ける。


まれに色移りすることがあります。

各部の名称

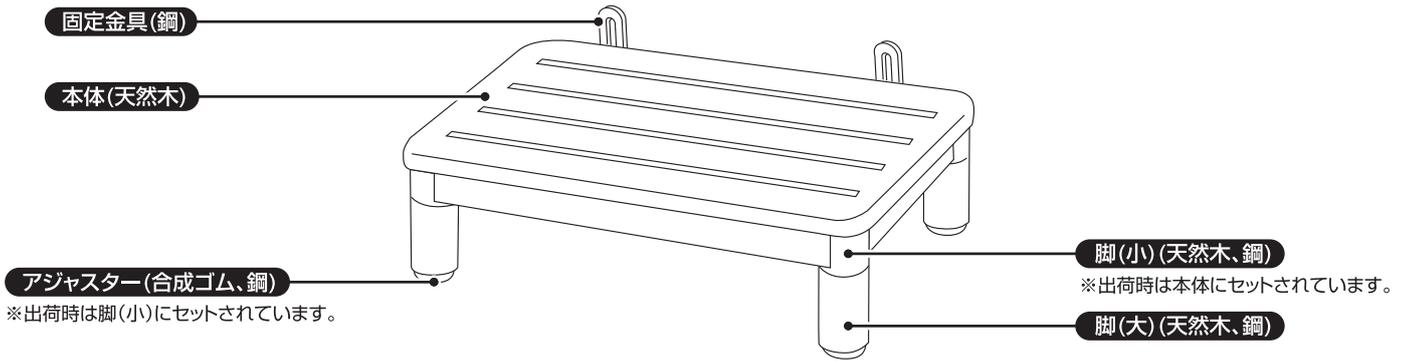

部材・付属品一覧

組み立て前には必ず同梱されている部材・付属品をご確認ください。

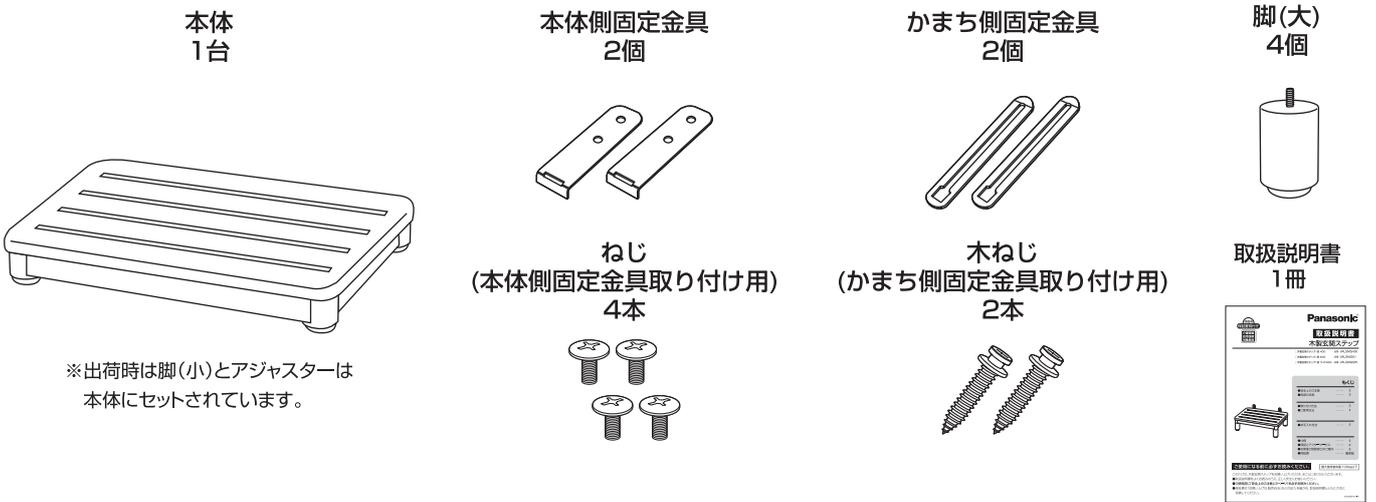

取り付け方法


プラスドライバーをご用意ください。

1 設置する場所の寸法の確認

●取り付けされる前に、取り付けサイズ表を参考に玄関の寸法をご確認ください。

取り付けサイズ表


A(天面高さ)	B(固定金具ネジ取付位置)	C(固定金具先端高さ)
8cm	9~15.5cm	9.5~16cm
15cm	16~22.5cm	16.5~23cm
20cm	21~27.5cm	21.5~28cm

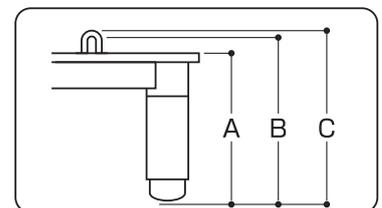

2 本体側固定金具の取り付け


●本体側固定金具を本体の穴に差し込みネジで固定してください。

※本体側固定金具には表裏がありますので注意してください。

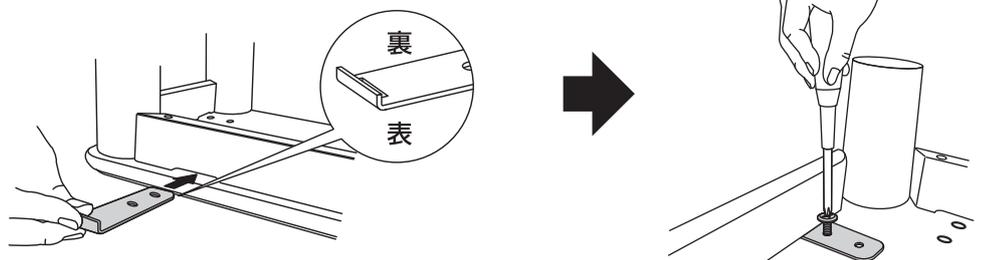


3 取り付け位置を決める

- 玄関ステップを実際に取り付ける場所に設置し、図のようにかまち側を固定する場所を決め、目印を付けてください。
目印は必ず左右平行になるように付けてください。

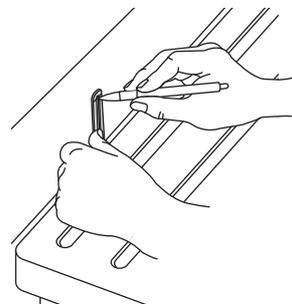


4 かまちネジの固定

- 一旦玄関ステップを取りはずし、あらかじめ目印を付けた場所に木ネジを締めつけてください。
※木ネジのツバ部がかまちに当たるまでしっかりと締めつけてください。

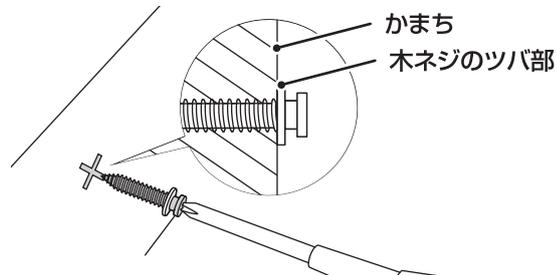

5 かまちネジの固定

- 木ネジのツバ部に、かまち側固定金具の溝を通し、かまち側固定金具を木ネジに固定した後、本体側固定金具の差し込み穴にかまち側固定金具を挿入し、玄関ステップを固定します。
※かまち側固定金具は、上部が手前に曲がっている方を表面にしてください。

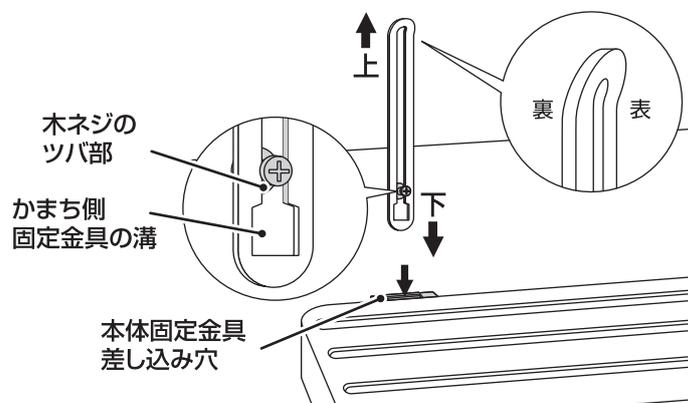

注意

- 段差や傾斜がある所に設置しない。
転倒やケガの原因になります。
- 昇降の際は、天板の中央付近を踏む。
端を踏むと、上がりかまちとのすき間に足が入ったり、滑ってケガをする原因になります。
- 勢いよく飛び乗ったりしない。
転倒やケガの原因になります。
- 水に濡れた場合、乾いた布でふき取る。
腐食やサビの原因になります。


■ ご使用方法 ■

ご使用前に、介助者がつきそって使い勝手のチェックをされることをおすすめいたします。


1 設置する方向を決める

- タテ置き・ヨコ置きどちらでも設置可能です。
玄関の幅や広さに合わせて設置する方向を決めてください。

タテ置き

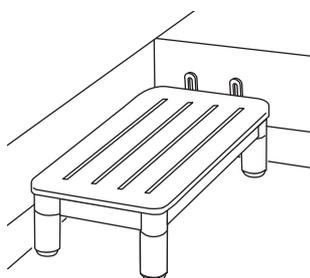


ヨコ置き

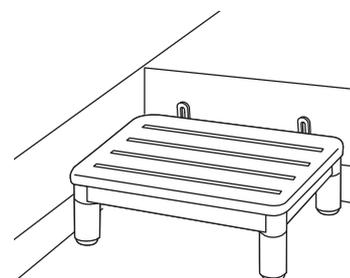


2 設置する高さを決める

- 天面の高さは脚の組み合わせを変える事により3段階(8・15・20cm)に調整することができます。ご使用になる玄関の高さに合わせて脚の高さを調整してください。
- 出荷時、脚(小)は本体に取り付けてあります。

脚の取り付け方法

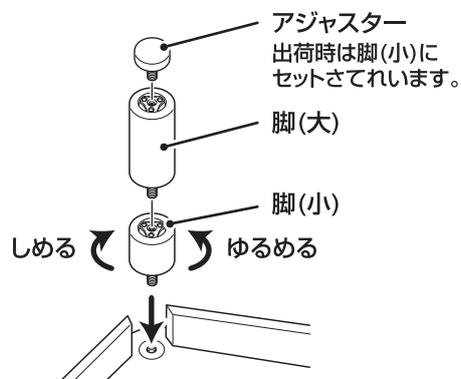

脚(大)・(小)の組み合わせによる高さ

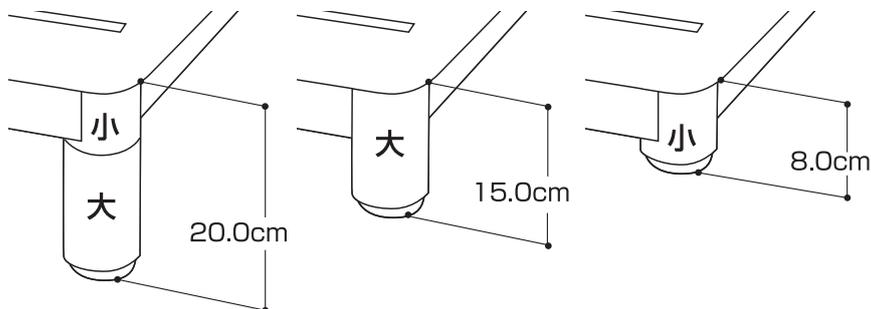

注意

- アジャスターを必ず脚底面に取り付ける。アジャスターはガタつき調整用につき、高さ追加には使用しない。破損の原因になります。
- 必要以上に脚を締めつけすぎない。金具が抜け、破損の原因になります。

■ お手入れ方法 ■

- 本体を柔らかい布で水ぶきしてください。
- ひどい汚れは家庭用中性洗剤をうすめてお使いください。

市販の中性洗剤をご使用ください。

洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませ汚れを拭き取り十分に水洗いした後、水切りをしてください。



注意

- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。本体が劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。
- 屋外に放置したり直射日光に当てたりしない。色あせや、本体が破損し、ケガをするおそれがあります。

■ 仕様 ■

製品名	木製玄関ステップ1段 400	木製玄関ステップ1段 600	木製玄関ステップ1段 ワイド900
製品品番	VALSMG400	VALSMGS1	VALSMGSW
サイズ(cm)	幅40×奥行35×高さ8・15・20	幅60×奥行35×高さ8・15・20	幅90×奥行35×高さ8・15・20
材質	本体:天然木 表面加工:ウレタン樹脂塗装 固定金具:鋼(メラミン焼付塗装) アジャスター:鋼(クロメート処理)、合成ゴム ネジ:鋼(クロメート処理)		

廃棄上のご注意

廃棄するときにはできるだけ素材別に分解し地域の分別のルールに従い廃棄してください。

■ 保証とアフターサービス ■

●保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

●補修用性能部品の保有期間

当社は木製玄関ステップの補修用性能部品を製造打切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中は

ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。

保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、
まずご購入求めの販売店・工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

フリーダイヤル



0120-365887

●受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日休み)

<http://panasonic.biz/healthcare/aflt/>

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 代表 TEL06(6908)8122

©Panasonic AGE-FREE Life Tech Co.,Ltd.2012