

Panasonic[®] サービスガイド

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。

保証書は確実に発行しましょう。


2025年 11月発行 No.63

可動式入浴台 アクアムーブ

●品番

PN-L14001D

可動式入浴台
アクアムーブ
PN-L14001D

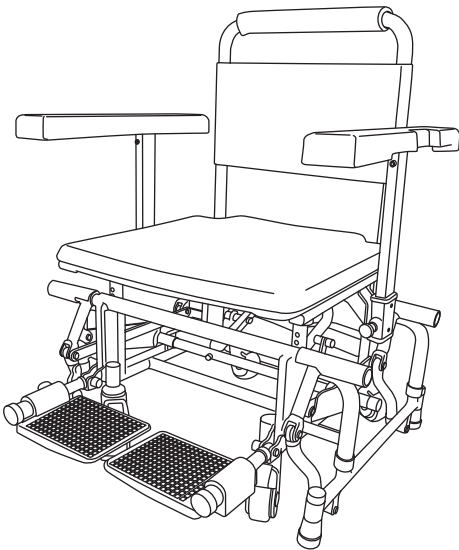

定 格		
製 品 名	可動式入浴台 アクアムーブ	
製 品 品 番	PN-L14001D	
サ イ ズ	製 品 寸 法	幅62×奥行72×高さ75～85cm
	座面サイズ	幅46×奥行46cm
	座面までの高さ	35～45cm(1.25cmピッチ9段階)
	ひじ掛け高さ	座面より 21cm
	ひじ掛け内寸	47cm
材 質	キャスター	3インチキャスター
	フ レ ー ム	アルミニウム
	座面・ひじか け・背もたれ クッション	EVA樹脂
	座 面	ポリエチレン
	アジャスター	合成ゴム
製 品 重 量	16kg	

発売年月	技術サービス区分
平成24年 8月	


目 次


部品展開図・価格表 1～3

※サービスガイドの記載内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

可動式入浴台 アクアムーブ 部品展開図・価格表

1. 部品展開図

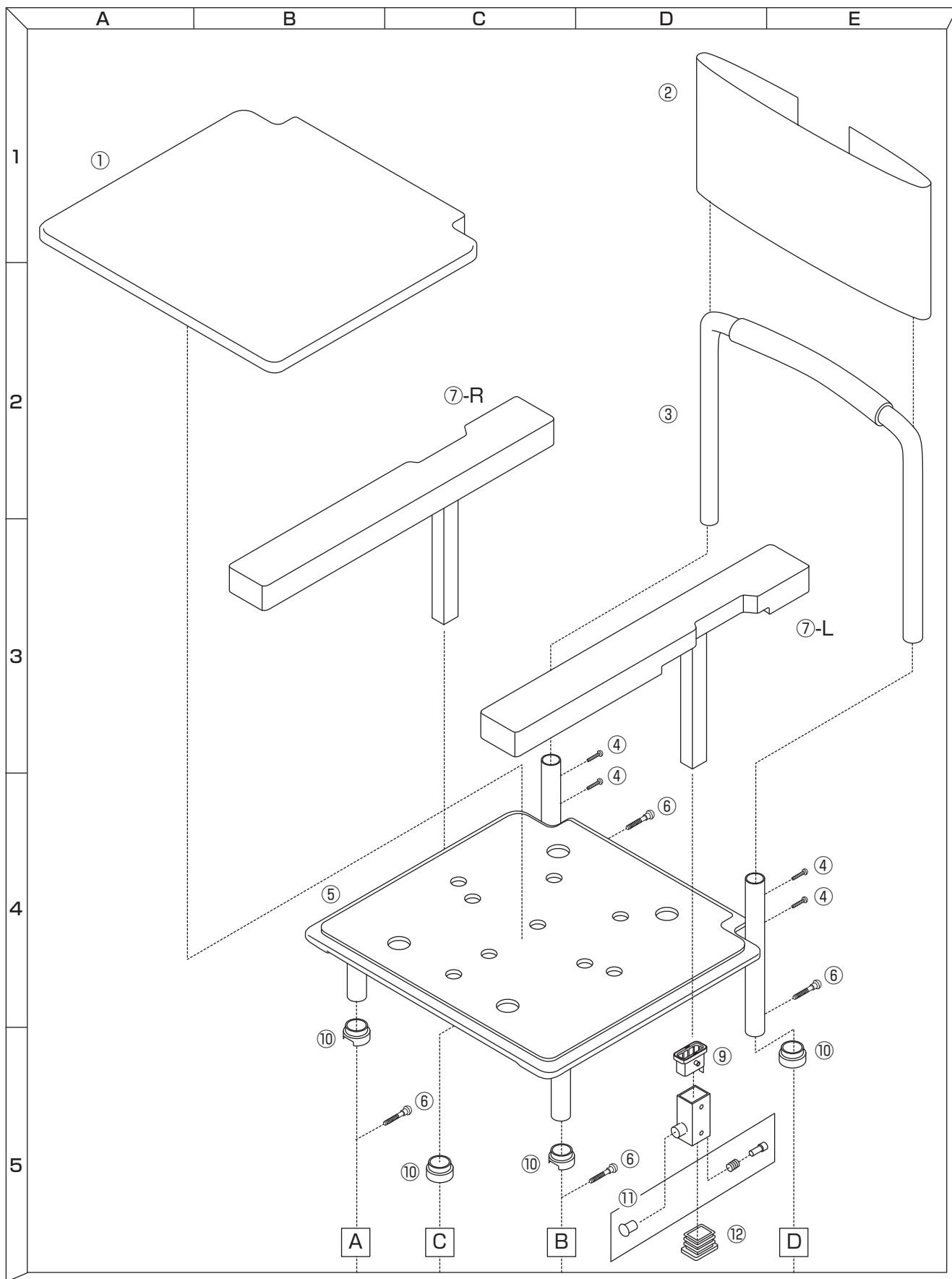

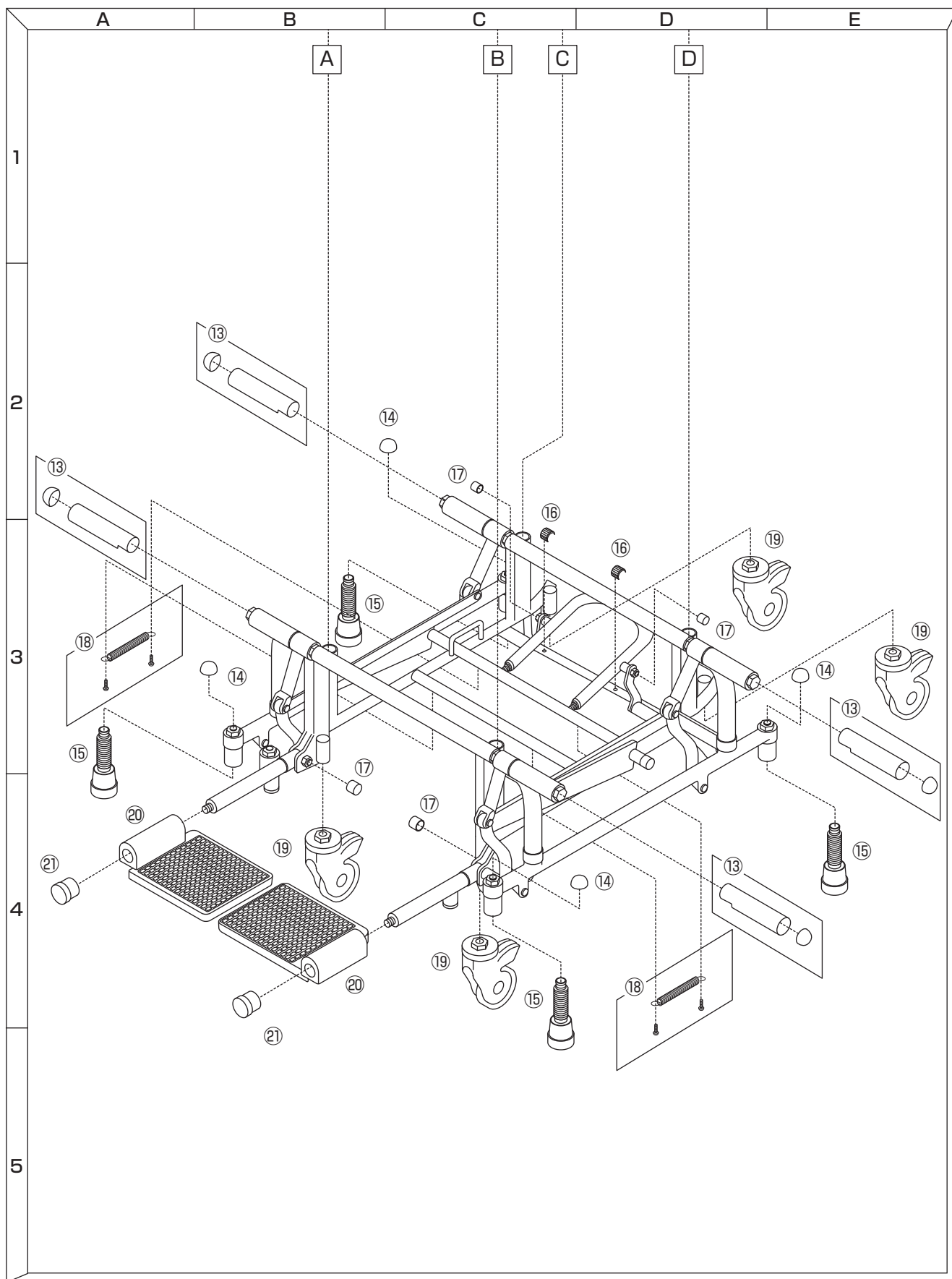

2. 部材価格表

この価格に表示されている表示価格は消費税抜きです。

可動式入浴台 アクアムーブ PN-L14001								
図面 番号	補助 番号	部品名	ご注文品番	箱 入数	販売店渡価格	希望小売価格 (税抜)	摘 要・備 考	1台 個数
1		座面クッション	PN-L1400101P	1		4,000		1
2		背もたれシート	PN-L1400102DP	1		4,500		1
3		背もたれ	PN-L1400103P	1		3,000		1
4		背もたれ固定ネジ	PN-L1400104P	4		250		4
5		座面	PN-L1400105P	1		3,000		1
6		座面高さ調整ボルト	PN-L1400106P	1		250		4
7	R	ひじ掛け(R)	PN-L1400107RP	1		4,000		1
	L	ひじ掛け(L)	PN-L1400107LP	1		4,000		1
9		ひじ掛け角パイプスリーブ	PN-L1400109P	1		500		2
10		座面昇降パイプ隙間埋めゴム	PN-L1400110P	1		300		4
11		スライドピンセット	PN-L1400111P	1		600	スライドピン、スプリング、ノブ	2
12		ひじ掛け角パイプエンドキャップ	PN-L1400112P	1		350		2
13		浴槽当てキャップ	PN-L1400113P	1		750	浴槽当てキャップ、浴槽当てキャップゴム	4
14		M12 ナットキャップ	PN-L1400114P	1		200		4
15		脚ゴムセット	PN-L1400115P	1		1,700		4
16		フットブレーキ当てカバー	PN-L1400116P	1		350		2
17		M8 ナットキャップ	PN-L1400117P	1		200		4
18		フットブレーキスプリングセット	PN-L1400118P	1		300	フットブレーキスプリング、カラー、ネジ	2
19		キャスター	PN-L1400119P	1		4,500		4
20		フットプレート	PN-L1400120P	1		1,600		2
21		フットプレートエンドキャップ	PN-L1400121P	1		500		2
22		ご説明用DVD	PN-L1400122P	1		400		1
23		取扱説明書	PN-L1400123P	1		300		1
24		梱包箱	PN-L1400124P	1		1,700		1


・お手入れ方法

停止ブレーキが解除できない時・脚ゴムが床から浮かない時

症状	停止ブレーキを解除しても、フットブレーキストッパー（脚ゴム）が床から浮かず、移動ができない。
原因	フレーム内に溜まった汚れのお手入れ不足により、脚ゴムと連結しているバーが駆動しないため。
対応	溜まった汚れをお手入れする。

停止ブレーキを解除する

ひじ掛けが上がっていることを確認し、
停止ブレーキを足の甲で持ち上げてください。
※ひじ掛けが下がっていると解除できません。

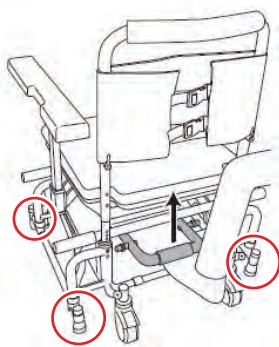

停止ブレーキを解除した後

正常時


脚ゴムは床から浮き、移動できる状態となります。


不具合時

停止ブレーキが解除されず、脚ゴムは床についたままで、
移動できません。



原因	石鹸カス・水垢が溜まり、停止ブレーキが駆動しない
対応	停止ブレーキ駆動部をお手入れする
結果	正常駆動


停止ブレーキ駆動部のお手入れ方法

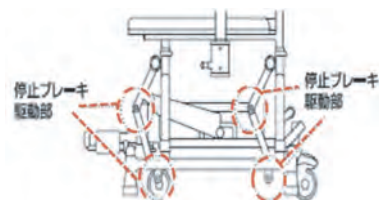

「停止ブレーキ駆動部」を示す  部分に中性洗剤をふきかけ、
停止ブレーキを20～30回程駆動させてください。
スムーズに駆動するのを確認後は、洗剤が残らないよう
水でしっかりと洗い流してください。

停止ブレーキ駆動部が正常かどうかの確認

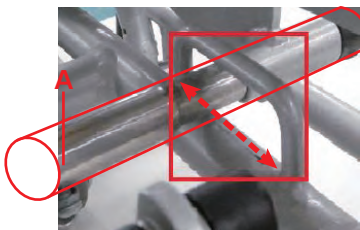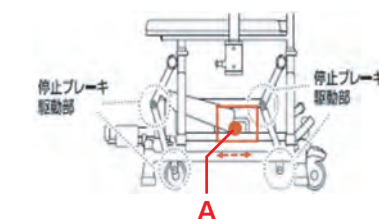


お手入れにより、石鹸カスや水垢等が取り除かれると、
停止ブレーキと連動しているフレームが駆動し、
 内を貫通している横棒（A部）が、枠内で記載の矢印方向にスライドします。
横棒がスライドすることにより、停止ブレーキは解除され、
脚ゴムは床から浮いて移動することができるようになります。

・ひじ掛けの交換方法


必要工具：プラスドライバー




交換手順

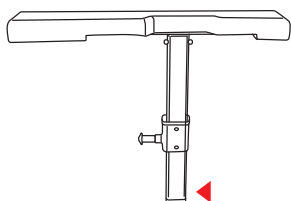

ひじ掛け支柱の底面◀部分についているネジを、
プラスドライバーで外します。

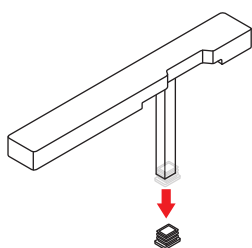




ネジを外したら、ひじ掛け角パイプエンドキャップを
ひじ掛け支柱から抜きます。

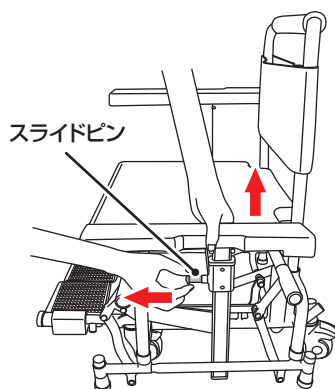

スライドピン（黒いノブ）を引っ張りながら、
ひじ掛けを、天井方向に引っ張り上げて抜いてください。

ひじ掛けを抜いたら、交換したいひじ掛けを
逆の手順で取り付けてください。

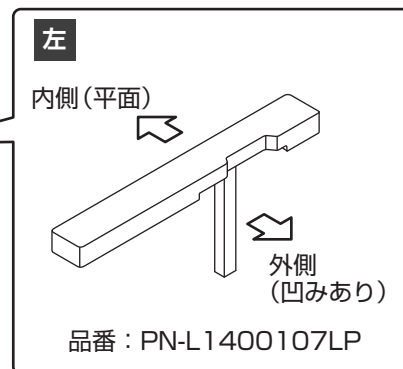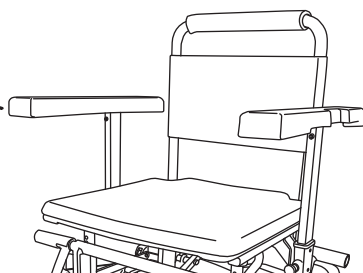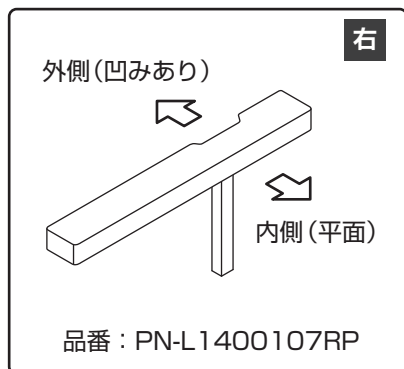

※ひじ掛けには、左右があります。
左右とも「内側は平ら」「外側は凹みの形状」で取り付けてください




・スライドピン交換手順




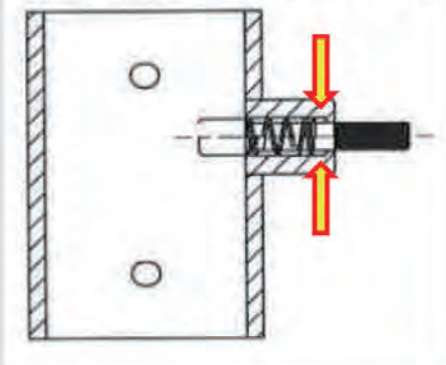

工具・部品準備品



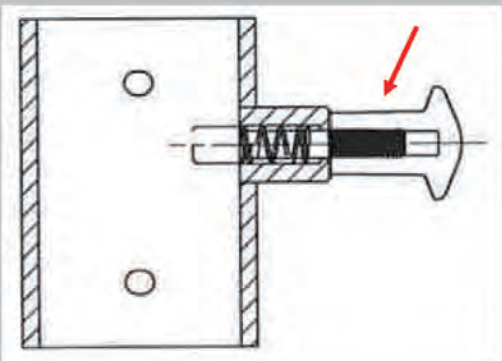
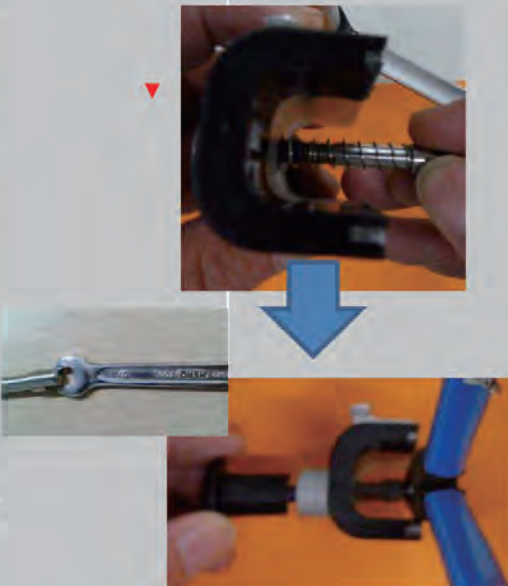
工具 ①プラスドライバー ②ラジオペンチ
 部品 ③スライドピン ④ノブ ⑤リング
 ⑥ねじロック液状タイプ ⑦片ロスパナ6

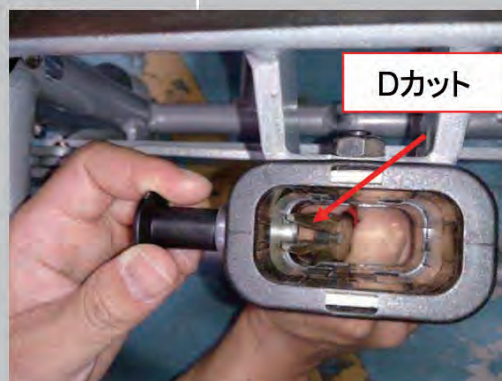No.	作業内容	使用部品・工具
1	<p>・ブレーキを踏み、本体を固定させる。 ※ブレーキを踏まないとひじ掛けが下がりません。</p>	
2	<p>・ひじ掛け下部のひじ掛け角パイプ エンドキャップねじを外す。</p>	<p>・プラスドライバー</p>
3	<p>・ツマミを引っ張りながら ひじ掛けとひじ掛け角パイプ エンドキャップを取り外す。</p>	
4	<p>・ラジオペンチでスライドピンのDカット部を 掴みながらノブを外す。 ※古いロットの場合はDカット形状に っていない仕様もあります。</p>	<p>・ラジオペンチ ・ノブ ・片ロスパナ6</p>



※スライドピンにロックタイトが効きすぎて、ノブが外れない場合は、ペンチでノブを掴んで外す。
 ※外す際、ノブが損傷しますので、ノブを新品に交換して下さい。

No.	作業内容	使用部品・工具
5	<p>・スライドピン取り付け部位を清掃してください。</p> 	清掃道具等
6	<p>・スライドピンとスプリングを交換する。 ・スライドピンにスプリング、リングを取り付ける。</p> 	
7	<p>・本体フレームに取り付け 矢印部がリング納まり位置(フレーム内部)</p>  	

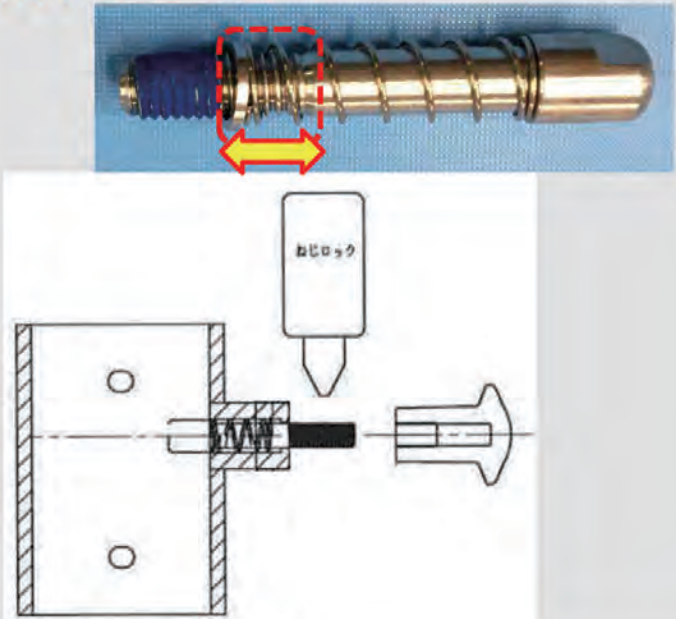No.	作業内容	使用部品・工具
8	<p>・スライドピンにネジロックを塗布する。 ※ねじロックを塗布することでノブの外れを防止します。</p> 	<p>・ねじロック液状タイプ</p> 
9	<p>・樹脂ノブを取り付ける。</p>  <p>・ペンチでスライドピンのDカット部を 掴みながらノブを取り付ける</p> 	<p>・ペンチ ・片口スパナ6</p>

No.	作業内容	使用部品・ 工具
10	<p>・ノブを摺動させて、スプリングが飛び出さないか確認する。</p> <p>※写真は、キャップが着いています。 ●過去に修理したもののキャップ有りますが、不要です。</p>	
11	<p>・ノブを引っ張りながら ひじ掛けを取り付ける。</p> 	
12	<p>・ひじ掛け角パイプエンドキャップねじを 取り付ける。</p>	<p>・プラスドライバー</p>

・ キャスターガタツキ対処手順

必要工具

スパナ（口幅13）



ロックタイト（中強度以上）




ナット締め込み手順

① アクアムーブ本体を横に寝かせてください。



② キャスター内側のナットをスパナ（口幅13）にて締め込んでください。

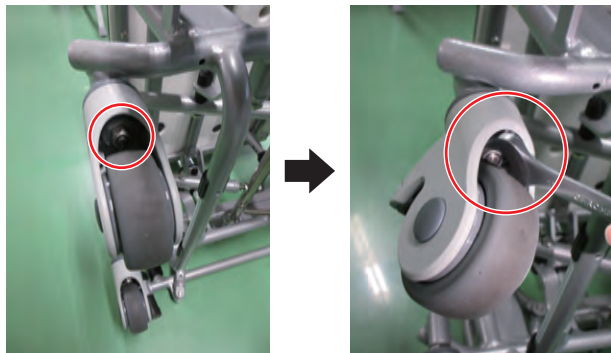

③ キャスターが正常に動作するか確認してください。

・フットブレーキ スプリングセットの交換方法

必要工具

プラスドライバー（最初の仮止めまで）






ラチェットドライバー（最後の増締めを少ない力で締め付け可能）



交換手順


- ・ A箇所と接続するネジを仮止めする。
- ・ スプリングを引っ張りながら、B箇所と接続するネジを仮止めする。
- ・ AとBのネジを増締めする ➡ 完了。

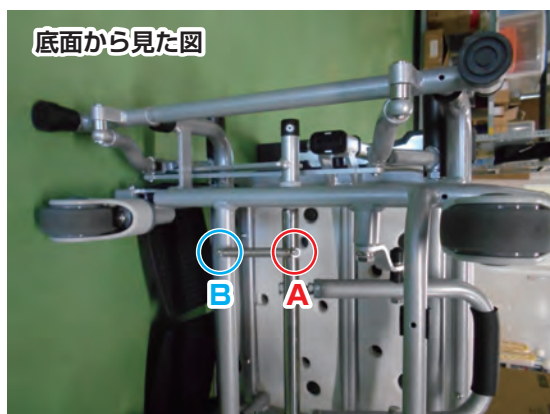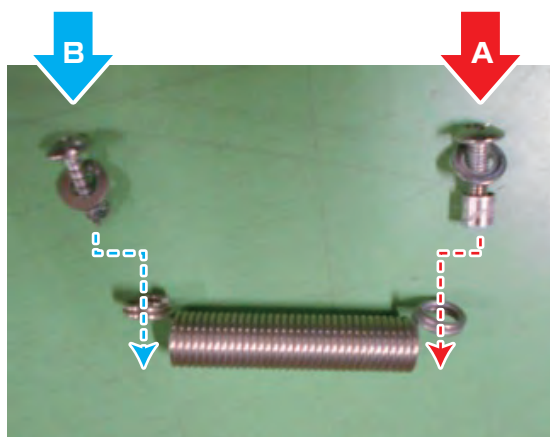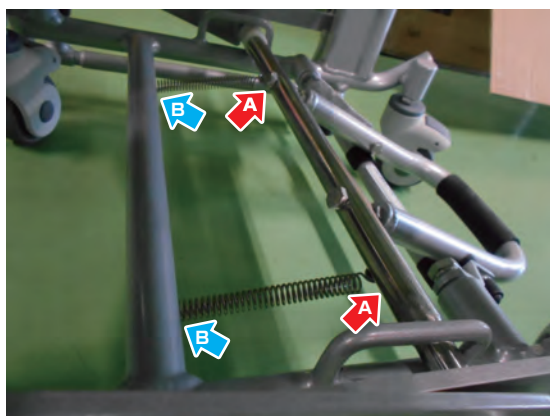

・フットプレート調整方法手順

フットプレート調整方法手順


①キャップを外す

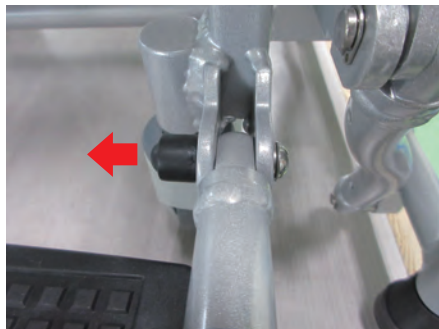

②六角レンチを差込む



③反対側を13mmのメガネスパナで固定しながら、六角レンチを回して締めて調整してください。
(六角レンチ側を回しても、メガネスパナ側を回しても締まるなら問題ありません。)

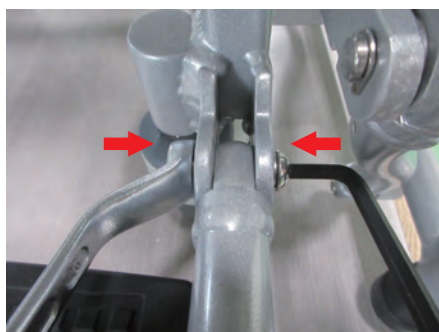

・アクアムーブ製造ロット番号の記載位置

下記の場所にあるシリアル番号をご確認ください。



パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真 1048 番地