

パナソニックの手すりで、家中の動線をサポート

手すりの役割

移動や移乗などの動作を行う際に、手を通じて体重をあげる重要なモノ

起きあがる



立位保持する



昇降を支える




立ちあがる



座る



歩行を支える

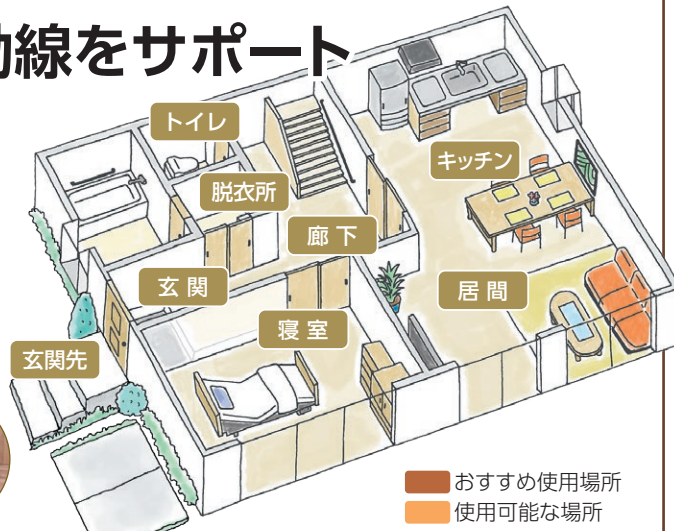

歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉

寝室 玄関
居間 トイレ
廊下
脱衣所
キッチン



新商品

自在手すり ツインディ〈水廻り用〉

寝室
脱衣所
キッチン
玄関
トイレ



新商品

折りたたみ可能な面手すり スタンディ

寝室
居間
脱衣所
キッチン
玄関



歩行サポート手すり スムーディ

玄関
玄関先



すっきり手すり クリンディ

寝室 トイレ
居間
脱衣所
キッチン
玄関



洋式トイレ用 スライド手すり(ステンレス)

トイレ



自在手すり ツインディ〈室内用〉

寝室 玄関
廊下
居間
脱衣所
キッチン



アームサポート手すり メンディ

寝室
居間
脱衣所
玄関
トイレ



自在手すり ツインディ〈玄関用〉

玄関



こちらから手すりのラインアップ、及びこの冊子のPDFファイルをご覧になれます。

※データ通信料はお客様負担となります。

※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。



ご購入の前に

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

- この冊子の掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。
- この冊子に掲載の一部の商品は、使用イメージのため他社製品を使用しています。

お取り扱い店

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141

個人のお客様 製品に関するお問合せ

0120-365887 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 | (土、日、祝日休み)

この冊子の記載内容は2021年10月現在のものです。

Panasonic

事例集 No.3

介護・生活快適商品
手すり・移動支援

介護保険福祉用具貸与対象商品

全国の福祉用具専門相談員の知恵がつまった設置事例をご紹介します



新商品

歩行サポート手すり
スムーディ〈屋内用〉



新商品

自在手すり
ツインディ〈水廻り用〉



折りたたみ可能な
面手すり
スタンディ



歩行サポート手すり
スムーディ




すっきり手すり
クリンディ



洋式トイレ用
スライド手すり
(ステンレス)



自在手すり
ツインディ
〈室内用〉

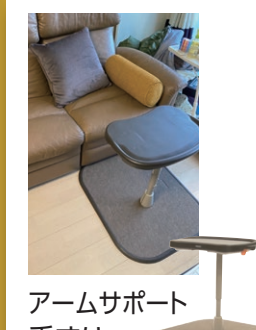


アームサポート
手すり
メンディ



自在手すり
ツインディ
〈玄関用〉

歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉ひろがるシリーズ

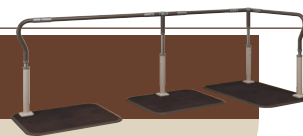

豊富な組み合わせで部屋から部屋への移動をサポート

設置・選定
確認は
コチラ >>



● 廊下の段差



手すり長さ約173cm

DATA

ご利用者：円背、下肢筋力低下があり、
玄関の段差を昇るのが大変

こだわり POINT

シルバーカーで段差を超えていたが、
スムーディ屋内用導入でラクになる

手すりの方が安定しているのは
もちろんですが、安定していると体重を
あずけ足をあげやすくなるんですよ

● 土間



DATA

ご利用者：脊髄小脳変性症により
立ち上がりに不安

こだわり POINT

玄関での立ち上がりが
ラクにできるようになった

段差にも対応



段差をつなぐ手すり
が620mmタイプ
の場合約44cmまで、
930mmタイプ
の場合約66cmまで
対応可能
(XPN-L80801、
XPN-L80802は
段差対応できません)

● 廊下



手すり長さ約173cm

DATA

ご利用者：転倒の不安あり
住 環 境：トイレまでの通路にガラス戸あり

こだわり POINT

手すりの設置により、移動動作負担だけでなく
転倒時にガラス戸で大怪我する不安も軽減

● 居間



手すり長さ約173cm

DATA

ご利用者：心臓病、高血圧
歩行時にふらつきあり転倒多い
2種類の手すりといすを
使い歩きしているが、
不安定になることもある

こだわり POINT

つながっている手すりに交換したこと
(安心して見守りができる、とご家族談)

ご家族の動線も考え、
すべてはつながらなかったこと

ふらつきや、目が見え
づらいケースでは特に、
手すりがつながって
いると安全・安心です



● 寝室



導入前



導入後

手すり長さ約204cm

DATA

ご利用者：下肢筋力低下が顕著

こだわり POINT

ご利用者の身長が175cmなので
高さ85cmに設定できること、
歩行時に足が上がりにくいので
ベース縁ゴムがなだらかなことから選定

パーキンソン病などで、
廊下のコーナーなど
90度の方向転換が
苦手なケースでも
手すりを持ったまま
移動できます



手すり長さ約173cm




DATA

ご利用者：歩行が不安定
住 環 境：ベッドから入口まで支持物がない

こだわり POINT

畳の上にも置くだけで簡単設置
今後の状態変化を見据え、連結の長さ・
角度調整ができるため選定

角度変更可能

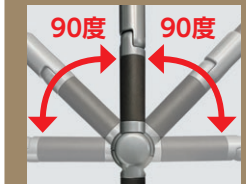

回転連結支柱
左右に90度、
5度ピッチで調整可能



こだわり POINT

ベッドで立ち座りと
居室移動に兼用
ベースがカーペット
で冷たくないことも
選定理由



ベースの短辺が大きく
はみださないので、
このように置くことも
できます
支柱位置を中央に
できることもポイントです



● キッチン



手すり長さ約185cm

キッチンでは
移動だけでなく、
立位保持にも役立ちますね



● トイレ



DATA

ご利用者：末期がん

状態変化見据え
住宅改修ではなく
レンタルを希望

住 環 境：入口から便座
まで距離がある

こだわり POINT

便座まで安心して移動でき、
安定感が高いため選定

自在手すり ツインディ〈水廻り用〉

狭い場所でも置きやすく、水廻りに強い



● トイレ



DATA

ご利用者：座った状態で廊下を移動し、便器をつかんでなんとか立ち上がり、トイレに座っている

こだわり POINT

住宅改修なども考えたが、**足元のすべり止め**も含め選定



DATA

ご利用者：パーキンソン病
自分でできることは減らしたくないという希望あり

こだわり POINT

手すりの**角度を調整**し便座前に設置、立ち座り動作が安定してできるようになる

角度変更可能



力を入れやすい角度に調整できる
(片側30度ピッチ4段階)



● 脱衣所



DATA

ご利用者：両側変形性膝関節症で更衣時にふらつき

こだわり POINT

すべりにくく、水廻りで使用できるため選定



DATA

ご利用者：可動域制限あり
またぎ動作に不安

こだわり POINT


浴室出入口の段差のまたぎが安定してできるようになる



こだわり POINT

椅子からの立ち座りが安定

● 玄関

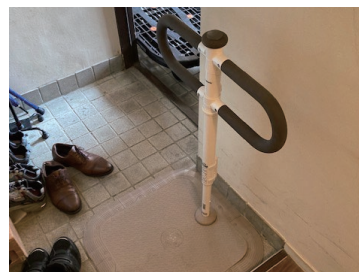

DATA

ご利用者：履物の着脱時に支えが必要
住環境：低い上がり框の段差、スペースが狭い


こだわり POINT

雨で履物が濡れたときでも支障ない

ベースが**58×58cm**とコンパクトだから省スペース



水廻りに強い

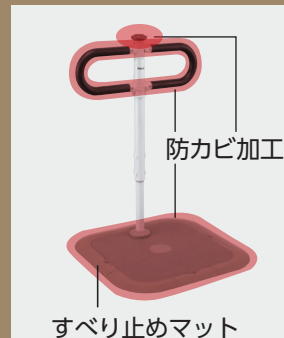

折りたたみ可能な面手すり スタンディ

低い位置から立ちやすい



● 玄関



DATA

ご利用者：下肢筋力低下、リウマチ

こだわり POINT

スタンディの面部分を利用して腕や手をつき、立ち上がり動作が安定

● 居間



こたつの天板も、手をつくとも動いたり、高さが足りなかったりするので、スタンディが役立ちます



● 寝室



DATA

ご利用者：心臓疾患、ふらつきあり
夜間トイレの頻回、布団から起き上がりが大変

こだわり POINT

面手すりですぐ立ち上がることで**心臓への負担も軽減**



こだわり POINT

布団からの起き上がりのときに使用
他商品を試すも、面部分に手をついた立ち上がりでご本人にとってスムーズだったため導入

● 脱衣所



DATA

ご利用者：気力・活動量・筋力の低下傾向あり
老々介護で、一度床にしゃがむと立ち上げ介助が大変

こだわり POINT

上肢の筋力はあるため、手のひらや腕をつきながらの自立動作を実現するため導入

便利な面手すり



握れなくても手のひらや前腕をのせて支えやすい

折りたたむことも可能



歩行サポート手すり スムーディ

にぎれば分かる安定感。1本支柱でデザインも好評！



● 玄関前アプローチ



導入前



導入後

標準伸縮タイプ2台

DATA

ご利用者：大腿骨骨折によりふらつきあり

こだわり POINT

標準伸縮タイプを2台設置
すぐ横が駐車場で、手すりの間を通り
抜けられ、ご家族の移動も困らない
ご利用者には
安心して外出ができると喜ばれた



導入前



導入後

ロング2400タイプ

DATA

ご利用者：右片麻痺

門扉の開閉をしたいので
住宅改修よりレンタル希望

こだわり POINT

門扉の隙間に手すりを通し
片側を開閉ができるようにした



ステップタイプ

DATA

ご利用者：両膝関節と股関節に痛み
既設の手すりでは
支えきれず何度か転倒

こだわり POINT

スムーディを併用することで
両手すりとして使用




ロング2050タイプ

DATA

住環境：段差が広く、
間に石のブロックがある

こだわり POINT

ブロックをまたいで手すりを設置、
安定して歩行できるようになった

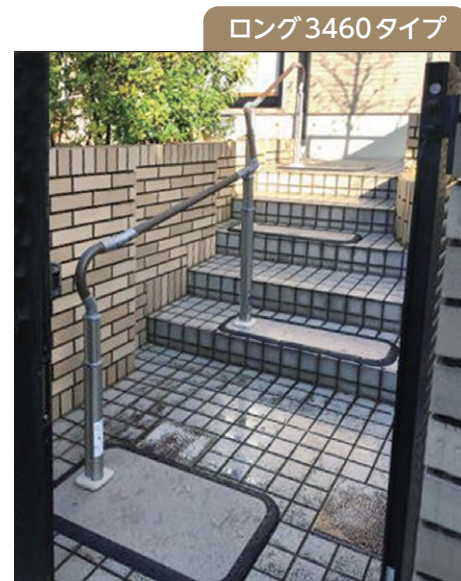

ロング3460タイプ

最大9段まで
対応可能です



● 玄関



DATA

ご利用者：歩行が不安定

こだわり POINT

上がり框だけでなく、
玄関扉まで設置



DATA

ご利用者：末期がん

こだわり POINT

状態変化に
早く対応できるよう、
住宅改修ではなく
レンタル手すりを選定

昇り降りとも
使用できるように
真ん中に手すりを設置

● 軒下

縁側や勝手口など、
さまざまな軒下段
差で役立ちます



標準タイプ



標準タイプ



ステップタイプ

ロング2400伸縮タイプ



DATA

ご利用者：退院した後、
独居であるため
洗濯物が課題
伝い歩きはできる
が、転倒の危険性
あり

こだわり POINT

距離が長く取れ、
導入後も位置や高さの
調整ができる



標準タイプ

DATA

ご利用者：下肢筋力低下

こだわり POINT

住宅改修も提案させて
いただいたが、
別の箇所で使いたい
とのことで、
レンタル対応

すっきり手すり クリンディ

コンパクトなので便利



● 玄関



DATA

ご利用者：片麻痺

こだわり POINT

支柱を中央固定にし、
框の昇り降りどちらも
健側でできる


● 居間



こだわり POINT

座椅子の横に設置し
立ち座りのときに利用
コンパクトなので動線を
ふさがない

● トイレ

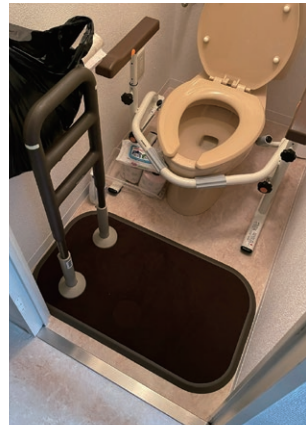

DATA

ご利用者：普段車いすを使用
しているが、
車いすですぐトイレに
入ることに
抵抗感がある

こだわり POINT

入り口の前で立位を取り
安定して
便座まで移動できる


● 洗面所



こだわり POINT

ベースが短いので
体の近くで手すりを
握れる

● 勝手口

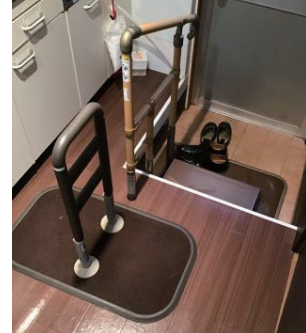

玄関や掃き出し窓など
を上がりきった一歩目
を支えることも重要です



● 寝室



DATA

ご利用者：両膝関節痛による
痛みで起居動作
が不安定

こだわり POINT

見た目も気にされるため、
外観と機能が両立して
いるクリンディを選定

● トイレ前



DATA

ご利用者：トイレ扉を開ける
ときに後方へ転倒
したことがある

こだわり POINT

ご家族の階段昇降の邪魔
にならないコンパクトさと、
ひんやりしないベースとで
選定

コンパクト

78cm

46cm

カーペット
付きのベース

洋式トイレ用 スライド手すり(ステンレス)

移乗や操作がしやすいスライド式



● トイレ




DATA

ご利用者：パーキンソン病
住環境：トイレが扉に
向かって横向き

こだわり POINT

手すり部と脚部の出幅が
横からの出入りの
邪魔にならない

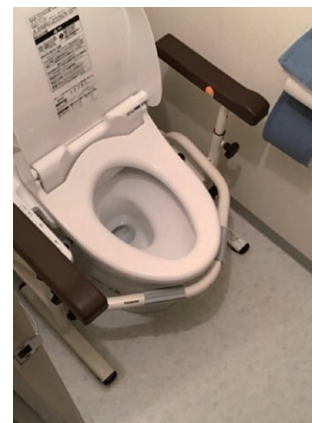

こだわり POINT

ペーパーホルダーを移設
せずに手すりを使いたい
という意向を尊重し、
スライド手すりを選定



DATA

ご利用者：下肢筋力低下
ご家族が段差解消
のために用意した
すのこをそのまま
使いたいとの希望

こだわり POINT

脚部が出ていないこと、
便器がくびれている形状
だったことから選定



こだわり POINT

引き戸なので壁に手すり
を設置できないため、
レンタル手すりを選定

スライドの利点



はねあげ手すり
手が届きにくい



スライド手すり
手が届きやすい

DATA

ご利用者：膝関節の変形、
下肢筋力低下

こだわり POINT

横手すりが遠いため
うまく利用できておらず
レンタル手すりを選定

パーキンソン病の
場合でも便座の上では
姿勢が崩れがち。
体をひねるとさらに
危険ですよ



片麻痺の場合、
壁付き手すりを
つかまなくても
体が支えられる

自在手すり ツインディ〈室内用〉

力が入りやすい角度にできる



● 寝室



DATA

ご利用者：体力と下肢筋力の低下、転倒の恐れあり

こだわり POINT

スプリングマットレスに厚みがあるため、手すり高さが85cmまで上がるものを選定

● 居間



DATA

ご利用者：人口骨頭置換術後

こだわり POINT

ベッドからの立ち上がり、移動が兼用できるため選定

幅60cmと両手で持ちやすく、1本支柱なので足元すっきりです

● トイレ



DATA


ご利用者：便座の立ち座りが困難
住 環 境：住宅改修不可、天井強度弱く突っ張り式手すりも不可

こだわり POINT

このスペースに置くベースのサイズの中で、トイレへの移動と立ち座りが最もやすかったので選定
便座からの立ち座り動作と、入口から便座までの移動が安定するようになる

角度調整

力が入りやすい角度に調整可能
60度から300度まで(30度ピッチ)

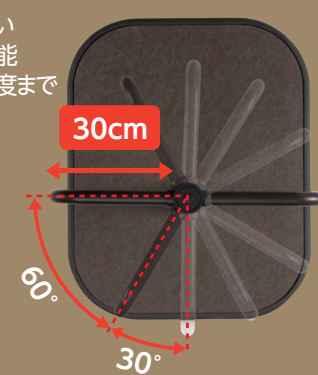

アームサポート手すり メンディ

大きな面で支えやすい



● 居間



DATA

ご利用者：立ち座りの際に転倒リスクあり

こだわり POINT

体重を預けて立ち座りができ、安全と喜ばれる

握力や脚力が低下している場合は面を使うと安定しやすくなります

● 寝室



DATA


ご利用者：ベッドからの立ち上がりで何度も転倒したことあり(テレビにつかまり、壊してしまったことあり)

こだわり POINT

セラピストとの相談のもと、面手すりを選定

自在手すり ツインディ〈玄関用〉

手すりの角度や出幅が調整できる

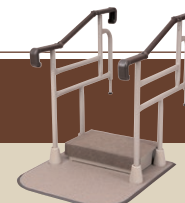

片手すり踏み台なし



DATA

ご利用者：ふらつきあり
住 環 境：框高さが30cm

こだわり POINT

安全に昇降動作が行えるようになった

片手すり踏み台あり



こだわり POINT

1段上がったところが奥行55cmと長いので、手すり部分が長いツインディ〈玄関用〉を選定

片麻痺や膝痛では後ろ向きや横向きに降りた方がラクなケースがあります

両手すり踏み台あり



DATA


ご利用者：重度の円背や肩関節の疾患から腕が十分に上がりきらない

こだわり POINT


手すりの高さを低くできるため、ツインディを選定

角度と出幅調整

手すり角度を起こせるので高い段差も脇を締めて昇りやすい

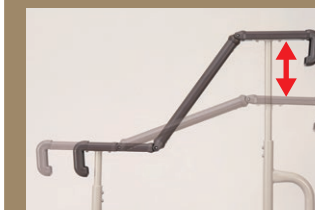

手すり端部は出幅も調整でき、平らで手を置きやすい

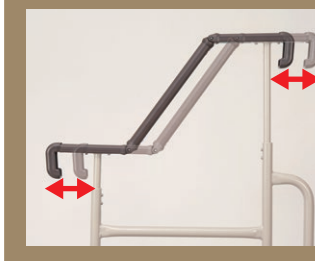

詳しくはこちらをご覧ください！

▶ご自宅の様々なシーンでの
ご提案動画



▶「はやわかり」動画は
こちら



▶ひろがるシリーズの
特長をご紹介



※データ通信料は、お客様負担となります。 ※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。