


取扱説明書

歩行サポート手すり スムーディ専用 **ガタツキ抑制プレート** 家庭用

品番 PN-L8060059P

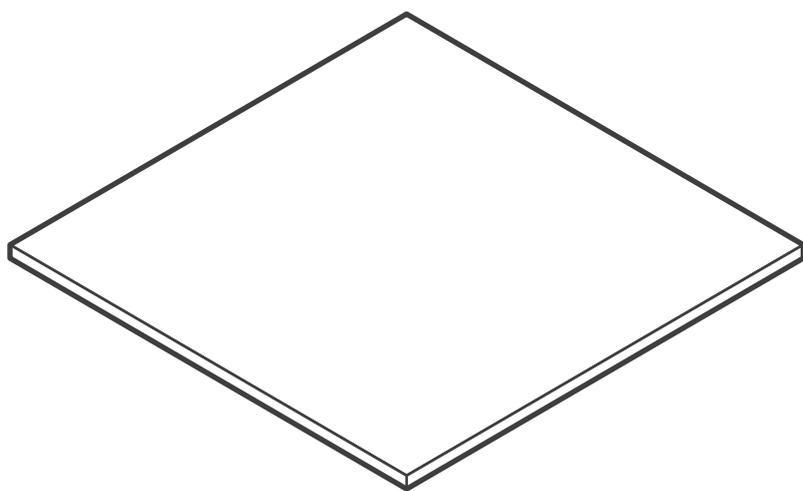

もくじ

安全上のご注意	2
同梱品の確認	3
商品寸法図	3
取り付け方法	3
仕様	4
お手入れの仕方	4
お客様ご相談窓口のご案内	4

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



注意

剥がれ、事故、けが
などを防ぐために



- 本製品以外の用途で使用しない
(事故の原因)




- 取り付けは納入業者が行う
(剥がれによる事故の原因)

- ガタツキ抑制プレート同士の貼り合わせは最大2枚(厚み 8mm)までにする
- ガタツキ抑制プレートを取り付けた際はベースと地面の段差が大きくなるので注意する
(つまづきによるけがの原因)


- ベースに貼り付ける際は、必ずベース板上(金属面)に貼り付ける
- 一度剥がした後、再度ご使用になる場合は、未使用の両面テープで貼り付ける
※専用の両面テープをご使用ください。【品番：PN-L8060139P】
(剥がれによる事故の原因)

- 取付け後、製品にがたつきがないか確認する
(転倒によるけがの原因)

同梱品の確認

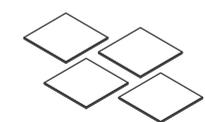

ガタツキ抑制プレート
4枚

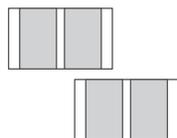


両面テープ
4枚



取扱説明書
1部

商品寸法図

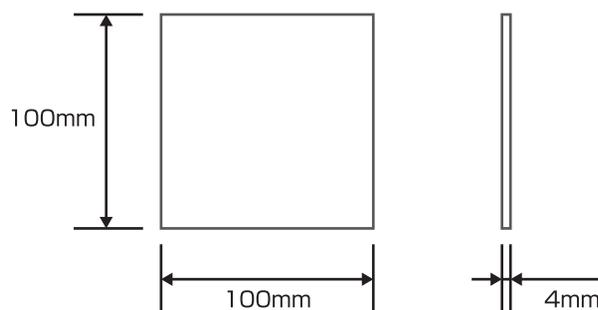


取り付け方法

1 両面テープを貼る

ガタツキ抑制プレートに両面テープを1枚貼る。

貼り付け位置

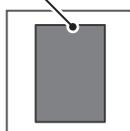


2 ガタツキ抑制プレートを貼る

以下の推奨貼り付け位置を参考に、ベース裏面にガタツキ抑制プレートを貼り付け、ベースのがたつきを調整する。


標準ベース(裏面)

貼り付け位置

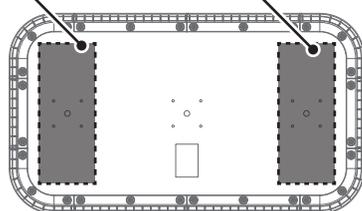


ステップベース(裏面)

貼り付け位置

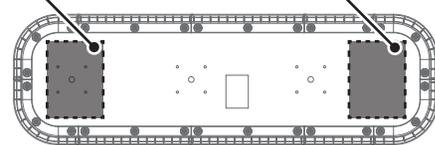

※がたつきが大きい場合はプレート同士を付属の両面テープで貼り合わせて、プレートを厚くし、ベースに貼り付けてください。

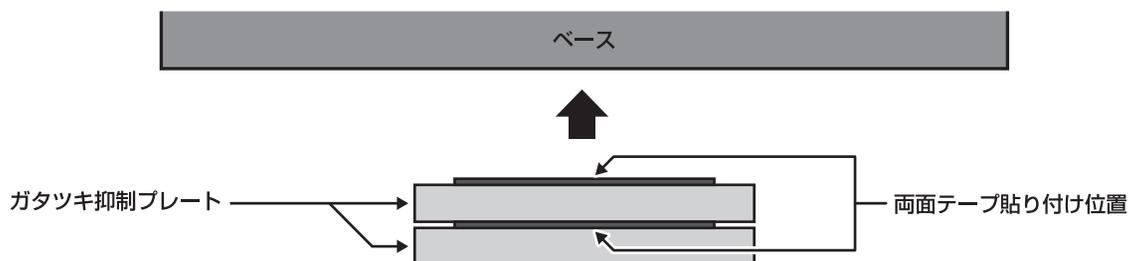

⚠ 注意

- ガタツキ抑制プレート同士の貼り合わせは最大2枚(厚み8mm)までにする
(つまづきによるケガの原因)
- 必ずベース板上(金属面)に貼り付ける
(剥がれによる事故の原因)

仕様

製品名	ガタツキ抑制プレート
製品番号	PN-L8060059P
製品寸法	幅10 × 奥行10 × 高さ0.4 cm
材質	合成ゴム

お手入れのしかた

安全のため、定期的にお手入れをお願いします。

- お手入れはやわらかい布で乾拭きするか、固くしぼった布で水拭きしてください。
- 汚れがひどい時は中性洗剤をしみこませたやわらかい布で拭き、その後水拭きをしてから乾いた布で水分をきれいにふきとってください。
- 貼り付け後、一部にめくれや著しい変色がある場合は交換してください。

⚠ 注意

- 中性洗剤を使用してください。
- 塩素系洗剤、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、熱湯などは使用しないでください。
- シンナーやクレゾールなどの揮発性薬品は使用しないでください。
- たわし、みがき粉、研磨剤入りのスポンジなどは使用しないでください。
(劣化、破損による事故の原因)

商品・お取扱いなどのご相談は
パナソニック エイジフリー株式会社
0120-365887
●受付時間 9:00~12:00 (土、日、祝日休み)
13:00~17:00
<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

©Panasonic AGE-FREE Co.,Ltd. 2025