


歩行サポート手すり スムーディ 設置パターンの可否


		NEW		NEW				
	標準 タイプ	ステップ 630タイプ	ステップ 980タイプ	ロング 1700タイプ	ロング 2050タイプ	ロング 2400タイプ	ロング 3460タイプ	
<p>黄色部分はこれまでNGとしてきましたが、新たに可能になった組合せです</p>								
<p>手すりの 630mmと 980mmを 入替える</p>	×	<p>ステップ 980タイプです</p>	<p>ステップ 630タイプです</p>	×	<p>○ ×</p>	<p>ロング 2050タイプです</p> <p>○ ×</p>	×	
<p>ステップベースの 位置を入替える</p> <p>○</p>		○ 	○ 	○ 	○ 	○ 	○ 	
<p>ステップベース の枚数を増やす</p> <p>×</p>		×	×	×	×	×	×	

その他の設置パターン可否


○ 支柱ごとの手すりの高さが異なる

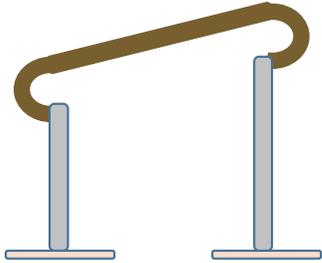


○ 支柱位置が異なる (端と中央)

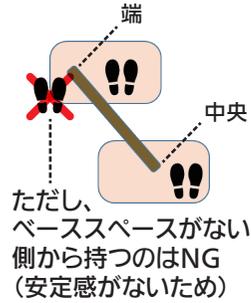


× ひとつのベースに対し 両手すり以外の取付

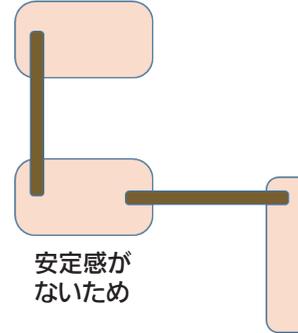


× 両手すりが 途中から片手すり

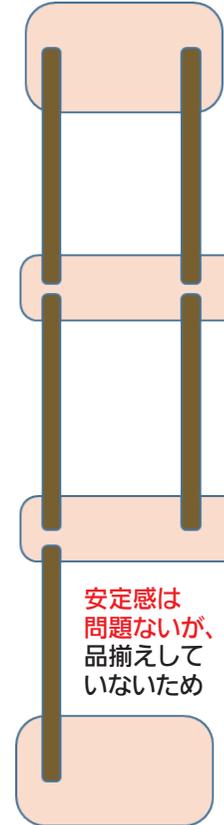


× ロングタイプ3460 よりも長い延長

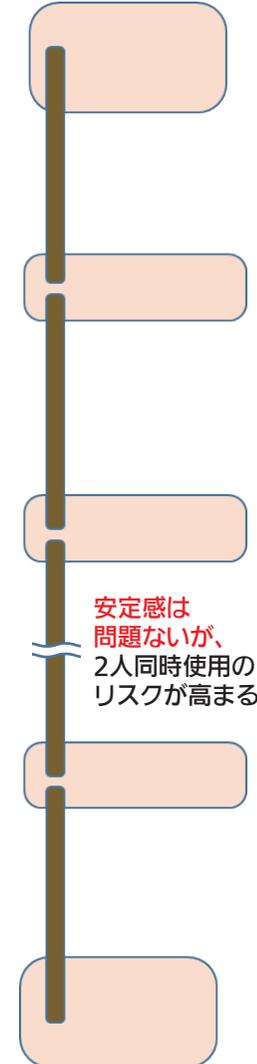


○ 両手すりの 左右の高さが異なる

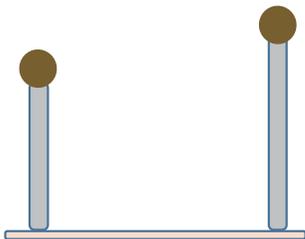

× 支柱位置が異なる (端と反対側の端)

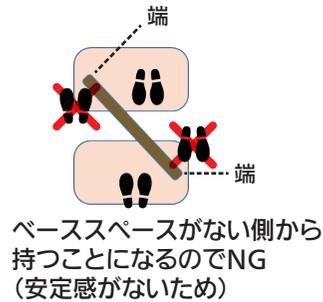


× ひとつのベースに対し 両手すり以外の取付

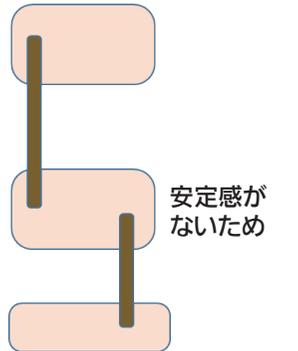


× 両手すりが 途中から片手すり



× ロングタイプ3460 よりも長い延長

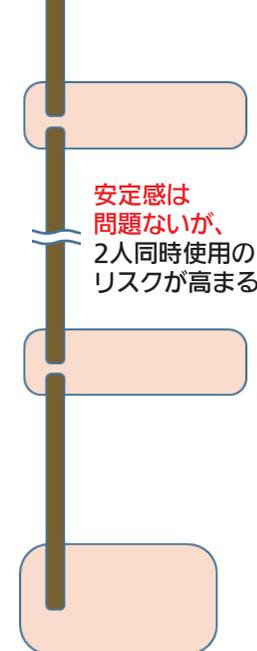

× ベース長側面どうしが 平行ではない

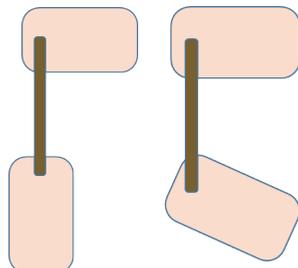

安定感がないため