


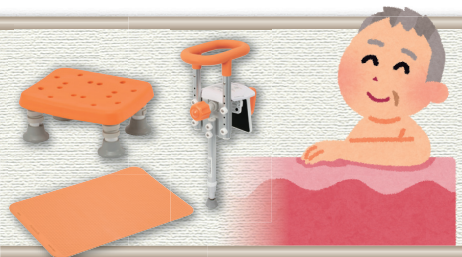

浴槽内の姿勢 のはなし



浴槽内は浮力が働くので注意! 姿勢がくずれやすくなります!



へえっ!?

高齢者の家庭内での
死亡事故No.1は※
溺死なんですよ。

※厚生労働省 2014年人口動態調査より




特に浴槽が長くて広い洋式タイプは
姿勢が安定しないので気をつけてください。

浴槽の背角度が緩やか
↓
身体がずれやすい
↓
浴槽が長いので
脚を突っ張れない
↓
脚が浮いて背中が倒れる
↓
おぼれる




他にもおぼれる原因は、
こんなことが考えられます。

- ・脱水
- ・血圧の急降下による
覚醒度の低下や失神

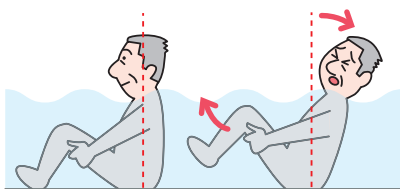

頭の位置が少し後方に傾くだけで脚が浮きます。
(背中と浴槽壁との空間が大きいくほど顕著です)

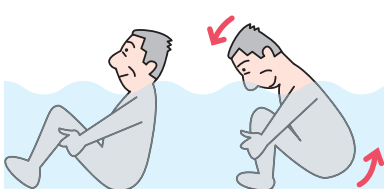

頭の位置が膝よりも前の方に来ると、
自然とお尻が浮いて立ち上がりやすくなります。

■入浴姿勢と浮力の関係

お湯の中では体重が約1/10になり、その多くを
頭部の重さが占めています。なぜなら頭部は水面
よりも上に出ているので、浮力が働か
ないからです。そのため頭部の位置
によって、入浴姿勢も大きく影響を
受けるのです。



浴槽内でおぼれない工夫

Point 1 すべり止めマット を敷く



マットは消耗品なので、表面がすり減ったり
固くなってきたら交換してください。

浴槽の材質や
底の凹凸でマットが
使えないこともあるので
浴槽をチェック
してくださいね。



ずっと
使えたと
思った...



入るとき、マットをしっかり踏みしめていない状態で横方向に
大きな力をかけると、マットが移動することがあるので注意!



特につま先から着地すると、全体重が乗るまでタイムラグが大きく危険です。
深い浴槽や、バスボードから降りるときは気をつけてください。

Point 2 浴槽台 に座る

浴槽台不使用時

前傾姿勢が
とりにくい



浴槽台使用時

前傾姿勢が
とりやすい



これは
安心だ!

浴槽台に座ると前傾しやすくなり
脚が浮かないので、すべりにくいですよ。

立ちくらみにも! /

浴槽台不使用時

湯船から
立ち上がると、
立ちくらみが
するんだ。



危ない!!

浴槽台使用時

スツ



これで
クラクラ
しないので
すむよ。

2段階で、
立ち上がれば
安心ですね。

立ちくらみには、
浴槽台がおすすめです!

ゆっくりつかりたい浴槽内では **安定した姿勢** を保てる工夫をしましょう!

浴槽内で姿勢を保つのに役立つ商品

防かび加工の(ユクリア)シリーズ

防かびタイプのメカニズム

防かび剤が防かびバリアを作る
かび菌の内部への増殖をブロック



※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。

3色から選べる

- オレンジ(D)
- ブルー(A)
- ブラウン(BR)

出入りはもちろん、浴槽内の姿勢もサポート

デモ

入浴グリップ

介護保険
購入対象品目

組立完成品です。
脚付タイプのみ、
脚部の取付が必要です。

最大使用者体重 100kg

幅広い浴槽に対応


- 130
(在来工法
浴槽専用)

- UB専用※
コンパクト
130脚付



ユニットバスには
エプロン部を
押し込まない
UB専用※入浴グリップを!

浴槽カーブにも幅広く対応できるので端によせやすい。

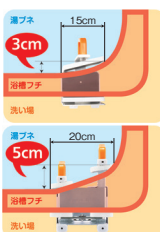

端に寄せると
またぎやすい

横またぎ
ひざ位置低く負担小



入浴姿勢を サポートする 内グリップ付き

浴槽内の
内グリップで、
入浴時の姿勢を
サポートします。



対応浴槽幅・カーブなど事前に詳細をご確認ください。

品名	品番	希望小売価格 (税抜き価格)
130	PN-L12011□	25,500円
UB専用※コンパクト130脚付	PN-L12311□	30,000円

色のご指定は、品番のうしろの□に下記のアルファベットをご指定ください。

(オレンジ：D/ブルー：A/ブラウン：BR)

※UB専用→ユニットバス専用

浴槽台に座って姿勢を安定

デモ

浴槽台

介護保険
購入対象品目

組立完成品

最大使用者体重 100kg


軽量・ソフトの2タイプから選べる

- 軽量レギュラー1220
- ソフトレギュラー1220



設置もかんたん

自重で沈むので湯を張った後でもかんたんに設置できます。

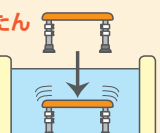

浴室や浴槽内でもすべりにくいミニ吸盤を採用しました。

立ち上がり状態が変化しても、高さ調整が可能



大腿骨頸部骨折などで人工股関節術後は脱臼回避のために座面を高くします


ソフトタイプは座り心地が快適カバーもはずして洗えます。



お尻の肉が
よせた方にも
おすすめ



浴槽台に座ると
前傾姿勢が
とりやすい

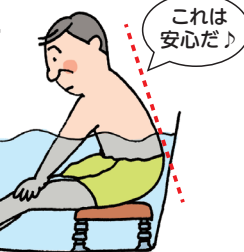

これは
安心だ♪

品名	品番	希望小売価格 (税抜き価格)
軽量レギュラー1220	PN-L11820□	19,000円
ソフトレギュラー1220	PN-L11620□	20,000円


色のご指定は、品番のうしろの□に下記のアルファベットをご指定ください。

(オレンジ：D/ブルー：A/ブラウン：BR)


転倒防止に

すべり止めマット

よりすべりにくなりました

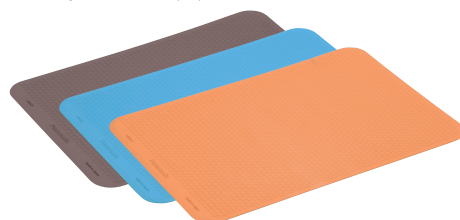

昆沙門亀甲柄(びしゃもんきっこうがら)だから
360度高いグリップ力

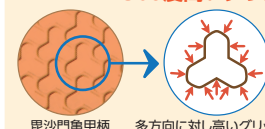

辺が多く多方向に
対し高いグリップ力を
発揮します

ステンレス浴槽にも使用可能

浴槽台と合わせても色が少し薄いので
浴槽内でわかりやすくなっております。



足もとに敷いて、
またぎ動作や
立ち上がり動作を
支えます



品名	品番	希望小売価格 (税抜き価格)
すべり止めマット(M)	PN-L10201□	5,700円
すべり止めマット(L)	PN-L10202□	6,000円

色のご指定は、品番のうしろの□に下記のアルファベットをご指定ください。

(オレンジ：D/ブルー：A/ブラウン：BR)

シャワーチェアも

(ユクリア)



次回は

展示会

こんなところを
チェックしましょう!

デモ

デモ機貸出有商品

詳細は

「介護・生活快適商品カタログ
2017-2018」をご覧ください。

ご用命は

パナソニック エイジフリー株式会社 ケアプロダクツ事業部
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<http://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141
個人のお客様 製品に関するお問合せ

☎ 0120-365887 受付時間9:00~17:30
(土、日、祝日休み)

このチラシの記載内容は2018年8月現在のものです。