



パナソニックの手すり 家の中での設置事例のご紹介

居室&
寝室編

居室

高齢者の転倒・転落事故が多い家庭内の場所はどこだと思いますか？
それは**居室**です。＊慣れた場所でも転倒する危険があります。
事故防止につなげるために、手すりの設置を検討しましょう。

(※高齢社会白書(内閣府)2018年)



クリンディ



手すり幅25cmと場所を取らないので座るスペースもゆったり

日中はリビングで家族と一緒に過ごしたいが
ソファが柔らかく沈むので立ち上がりが困難な方

空間を損なわないデザインでコンパクトなクリンディを選定

ツインディ室内用



玄関から居室に入るときに
手すりがなく椅子を
つたって歩いていた方
(転倒のリスクあり)

動線に合わせて角度調整できる
ツインディ室内用を設置



60～300度まで
30度ピッチで
調整できる

特に**パーキンソン病**の場合、方向転換角度を緩やかにしたり、動く方向が見て分かれると身体が動きやすくなります。
角度調整ができる手すりでの動線づくりがおすすめです。



メンディ

立ち座りの際に
つかまるところが
ないため
転倒リスクがある方

メンディに体重を預けて立ち座りができ、安全だと喜ばれる

前腕がしっかり乗るから、
足腰に掛かる体重が1/3に



握力や脚力が低下している方は面を使うと安定します。




スムーディ屋内用 2950タイプ (手すり長さ 295cm)

出入り時に
つかみやすい端部

手すり高さ
最大85cm
高い位置で持ちたい方にもおすすめ

支柱が端寄りじゃまにならない

ベースがはみ出ないので安心

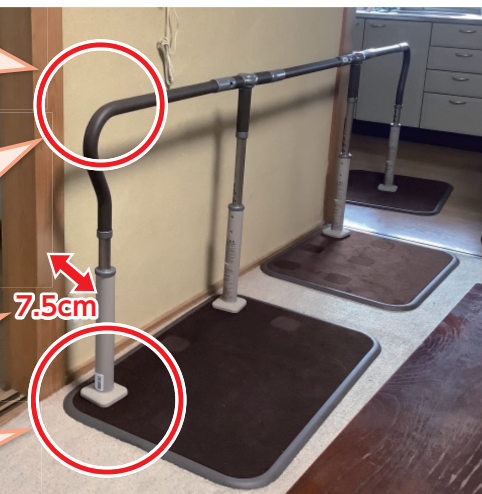

つかまるところがなく転倒リスクがある方

部屋と部屋を結ぶように連結したスムーディ屋内用を設置

寝室

夜間にトイレに起きる回数が増えると、立ちくらみや暗くて見えづらいことによる転倒の心配が増えてきます。手すりのタイプや配置を工夫し、安全に過ごせる環境を整えましょう。



スムーディ屋内用

ベッドからの立ち座りと
ドアまでの移動に不安がある方

立ち上がりから歩き出しまで
握っていただける手すり長さ
ベースがカーペットで冷たくない
ことも選定理由のひとつに



大腿骨頸部骨折術後などで、
両手で持って立ち上がる時などに、
長めの手すりは便利です。



ツインディ室内用

下肢筋力低下により
転倒が多い方

手すりがなくても少し歩けるため、
ベッドから離れた、転倒リスクが
ある位置に設置
移動する際の転倒リスクが
軽減できた



1本支柱なので、足まわりも
引っ掛かりにくく安心

スタンディ

布団からの起き上がり
立ち上がりが困難な方

面部分に手をついて
体をあずけられること
で立ち上がりがス
ムーズに




使用しない時は
折りたためる



スムーディ屋内用 & ツインディ室内用

ベッドから居室外への
移動が困難な方

2種類の手すりを組み合わせ
設置することで、安定して立
ち上がりから移動までできる
ようになった

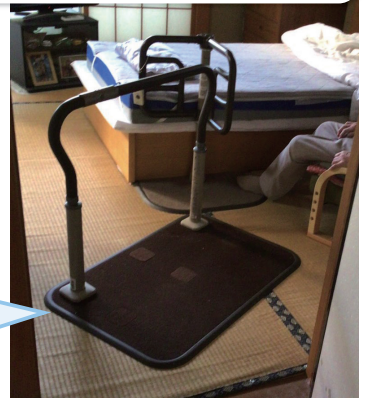

住宅改修で手すりが置けな
い動線にも、レンタル手すり
なら置くだけで簡単に設置

さらに! スムーディ屋内用面手すりなら起き上がりから歩き出しまでサポート



2022年1月
新発売

使用
イメージ



安定して体重を掛けられます



立った後の歩き出しも
そのまま支えられます

福祉用具専門相談員の
手すり選定理由やポイ
ントをまとめた手すり
事例集No.3もぜひご
覧ください。



今回は

プレポの活用方法や、
バックナンバーについて
ご紹介します。



詳細は
「介護・生活快適商品
カタログ2021-2022」
をご覧ください。
上記品揃え以外にも取り揃えております。

ご用命は

当社商品をわかりやすくご紹介

下記QRよりご覧ください。

▶ ご自宅の様々なシーンでの
ご提案動画



▶ ひろがるシリーズの
特長をご紹介



▶ 手すり事例集
No.3はこちら



※データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承願います。

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141
個人のお客様 製品に関するお問合せ

0120-365887 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 | (土、日、祝日休み)

このチラシの記載内容は2022年3月現在のものです。