



パナソニックの手すり 設置事例のご紹介

玄関
編

玄関

靴の脱ぎ履き、立ち座り、段差の昇降などの動作をする玄関には、ご利用者にあった手すりを選定することが大事です。玄関シーンの4つの事例をご紹介します。



スムーディ屋内用 1730タイプ

視力が悪く段差の昇降に不安がある方

手すりを握ったまま段差の昇降ができ、転倒も防止できるようになった

目が見えづらい方やふらつきがある方は、手すりがつながっていると安心・安全です！



スムーディ ロング1700タイプ両手すり

**段差が高いため昇降時にふらつきがある方
(2段で高さ53cm)**

途中の段差にステップベースを置き、
上から下まで手すりを握って移動できる

昇降どちらからでも安全に動作ができるように両手すりを選定



ツインディ玄関用 & クリンディ

**支持物がなく
転倒リスクが高い方**

柱に傷をつけたくないためレンタル手すりを検討

上がりきったあとの移動が不安なため、ツインディ玄関用の手すりの奥行を調整
さらにクリンディも併用



スタンディ

**両側変形性膝関節症により立ち座り動作が不安定な方
(狭いスペースの玄関)**

面に手をつくことで立ち座りの膝の負担が軽減



面部分が折れたためなのでスペースができ、ご家族にも喜ばれています！



高齢になると体力の低下や、筋力の低下、転倒の不安などにより、外出する意欲や機会が低下します。安全に外出するために、手すりを使った環境整備の事例をご紹介します。



スムーディ ステップ伸縮タイプ

両膝関節痛と
腰椎圧迫骨折により
歩行時に痛みがある方

植木を掴んで昇降していた
が手すりを使うことで安全に
昇降できるようになった

膝や腰への負担も軽減



スムーディ ステップタイプ

転倒のリスクがある方
今後車いすになる可能性あり

スロープなどに変更できるよう
レンタル手すりを選定

ステップベースが踏面に
おさまる公道にはみ出ない



スムーディ 標準タイプ

片麻痺のある方

中央支柱にすることで
行き帰り健側で握れる

介助負担が減りご家族も
喜ばれる



スムーディ ロング3460タイプ

9段ある高い階段
転倒を繰り返している方

ステップベースなら狭い踏面に設置
可能

上から下まで手すりを握って移動で
き転倒リスクが減った



玄関シーンにおすすめ!

スムーディ
屋内用面手すり

2022年1月発売!



ベースは小さく
て、面手すりは
折りたたむため
から、狭い玄関
にも置けるわね!



両手すり
開閉操作ピン



設置前



■靴の脱ぎ履きは危険



■框に座ると立ちづらい

設置後



■立ち上がりと昇降をサポート

今回は

新商品 温水洗浄便座付き
補高便座αをご紹介します。



詳細は
「介護・生活快適商品
カタログ2021-2022」
をご覧ください。
上記品揃え以外にも取り揃えております。

当社商品をわかりやすくご紹介
下記QRよりご覧ください。

▶ご自宅の様々なシーンでの
ご提案動画



▶ひろがるシリーズの
特長をご紹介



▶手すり事例集
No.3はこちら



※データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承願います。

ご利用は

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141
個人のお客様 製品に関するお問合せ

0120-365887 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 | (土、日、祝日休み)

このチラシの記載内容は2022年5月現在のものです。