



# 居室内転倒を防止するための手すりのご紹介!

高齢者の**転倒・転落等の事故**の多くは**居室内で発生**しています。  
特に寒くなると身体も動きづらくなり転倒事故も多くなっています。  
今回は居室内での**転倒を防止するレンタル手すり**についてご紹介します!




## 高齢者に多い転倒事故について

### 【高齢者の緊急搬送される原因は?】



### 【どこで事故が多いの?】

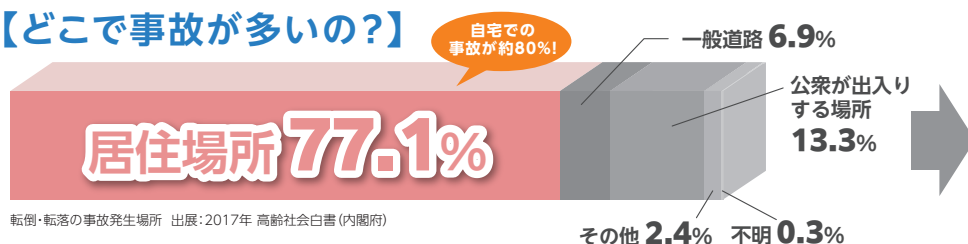

特に**ベッドからの立ち上がり**の他、**ポータブルトイレ**や**車イス**への移乗時に多く発生しています。



たとえばパーキンソン病の方の場合

好き・快適・得意・安心

体が**動きやすくなる**

嫌い・不快・苦手・怖い

体が**動きにくくなる**



パーキンソン病の4大症状

#### 1 振戦

手足が規則的に震える



#### 2 筋固縮(筋強剛)

関節を動かすと抵抗感を示す



#### 3 無動

動きが鈍くなり一つの動作開始に時間がかかる



#### 4 姿勢反射障害

転倒防止が困難




居室内でのシーンに応じたレンタル手すりの一例をご紹介します!


## ベッドからの立ち上がりや急角度での方向転換に

ツインディ<室内用>


居室の動線が重なる部分に置くことで、初期のパーキンソン症状の苦手方向への方向転換をサポートします!

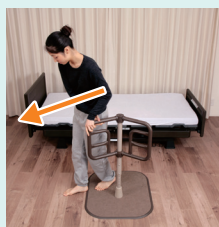

●ベッドからタンスへ

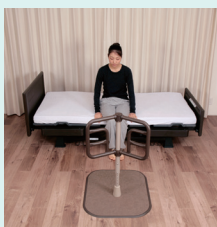

●入口からベッドへ

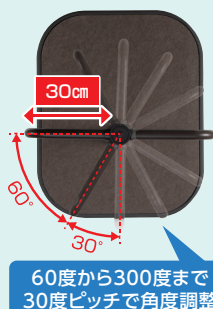

パーキンソン病では自分の動き方や動線が**目で見てイメージ**できると体が動きやすくなることもあります。



進む方向が目で見えてイメージしやすいです。

方向転換角度を穏やかにできます。

# ベッドからの立ち座りやポータブルトイレへの移乗に

スムーディ〈屋内用〉  
らくらくダブル

2本手すりなので、ADLが低下してきた方にも使いやすいです。

## スムーズな立ち上がり



片手すりだと  
立ちづらい  
→両手すり  
で立ちやすい  
(体重が分散できる)

歩き出し・  
方向転換が不安  
→手すりを  
連結できる  
(上下・左右角度変更可能)



フリンディ2台置きより便利  
・ベッドから脚がおろしやすい  
・体の前方で持て、立ちやすい


支柱位置は  
変更できます

## 移乗・立位の安定



片手すりだと  
移乗しづらい  
→両手すり  
で移乗しやすい  
(肩幅で持て、バランスが安定)


下衣着脱時に  
ふらつく  
→手すりに  
寄りかかれる  
(介助時もラク)

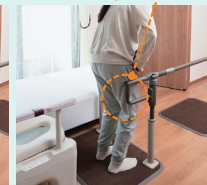

# トイレやキッチン、 居室などへの移動に

スムーディ〈屋内用〉

上下左右に角度も変えられるひろがる手すり。  
室内での伝い歩きを安心サポート。

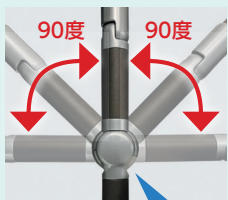

左右に角度調整可能  
(5度ピッチ)



中央支柱で  
往復健側対応

# 低い姿勢からの 立ち上がりと歩き出しに

スムーディ〈屋内用〉  
面手すり

面に手をつけて立ちやすく、  
その後の伝い歩きも支えます。



安定し体重を掛けられます



立ったあとも支えます



そのまま、歩き出しもサポート



玄関でも!

寒くなると居室内で過ごす時間も増えます。転倒対策も万全にしましょう!



詳細は  
「介護・生活快適商品  
カタログ(2023-2024)」  
をご覧ください。

上記品揃え以外も取り揃えております。



当社商品をわかりやすくご紹介  
下記QRよりご覧ください。

らくらく  
ダブルの  
ご紹介



ひろがるシリーズの特長をご紹介



※データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご用命は

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141

個人のお客様 製品に関するお問合せ

フリーダイヤル 0120-365887 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00  
時間 | (土、日、祝日休み)

このチラシの記載内容は2024年1月現在のものです。