



新商品 ポータブルトイレ ラフィーネキューブと スムーディ<Pトイレ用>のご紹介

パナソニックが提案するあたらしいポータブルトイレ&手すりを
1月31日に発売しました! 新商品の特長と開発担当者の思いをご紹介します!



NEW ラフィーネキューブ&スムーディ<Pトイレ用>



【ラフィーネキューブ】
バケツタイプ:
47,300円(税込)~
手動ラップタイプ:
88,550円(税込)~
【スムーディ<Pトイレ用>】
101,090円(税込)~



ご利用者、ご家族に安心とゆとりをもたらす
新しいポータブルトイレが新登場!

新提案


ラフィーネ
Cub
×
スムーディ

介護保険
購入補助対象品
(ポータブルトイレ)

介護保険
貸与補助対象品
(手すり)




ポータブルトイレ部分はバケツタイプ、手動ラップタイプの2タイプ

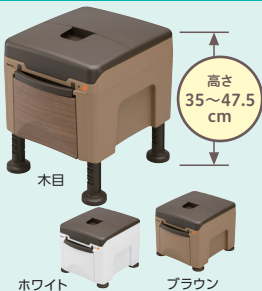

- 高さ調整可能(35~47.5cm、2.5cmピッチ)
- 単体でも使用可能

バケツタイプも洗やすい!

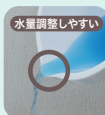

撥水加工で、回し洗いしやすい形状
なので汚れを落としやすいです

持ち手、注ぎ口とも流しやすい
ように工夫をしています

手すり部分

ひじ掛けは長め・ゆったり内寸で使いやすい



● 従来品の当社ポータブル
トイレより約3cm
ひじ掛けが長いです

● 従来品の当社ポータブル
トイレよりひじ掛け内寸が
ゆったりです

開発担当者にラフィーネ キューブへの思いを聞きました!



商品開発への“思い”

ポータブルトイレのお困りごとの一つである排泄物処理方法に着目し、ラフィーネキューブと
いう新たな商品を考えました。従来のバケツタイプのほか、新しく品揃えしたラップタイプで
は、処理袋を使用可能にすることでニオイ漏れを防ぎ、袋のまま廃棄できるようにしました。
また手動で処理袋を熱圧着することにより、処理時間も約10秒と短縮化を図りました。

新商品の“こだわりポイント”

今まで価格の面で、ラップタイプのポータブルトイレを諦めていた方々にもご使用いただき
たいという思いから、熱圧着方法を「手動」にし、商品の価格を抑えました。
こだわりポイントとして、便座の中に手を入れなくても排泄物が入った処理袋を取り出せる
よう、トイレの前側に開閉するカバーを取り付けております。



新提案のポータブルトイレ&手すりでさまざまな課題解決に!



課題 1

ポータブルトイレを移乗時の支えにしてしまい
転倒・転落する事故が発生しています




キューブなら、転倒リスクを減らし、
介助を受けずに自分で移乗しやすくなります

介助グリップのみ



介助グリップ
+ PTトイレ手すり

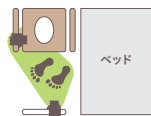

安定感アップ・
支持基底面拡大

ポータブルトイレを支えに
できるので支持基底面が広がり、
動作が安定します

いろいろなところを持てる



縦手すり部分を使うと、浅座りや
使フタの開閉がしやすくなります

立位時にも持てる




立位移乗のときも、ひじ掛けよりも
高い位置で持てるので、動作しやすいです

課題 2

ポータブルトイレをベッド横のすぐ近くに
置くことによる弊害が発生しています



キューブなら、ポータブルトイレを“少し”離すことで、
歩行機会づくりや離床・介助スペース確保ができます

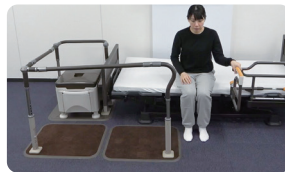

一連の動作がしやすい・
ベッド横のスペースひろびろ

手すりをつなげることで
ベッド足元側などに置きやすくなります



方向転換や
立ち座りもしやすい

排泄のたびに
一連の動作が
リハビリになります

- 1 フタ開け
- 2 方向転換
- 3 着座
- 4 立ち上がり

課題 3

排泄物処理が導入時の想定以上に
ご家族の心身負担、ご家族にお任せする
ご利用者の精神的負担になっています



キューブの手動ラップタイプなら!

処理袋で簡単に廃棄できるので、
排泄物処理負担を
大きく軽減できます

わずか10秒!
かんたんラッピング



臭いもれ少なく
掃除も不要!
そのまま捨てやすい

処理袋は熱圧着されるので
排泄物がこぼれることや
臭い漏れを防げます



ラフィーネキューブは
手動式ラップタイプと
バケツタイプを品揃え
しています



新商品 ラフィーネキューブ、スムーディ〈PTトイレ用〉

ラフィーネ

Cub



詳しい情報は
こちら



当社商品をわかりやすくご紹介

下記QRよりご覧ください。

▶ ひろがる
シリーズの
特長をご紹介



▶ エイサボの
ご紹介動画



※データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご用命は

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141

個人のお客様 製品に関するお問合せ

フリーダイヤル **0120-365887** 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 | (土、日、祝日休み)

このチラシの記載内容は2024年2月現在のものです。