


## 取扱説明書



### リショーン用サイドレール 品番：PN-S106042

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

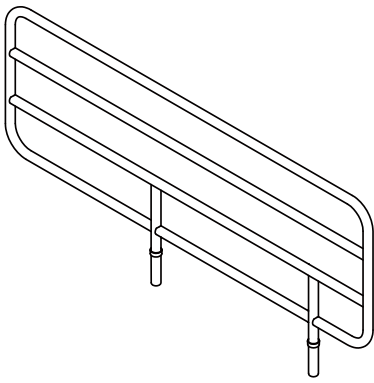



- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に下記の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


## 安全上のご注意


必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


- 誤った施工をした時に生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)


 <b>警告</b> 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 してはいけない内容です。
 <b>注意</b> 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	 実行しなければならない内容です。

 **警告**


 **禁止**


- リショーンPlus以外に使用しない
- 専用のサイドレール以外と組み合わせて使用しない  
安全なすき間が確保できず、事故・けがの原因となります。
- 首などを柵のすき間にはさみ込まない
- すき間に入った状態でベッドを操作しない
- ボードとのすき間に頭などを入れない  
はさまれて、事故・けがの原因となります。
- サイドレールに腰を掛けたり、もたれたり、ぶら下がったりしない
- サイドレールを手すりとして持って、移動などしない  
バランスを崩して転倒し、事故・けがの原因となります。
- オーバーテーブルを使用するときは、サイドレール端部(R部)の上に置かない  
脱落したり、物がこぼれたりする原因となります。
- 12歳以下のお子様や自分で適切に操作できない方には操作をさせない  
思わぬ事故・けがの原因となります。
- お客様による修理・分解・改造はしない  
思わぬ事故・けがの原因となります。
- ストーブなどの火気類に製品を近づけない  
火災や変色・変形の原因となります。

 **警告**


 **必ず守る**

- サイドレールは取り付け穴にきちんと挿入して使用する  
バランスを崩して転倒し、事故・けがの原因となります。
- サイドレールは正しい向きで使用する  
安全なすき間が確保できず、事故・けがの原因となります。
- ベッドから移動するときは、衣類の引っ掛かりに注意し、ゆっくりと行動する  
衣類が引っ掛かり、事故・けがの原因となります。

 **注意**

 **禁止**

- 座位が保てない方には使用しない  
倒れ込みにより、事故・けがの原因となります。
- サイドレールを持ってベッドを移動しない  
負荷が掛かり、事故・けがの原因となります。

 **必ず守る**

- 専用マットレスを使用の上、5mm以上の厚みの物をマットレスの上にしかないでください。  
サイドレールを乗り越えてベッドから転落する原因となります。

# 仕様

品名	リショーン用サイドレール
品番	PN-S106042
取付ピッチ	430mm
長さ	996mm
高さ	472mm
重量	2.5kg

## 取り付け方向と組み合わせ

- サイドレールは正しい向きで取り付けてください。


### 警告




禁止

- 専用のサイドレール以外と組み合わせ使用しない  
安全なすき間が確保できず、事故・けがの原因となります。

○正しい向きの取付け

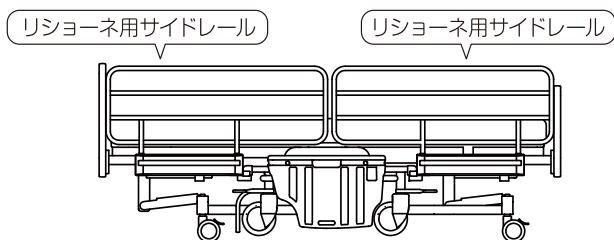


×間違った向きの取付け

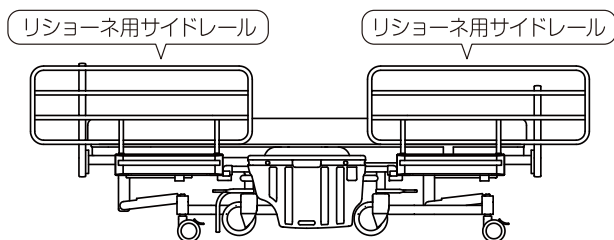

## 取り付けかた

1. 取り付け穴のキャップを外す。
  2. 根元までしっかりと差し込みます。
- サイドレールを取り付けないときは、必ずキャップを取り付けてください。

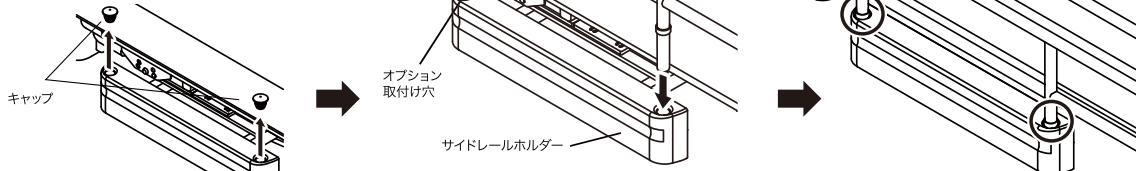

## お手入れのしかた

※ つねに清潔に保つように清掃してください。

- 1 中性洗剤を適度にうすめスポンジか柔らかい布に含ませ、汚れをきれいにふき取る。
- 2 乾いた布でからぶきする。

### 注意



必ず守る

- 必ず中性洗剤を使用する
- オゾン消毒はしない
- 水洗いはしない  
守らないと、製品を傷める原因となります。

## 故障かな？と思ったとき

- 修理を依頼される前に、下記の項目をチェックしてください。

症状	チェック内容	処理
サイドレールが差し込みにくい	オプション取り付け穴にゴミが混入していないか	ゴミなどが混入している場合は、取り除く。それでも差し込みにくい場合は、使用を中止し、販売店にご相談ください。
サイドレールが変形した	—————	使用を中止し、販売店にご相談ください。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

## 修理を依頼されるときは

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の2ページにしたがってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、お買い上げの販売店にご依頼ください。

### ●保証期間中は

お買い上げの販売店まで、製品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 保証書

この製品には保証書を添付しております。所定の事項の記入および記載内容をご確認のいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、このサイドレールの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お客様ご相談窓口のご案内

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お手入れ・お取扱いなどのご相談は、  
まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリー株式会社

フリーダイヤル



0120-365887

●受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日休み)

<http://panasonic.co.jp/es/pesalt/>

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2014-2016

PN-S10604241P  
T1216-1