

保管用


保証書別添付

介護保険  
購入対象  
品目

## 取扱説明書

## 家具調トイレ 座楽アウポット

- ひじ掛けはね上げ
- プラスチック便座 品番 PN-L21401
  - 長穴プラスチック便座 品番 PN-L21406
  - ソフト便座 品番 PN-L21402
  - あたたか便座 品番 PN-L21403
  - 脱臭プラスチック便座 品番 PN-L21411
  - 脱臭長穴プラスチック便座 品番 PN-L21416
  - 脱臭ソフト便座 品番 PN-L21412
  - 脱臭あたたか便座 品番 PN-L21413

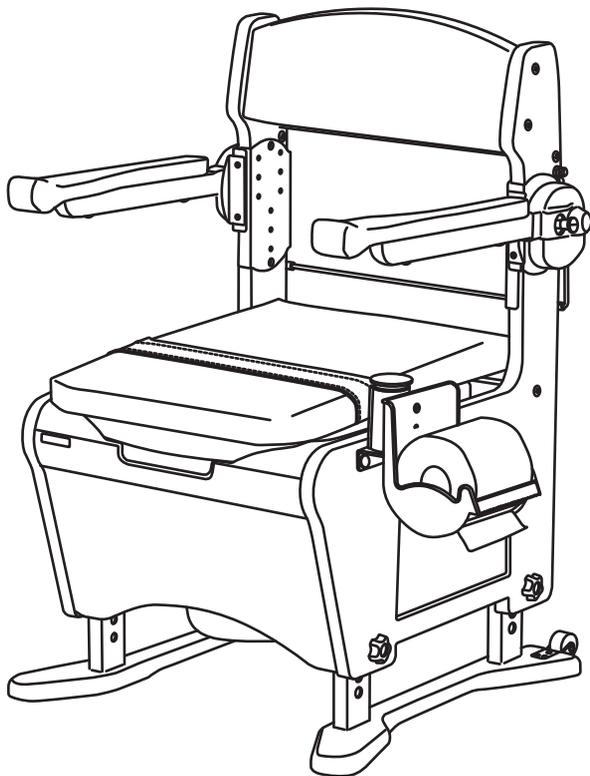

### もくじ

●安全上のご注意	.....	2
●各部の名称	.....	5
●部材・付属品一覧	.....	5
●商品寸法図	.....	6
<hr/>		
●組み立てかた	.....	6
●ご使用方法	.....	9
<hr/>		
●お手入れ方法	.....	12
<hr/>		
●故障かな?と思った時	.....	14
●仕様	.....	14
●保証とアフターサービス	.....	15
●お客様ご相談窓口のご案内	.....	16

**ご使用になる前に必ずお読みください。**

最大使用者体重:100kg以下

このたびは、家具調トイレ 座楽アウポットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# ■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。



## 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 警告

  
必ず守る

■ 座る際や、使用後立ち上がろうとする際などに、ご使用者自身が**身体の安全性を十分に確保できない場合は介助者が付き添う。**

転倒や、ケガのおそれがあります。



  
禁止

■ **すき間や開口部に身体の一部をはさまない。**

ご使用者の心身の状態や利用状況によって、すき間にはさまれ生命に関わる大きな事故につながる可能性があります。特に、頭部や首、腕や足がはさまれないよう十分ご注意ください。



  
必ず守る

■ **必ず平坦な場所で使用する。**

滑りやすい場所や安定の悪い場所に設置すると、転倒やケガのおそれがあります。

  
禁止

■ **体重が100kgを超える方は使用しない。**

本体が破損し、ケガのおそれがあります。

  
禁止

■ **商品梱包用のポリ袋やシートをかぶらない。**

窒息するおそれがあります。

  
禁止

■ **トイレ、座いすとしての用途以外には使用しない。**

子供の遊び道具や踏み台等として使用すると破損やケガのおそれがあります。

  
禁止

■ **浴室内など、湿気の高い場所には設置しない。**

故障や感電、火災の原因になります。

  
禁止

■ **横からもたれかからない。**

移動の際にひじ掛けにつかまると転倒しケガのおそれがあります。家具調トイレまでの移動が困難な場合は介助者の付き添いが必要です。

  
禁止

■ **ひじ掛けや、背もたれなどにつかまったり、身体を支えるために使用しない。**

破損やケガのおそれがあります。

  
分解禁止

■ **絶対に分解したり、修理、改造はしない。部品の代用品は使用しない。**

本体が正常にはたらかず、破損やケガのおそれがあります。また、感電、火災の原因にもなります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

# 警告

あたたか便座/脱臭プラスチック便座/脱臭長穴プラスチック便座/脱臭ソフト便座/脱臭あたたか便座



- **お手入れの際、あるいは長期間ご使用にならない場合は必ず電源プラグ、ACアダプターをコンセントから抜く。**  
故障や感電、火災の原因になります。
- **電源プラグ、ACアダプターは根元まで確実に差し込む。**  
故障や感電、火災の原因になります。
- **コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以上で使わない。**  
故障や感電、火災の原因になります。
- **電源プラグ、ACアダプターのほこり等は定期的にとる。**  
電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。  
電源プラグ、ACアダプターを抜き、乾いた布でふいて下さい。

あたたか便座/脱臭プラスチック便座/脱臭長穴プラスチック便座/脱臭ソフト便座/脱臭あたたか便座



禁止

- **いたんだ電源プラグ、ACアダプター、電源コード、ゆるんだコンセントは使用しない。**  
故障や感電、火災の原因になります。
- **濡れた手で電源プラグ、ACアダプターを抜いたり接続をしない。**  
故障や感電、火災の原因になります。
- **電源コード、コントローラーコードを本体の下敷きにしない。**  
電源コードを無理に曲げる、引っ張る、ねじる、傷つける、加工する等を行わない。  
また電源コードやコントローラーコードを束ねたり、傷んだまま使用しない。  
故障や感電、火災の原因になります。

あたたか便座/脱臭プラスチック便座/脱臭長穴プラスチック便座/脱臭ソフト便座/脱臭あたたか便座



水ぬれ禁止

- **あたたか便座、あたたか便座コントローラー、電源プラグ、脱臭器、ACアダプター、脱臭器センサーに汚水や水をかけない。**  
故障や感電、火災の原因になります。
- **あたたか便座、ソフト便座、脱臭器は丸洗いしない。**  
故障や感電、火災の原因になります。

# 注意



必ず守る

- **ご使用者の身体状況に応じて各部品を調整する。**  
調整が不適切な状態で使用すると転倒やケガのおそれがあります。  
各部品の調整はお買い上げの販売店かケアマネージャーなどの専門家に  
ご相談ください。



必ず守る


- **便座を開閉する際、あるいはトイレポット、防汚トレイを取り出す際には座面が倒れてこないことを確認する。**  
座面が倒れると指などはさんでケガをすることがあります。



禁止

- **座面を開閉するときには側面や座面の折れ目などは持たない。**

側面や座面の折れ目を持つとひじ掛けや本体に指をはさんでケガをすることがあります。

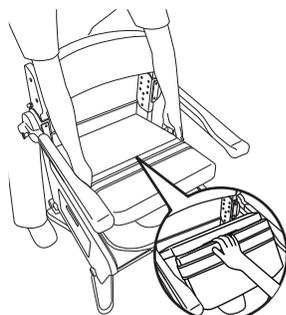

必ず守る

- **ひじ掛けをはね上げたり降ろしたりした後はロックを必ず確認する。**  
ロックされていないと腕や体等をはさんだりするおそれがあります。



必ず守る

- **各部の取り付け箇所やネジがゆるんでいないか、時々点検する。**  
本体が正常にはたらかず、破損またはケガをすることがあります。

# ⚠ 注意



■便座の上に乗ったり  
便座を乱暴に開閉しない。  
故障や破損、ケガの原因となります。



■本体や便座が破損したときは  
使用しない。  
故障や破損、ケガの原因となります。




■人や物をのせたまま移動しない。  
移動中に落下するなど  
故障や破損、ケガの原因となります。




■本体に中性洗剤以外の洗剤、  
シンナー、ベンジン、薬品などを  
用いて清掃をしない。  
割れてケガをしたり、感電の原因になります。



■屋外に放置したり  
直射日光に当てたりしない。  
色あせやひび割れ、破損の原因となります。

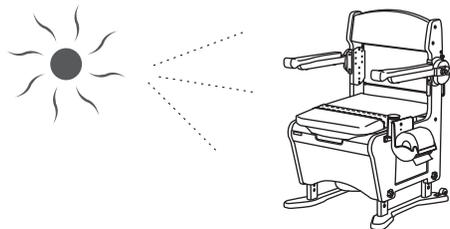

■火気に近づけない。  
火災や変形の原因となります。

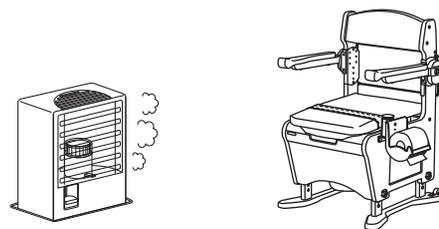

■トイレポットの中に水や汚物を入れたまま、本体を移動させたり  
座面の高さ調整を行わない。  
内容物がこぼれ、床や衣服を汚すおそれがあります。



必ず守る

あたたか便座/脱臭あたたか便座

■低温やけどに注意する。

便座の同じ場所に長時間皮膚がふれていると低温やけどのおそれがあります。  
長時間便座に座るときはあたたか便座コントローラーの温度調整つまみを「低め」にしてください。  
【次のような方は特にご注意ください。】

ご年配の方、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、  
かぜ薬など)を服用された方、深酒、疲労の激しい方。

■長時間イスとして使われる場合は、便座の温度を低くする。

便座があたたかい状態で、便フタに長時間座ると便座と座面が、はりつく事があります。



あたたか便座/脱臭あたたか便座

■あたたか便座は、便座にカバーをかけて使用しない。

本体の温度が上昇し、故障、感電の原因になります。


## 脱臭器の取り扱いについて

脱臭プラスチック便座/脱臭長穴プラスチック便座/脱臭ソフト便座/脱臭あたたか便座

下記のような状態で使用すると脱臭器が誤動作を起こすおそれがあります。

- 脱臭器センサーの赤外線センサー面は傷つけないように十分注意する。
- 本品付近に照明器具を設置しない。
- 本品付近の壁は、金属板などの鏡面のものは避ける。
- 太陽光や照明灯などが直接、赤外線センサー面に当たらないように設置する。
- 赤外線センサー面が汚れたら、やわらかな布で掃除する。
- インバーター照明により、脱臭器が誤作動をおこす場合があります。
- 脱臭器センサーの感知距離は着衣の色により異なります。  
黒っぽい着衣では感知距離が短くなる場合があります。
- 脱臭器センサーの矢印の方向が間違っていると、脱臭器が止まらない事があります。(8項参照)


# 各部の名称

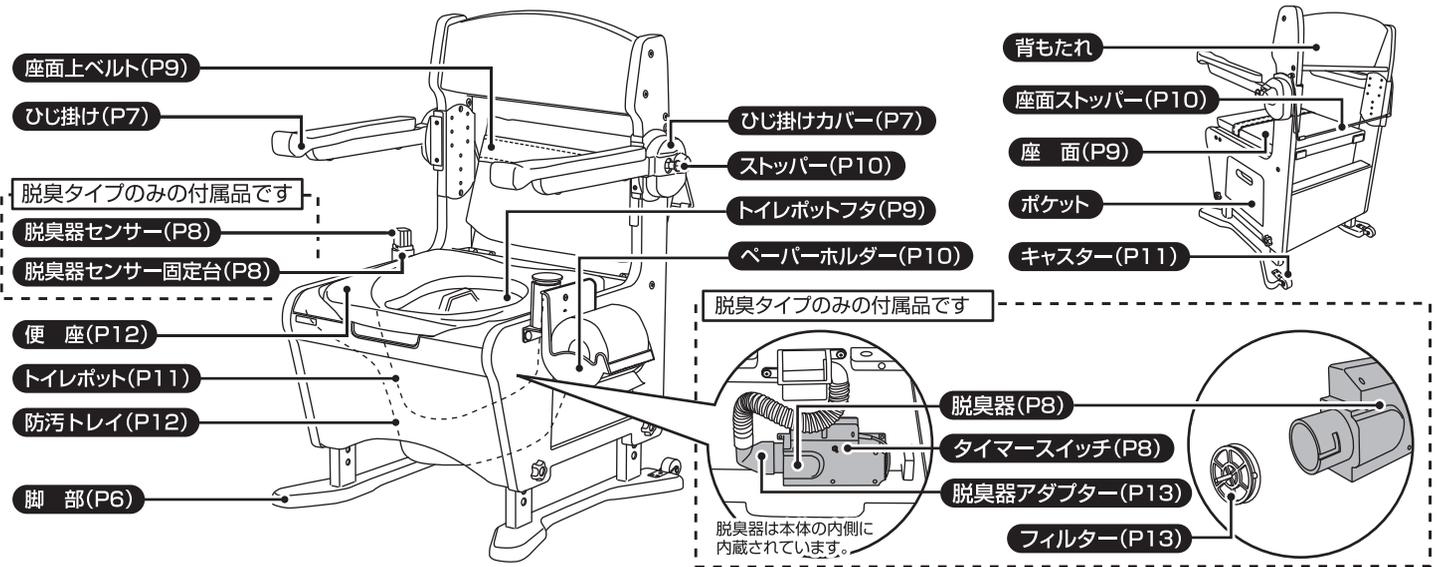

# 部材・付属品一覧

組み立て前には必ず同梱されている部材・付属品をご確認ください。

本体  
1台

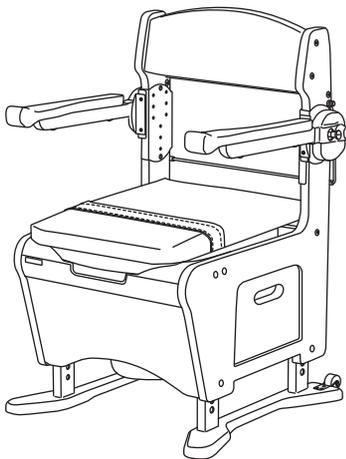

※ひじ掛け、脚は本体に  
あらかじめ取り付けられています。

本体にあらかじめ  
取り付けられています

トイレポットフタ  
1個



トイレポット本体  
1個



防汚トレイ  
1個



別途梱包の上、トイレポット  
の中に入っています


ペーパーホルダー  
取り付け台  
1個



ペーパーホルダー  
取り付けネジ  
2個



ペーパーホルダー  
1個

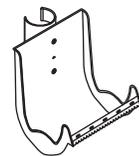

取扱説明書  
1冊



トイレポットの中に入っています

消臭液  
1本



品番: VALTBN5B

便座カバー  
1枚




品番: VALTBCKBE

※あたたか便座タイプ  
には付属しません。


あたたか便座タイプのための付属品です

あたたか便座コントローラー

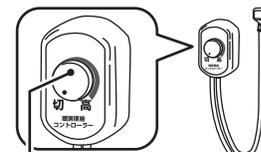

温度調節ツマミ

電源プラグ

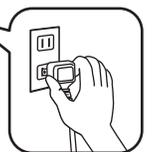

あたたか便座本体  
※防汚トレイに  
取り付けられています。



脱臭タイプのための付属品です

脱臭器センサー  
1個



赤外線  
センサー面

※トイレポットの中  
に入っています。

センサー固定具  
1個



※本体に取り付け  
ています。

ケーブル固定具  
1個



※トイレポットの中  
に入っています。


ACアダプター  
1個



※トイレポットの中  
に入っています。

コントローラー取付板

表

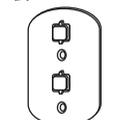

※裏面に両面テープを  
貼ってご利用ください。

裏



両面テープ




取り付けビス  
(2本)



両面テープ  
(2枚)


# 商品寸法図

立体図

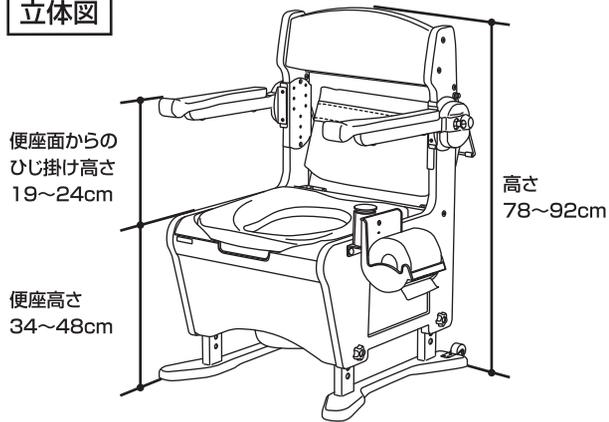


※座面クッションの  
高さは便座高さ+3cmです。

上面図

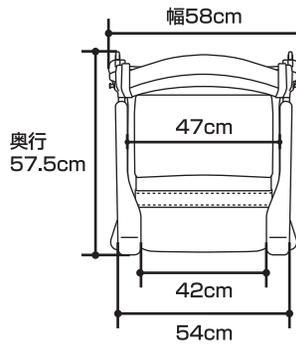


便座寸法図

- プラスチック便座
- ソフト便座
- あたたか便座

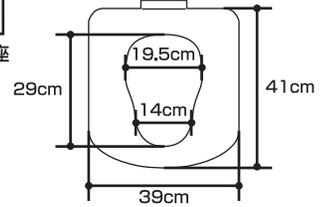

- 長穴プラスチック便座

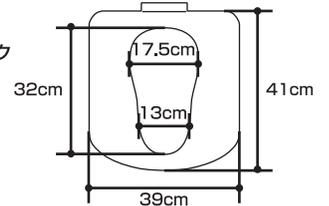

## 組み立てかた


本体を組み立てる

### 1 便座の高さ調整方法

- 便座の高さは34~48cmまで2cm間隔で8段階の調整ができます。
- 脚はあらかじめ便座の高さが34cmの位置に取り付けてあります。
- 前後に3度傾斜をつける事ができます。
- 固定するときには仮止めし、平坦な床の上におき脚がすき間なく床面に接していることを確認し全てのノブボルトを完全に締め付けてください。


#### 座面を水平にする場合

- 前後のノブボルトを取りはずしご利用者の排泄を行いやすい座面高さに調整してください。

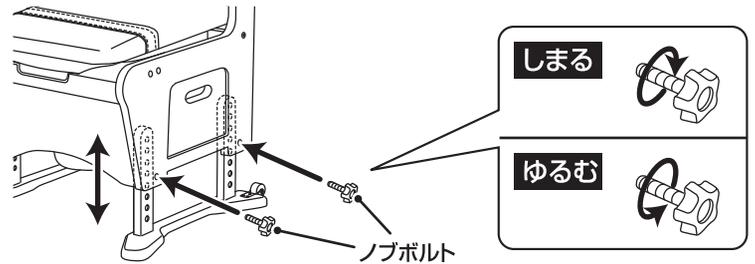


#### 前側に傾斜をつける場合

- ①希望の高さで脚の前側を仮固定してください。
- ②前側より1段高い穴で脚の後ろ側を仮固定してください。
- ③前後のノブボルトを完全に固定してください。

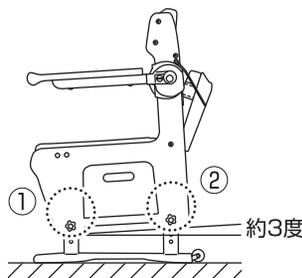

#### 後側に傾斜をつける場合

- ①希望の高さで脚の前側を仮固定してください。
- ②前側より1段低い穴で脚の後ろ側を仮固定してください。
- ③前後のノブボルトを完全に固定してください。

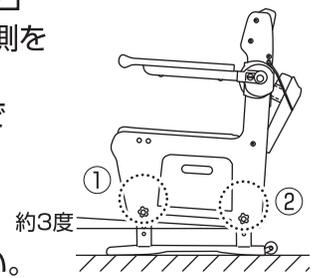

注意

#### ■前後の脚の高低差は一段までにする。

二段以上の高低差をつけると立ち座りしにくくなったり安定した座位姿勢を保つことができなくなります。また脚が破損するおそれがあります。

#### ■高さ調整の際は、必ず左右の脚が同じ高さになるように、ネジで確実に固定する。

本体が不安定になり、転倒したり、けがの原因になります。


お知らせ

#### ■穴に「塗料・木くず」が入ったまま取り付けると隙間が出る場合があります。

「塗料・木くず」を除去してください。

## 2 ひじ掛けの高さ調整方法


- ひじ掛けの高さは19~24cmまで2.5cm間隔で3段階の調整ができます。
- ひじ掛けはあらかじめ便座からの高さ24cmの位置に取り付けてあります。
- ひじ掛けの高さは右図を参照してください。

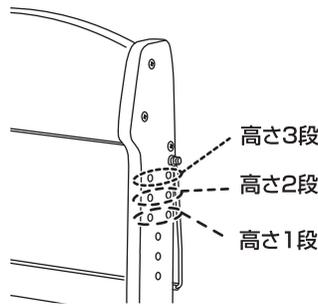

高さ調整穴	ひじ掛け高さ
高さ3段	24cm
高さ2段	21.5cm
高さ1段	19cm

### 1 ひじ掛けカバーを取りはずす


ひじ掛けカバーは、裏側に2ヶ所のツメで固定されています。  
ツメを外向きに広げ取りはずしてください。

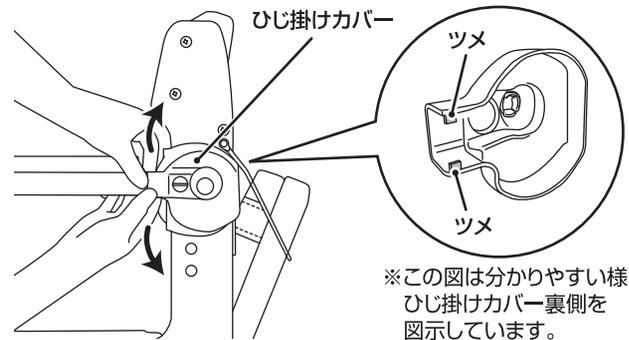

※この図は分かりやすい様にひじ掛けカバー裏側を図示しています。

### 2 ひじ掛けを取りはずす

3ヶ所のネジをプラスドライバーではずし、ネジ位置を目的の高さに変えてください。

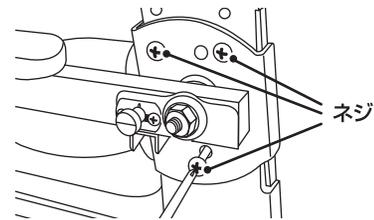


### 3 ひじ掛けの固定

ひじ掛けストッパーをフリー位置に合わせ  
(P10 **3** ひじ掛けをはね上げる／降ろす  
の項目を参照ください。)  
片ひじ3ヶ所のネジを締め  
ひじ掛けカバーをはめ込んでください。


## 3 付属の便座カバーを取り付ける

■あたたか便座タイプには付属していません


- ①便座を立ててカバーを裏返してください。

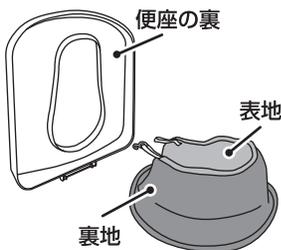

- ②カバーのフック部が下になるようにし、便座穴からカバーを引出してください。

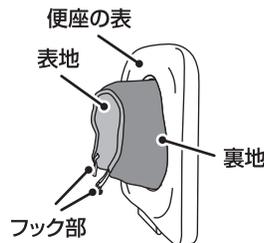


- ③フックを便座の表からヒンジ部にまわしフックを引っ掛けてください。

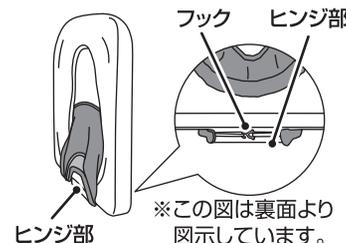


※この図は裏面より図示しています。


- ④カバーを便座の肩部に引っ張りひっかけてください。

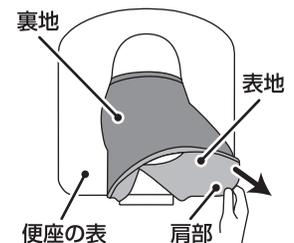

- ⑤カバーを便座の逆の肩部にひっかけてください。

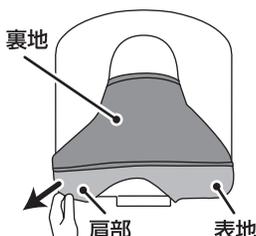


- ⑥カバーを便座の先端部に引っ張りひっかけてください。

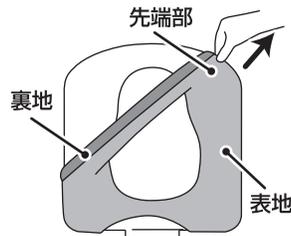

- ⑦カバーを便座の逆の先端部にひっかきしわ、たるみをのばしてください。



- パイプを外せば洗濯機で丸洗いができます。洗濯後は風通しの良い所で陰干してください。

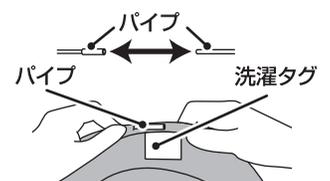


※洗濯タグにパイプ通し口の目印を記載しています。


## 4 ペーパーホルダーを取り付ける

- プラスドライバーをご用意してください
- 左右どちら側にも取り付けることができます

- ① ペーパーホルダー取り付け台を本体に取り付け、ネジで固定してください。

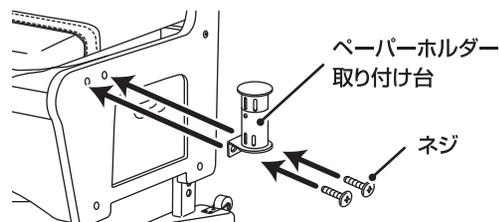

- ② ペーパーホルダー取り付け台にペーパーホルダーを取り付けてください。

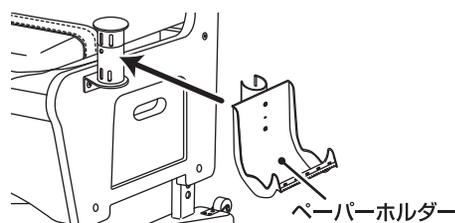


5～8 は、脱臭タイプの説明になります。


## 5 脱臭タイマーの変更方法

- 脱臭タイマーは60分、15分に設定ができます。
- 出荷時の脱臭タイマーは60分に設定されています。

- ① 防汚トレイを上へ持ち上げ取りはずしてください。

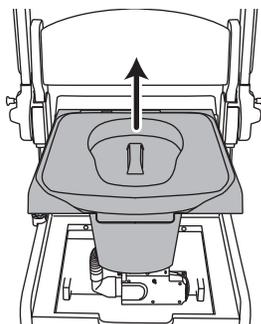

- ② お好みの脱臭時間に合わせ、脱臭タイマースイッチをスライドさせてください。

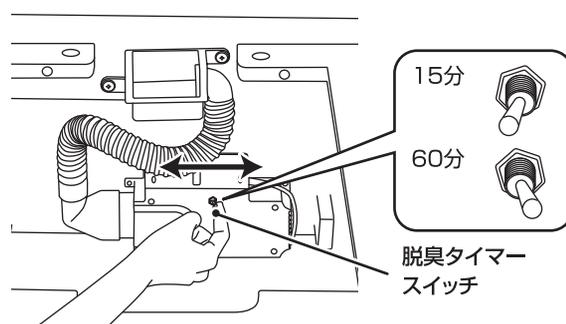

## 6 脱臭器センサーを取り付ける


- プラスドライバーをご用意してください
- 左右どちら側にも取り付けることができます

- センサー固定具は出荷時、右側に取り付けています。


### 1 センサー固定具の取り付け

センサー固定具を本体のセンサー固定部にネジで取り付けてください。

#### 右側への取り付けの場合

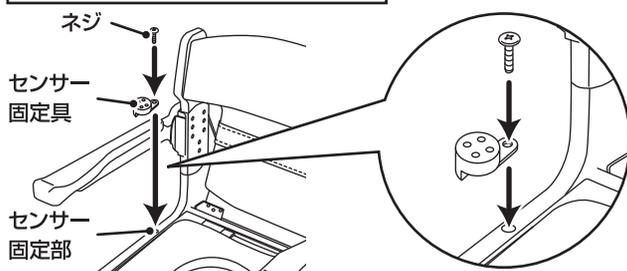


#### 左側への取り付けの場合

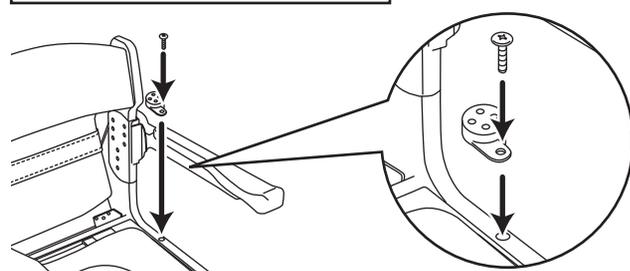


### 2 脱臭器センサーの取り付け

脱臭器センサーの矢印は座面を降ろした時の、座面側面にある黒テープに向くようにセンサー固定具の穴に差し込んでください。

#### 右側への取り付けの場合

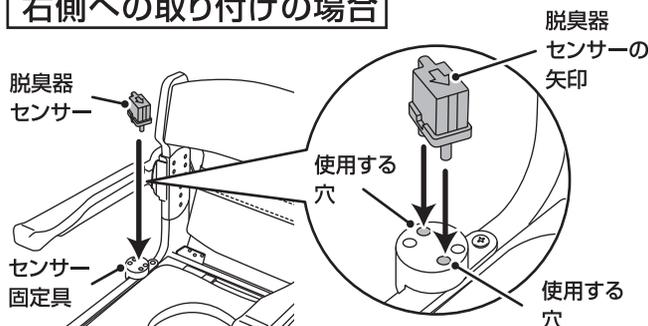


#### 左側への取り付けの場合

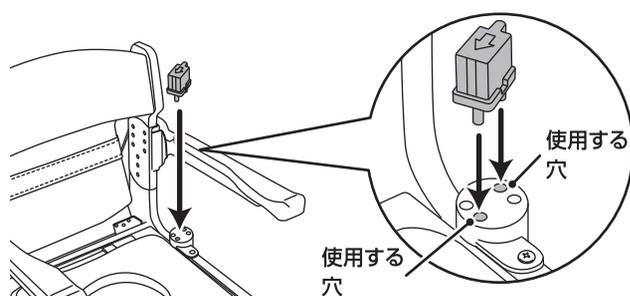


## 7 脱臭器センサープラグ、ACアダプタープラグを接続する

- 本体背面にケーブル固定具を貼付け脱臭器センサーのケーブルをまとめてください。
- 脱臭器センサープラグを脱臭器センサープラグ差し込み口(ケーブルが長い方)にACアダプタープラグをACアダプタープラグ差し込み口(ケーブルが短い方)に差し込んでください。

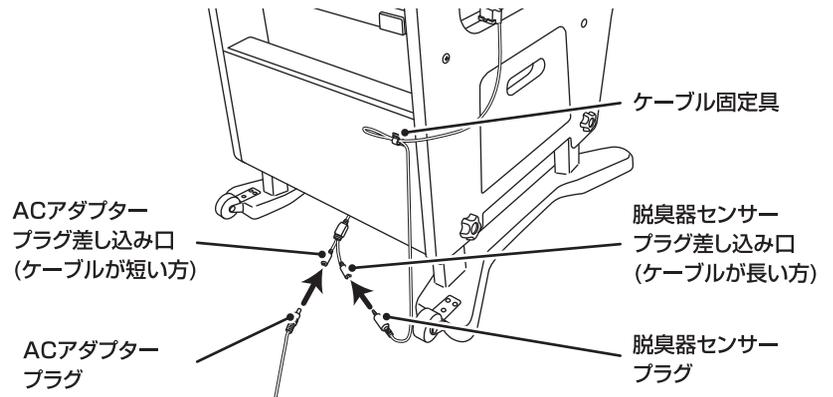

## 8 ACアダプターをコンセントに差し込む

- ACアダプターをお近くの100Vコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

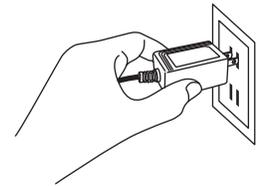

9 は、あたたか便座タイプの説明になります。

## 9 あたたか便座コントローラーを設置する


- あたたか便座コントローラーはトイレ側面、後ろ脚など操作しやすい、平らな位置にコントローラー取り付け板を固定し、取り付けてください。
- 取り付け後、あたたか便座コントローラーがしっかりと固定されている事、便座や便フタの開閉時に、あたたか便座のコードがはさまれない事を確認してください。

## ■ ご使用方法 ■

ご使用前に、一度、健常者の方が使い勝手のチェックをされることをおすすめいたします。

## 1 座面を開け、便座をあげてトイレポットフタをはずす

- ①座面上ベルトを持ってください。
- ②座面を持ち上げ開いてください。
- ③便座を上げトイレポットフタをはずしてください。

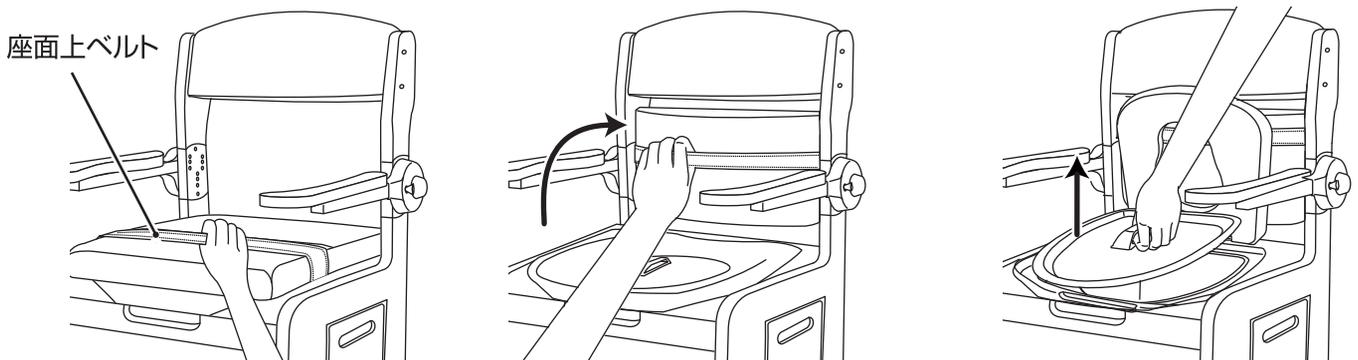


## 2 トイレポットに水と消臭液を入れる

- ポットに水1.5~2リットルを入れ、消臭液を溶かしてください。
- 脱臭タイプは消臭液を併用することで、夜間など長時間汚物の処理ができない場合も脱臭効果を持続させることができます。


### 3 ひじ掛けをはね上げる／降ろす

- ラインに合わせて「ロック位置」又は「フリー位置」での位置を決め、ピンが溝に合ったことを確認してください。

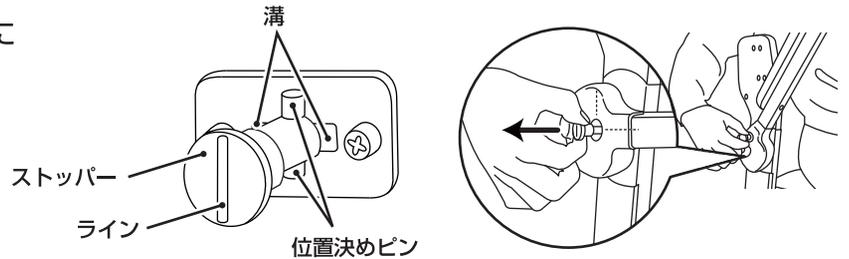


#### ロック位置 ひじ掛けを固定して使う場合

- ひじ掛けは、水平と垂直の2ヶ所に固定することができます。
- ストッパーを手前に引いて「フリー」の位置にラインを合わせてからひじ掛けをはね上げ／降ろします。
- ひじ掛けが水平もしくは垂直の位置で、ラインをロック位置に合わせてロックします。

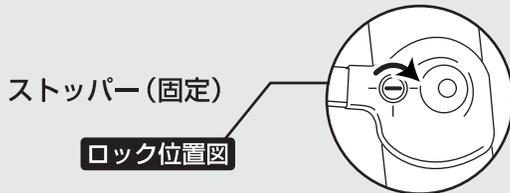

#### フリー位置 ひじ掛けを固定しないで使う場合 ※必ず介助者が付き添ってください。

- 介助者が付き添う際に介助しやすいよう、ひじ掛けを、水平から垂直の位置にはね上げたり、はね降ろしたりすることができます。
- ストッパーを手前に引いたまま回転させて、図のようにラインを「フリー」の位置に合わせます。
- ロックが解除され、ひじ掛けを自由に動かすことができます。

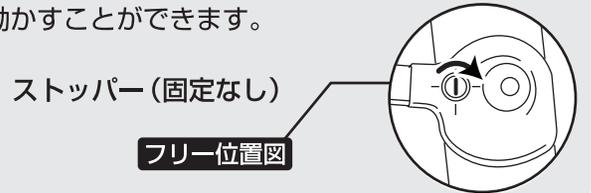


注意

- ひじかけは、ゆっくりとはね上げ、降ろす。  
転倒やケガのおそれがあります。
- ロックのかかりを毎回確認する。  
転倒やケガのおそれがあります。
- ロック位置のまま、ひじ掛けを上げ下げしないでください。  
塗装面が傷つき、はがれます。

### 4 座面は座面ストッパーをはずすと後方まで倒れます

- 後ろから介助が必要な場合は、図のように座面ストッパーを持ち上げながら座面を後方に倒してください。

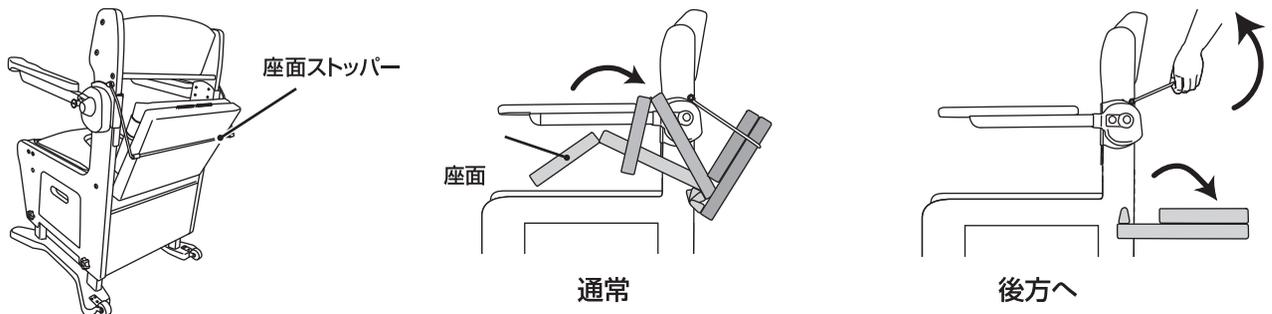


### 5 ペーパーホルダーの使用方法

■トイレットペーパーのセット方向にご注意ください

- トイレットペーパーを図のようにセットし（ペーパーカッターを利用し）引き上げるようにして切り取ってください。

※カッター部に強く触れると肌や衣服を傷つけるおそれがあります。

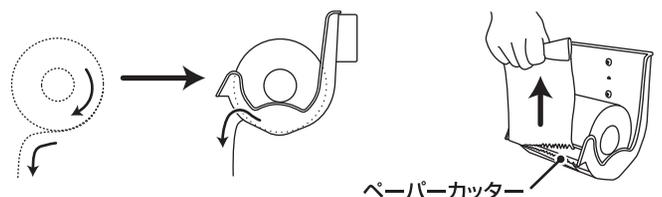


## 6 汚物の処理について

- トイレポットだけを取りはずして、汚物をご家庭のトイレに流してください。
- 消臭液も浄化槽へ流せます。



## 7 キャスターの使用方法

- キャスターはトイレを移動させる際にお使いください。
- 移動はひじ掛けがしっかりと固定されているか確認しひじ掛けの前側を図のように持ち上げて移動させてください。

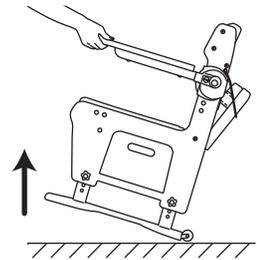

注意

- トイレに人が座った状態では移動させない。**  
キャスターは本体の移動専用ですので、破損やケガの原因となります。
- 移動の際は汚物の有無を確認する。**  
大きく傾けて移動すると汚物がこぼれるおそれがあります。
- 移動の際はひじ掛けは必ずロックする。**  
本体が破損し、ケガをするおそれがあります。

8 は、脱臭タイプの説明になります。

## 8 脱臭器を作動させる

- ACアダプターを、交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- 便座に座ると約3秒後に自動で脱臭が開始されます。  
(誤動作防止の為、ACアダプターをコンセントに差し込んでから約20秒間、センサーは感知しません。)
- 便座から立ち上がると60分後または15分後(出荷時は60分後に設定)に脱臭が終了します。  
設定方法はP8 5 脱臭タイマーの変更方法を参照してください。
- 外出時や脱臭が不要なときには、安全のため必ずACアダプターを抜いてください。

9 は、あたたか便座タイプの説明になります。

## 9 温度調節つまみで温度調節を行う

- 電源プラグを、交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- つまみを切の位置から回し、お好みの温度に設定してください。
- 温度調節はコントローラーの温度調節つまみで行います。
- 使用しないときは便フタを閉じると無駄な放熱を防ぎ節電になります。
- 外出時や暖房が不要なときには、安全のため必ず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグをもって抜いてください。
- お年寄りや、お子さまなどが使用されるときには、取り扱いについて、十分注意してください。




室温が5℃を下回る場合  
お好みの温度にセットしても  
その温度に達しないことがあります。



注意

- 温度調節つまみは、力いっぱい回さないでください。**  
故障の原因になります。

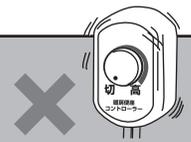

# ■ お手入れ方法 ■

便座、トイレポット・防汚トレイは取りはずして丸洗いができます。



■あたたか便座、ソフト便座、脱臭器は丸洗いしない。  
故障・感電のおそれがあります。


お知らせ

■あたたか便座、ソフト便座、脱臭器の汚れは水またはぬるま湯をやわらかい布にしみこませて軽くふき取ったあと水気を十分ふき取ってください。

●便座と防汚トレイの取りはずしは本体から持ち上げて取りはずしてください。


市販の中性洗剤をご使用ください。

洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませ汚れを拭き取り十分に水洗いした後水切りをしてください。

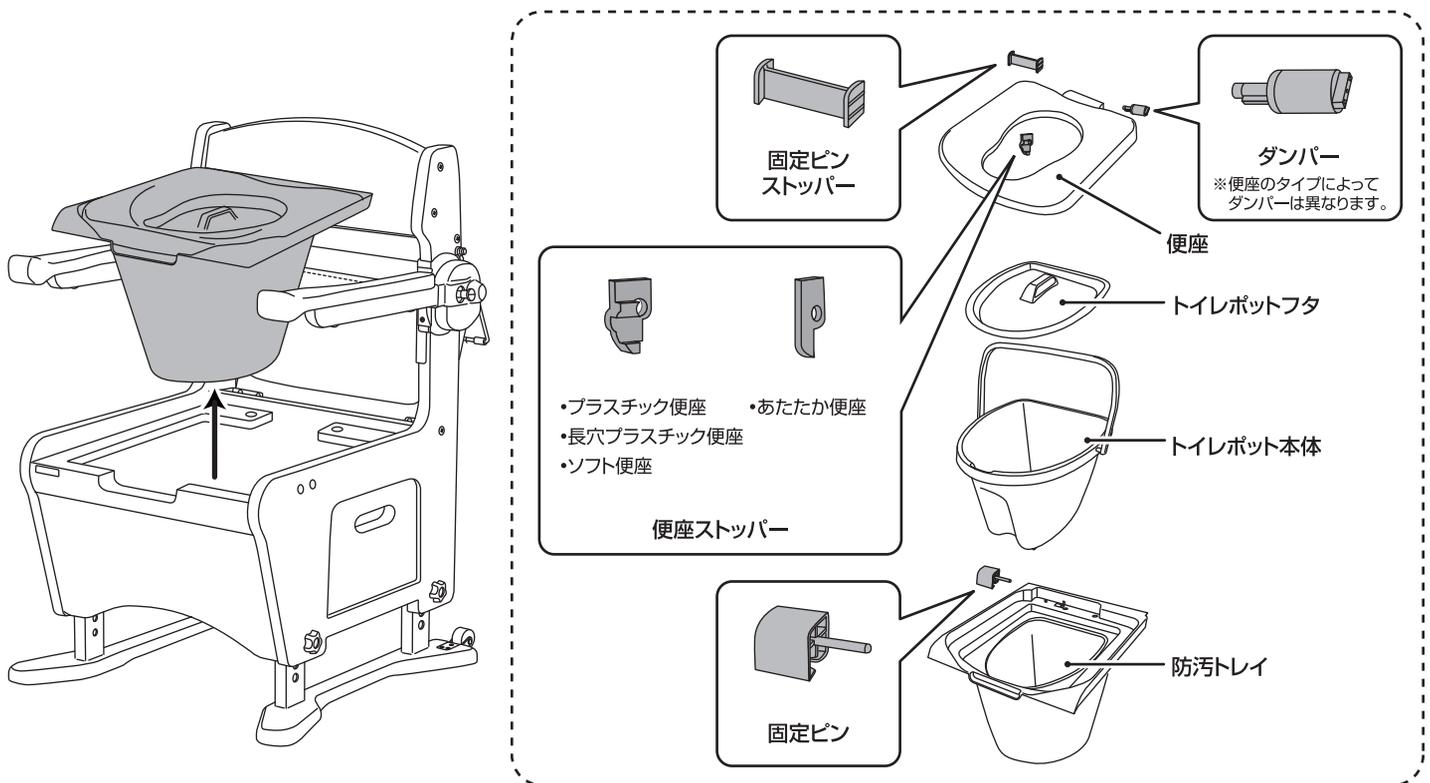


## 1 便座を取りはずす


① 固定ピン ストッパーを上を持ち上げてください。

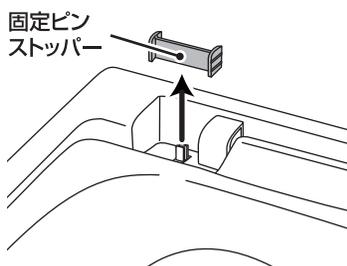

② 固定ピンを親指で軽く下に押しながらからスライドさせてください。

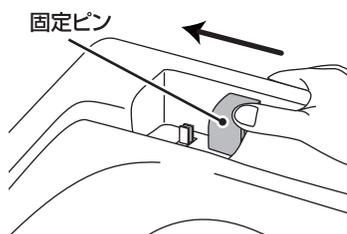

③ 便座を斜めに持ち上げてください。

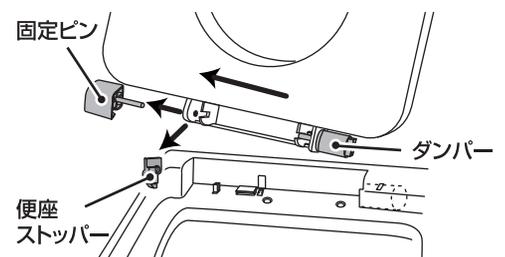


お知らせ

■取りはずしの際に、部品をなくさないようにしてください。

## 2 便座を取り付ける(お手入れがお終わったあと)


### ダンパーの差し込む方向について

ダンパーは差し込む方向が決まっています。防汚トレイのチェック窓に青色が見えると方向が間違っています。そのまま使用するとダンパーが破損しますので、ご注意ください。

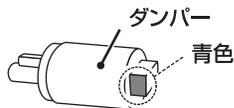


※ダンパーは、便座をゆっくり閉めるための部品です。手で無理に便座を倒すと破損するおそれがあります。


- ①ダンパーを便座に差し込み  
ダンパーの凸部を防汚トレイの溝に押し込んでください。

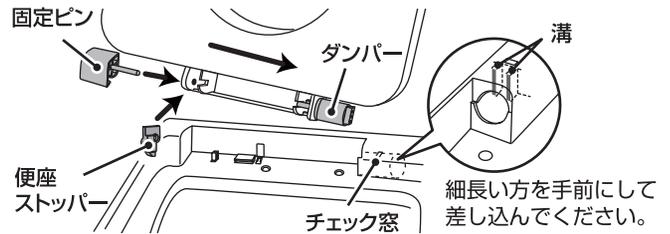

- ②便座に便座ストッパーを差し込み  
固定ピンが便座の穴と便座ストッパーの穴を通るように差し込み、防汚トレイのレール部にスライドさせてください。

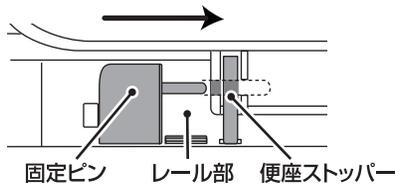

- ③便座を下げ、固定ピンストッパーを  
防汚トレイのツメの間に差し込んでください。

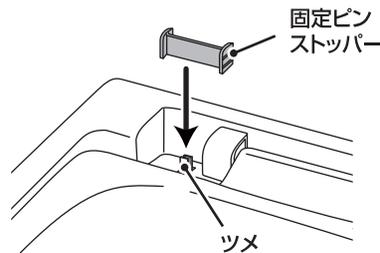

注意

■磨き粉、たわし等を、使用しないでください。

傷がつき、汚れが落ちにくくなります。

■便器用洗剤、漂白剤、シンナー、ベンジン等は、使用しないでください。

変質し、破損する恐れがあります。

■屋外に放置したり、直射日光に当たったりしないでください。

色あせやひび割れの原因となります。



### 3 は、脱臭タイプの説明になります。


お手入れの際には必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

## 3 定期的(1ヶ月に1回)にフィルターを洗ってください


- 脱臭器アダプターを取りはずしてください。  
脱臭機アダプタを持ち、時計回りに回転させ  
スライドさせてください。

※取り付けの時は脱臭機のダクト溝と脱臭機アダプタの  
目印を合わせて差し込んで下さい。

脱臭機アダプター目印    ダクト溝

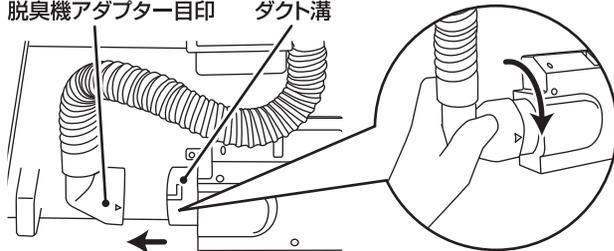

- 脱臭機のダクトよりフィルターを取りはずして  
ください。

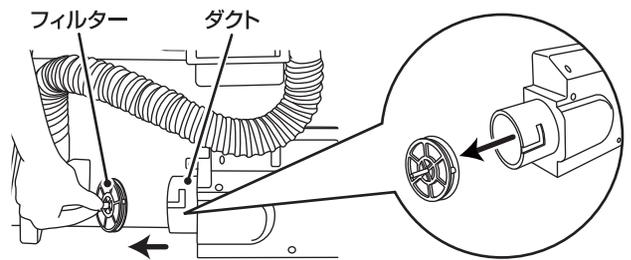

注意

■フィルターは定期的に洗浄を行ってください。

汚れが付着しますと、脱臭効果が低下することがあります。

■フィルターを洗った後は、必ず水分を完全に乾燥させてから脱臭器に装着してください。

水分が残ったまま装着しますと、脱臭器が故障するおそれがあります。

■取り付ける際は、脱臭器と脱臭器アダプターが接続されていることを確認してください。

脱臭器が正常にはたらかないおそれがあります。

交換用フィルターは別売です。  
品番:PN-L3011144P

# 故障かな?と思った時

(脱臭タイプ)

修理を依頼される前に下記をお読みください。

現象	確認	処置
便座に座っても作動しない	●ACアダプターがコンセントからはずれていませんか?	●ACアダプターを100Vコンセントに差し込んでください。
	●ACアダプターが脱臭器からはずれていませんか?	●ACアダプタープラグを脱臭器に差し込んでください。
	●脱臭器センサーが正しく接続されていますか?	●正しく接続してください。
脱臭効果が弱くなった	●フィルターが汚れていませんか?	●1ヶ月に1回フィルターを洗ってください。
	●脱臭器アダプターが正しく接続されていますか?	●正しく接続してください。
便座に座っていても作動する	●太陽光などが直接、赤外線センサー面に当たっていませんか?	●脱臭器の取り扱いについて(P4)を確認してください。

# 仕様

製品名	家具調トイレ座楽アウポット ひじ掛けはね上げ プラスチック 便座タイプ	家具調トイレ座楽アウポット ひじ掛けはね上げ 長穴プラスチック 便座タイプ	家具調トイレ座楽アウポット ひじ掛けはね上げ ソフト 便座タイプ	家具調トイレ座楽アウポット ひじ掛けはね上げ あたたか 便座タイプ	家具調トイレ座楽アウポット ひじ掛けはね上げ 脱臭プラスチック 便座タイプ	家具調トイレ座楽アウポット ひじ掛けはね上げ 脱臭長穴プラスチック 便座タイプ	家具調トイレ座楽アウポット ひじ掛けはね上げ 脱臭ソフト 便座タイプ	家具調トイレ座楽アウポット ひじ掛けはね上げ 脱臭あたたか 便座タイプ
製品品番	PN-L21401	PN-L21406	PN-L21402	PN-L21403	PN-L21411	PN-L21416	PN-L21412	PN-L21413
サイズ	製品寸法	幅58×奥行57.5×高さ78~92cm						
	便座サイズ	幅39×奥行41cm						
	便座高さ	34・36・38・40・42・44・46・48cm(2cmピッチ8段階)						
	ひじ掛け高さ	便座面より 19・21.5・24cm(2.5cmピッチ3段階)						
	ひじ掛け内寸	最小部 42cm、最大部 47cm						
材質	本体	天然木(ウレタン樹脂塗装)						
	便座	ポリプロピレン	ウレタンフォーム 合成皮革	ABS樹脂	ポリプロピレン	ウレタンフォーム 合成皮革	ABS樹脂	
	座面	ウレタンフォーム・合成皮革						
	トイレポット防汚レイ	ポリプロピレン						
	背もたれ	ウレタンフォーム・合成皮革						
	ひじ掛け	ひじ板:天然木 / 本体:鋼材						
製品質量	20.5kg	20.5kg	21kg	21.5kg	21kg	21kg	21.6kg	22kg
付属品	便座カバー 1枚			便座カバー 1枚				
	ペーパーホルダー・消臭液 1本							

## ●あたたか便座仕様

定格	AC100V 50/60Hz 45W
電源コード	1.6m(電源側) 0.7m(便座側)
温度調節	無段階電子制御 切・32~42℃
ヒーター	45W
およその電気代	24円/日(24時間通電) ※新電力料金目安単価: 22円/kWh(税込み)で計算
安全装置	電子制御方式、温度ヒューズ
材質	ABS樹脂
便座寸法(cm)	幅39×奥行41
製品質量	1.5kg

## ●脱臭器仕様

定格	AC100V 50-60Hz 専用アダプター使用 (DC12V 3W)
消費電力	約3W(脱臭器作動時) 約0.5W(待機時)
およその電気代	0.3円/日(1時間/1日の使用) ※新電力料金目安単価: 22円/kWh(税込み)で計算
コードの長さ	ACアダプターコード/約1.8m センサーコード/約0.6m

## 別売部品のご案内

商品名	品番
ポータブルトイレ はっ水剤入りポット	PN-L53016W
便座カバー角形	VALTBCKBE
消臭液	VALTBN5B

## 廃棄上のご注意

廃棄するときにはできるだけ素材別に分解し  
地域の分別のルールに従い廃棄してください。

# ■ 保証とアフターサービス ■

## ●保証書について

この商品は保証書を別途添付しております。

保証書は販売店でお渡しいたしますので、「販売店名、購入日」など所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

## ●補修用性能部品の保有期間

当社は家具調トイレ 座楽アウポットの補修用性能部品を製造打切り後、

5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ●修理を依頼される時

### ●保証期間中は

ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、お電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。

保証の規定に従って修理させていただきます。

### ●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 公的介護保険制度購入対象商品

※申請の際にコピー、または切り取ってご使用ください。

家具調トイレ 座楽アウポット  
ひじ掛けはね上げ  
プラスチック便座タイプ  
品番: PN-L21401



パナソニック  
エイジフリーライフテック  
株式会社

家具調トイレ 座楽アウポット  
ひじ掛けはね上げ  
長穴プラスチック便座タイプ  
品番: PN-L21406



パナソニック  
エイジフリーライフテック  
株式会社

家具調トイレ 座楽アウポット  
ひじ掛けはね上げ  
ソフト便座タイプ  
品番: PN-L21402




パナソニック  
エイジフリーライフテック  
株式会社

家具調トイレ 座楽アウポット  
ひじ掛けはね上げ  
あたたか便座タイプ  
品番: PN-L21403



パナソニック  
エイジフリーライフテック  
株式会社

家具調トイレ 座楽アウポット  
ひじ掛けはね上げ  
脱臭プラスチック便座タイプ  
品番: PN-L21411

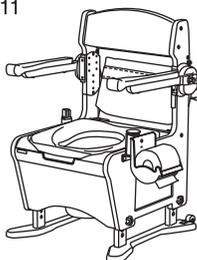


パナソニック  
エイジフリーライフテック  
株式会社

家具調トイレ 座楽アウポット  
ひじ掛けはね上げ  
脱臭長穴プラスチック便座タイプ  
品番: PN-L21416



パナソニック  
エイジフリーライフテック  
株式会社

家具調トイレ 座楽アウポット  
ひじ掛けはね上げ  
脱臭ソフト便座タイプ  
品番: PN-L21412

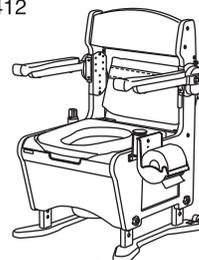

パナソニック  
エイジフリーライフテック  
株式会社

家具調トイレ 座楽アウポット  
ひじ掛けはね上げ  
脱臭あたたか便座タイプ  
品番: PN-L21413



パナソニック  
エイジフリーライフテック  
株式会社

# お客様ご相談窓口のご案内

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

### 愛情点検

長年ご使用の家具調トイレの点検を！



#### こんな症状はありませんか

- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 本体や便座にひびや割れが入っている。
- 異常な音やこげ臭いにおいがする。
- 触ると電気(ビリビリ)を感じる。
- その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、  
まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

### 商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

フリーダイヤル



0120-365887

●受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日休み)

<http://panasonic.co.jp/hcc/phcalt/>

西日本営業所 TEL.06(6908)8141 FAX.06(6908)4506

東日本営業所 TEL.03(5408)7437 FAX.03(5408)0810

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 代表 TEL06(6908)8122

©Panasonic AGE-FREE Life Tech Co.,Ltd.2012

