


## 施工説明書

### 補高便座 $\alpha$


□#3 品番 PN-L520211P

□#5 品番 PN-L520221P

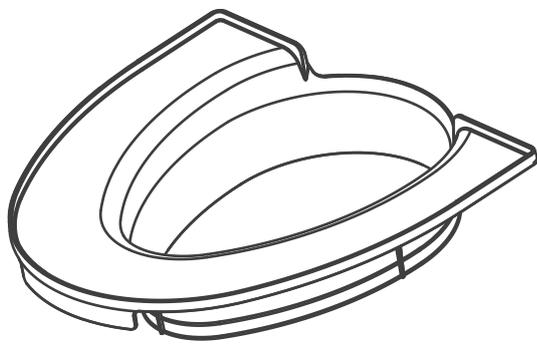

### もくじ

安全上のご注意	2
施工の前に	2
同梱品	3
便器の確認	3
施工方法	4

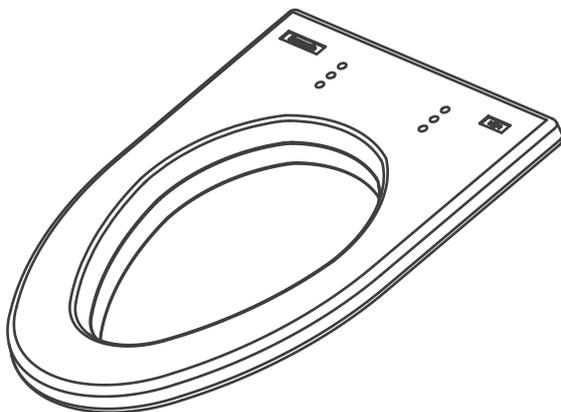

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工の前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。
- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。

最大使用者体重:100kg

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。

**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

## 警告

転倒、事故、けが  
などを防ぐために



-  ● 付属の洗浄便座(DL-KMR20-WS/DL-KER20-WS)以外に補高便座を取り付けない  
(便器に固定ができず破損したり、補高便座のはずれによるけがの原因)
-  ● 施工説明書に従い正しく施工を行う  
(けがや漏水による室内浸水の原因)
- 補高便座、温水洗浄便座が確実に便器に固定されていることを確認する  
(転倒によるけがの原因)
- 取り付け部品は必ず同梱の新品を使用する  
(固定が不確実になり補高便座が外れることによるけがの原因)

## 注意

転倒、破損、けが  
などを防ぐために




-  ● 補高便座を取り付ける際に、温水洗浄便座の便座や便フタだけを持ち上げない  
(本体落下によるけがや破損・故障の原因)

## 施工の前に


- 本体の取り付けが完了するまで電源プラグをコンセントに差し込まないでください
- トイレ内にアース付き電源コンセントがない場合は電気工事が必要です
- 浴室内にトイレがある場合は設置できません

ご準備いただくもの

プラスドライバー

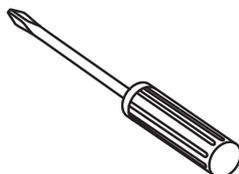


メジャー

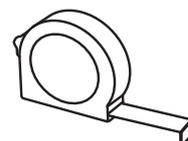

# 同梱品


●施工前に必ず同梱されている部材・付属品をご確認ください。

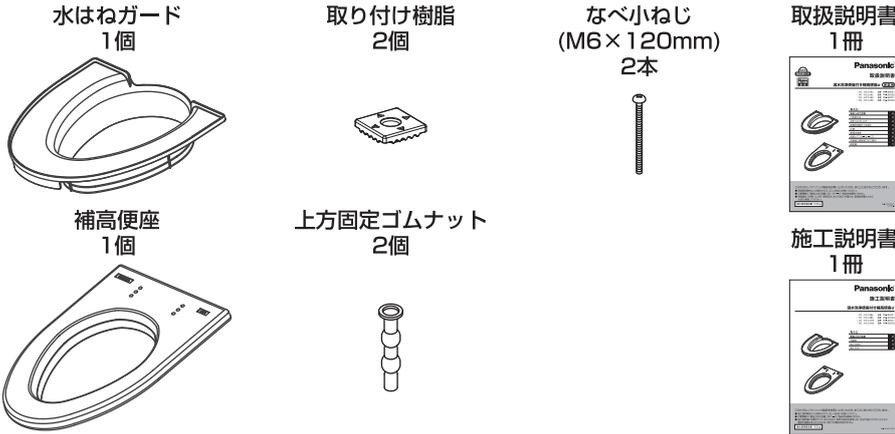

## 便器の確認

### 1. トイレの広さの確認

温水洗浄便座の取り付けには右図以上のトイレの広さが必要です。

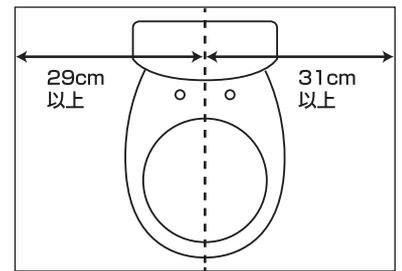

### 2. タンクの種類と位置・便器サイズの確認

下記以外のタンクの場合は販売店にご相談ください。

タンクの種類

**ロータンク式**

便器のサイズ

●便器によって補高便座が取り付けられない場合があります。

●便器のフチが平ではなく斜めになっていたり丸くなっている場合は販売店にご相談ください。

タンクの種類

**隅付ロータンク式**


ロータンクの位置

●便器、温水洗浄便座本体の受け面が小さくガタつく場合があります。状態をよく確認して取り付けてください。

左図で17cm未満の場合

## お知らせ

- デザイン便器、ワンピース便器※、ハイタンク式便器、非水洗便器、幼児用便器、身体障害者用便器、その他特殊便器には取り付けできません。
  - 取り付け可能便器はQRコードでアクセスできるサイトからご確認できます。
- ※製品の改廃情報が反映されているかはサイトにてご確認願います。
- ※本製品はレギュラー・エロンゲート兼用サイズです。

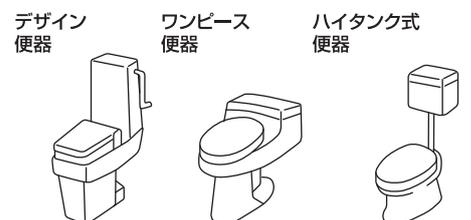


# 施工方法

付属する温水洗浄便座(DL-KMR20-WS/DL-KER20-WS)を補高便座に取り付ける際はこの施工方法に従ってください。


## 1. 上方固定ゴムナットの取り付け

便器の便座取り付け穴に上方固定ゴムナットを差し込んでください。

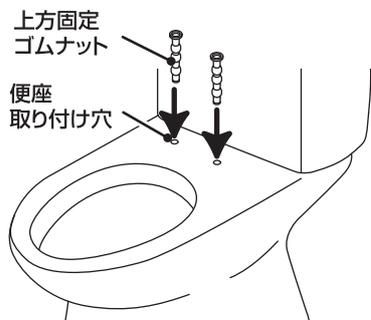

## 2. 補高便座の取り付け位置の確認


補高便座の前端が便器の前端と同じ位置から5mm程度前方に位置するように補高便座の取り付け穴を選択してください。

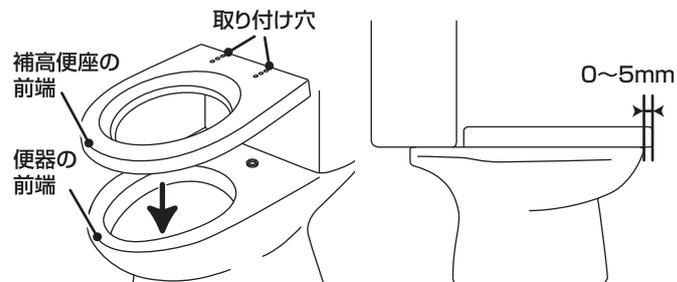

## 3. 本体固定板の取りはずし

温水洗浄便座の裏面から本体固定板を取りはずしてください。

本体脱着ボタンを押しながら本体固定板をスライドさせるとはずれます。

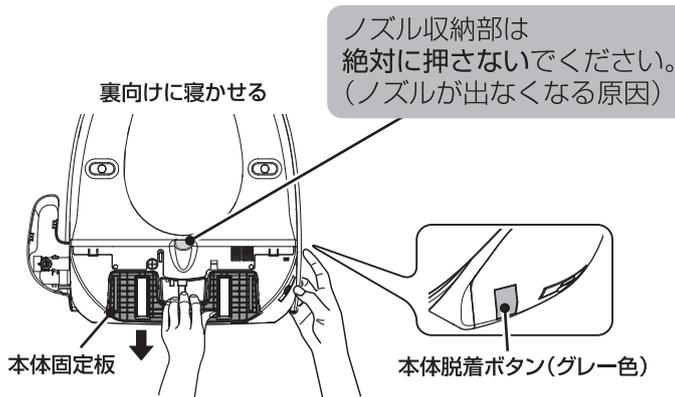


## 4. 本体固定板の取り付け

本体固定板の前端が補高便座の取り付け補助線に合うように調整し、取り付け樹脂を本体固定板にはめ込みなべ小ねじを締め付けてください。

取り付け後、補高便座が便器に確実に固定されているか確認してください。

締め付けトルクの目安: 0.8~1.0N・m (8~10kgf・m)  
※締め付けすぎると取り付け樹脂が破損する恐れがあります。

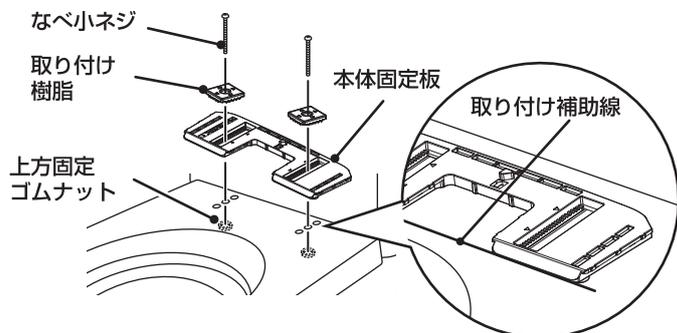


## 5. 便座の取り付け

本体固定板の中心と温水洗浄便座の中心を合わせる。

便座後部を少し浮かし、便器面から洗浄便座をすべらせ「カチッ」と音がするまで押し込む。

※電源コードをはさみ込まないようにしてください。

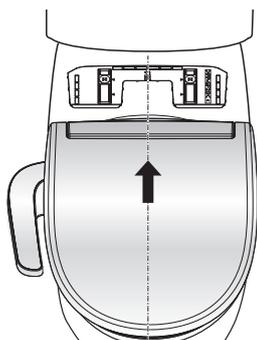

洗浄便座は便器から着脱できる構造のため、少しガタつきが生じることがありますが異常ではありません。

## 6. 組立・設置確認

以下の表に従って組立確認を行ってください。

No.	確認項目	チェック
1	補高便座が適切な取り付け穴位置で固定されている(方法2)	
2	補高便座が便器に確実に固定されている(方法4)	
3	同梱部品を全て使用している	

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地