


## 取扱説明書

介護保険  
購入対象  
品目

### ポータブルトイレラフィーネキューブ 家庭用

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> ラップ式プラスチック便座 | 品番 PN-L30301W/BR/CH |
| <input type="checkbox"/> ラップ式ソフト便座    | 品番 PN-L30302W/BR/CH |
| <input type="checkbox"/> ラップ式あたたか便座   | 品番 PN-L30303W/BR/CH |
| <input type="checkbox"/> プラスチック便座     | 品番 PN-L30401W/BR/CH |
| <input type="checkbox"/> ソフト便座        | 品番 PN-L30402W/BR/CH |
| <input type="checkbox"/> あたたか便座       | 品番 PN-L30403W/BR/CH |

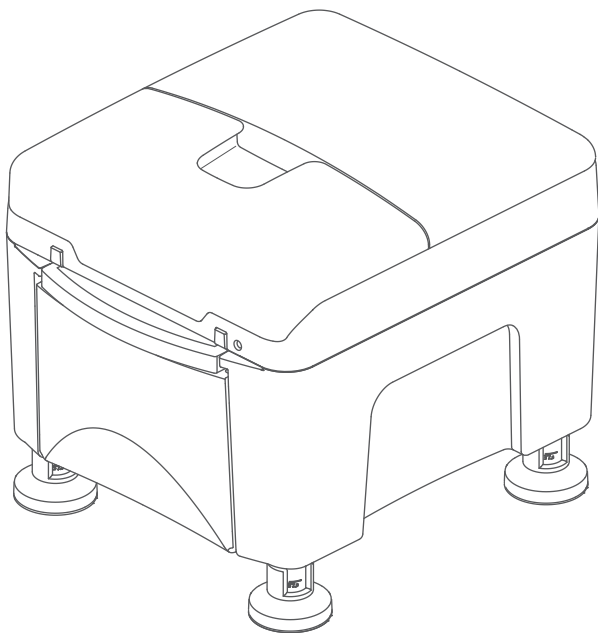

### もくじ

|              |    |
|--------------|----|
| 安全上のご注意      | 2  |
| 各部のなまえ       | 5  |
| 初めて使うときの準備   | 6  |
| 処理袋のセット方法    | 10 |
| ご使用方法        | 11 |
| お手入れのしかた     | 15 |
| 修理を依頼される前に   | 17 |
| 仕様           | 19 |
| 製品寸法図        | 20 |
| 愛情点検表        | 21 |
| 保証とアフターサービス  | 22 |
| お客様ご利用窓口のご案内 | 22 |
| 保証書          | 24 |

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。



## 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。




## 警告

転倒、事故、けが  
などを防ぐために

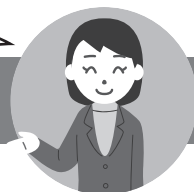


- 製品の上に立ち上がらない
- 人やものを乗せたまま移動させない
- 同時に2人以上で使用しない
- 重いものを乗せない
- 落としたり、強い衝撃を与えない
- 便座の上に立ったり、便座を乱暴に開閉しない
- 体重が100kgを超える方は使用しない
- 子供の遊び道具や踏み台など、トイレとしての用途以外で使用しない

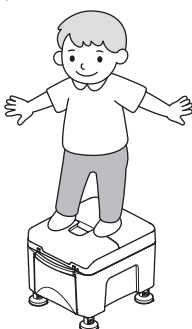


- 折りたたんだ便フタにつかまったり、身体を支えるために使用しない  
(故障や破損によるけがの原因)
- 凝固剤を口に入れない
- 商品梱包用のポリ袋やシートをかぶらない  
(窒息の原因)
- 故障したまま使い続けない  
例)
  - ・異音、異臭がしているとき
  - ・製品が異常に熱いとき
  - ・製品から煙がでているとき
  - ・製品にひびや割れが入っているとき→すぐに使用を中止し、販売店に連絡する。  
(けがや火災、感電の原因)
- 圧着操作時はヒーターに触らない  
(やけどによるけがの原因)




- 火気の近くに設置しない

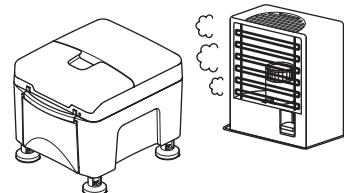


- 可燃性のものや火のついたタバコなどを投入しない  
(製品の変形によるショートや火災の原因)
- 便フタや便座を開閉するときは、  
取手以外を持って  
開閉しない

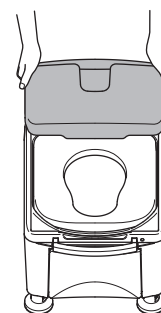

- 処理袋のセット時以外は電源プラグを  
差した状態でトイレの中に手を入れない  
(挟み込みによるけがの原因)

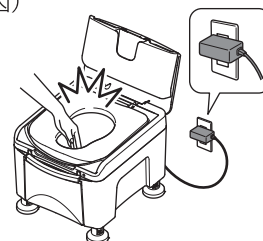

- 次のときは電源プラグを差したままにしない
  - ・製品を移動させるとき
  - ・長期間使用しないとき
  - ・お手入れするとき
  - ・各部の調整をするとき
  - ・雷が発生しているとき(絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因)

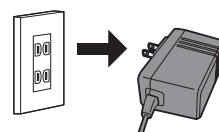

# 安全上のご注意


必ずお守りください

## 警告

転倒、破損、劣化  
などを防ぐために




- AC アダプターは指定のもの以外は使用しない
- 分解したり、修理、改造はしない
- 部品の代用品は使用しない
- あたたか便座、あたたか便座コントローラー、電源プラグ、AC アダプターに汚水や水をかけない
- あたたか便座、ラップユニットは丸洗いしない
- 浴室など湿気の多い場所には設置しない
- 濡れた手で電源プラグ、AC アダプターを抜いたり接続をしたりしない

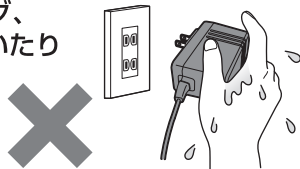

- 電源プラグや電源コード、AC アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるんだ状態で使用しない  
(故障や感電、火災の原因)




- 電源コード、コントローラーコードをトイレ本体の下敷きにしない

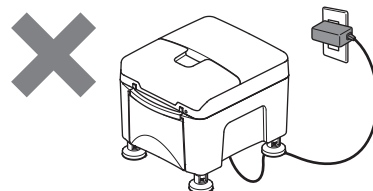


- 電源コードやコントローラーコードを下記の状態で使用しない
  - ・引っ張ってトイレ本体を移動させる
  - ・無理に曲げる、束ねる
  - ・ねじる
  - ・傷つける
  - ・加工する
  - ・隙間に挟む
  - ・重いものを乗せる
  - ・熱器具に近づける
 (故障や感電、火災の原因)




- トイレ本体に体を十分に近づけて座る

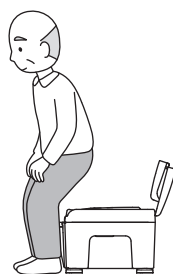


- 座る際や、使用後立ち上がりとする際などに、ご使用者自身が身体の安全性を十分に確保できない場合は介助者が付き添う  
(転倒によるけがの原因)

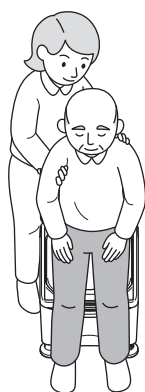


- 圧着操作をする際に、指がレバー部の隙間に挟まれないように注意する  
(挟み込みによるけがの原因)

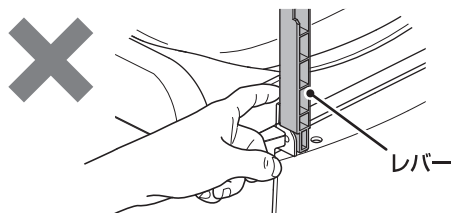

- 別売品の手すりと合わせて使用する際は、別売品のトイレサポートで確実に固定し隙間や開口部に身体の一部が挟まれないように注意する  
(P.14、15 スムーディ<Pトイレ用>取扱説明書 トイレサポートの固定方法)  
→ご使用者の心身の状態や利用状況によって隙間に挟まれ生命に関わる大きな事故につながる可能性があります。  
特に頭や首、腕や足が挟まれないよう十分ご注意ください。  
(挟み込みによるけがの原因)

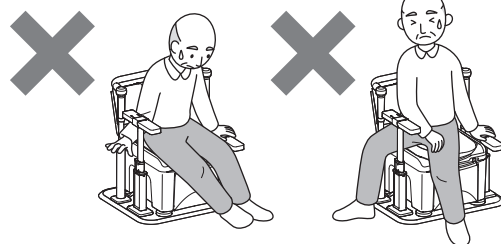

- 電源プラグや AC アダプター、コンセント差し込み部のほこりは定期的に掃除する

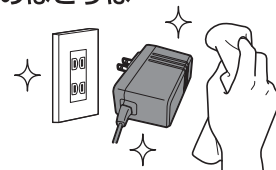

- 電源プラグや AC アダプターは根元まで確実に差し込む
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をせず、交流 100V で使用する  
(故障や感電、火災の原因)

# 安全上のご注意


必ずお守りください

## ！ 注意


破損、転倒、けが  
などを防ぐために




- 便フタの上に座らない
- 便フタやレバーをつかんでトイレ本体を移動させたり、傾けたりしない

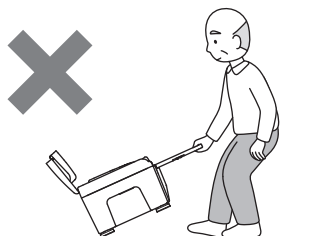

- レバーを引き出した際に上から荷重をかけたり引出したまま放置しない  
(破損によるけがの原因)
- 便座に手をついて移乗しない
- 高さ調整脚を外して使用しない
- 電源コード、コントローラーコードを移動経路上に設置しない  
(転倒によるけがの原因)

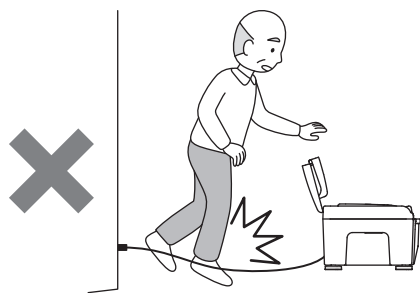


- アルコール以外で消毒しない
- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない  
(プラスチックの劣化または破損によるけがの原因)
- あたたか便座は、便座にカバーをかけて使用しない  
(故障や破損、やけどの原因)
- 専用の処理袋・凝固剤以外は使用しない  
→他の袋・凝固剤を使用すると、溶着できない等、漏れ、製品故障の原因となります。
- 便座に座った状態でラップユニットを操作しない  
(処理袋の破れ、圧着不良の原因)
- 排泄物が入った状態で移動させない  
(排泄物の漏れ、床や製品を汚し故障の原因)
- 屋外に放置したり、直射日光に当たったりしない  
(色あせやひび割れ、破損によるけがの原因)

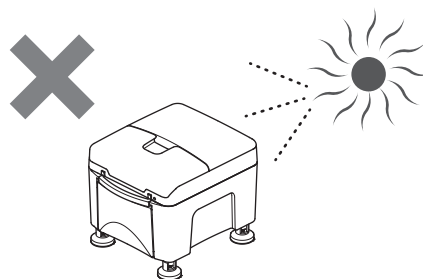

- ご使用の前には必ず処理袋の有無を確認し処理袋を正しく取り付ける
- 便座に深く座り使用する  
(排泄物の漏れ、床や製品を汚し故障の原因)




- 使用済みのトイレットペーパー等は処理袋の中央部へ入れる

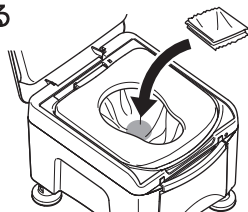

- 圧着済みの処理袋がトレーに残っていないか確認する  
(処理袋の破れ、圧着不良の原因)




- 回り止めがゆるんでいないか、定期的に点検する

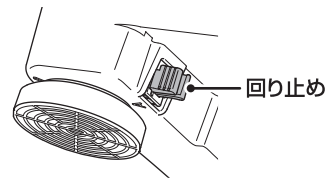

- 4本の高さ調整脚が必ず同じ高さになるように固定する
- 回り止めを使用し、確実に4本の高さ調整脚を固定する  
(転倒によるけがの原因)
- あたたか便座の暖房機能による低温やけどに注意する  
→便座の同じ場所に長時間皮膚がふれていると低温やけどのおそれがあります。  
長時間便座に座るときはあたたか便座コントローラーの温度調節つまみを「低め」にしてください。

(P.7 温度調節つまみで温度調整を行うを確認)  
(やけどによるけがの原因)

# 各部のなまえ

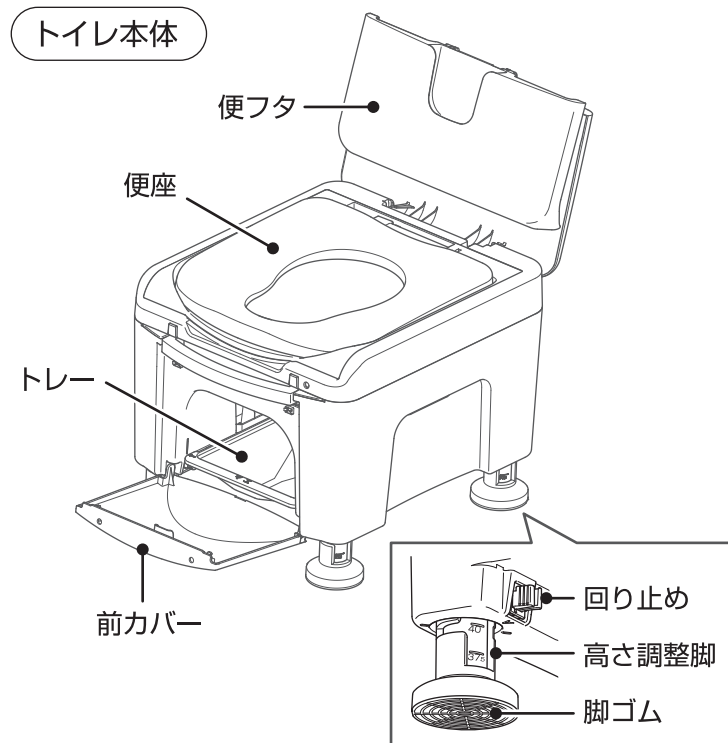

## ■ ラップタイプ

ラップタイプ用  
防汚トレイ

レバー

## ■ ラップユニット

シルバークリップ

シルバークリップ

ヒーター


圧着ゴム

## ■ バケツタイプ

バケツタイプ用  
防汚トレイ

# 同梱品の確認

## ラップタイプ

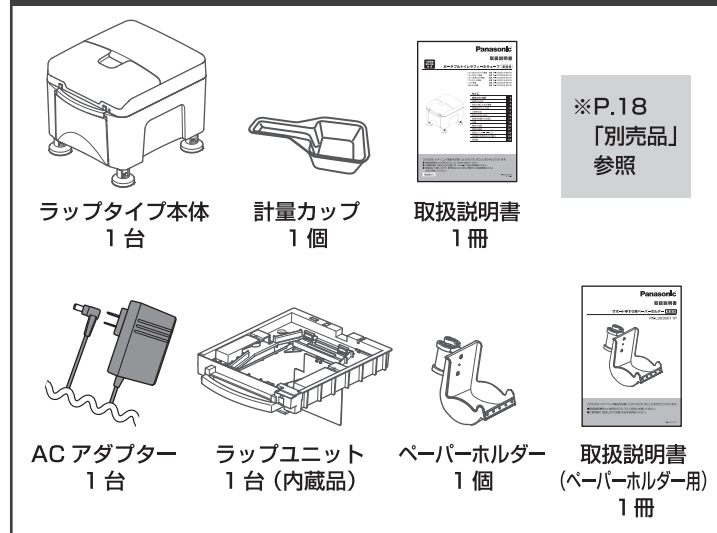



## バケツタイプ



## 便座の種類

### プラスチック便座

### ソフト便座

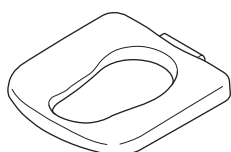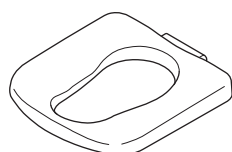


便座カバー  
1枚  
便座カバーEタイプ  
品番: PN-LTBCRKC  
※あたため便座タイプ  
には付属しません。

### あたため便座

あたため便座コントローラー

電源プラグ

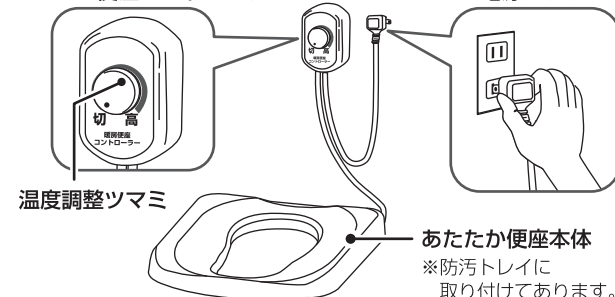



# 初めて使うときの準備

各項目の記載内容がお使いの商品に該当するかにつきましては、下記のアイコン表示をご確認ください。

該当する場合の  
アイコン表示



プラスチック 便座  
ソフト 便座  
あたたか 便座

該当しない場合の  
アイコン表示



プラスチック 便座  
ソフト 便座  
あたたか 便座

## 1 高さ調整脚で便座の高さを調整する


高さ調整を行う際は本体が倒れないよう支えてください。



プラスチック 便座  
ソフト 便座  
あたたか 便座


### ①調整脚のロックの解除

回り止めをつまみながら内側に引きます。

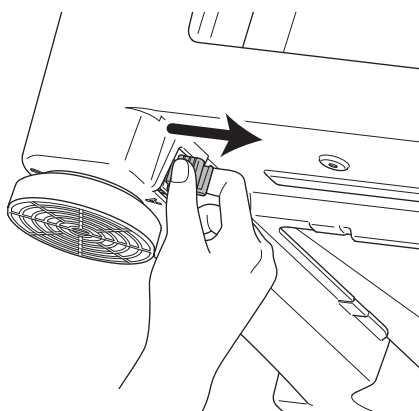


### ②調整脚の高さ調整

高さ調整脚を外側に約30度回して高さ調整脚を引き出します。

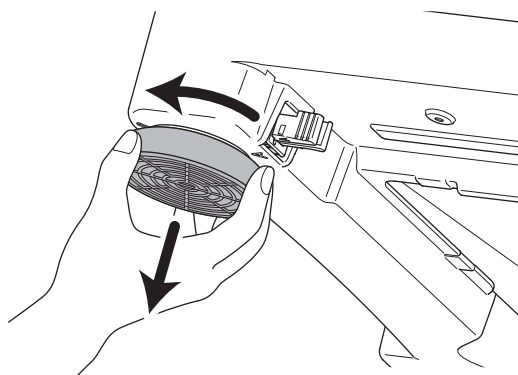


### ③調整脚の高さを揃える

調整脚に記載されている目盛りのラインと本体下面を合わせます。

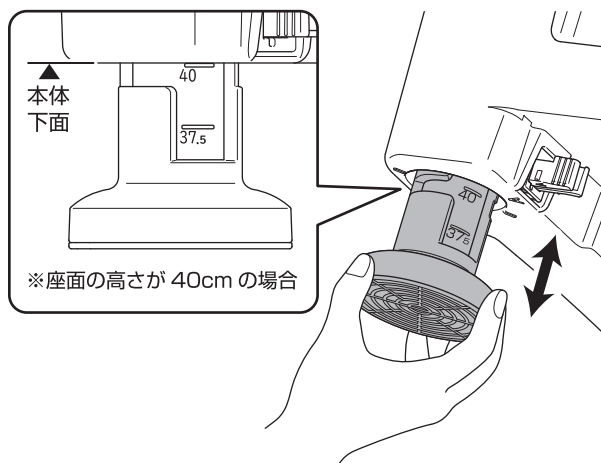

### ④調整脚のロック確認

高さ調整脚を内側に約30度回して回り止めをつまみながら最後まで押し込み、固定します。

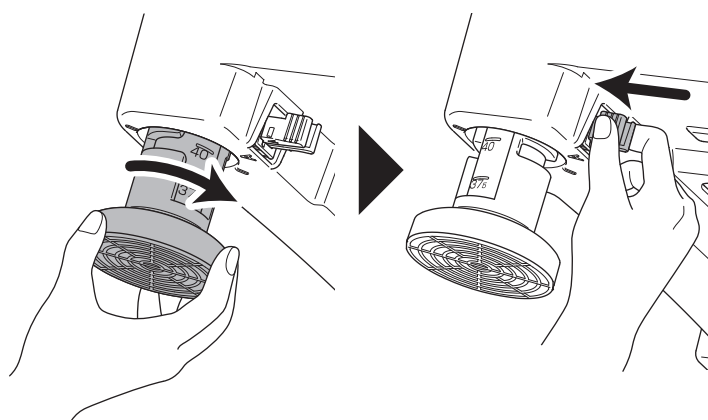


- 調整時は高さ調整脚を抜かずに行ってください。
- 正しく脚が装着されていない場合、バランスが崩れ、転倒する危険があります。

### ⚠ 注意


- 回り止めがゆるんでいないか、定期的に点検する
- 4本の高さ調整脚が必ず同じ高さになるように固定する
- 回り止めを使用して、確実に4本の高さ調整脚を固定する

## 2 あたたか便座コントローラーの設定をする

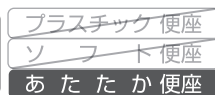

### ① あたたか便座コントローラーを設置してください。

- あたたか便座コントローラーの裏側に、マジックテープが貼り付けてあります。商品本体の使いやすい場所にあたたか便座コントローラーを固定してください。
- 取り付け後、あたたか便座コントローラーがしっかりと固定されている事、便座や便フタの開閉後に、あたたか便座のコードが挟まれない事を確認してください。

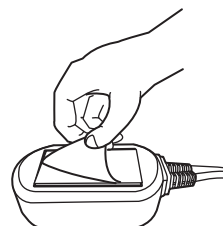

### ② 温度調節ツマミで温度調節を行ってください。


- 電源プラグを、交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ツマミを切の位置から回し、好みの温度に設定してください。
- 温度調節はコントローラーの温度調節ツマミで行います。
- 使用しないときは便フタを閉じると無駄な放熱を防ぎ節電になります。
- 外出時や暖房が不要なときには、安全のため必ず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグをもって抜いてください。
- お年寄りや、お子さまなどが使用されるときには取り扱いについて、十分注意してください。




温度調節ツマミを力いっぱい回すと故障につながります。

室温が5℃を下回る場合は好みの温度にセットしてもその温度に達しないことがあります。

## 3 ACアダプターを接続する

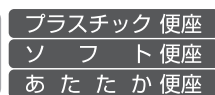


### ① 本体プラグにACアダプターのプラグを根元まで確実に差し込んでください。

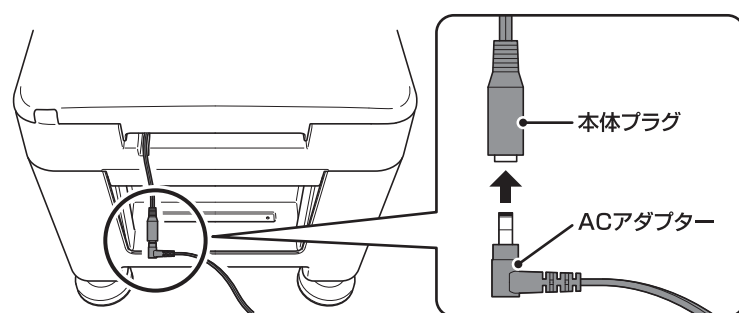


※後ろから見た図

### ② コンセントにACアダプターのプラグを根元まで確実に差し込んでください。

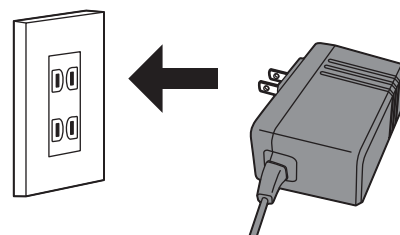


## ● 本体の持ち方



両側の持ち手部分を持ってください。

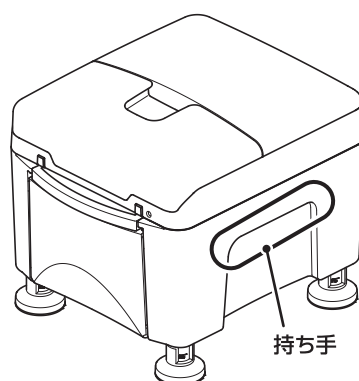

## 4 製品を設置する

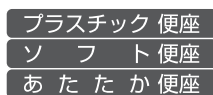


壁際や布団、ベッドサイドに設置する場合は、頭や腕、身体が挟まらないように製品を隙間なくくっつけるか、隙間が **110mm未満** または **350mm以上** になるように設置する

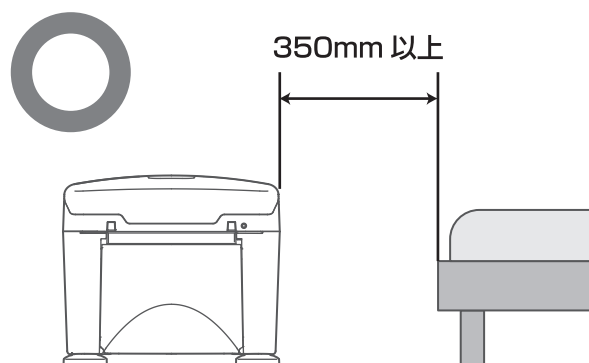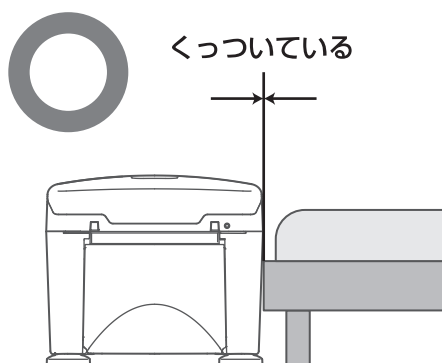


### ⚠ 警告

- AC アダプターは指定のもの以外は使用しない
- 濡れた手で電源プラグ、AC アダプターを抜いたり接続をしたりしない

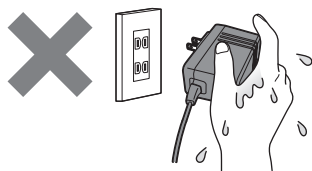


- 電源プラグや電源コード、AC アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるんだ状態で使用しない
- 電源プラグや AC アダプター、コンセント差し込み部のほこりは定期的に掃除する

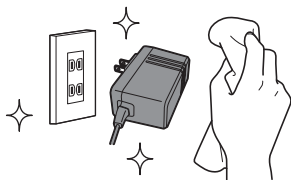

- 電源プラグや AC アダプターは根元まで確実に差し込む

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をせず、交流 100V で使用する
- 電源コード、コントローラーコードをトイレ本体の下敷きにしない

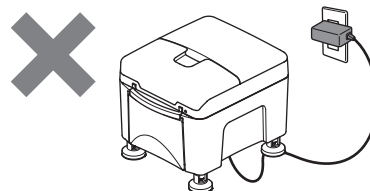


- 電源コードやコントローラーコードを下記の状態で使用しない
  - ・ 引っ張ってトイレ本体を移動させる
  - ・ 無理に曲げる、束ねる
  - ・ ねじる
  - ・ 傷つける
  - ・ 加工する
  - ・ 隙間に挟む
  - ・ 重いものを乗せる
  - ・ 熱器具に近づく (故障や感電、火災の原因)




## 5 付属の便座カバーを取り付ける




- ①便座を立ててカバーを裏返してください。

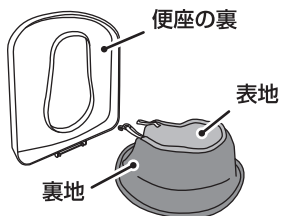


- ②カバーのフック部が下になるようにし、便座穴からカバーを出してください。

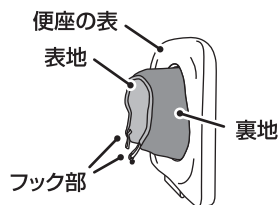


- ③フックを便座の表からヒンジ部にまわし、フックを引っ掛けてください。

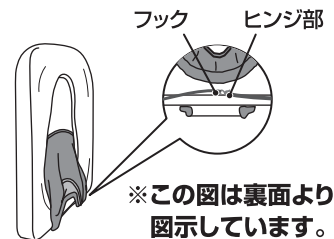


- ④カバーを便座の肩部に引っ張りひっかけてください。

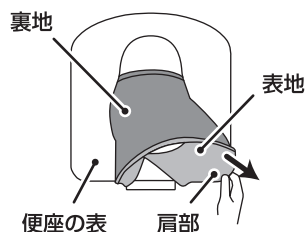


- ⑤カバーを便座の逆の肩部にひっかけてください。

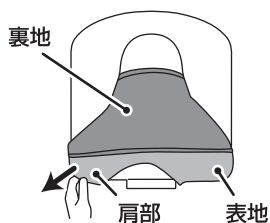


- ⑥便座の後方にカバーを引っ張りひっかけてください。

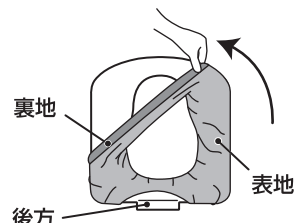

- ⑦カバーのしわ、たるみを延ばして整えます。

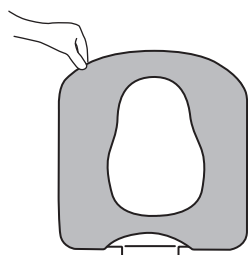


- パイプを外せば洗濯機で丸洗いです。洗濯後は風通しの良い所で陰干してください。

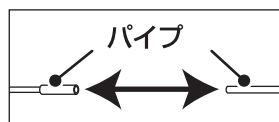

※洗濯タグにパイプ通し口の目印を記載しています。

洗濯タグ

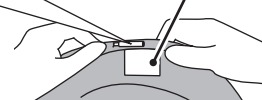

便座カバー取付方法を動画で確認することができます。



※データ通信料はお客様負担となります。  
※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。  
便座カバー E タイプ・角型タイプのご紹介動画です。  
便座カバー O 型・洋風便座専用便座カバーは取付方法が異なります。  
詳しくは、当社ホームページにてご確認ください。


# 処理袋のセット方法



## ラップタイプの場合


### 1 便フタ・便座を持ち上げる

レバーに表示されているラインが隠れるまでレバーを押し込みます。

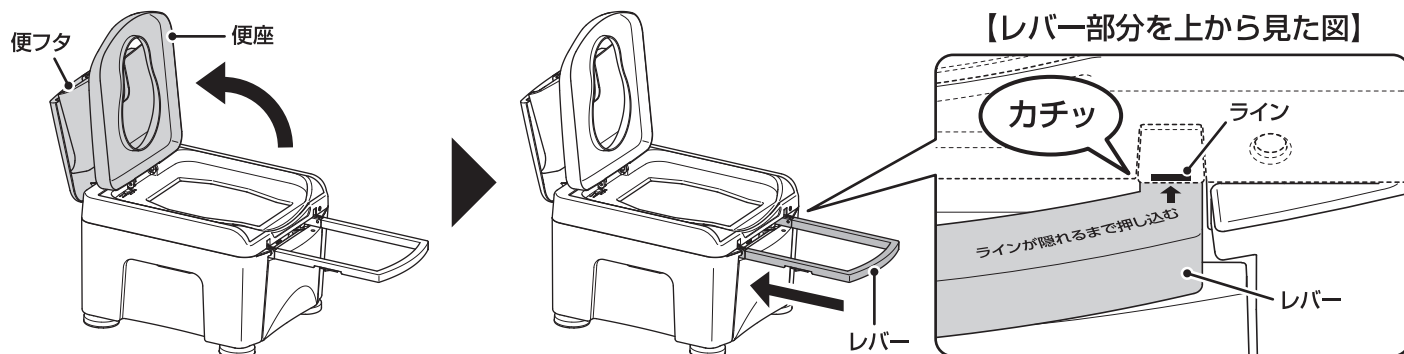


### 2 処理袋を広げる

P.18「別売品」参照

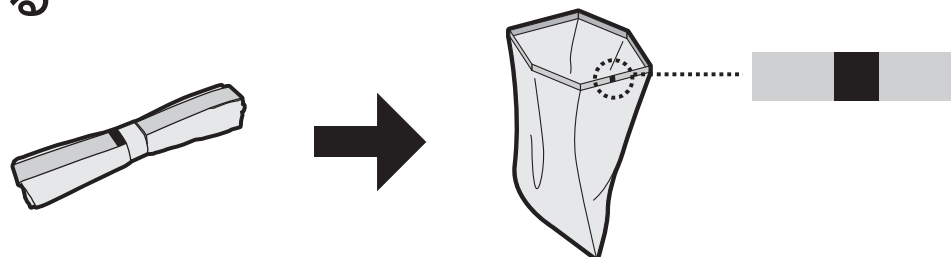


### 3 処理袋を本体にセットする

処理袋を4か所シルバーのクリップに **前側(レバー側)** から挟み、穴に沿うように広げます。  
セット後は便座を下ろします。

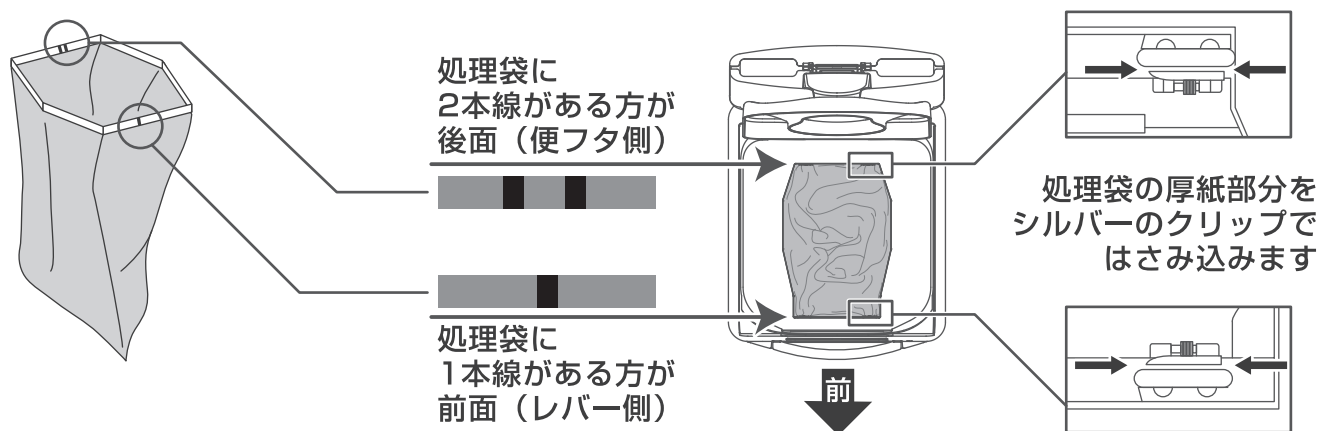

#### セット時の注意

右図の様に処理袋の左右が便座よりも内側に設置されてしまっている場合には手で押し戻し隙間をなくしてください。隙間が空いていると排泄物が処理袋から漏れてしまう可能性があります。

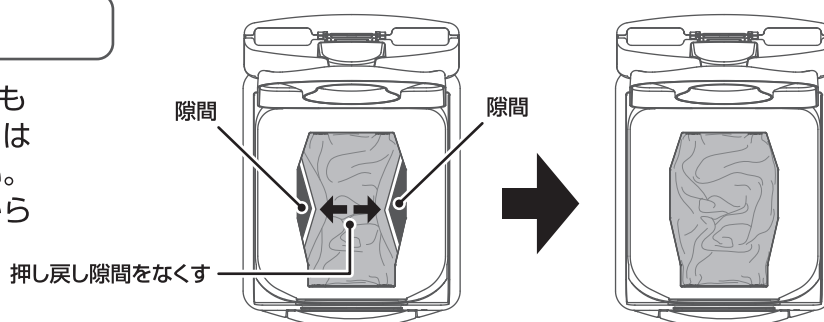

# ご使用方法



## ラップタイプの場合


- 使用前に必ず処理袋の有無を確認してください。
- 使用時は電源プラグをコンセントに差してください。

### 1 凝固剤を処理袋の中に入れる

P.18「別売品」参照

#### ⚠ 注意

- 凝固剤を口に入れない  
(窒息の原因)

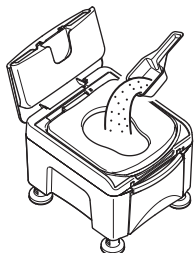

### 2 用を足す


便座には正しい姿勢でお座りください。

※立ち小便はしないでください。  
小用の時も座ってご使用ください。




### 3 処理袋を圧着する

- ①片手で本体を押さえ、レバーをゆっくり引出してください。  
(3秒程度かけて引出してください。)
- ②レバーを折り上げた状態で約10秒保持します。  
熱圧着が開始すると「ピピッ」と鳴り、緑のランプが点灯します。  
完了すると「ピッピッ」と鳴り、ランプが消灯し完了です。

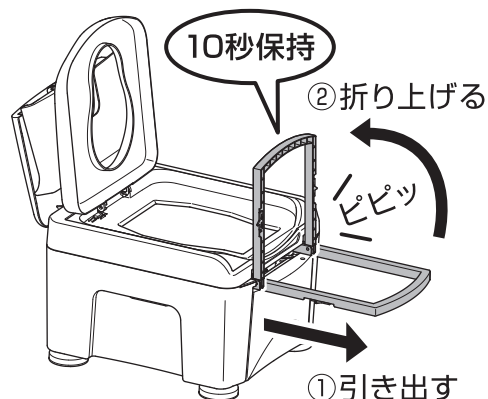

#### 【レバーの折り上げ状態(横から見た図)】

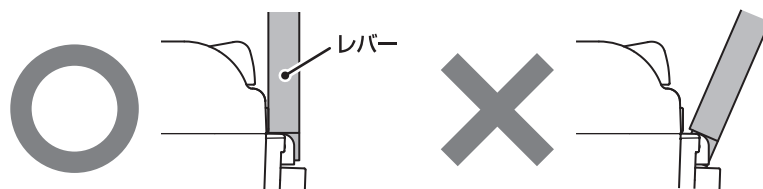


熱圧着中にレバーを離すと「ピー」とエラー音が鳴りランプが早く点滅します。  
その際は再度レバーを折り上げた状態で保持し、熱圧着してください。

#### ⚠ 注意


- レバーを引き出した際に上から荷重をかけたり引出したまま放置しない  
(破損によるけがの原因)

### 熱圧着処理時のレバー操作について

レバーはゆっくりと引き出してください。  
(3秒程度かけて引き出してください。)  
早く引くと処理動作不良、袋内の空気が多くなる原因となります。

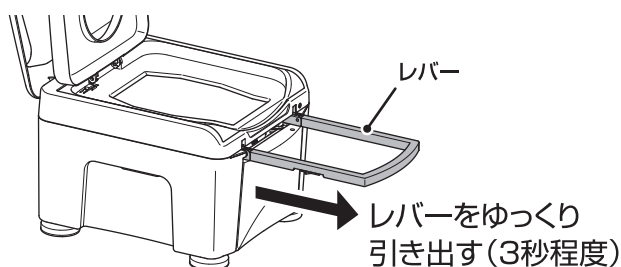

○ ゆっくり引くと  
空気が少ない

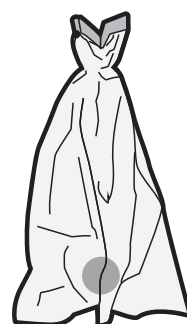


✕ 早く引くと  
空気が多い


## 4 レバーをゆっくり押し戻し、前カバーをあけて処理袋を取り出す。

- 燃えるゴミとして処理する場合は、地方自治体によって処理方法が異なるため、詳しくは各自治体にお問い合わせください。
- 大便が燃えるゴミとして処理できず、トイレに流す必要がある場合は処理袋から取り出し、トイレに少量ずつ様子(前の固まりが完全に流れたこと)を確認しながら流してください。  
※トイレの配管が詰まる原因となるため、凝固剤はトイレに流さないでください。  
※大便に付着している少量の凝固剤であればトイレに流しても問題ありません。


- ①レバーに表示されているラインが隠れるまでレバーを押し込みます。

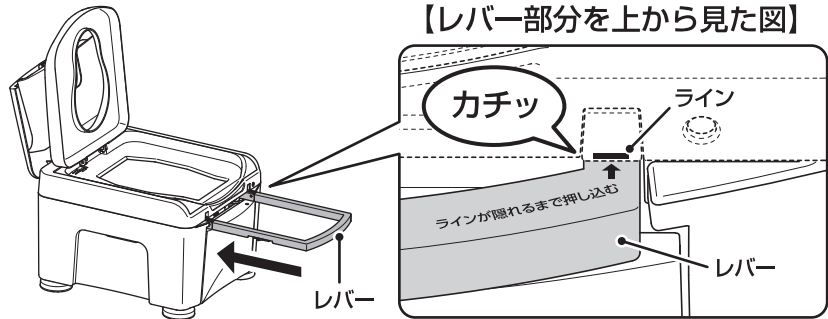


- ②前カバーの「押」2か所を押して開きます。

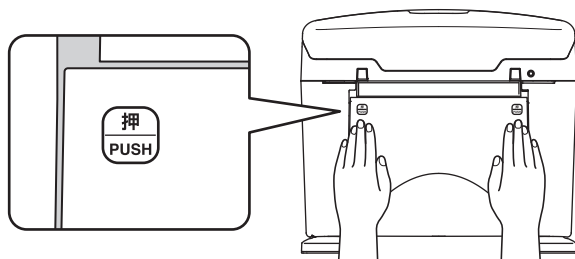


- ③トレー上にある処理袋を取り出してください。

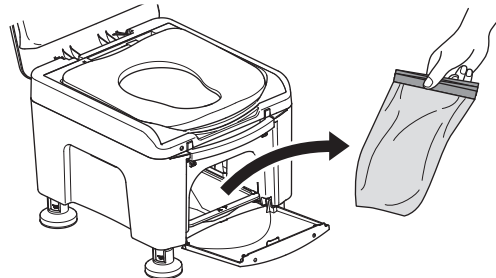

### 熱圧着処理について

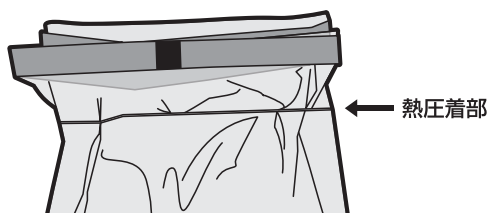

【正常な熱圧着】

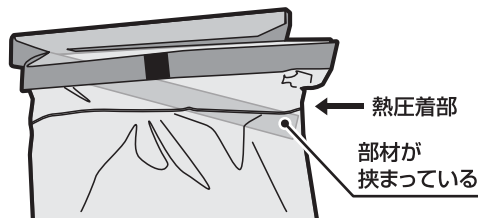


【熱圧着部に部材が挟まり不完全】


処理袋を正しくセットし  
圧着操作をゆっくり行うと  
部材が挟まりにくいです。

### 再圧着処理

熱圧着処理が不完全な(空気が漏れる)場合は、  
外した処理袋を下記にしたがって再処理をお願いします。

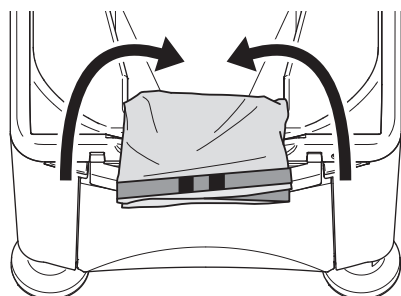

再熱圧着する処理袋を上図のようにたれ掛け、  
レバーを引き出し、上に折り上げた状態で保持します。

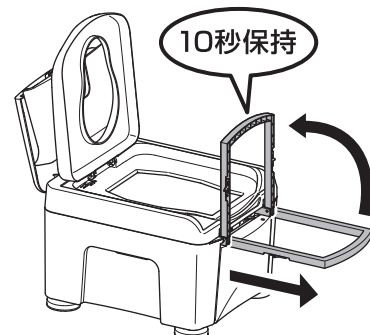


レバーを折り上げた状態で約10秒保持します。  
熱圧着が始まると「ピピッ」と鳴り、  
緑のランプが点灯します。  
完了すると「ピッピッピ」と鳴り、  
ランプが消灯し完了です。



## バケツタイプの場合


### 1 便フタを開く

便フタを持ち上げて後方へ押してください。

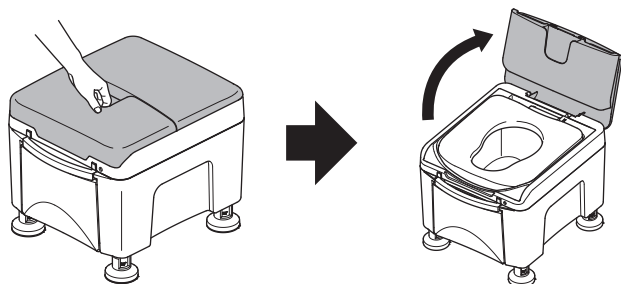


### 2 便座を上げる

便座の前を持ち、開いてください。

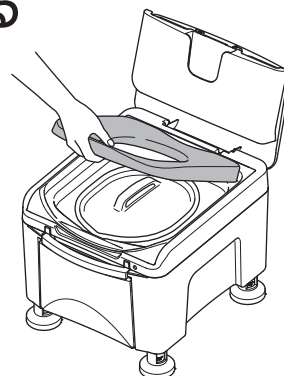

### 3 トイレバケツフタをはずす

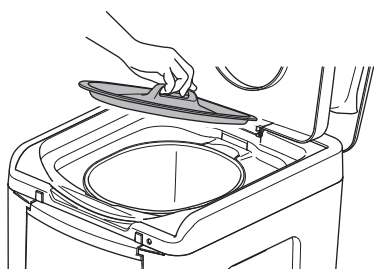

### 4 トイレバケツに水と消臭液を入れる

バケツに水1.5～2リットルと消臭液20cc(消臭液容器メモリ)を入れてください。

### 5 用を足す

便座には正しい姿勢でお座りください。

※立ち小便はしないでください。  
小用の時も座ってご使用ください。



#### ⚠ 警告


#### ●故障したまま使い続けない 例)

- ・異音、異臭がしているとき
  - ・製品が異常に熱いとき
  - ・製品から煙がでているとき
  - ・製品にひびや割れが入っているとき
- すぐに使用を中止し、販売店に連絡する。  
(けがや火災、感電の原因)

#### ●トイレ本体に体を十分に近づけて座る



#### ●圧着操作をする際に、指がレバー部の隙間に挟まれないように注意する

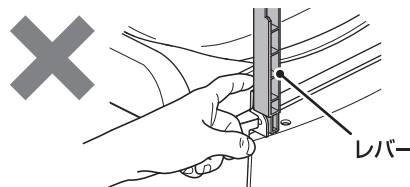

#### ●圧着操作時はヒーターに触らない (やけどによるけがの原因)

#### ●便フタや便座を開閉するときは、 取手や便座の前以外を持って開閉しない

#### ⚠ 注意

#### ●ご使用前には必ず処理袋の有無を確認し 処理袋を正しく取り付ける

#### ●便座に深く座り使用する (汚物の漏れ、床や製品を 汚し故障の原因)



## 6 汚物を処理する

バケツフタは取り出した状態、取り付けた状態どちらでも汚物処理が出来る構造になっています。  
トイレポットだけを取り外して汚物をご家庭のトイレに流してください。  
消臭液も浄化槽へ流せます。


### バケツフタを取り外した状態で汚物処理する方法

バケツ吊り手を倒しフタを取り外してから、  
バケツの持ち手と吊り手を持って  
トイレに汚物を流してください。



### バケツフタを取り付けた状態で汚物処理する方法

①バケツの吊り手と持ち手を持った状態で、  
バケツフタの後端を押し込むとバケツフタが  
開きます。

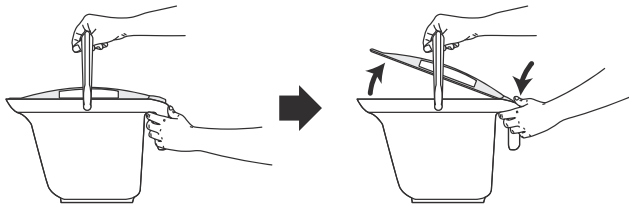


②バケツフタを開いた状態でバケツの持ち手と  
吊り手を持って、トイレに汚物を流してください。



バケツ内に排泄物や水が入った状態で  
バケツ持ち手のみで持ち上げると破損する  
おそれがあります。必ずバケツ吊り手も持って  
持ち上げてください。

### バケツのお手入れ方法

バケツ内で水を回しやすい形状にしているため、  
バケツ内の汚れが落としやすくなっています。  
汚物をトイレに流したあと、500～1000mlの  
水をバケツに入れ、くるくる回すように動かしてください。  
回転する水でバケツ内の汚れを取りやすくなります。

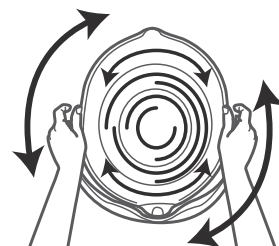

勢いよくバケツを動かすと、バケツ内の水や汚物が飛びだす恐れがあります。  
バケツ内の水の動きを確認しながら、ゆっくりと動かして洗浄してください。



# お手入れのしかた


安全のため、定期的にお手入れ、月に1回点検をお願いします。

- AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- AC アダプターのほこりは定期的に掃除してください
- 便座・防汚トレイは取り外して洗うことができます。  
中性洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませ汚れを拭き取り十分に洗い流した後、水切りをしてください。
- あたたか便座、ラップ部は電気部品であるため乾いた柔らかい布で拭き取り清掃してください。  
(水をかけないでください)


## 本体のお手入れ

各部品は下図のように取り外してお手入れすることができます。

### ラップタイプ

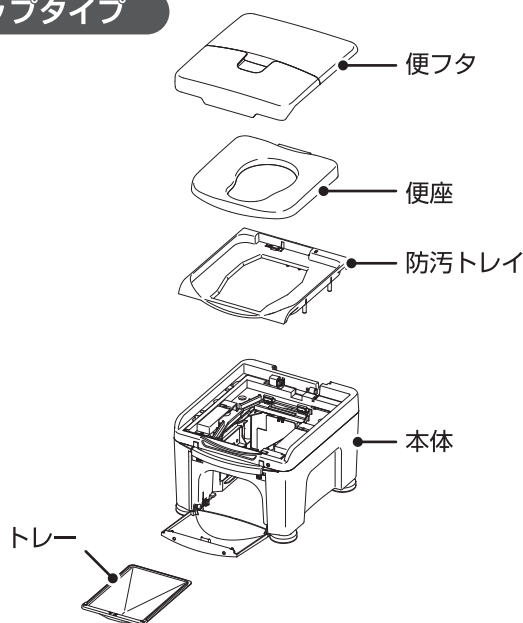


### バケツタイプ

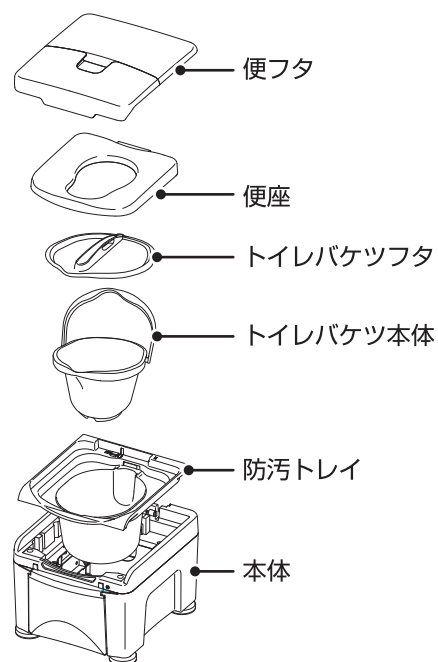


## 便座のお手入れ

### 1 防汚トレイから便座を取り外す

① 防汚トレイの固定ピン押さえを下に押さえながら固定ピンを左へスライドして外してください。

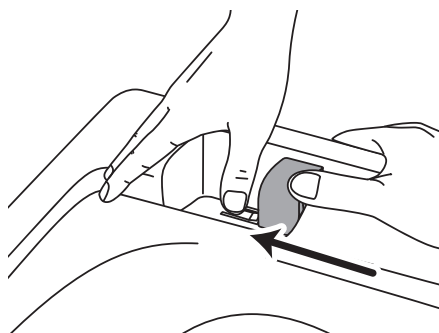

② 便座を斜めに持ち上げながら外します。

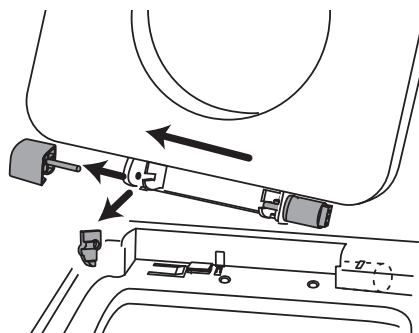

取り外しの際に部品を無くさないようにしてください。  
便座ストッパーは、便座の種類によって形が異なります。




・プラスチック便座  
・ソフト便座




・あたたか便座

## 2 防汚トレイに便座を取り付ける

①防汚トレイの差し込み穴にダンパーの凸部を合わせて溝に差し込み、ダンパーの溝に合わせてスライドさせながら取り付けてください。

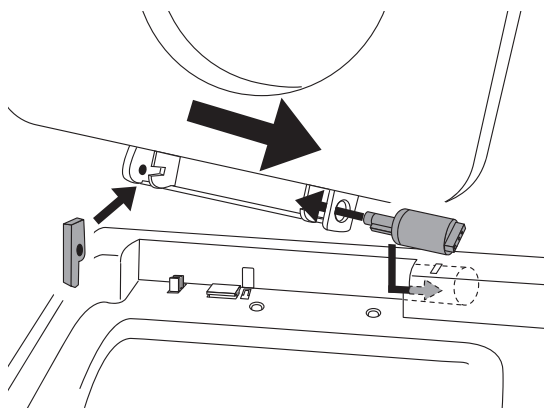

②固定ピンをレールに沿って便座に差し込んでください。便座の上げ下げ等を行い、正しく装着できているか確認してください。

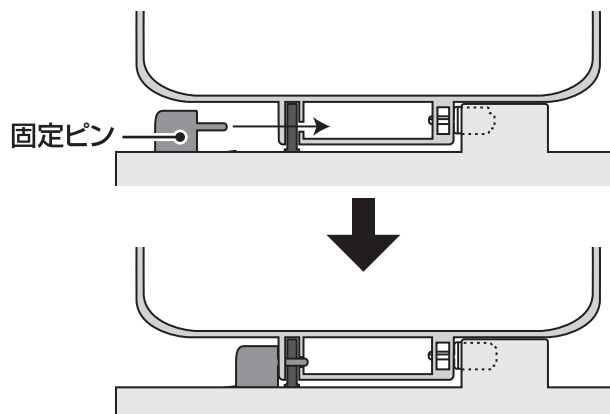

### プラスチック便座

#### ■ダンパーの差し込む方向について

ダンパーは差し込む方向が決まっています。

防汚トレイのチェック窓に青色が見えると方向が間違っています。

そのまま使用するとダンパーが破損しますので、ご注意ください。




※ダンパーは、便座をゆっくり閉めるための部品です。手で無理に便座を倒すと破損するおそれがあります。

## ヒーター・圧着ゴム部のお手入れ ※ラップタイプのみ


電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布で拭いてください。

### ヒーター

圧着動作直後はヒーター部分が高温になっている場合があります  
電源プラグを抜いてから少し時間を置いて拭いてください。

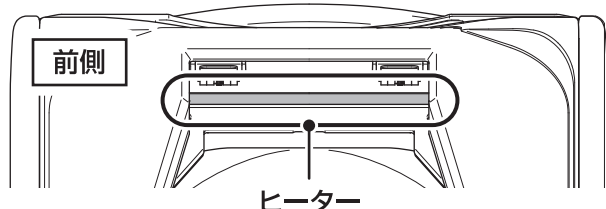

### 圧着ゴム

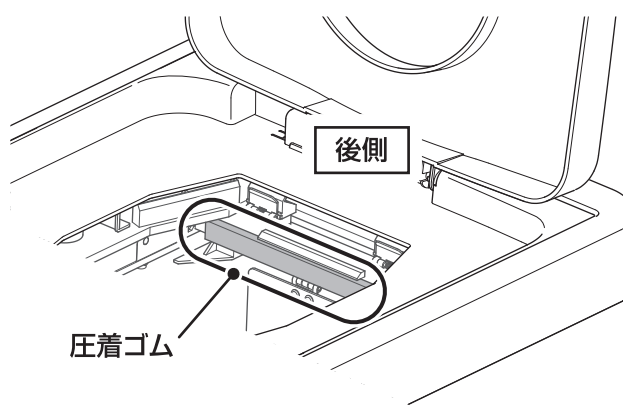

### ▲ 注意

- アルコール以外で消毒しない
- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない  
(プラスチックの劣化または破損によるけがの原因)
- ラップユニットに水をかけて洗わない  
(故障や感電、火災の原因)

# 修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお、異常がある場合は、納入業者へご連絡ください。

| 症 状       | 考えられる原因                    | 処 置                                                                     |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 使用中にガタつく  | 脚ゴムが床面より浮いている              | 平坦な床面に高さ調整脚 4 本が同じ高さで接していることを確認してください                                   |
|           | 高さ調整脚が固定されていない             | 調整脚が固定されていることを確認してください<br>(P.6 初めて使う時の準備)                               |
| ラップが出来ない  | ラップした処理袋に穴が空いている           | 再圧着をしてください<br>(P.12 再圧着処理)                                              |
|           | 10 秒待たずにレバーをおろしている         |                                                                         |
|           | ティッシュなど異物を挟んだ状態でラップしている    | 挟み込んでしまった異物を取り除き、再圧着してください<br>(P.12 再圧着処理)                              |
|           | 処理袋やカスがヒーターに貼りついている        | ヒーターの汚れを拭きとってください<br>それでもラップが出来ない場合は販売店にご連絡ください<br>(P.16 ヒーター・圧着部のお手入れ) |
|           | 排泄物を溜めすぎて圧着出来ない            | 内容物を減らし圧着してください<br>※排泄量には個人差がありますが、排泄 1 回毎に熱圧着処理をしていただくことをおすすめします       |
|           | 処理袋をセットせずに排泄している           | 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。<br>その後、お買い上げの販売店にご連絡ください                       |
|           | 処理袋が正しくセットされていない           | 処理袋のセット方法をご確認ください<br>(P.10 処理袋のセット方法)                                   |
|           | AC アダプターがコンセントから外れている      | AC アダプターを 100V コンセントに差し込んでください                                          |
|           | AC アダプターのプラグが根元まで差し込まれていない | 本体プラグに AC アダプターのプラグを根元まで確実に差し込んでください<br>(P.9 AC アダプターの接続方法)             |
|           | トレーを取り付けていない               | トレーの前後を確認し取り付けてください                                                     |
| 焦げ臭い・煙が出る | 電機部品が故障している<br>コードが断線している  | 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。<br>その後、お買い上げの販売店にご連絡ください                       |
| 凝固剤が固まらない | 排泄物に対して凝固剤が少ない             | 凝固剤を追加で入れてください                                                          |
| 排泄物が固まらない | 凝固剤を入れ忘れている                | 凝固剤を入れてください                                                             |


# 別売品

ラップタイプ (PN-L3030\* W/BR/CH) 使用の場合、下記も合わせて販売店へお買い求めください。

## ■ ポータブルトイレ用凝固剤 (ラップ用)

品 番：PN-L50103

容 量：6L

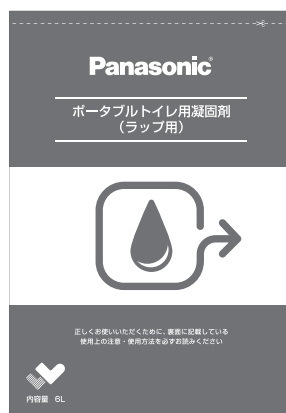

## ■ ポータブル用処理袋 (ラップ用)

品 番：PN-L50102

入り数：30 枚



# 仕様

| 製品名         |              | ラップ式<br>プラスチック便座                | ラップ式<br>ソフト便座        | ラップ式<br>あたたか便座       | プラスチック便座             | ソフト便座                | あたたか便座               |
|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 製 品 番 号     |              | PN-L30301<br>W/BR/CH            | PN-L30302<br>W/BR/CH | PN-L30303<br>W/BR/CH | PN-L30401<br>W/BR/CH | PN-L30402<br>W/BR/CH | PN-L30403<br>W/BR/CH |
| 色           |              | W：白    BR：ブラウン    CH：木目         |                      |                      |                      |                      |                      |
| サ<br>イ<br>ズ | 製品寸法         | 幅 45cm× 奥行 54cm× 高さ 39.5 ～ 52cm |                      |                      |                      |                      |                      |
|             | 便座サイズ        | 幅 39cm× 奥行 41cm                 |                      |                      |                      |                      |                      |
|             | 座面高          | 35 ～ 47.5cm(2.5cm ピッチ 6 段階調整)   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 材<br>質      | 本体           | ポリプロピレン                         |                      |                      |                      |                      |                      |
|             | 便座           | ポリプロピレン                         | ウレタンフォーム<br>合成皮革     | ABS樹脂                | ポリプロピレン              | ウレタンフォーム<br>合成皮革     | ABS樹脂                |
|             | 便フタ<br>防汚トレイ | ポリプロピレン                         |                      |                      |                      |                      |                      |
|             | バケツ・フタ       | —                               | —                    | —                    | ポリプロピレン              |                      |                      |
|             | 前カバー         | ABS樹脂                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 製 品 質 量     |              | 8.5kg                           | 8.8kg                | 9.5kg                | 8.2kg                | 8.5kg                | 9.2kg                |
| 最大使用者体重     |              | 100kg                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 付 属 品       |              | ACアダプター・計量カップ・ペーパーホルダー          |                      |                      | 消臭液 1本・ペーパーホルダー      |                      |                      |
|             |              | 便座カバー 1枚                        |                      | —                    | 便座カバー 1枚             |                      | —                    |

## ■ ラップタイプACアダプター

| 定 格   | AC100V 50/60Hz<br>専用ACアダプター使用<br>(DC13.5V 40W) |
|-------|------------------------------------------------|
| 消費電力  | 35W (圧着時)<br>0.3W以下 (待機時)                      |
| 電源コード | 約1.5m                                          |

## ■ あたたか便座

| 定 格       | AC100V 50/60Hz 45W                |
|-----------|-----------------------------------|
| 電源コード     | 1.6m (電源側)・0.7m (便座側)             |
| 温度調節      | 無段階電子制御 切・30～40℃<br>(雰囲気温度 20℃の時) |
| ヒーター      | 45W                               |
| 安全装置      | 電子制御方式、温度ヒューズ                     |
| 材質        | ABS樹脂                             |
| 便座寸法 (cm) | 幅39×奥行41                          |
| 製品質量      | 1.5kg                             |


### 廃棄上のご注意

●廃棄する際はできるだけ素材別に分解し、地域の分別ルールに従い廃棄してください。


# 製品寸法図

単位:cm



上面図

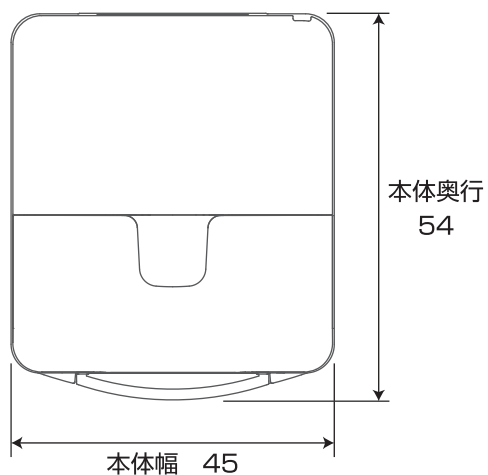

正面図

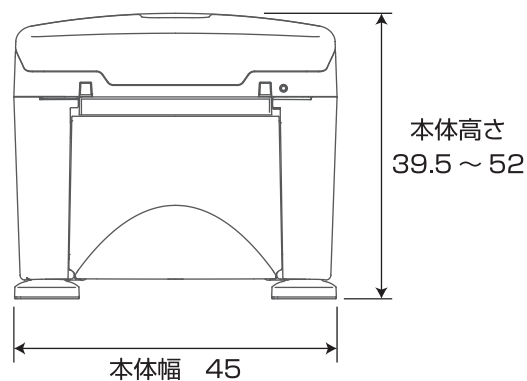


側面図

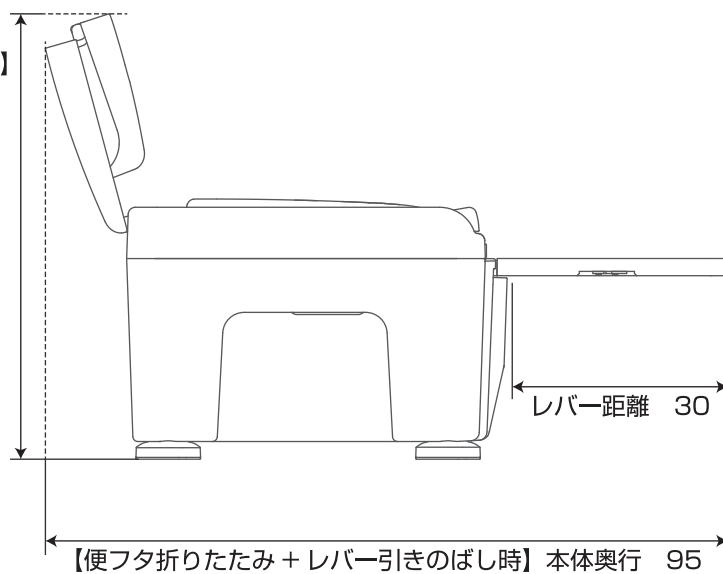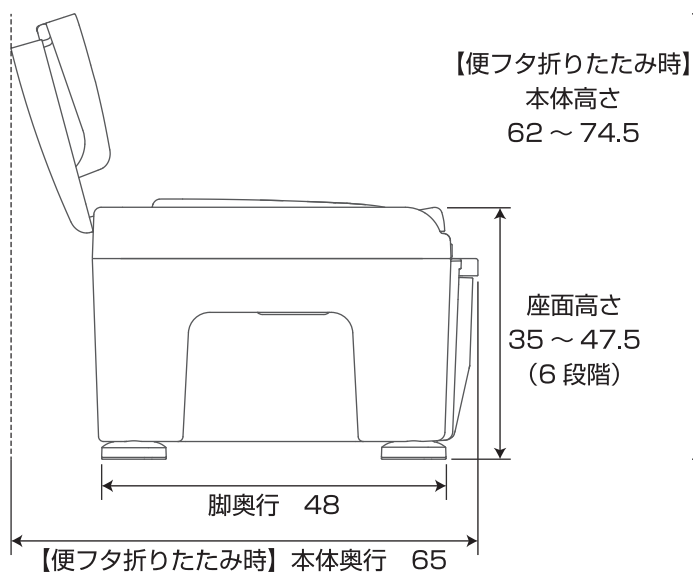


プラスチック便座

あたたか便座

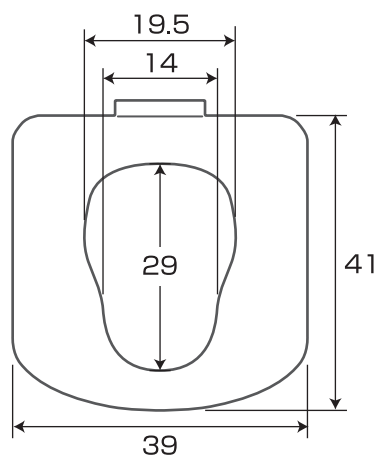

ソフト便座

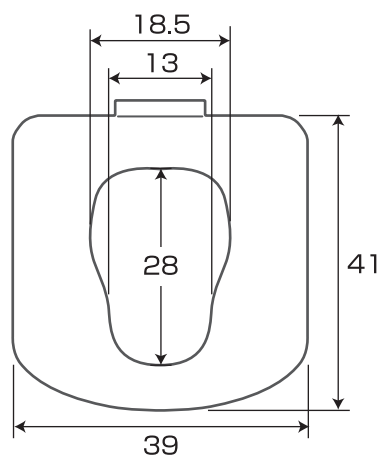



# 愛情点検表

事故防止のために

| ポータブルトイレ 安全チェックシート                                                                                           |                           | ※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください |  |  |  |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|
| 安全点検項目                                                                                                       |                           | 点検結果(該当には○)                |  |  |  |                                                        |
| ※1か月に1度チェックしてください                                                                                            |                           | 日付                         |  |  |  |                                                        |
| <div>愛情点検</div> <div></div> | 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 |                            |  |  |  | ○印があるときは、危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為、お取り替えをおすすめします。 |
|                                                                                                              | 電源プラグや電源コードが異常に熱い。        |                            |  |  |  |                                                        |
|                                                                                                              | 異常な音やこげ臭いがする。             |                            |  |  |  |                                                        |
|                                                                                                              | 触ると電気（ビリビリ）を感じる。          |                            |  |  |  |                                                        |
|                                                                                                              | 購入後5年以上経過している。            |                            |  |  |  | ○印があるときは、お買い上げ販売店にご相談ください。                             |
|                                                                                                              | 変色がある。                    |                            |  |  |  |                                                        |

上記の点検項目以外でも不具合があれば、販売店などの専門家にご相談ください

## ●製品の長期使用について

### 1. 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、ロットナンバーを本体に表示しております。

### 2. 想定安全使用期間とは

一般家庭用にてご使用いただくポータブルトイレラフィーネキューブにおいて、標準的な条件の下で、適正な取り扱いで  
使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。  
無償保証期間とは異なります。

※一般家庭以外(病院、施設など、不特定多数の方が使用される場所)に設置された場合は、使用条件により、想定安全  
期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

### 3. 経年劣化とは







長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】 5年(一般家庭にて使用いただく場合)

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による怪我などの事故に至るおそれがあります。

## 公的介護保険制度購入対象商品

※申請の際にコピーしてご使用ください。
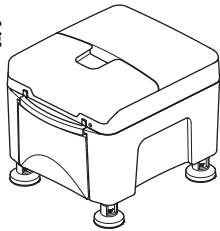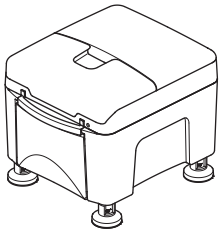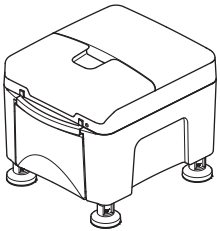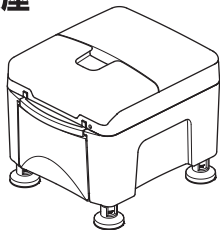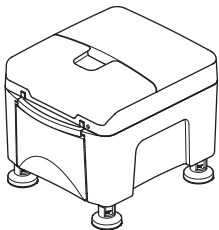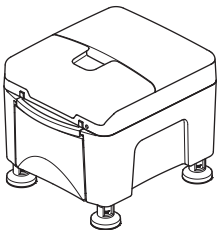
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ラップ式<br/>プラスチック便座</div> <div>品番:<br/>PN-L30301W<br/>PN-L30301BR<br/>PN-L30301CH</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div> | <div>ラップ式<br/>ソフト便座</div> <div>品番:<br/>PN-L30302W<br/>PN-L30302BR<br/>PN-L30302CH</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div> | <div>ラップ式<br/>あたたか便座</div> <div>品番:<br/>PN-L30303W<br/>PN-L30303BR<br/>PN-L30303CH</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div> |
| <div>プラスチック便座</div> <div>品番:<br/>PN-L30401W<br/>PN-L30401BR<br/>PN-L30401CH</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div>          | <div>ソフト便座</div> <div>品番:<br/>PN-L30402W<br/>PN-L30402BR<br/>PN-L30402CH</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div>          | <div>あたたか便座</div> <div>品番:<br/>PN-L30403W<br/>PN-L30403BR<br/>PN-L30403CH</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div>          |

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・  
修理などのご相談は

■ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

● お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話

お引き渡し日      年      月      日

■ 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げより1年間です。ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

■ 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後、5年保有しています。

修理を  
依頼されるとき

■ 保証期間中は、お買い上げの販売店まで、製品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。保証の規定に従って修理させていただきます。

■ 保証期間を過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

■ 修理料金は次の内容で構成されています

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。

【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。

※ この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。

万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリー株式会社

0120-365887

●受付時間 9:00～12:00 (土、日、祝日休み)  
13:00～17:00

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

©Panasonic AGE-FREE Co.,Ltd. 2024